

Mess-Tool zur Bestimmung der Brustwarzengröße

Bitte beachte Folgendes

Keine Messungen direkt nach dem Pumpen oder Stillen. Dies könnte zu ungenauen Messwerten führen.

Bevor du beginnst

Überprüfe, ob das Tool in der richtigen Größe ausgedruckt wurde, indem du die kurze Seite einer Kreditkarte an der Linie rechts auf dieser Seite ausrichtest. Wenn sie übereinstimmen, wurde das Tool richtig ausgedruckt.

Das Tool vorbereiten

Falte das Papier entlang der Faltnissen. Schneide die Kreise vorsichtig aus.

Um dieses Tool zu verwenden, drucke diese Seite im Maßstab von 100 % aus und richte sie an der unteren Zeile aus.

Du hast keinen Drucker? Verwende unsere Lineal-Methode auf Seite zwei.





Diese Linie sollte mit der kurzen Kante einer Kreditkarte übereinstimmen

So verwendest du das Tool

1. Richte eine deiner Brustwarzen auf.
2. Beginne mit dem größten Loch und stecke deine Brustwarze nacheinander durch jedes Loch.
3. Schiebe das Mess-Tool ganz nach unten, bis zum Ansatz deiner Brustwarze.
4. Wenn zwischen dem Rand des Lochs und dem Ansatz deiner Brustwarze noch Platz ist, dann ist das Loch zu groß. Wenn der Rand des Lochs deine Brustwarze am Ansatz berührt, ist das Loch zu klein.

Deine empfohlene Passform ist das Loch, das am nächsten am Ansatz der Brustwarze liegt, ohne sie zu berühren.

Sieh dir Seite zwei an, um deine empfohlene Passform zu finden.

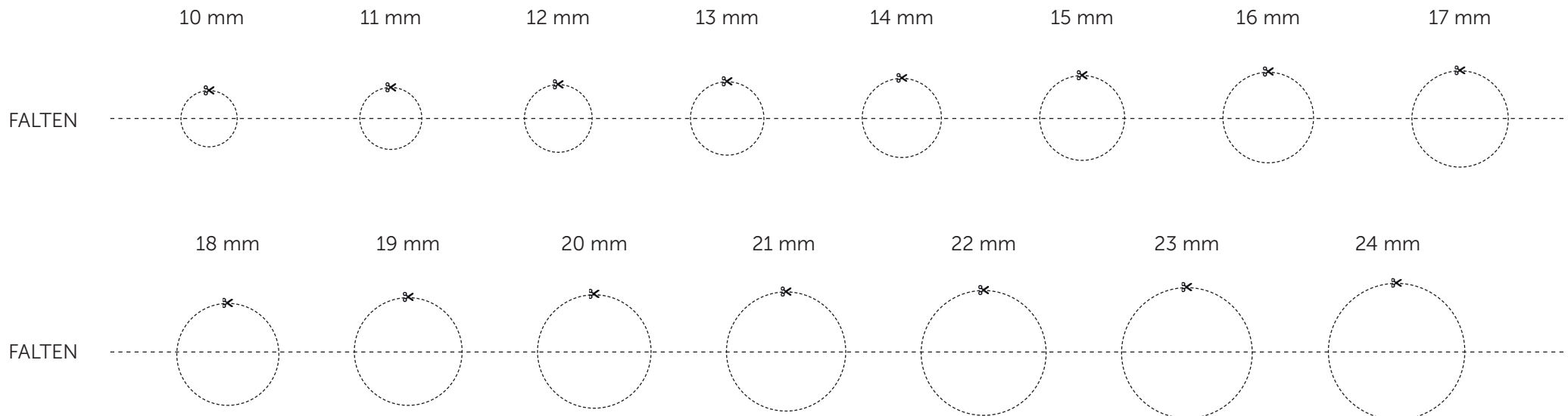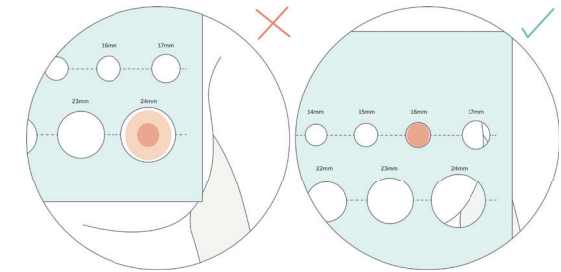


Mit einem Lineal messen

Du brauchst ein Lineal, einen Stift und eine Bankkarte oder Kreditkarte.



1. Fang an, indem du eine Brustwarze aufrichtest.
2. Halte die Karte so an das Ende des Lineals, dass ein rechter Winkel entsteht. Achte darauf, dass die Kante der Karte mit dem Anfang der Messskala auf dem Lineal übereinstimmt.

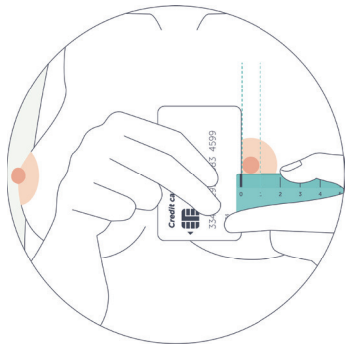

3. Stell dich vor einen Spiegel und lege die Basis deiner Brustwarze in die Ecke zwischen Lineal und Karte.

Dein Maß ist dort, wo der Ansatz deiner Brustwarze am breitesten ist.

Deine empfohlene Größe

Brustwarzen-Größe (mm)	Empfohlene Brustschalengröße
15 mm und darunter	Aufgrund deiner Messung empfehlen wir dir, dich mit unserem Kundenbetreuungsteam in Verbindung zu setzen. Schau dafür auf elvie.com/contact vorbei. Das Team hilft dir, deine empfohlene Brustschalengröße zu finden.
16 mm	Deine empfohlene Brustschalengröße ist: 21 mm.
17 mm	Deine empfohlene Brustschalengröße ist: 21 mm. Wenn du noch nicht mit dem Pumpen oder Stillen begonnen hast, brauchst du möglicherweise auch 24-mm-Brustschalen.
18 mm	
19 mm	Deine empfohlene Brustschalengröße ist: 24 mm.
20 mm	Deine empfohlene Brustschalengröße ist: 24 mm. Wenn du noch nicht mit dem Stillen begonnen hast, wende dich bitte an unser Kundenbetreuungsteam. Schau dafür auf elvie.com/contact vorbei.
21 mm	
22 mm	
23 mm	Deine empfohlene Brustschalengröße ist: 28 mm.
24 mm	
25 mm	
26 mm	Deine empfohlene Brustschalengröße ist: 28 mm. Wenn du noch nicht mit dem Stillen begonnen hast, wende dich bitte an unser Kundenbetreuungsteam. Schau dafür auf elvie.com/contact vorbei.
27 mm und darüber	Aufgrund deiner Messung empfehlen wir dir, dich mit unserem Kundenbetreuungsteam in Verbindung zu setzen. Schau dafür auf elvie.com/contact vorbei. Das Team hilft dir, deine empfohlene Brustschalengröße zu finden.