

CONTENIDO

Bienvenida	2
Características	3
Baterías	4
Funcionamiento	6
Mantenimiento	10
Aviso de batería baja	12

1

BIENVENIDA


¡¡Felicidades!!

Bienvenido a **Audiben soluciones auditivas**.
Por favor lea este manual cuidadosamente
antes de usar su solución auditiva.

Para pacientes con infección en el oído medio
deberá de acudir a su médico especialista
antes de usar cualquier solución auditiva.

2

CARACTERÍSTICAS

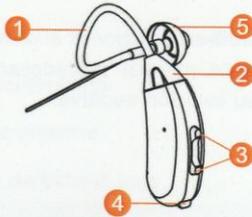

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Tubo de sonido | 4. Compartimento |
| 2. Salida de sonido | para la pila |
| 3. Botones de uso | 5. Dome |

3

BATERÍAS

Este modelo utiliza pila 10A, utilice la correcta
posición de la pila. Ponga la pila con el lado
positivo hacia arriba e insértelo en el
compartimento para la pila.

Si la pila no se ha puesto correctamente el
compartimento no se podrá cerrar, no lo
fuerce para cerrarlo.




Advertencia:
ponga las pilas lejos del alcance de los niños.

4

FUNCIONAMIENTO


AJUSTAR DOME

Ponga el Dome sobre las ranuras del tubo y empújelo hasta el fondo.

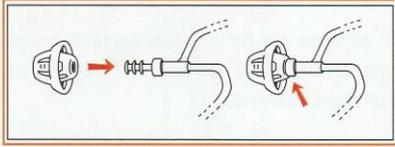

AJUSTAR TUBO DE SONIDO

Para conectar el tubo de sonido gírelo un poco y empuje hasta que quede bien sujeto.

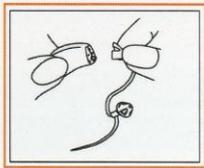

5

ENCENDIDO Y APAGADO

Inserte la pila y cierre el porta pilas, el aparato empezará a funcionar. El dispositivo cuenta con función retardo de encendido por lo que necesitará unos segundos para empezar.

Para apagar el dispositivo será suficiente con abrir el portapilas completamente.

Siga el procedimiento para insertar el aparato en su oído:


Paso 1: Mantenga el tubo de sonido.

Paso 2: Coloque el instrumento sobre la parte superior de la oreja.

Paso 3: Inserte suavemente la cúpula en el canal auditivo.

Paso 4: Mueva el cierre de retención y coloque el aparato en su oído.

6

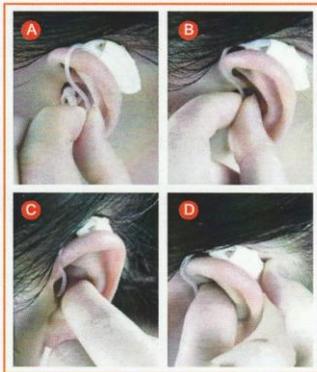

Antes de ponerse su solución auditiva, por favor limpie el oído y asegúrese de que la tapa de la batería está correctamente cerrada.

7

BOTONES DE USO

Control de volumen:

pulse el botón de arriba para subir el volumen, pulse el botón de abajo para bajar el volumen.

Botón de cambio de programa:

pulse cualquiera de los dos botones anteriores durante 3-4 segundos de manera continuada para cambiar de programa.



Botón para subir

Botón para bajar

8

CAMBIAR LA BATERÍA

Paso 1: Para apagar el aparato abra la tapa de la pila.

Paso 2: Retire la pila antigua.

Paso 3: Retirar el plástico protector de la nueva pila.

Paso 4: Inserte la nueva pila, asegúrese de que el signo más (+) se enfrenta arriba.

Paso 5: Cierre la tapa de la pila.



9


MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Use un paño suave para limpiar el tubo después de su uso para eliminar cualquier partícula o la humedad. La herramienta de limpieza se utiliza para eliminar la suciedad (cera) del tubo de sonido y del auricular.

CAMBIO DE TUBO

1. Para retirar el tubo gire suavemente el tubo de sonido. Sujete de manera firme el aparato.
2. Tire del tubo de sonido y del aparato.
3. Para limpiar, inserte la herramienta de limpieza a través del tubo.
4. Para volver a montar o cambiar los tubos de sonido debe alinear y empujar el tubo hasta que encaje en su lugar.

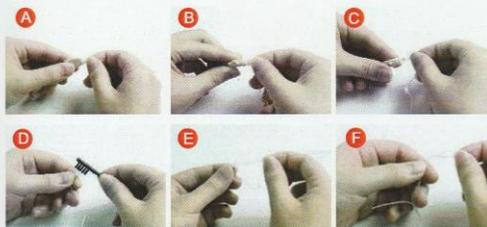

10

CONSEJOS DE LIMPIEZA

El cerumen es una de las principales causas de los problemas con las soluciones auditivas.

La limpieza es más fácil cuando la cera del oído está seca por la mañana antes de introducir el instrumento en la oreja.

Limpiar el instrumento con un paño suave y seco y un pequeño cepillo. Hacer la limpieza en una mesa suave para evitar daños, y que no se caiga.



NO USAR AGUA
NI OTROS LÍQUIDOS

11

AVISO DE PILA BAJA

Cuando escuche un pitido corto, significa que la batería se está acabando. Se mantendrá la advertencia intermitente hasta que se reemplace la batería.

La calidad del sonido puede estar influenciada después de la primera advertencia, esto es normal y se puede remediar mediante la inserción de una pila nueva en el audífono.

El rendimiento de la solución auditiva depende en gran medida de la calidad de la batería utilizada.

1. Es importante la utilización de baterías de alta calidad.
2. También es importante que las pilas estén bien envasadas antes de usar. Por tanto, cada batería está provista de una etiqueta adhesiva que asegura que la batería esté sellada y fresca hasta su uso.
3. Nunca deje una pila agotada en el aparato ya que puede dañarlo.

12

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay sonido	Pila gastada	Cambiar pila
	No hay pila	Poner una pila
	Suciedad o cera en micrófono o auricular	Limpiar auricular con cepillo y sacar la "dome" y limpiarla
Hay poco sonido	Batería baja	Cambiar pila
	Excesiva cera en sus oídos	Extraiga la cera o si no puede acudir a un médico ya que puede ser un tapón de cera
	Volumen bajo	Subir el volumen
	Suciedad o cera en micrófono o auricular	Limpiar auricular con cepillo y sacar la "dome" y limpiarla
Pitido	No ha colocado la solución auditiva de manera correcta en el oído	Coloque e inserte bien la ayuda auditiva de manera que esté bien ajustada al oído
	Excesiva cera en sus oídos	Extraiga la cera o si no puede acudir a un médico ya que puede ser un tapón de cera
	Talla de "dome" inapropiada	Ponga un "dome" de otra talla

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

La temperatura no debe de exceder de los límites $-20^{\circ}/60^{\circ}$ C y la humedad no debe de ser de más del 85% durante un período prolongado.