

Vaporizador para limpieza de copa menstrual

Lami


Manual de usuario

Gracias por comprar el vaporizador de copa menstrual Lani. Lee el manual de instrucciones para obtener más información antes de utilizarlo por primera vez.

Precauciones de seguridad

- 1. Para evitar quemaduras en el cuerpo causadas por agua hirviendo y vapor, asegúrate de cerrar la tapa cuando uses el vaporizador, los niños deben mantenerse alejados del producto.**
- 2. No te acerques a las salidas de vapor cuando esté funcionando para evitar quemaduras.**
- 3. No coloques artículos no resistentes al calor en el vaporizador de copa menstrual para evitar daños a los artículos.**
- 4. Cuando limpies el producto, corta la corriente, limpia con un paño suave y limpio con jabón o alcohol.**
- 5. En caso de causar daños al producto, únicamente un profesional deberá desmontar o reparar el producto.**
- 6. Después de usar el vaporizador, desenchufa el cable de alimentación y guárdalo en un lugar seco.**

Nombre del producto / Función

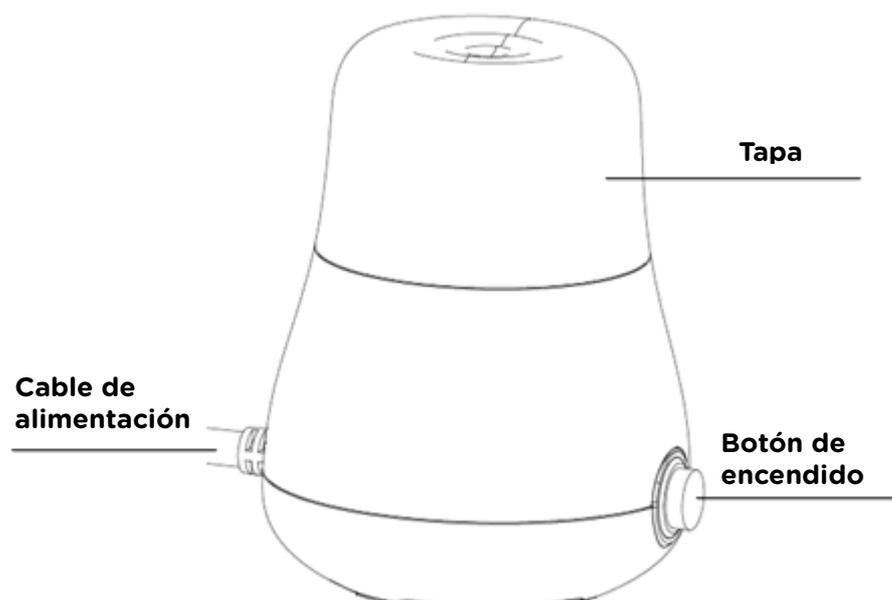

Especificaciones del producto

Nombre del producto: vaporizador de copa menstrual

Entrada: CA 110V

Potencia nominal: 190 W

Tiempo de limpieza de la línea de llenado: 8 ~ 10 minutos.

Indicador de encendido: anaranjado;

Características del producto

- **Este producto está especialmente diseñado para sanitizar copas menstruales y es compatible con todos los tipos y tamaños de copas menstruales en el mercado.**
- **Gran capacidad de agua, desinfección a alta temperatura a largo plazo, derritiendo y limpiando todo tipo de suciedad, matando eficazmente las bacterias hasta el 99.9%.**
- **Resistente a altas temperaturas, resistente a la corrosión, diseño de doble aislamiento para evitar quemaduras.**
- **Fusible incorporado para garantizar la seguridad eléctrica. La lámina calefactora está recubierta con teflón, que es duradero.**
- **Operación con un botón, diseño antiarrugas, preservación del calor.**
- **Aspecto elegante y hermoso, conveniente para transportar.**

Cómo usar el producto

- 1. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.**
- 2. Vierte agua hasta que sumerja la marca del llenado. Luego coloca la copa menstrual en la cámara de desinfección y cierra la cubierta superior.**
- 3. Presiona el botón de encendido, la luz indicadora (naranja) se enciende, indicando que la máquina comienza a funcionar.**
- 4. Usa la marca de nivel de agua recomendada, el tiempo de limpieza será de aproximadamente 8 ~ 10 minutos. La energía se cortará automáticamente cuando se evapore el agua. Apaga o desenchufa el cable de alimentación cuando finalice la desinfección.**

5. Déjalo enfriar antes de sacarlo y usa la copa menstrual.

Observaciones: El vaporizador tiene una función de preservación del calor. Cuando la máquina se enfría durante un cierto tiempo y la temperatura es baja, comenzará a calentarse nuevamente, hasta que alcance una cierta temperatura, se apagará nuevamente. Apaga la máquina o desenchufa el cable de alimentación después de completar la desinfección.

Recomendación:

▪ **Antes de desinfectar la copa menstrual, limpie la copa menstrual y el vaporizador.**

Atención a Clientes

LANIFEM S DE RL DE CV

hola@lani.mx

4446530222

lani.mx

Precauciones

▪ **Para problemas de calidad del producto causados por factores no humanos dentro de un año a partir de la fecha de compra, comuníquese con nosotros para el reemplazo completo de la máquina.**

▪ **Para el servicio de reemplazo, presenta este manual con su número de serie ubicado en la parte inferior del producto, y el comprobante de compra o el correo de confirmación de compra de la tienda en línea.**

▪ **Proporciona una descripción o una imagen cuando se trate de problemas de calidad.**

La garantía no aplica en casos de:

▪ **Uso inadvertido, operación incorrecta y daño inducido por el hombre.**

▪ **No poder proporcionar prueba de compra.**

▪ **Daño causado por fuerzas irresistibles como los desastres naturales.**