



safetyslife

RESPIRATORI

RESPIRATORI - dispositivi protezione vie respiratorie (mascherine)

Le mascherine riducono la trasmissione di agenti patogeni nell'aria respirabile durante un intervento chirurgico o altri trattamenti medici. Da SafetysLife® è possibile acquistare maschere chirurgiche professionali per studi medici, cliniche, sale operatorie o laboratori in molti colori e varianti ad un prezzo vantaggioso.

Le mascherine sono formate da 2 o 3 strati di tessuto non tessuto (in fibre di poliestere o polipropilene) che filtrano l'aria in uscita e proteggono da schizzi di liquido, come la saliva emessa con tosse o starnuti.

SPECIFICHE E MATERIALI DI COMPOSIZIONE

Le mascherine si possono utilizzare quando non si hanno migliori alternative a disposizione, in quanto una protezione inferiore è sempre preferibile a non avere nessun dispositivo di protezione. Ribadiamo ulteriormente, per una protezione efficace acquista se possibile le mascherine con standard FFP2 o FFP3, qualora le trovassi tra quelle disponibili.

Le Mascherine sono utilizzate in ambito medico per limitare la diffusione di agenti infettivi dal personale al paziente. Sono quindi utilizzate in sala operatoria durante interventi chirurgici per non infettare il campo chirurgico. Sono state testate per assicurare degli specifici livelli di protezione dal punto di vista di espulsione di sangue o altri fluidi biologici. Le Mascherine sono monouso in tessuto costituite solitamente da quattro strati:

Elevate prestazioni di filtraggio 98%

Mascherina composta in 3 strati di morbido tessuto non tessuto, privo di fibra di vetro. Grazie agli occhielli per le orecchie privi di lattice e la fascia nasale, la maschera offre un'eccellente comoda indossabilità.

Occhielli per orecchie e prive di lattice

Con archetto nasale per forma ideale

Esterno filtrante

centrale impermeabile a aria e liquidi come goccioline di saliva espulse dalla vie orali

Interno

costituito da materiale ipoallergenico per proteggere la pelle da infezioni cutanee o danni da sfregamento

Barretta interna

deformabile stringi naso necessaria a far aderire la mascherina perfettamente al viso

TUTTI I RESPIRATORI SAFETYSLIFE® sono progettati per garantire il massimo livello di comfort

TUTTI PRODOTTI SAFETYSLIFE® SONO CERTIFICATI CE



COME INDOSSARLE

Prima di indossare la mascherina è necessario che pieghi la visiera ai bordi per avere una protezione maggiore soprattutto per schizzi laterali potenzialmente dannosi per gli occhi. Dopodichè puoi procedere a modellare la barretta stringinaso in modo che aderisca perfettamente al tuo naso. Puoi quindi sistemare la mascherina sul tuo viso accertandoti di coprire naso e bocca. La Mascherina è composta da quattro lacci, due superiori e due inferiori, quindi uno per spigolo. Prendi i lacci superiori e posizionali sulla sommità del tuo capo e stringili applicando un nodo in modo che la mascherina sia ben fissata. Dopodichè prendi i lacci inferiori e applica un nodo sulla nuca, alla sommità del collo e stringi forte ma non troppo per evitare che leda alla pelle. Distendi la mascherina in modo che aderisca perfettamente al viso e ridurre al minimo i contatti con l'aria.

Come già detto la Mascherina va sostituita, queste mascherine sono assolutamente usa e getta, non vanno reindossate. La Mascherina può anche essere acquistata senza lacci ma con elastici auricolari. Puoi posizionare la mascherina sul viso e sistemare gli elastici intorno alle orecchie. Infine modella la barretta stringinaso per limitare gli spifferi d'aria circostante.



PROTEZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS

Le Mascherine sono dispositivi medici ed esistono per proteggere medici o pazienti in specifiche situazioni, come in sala operatoria. Non servono per proteggersi dai Virus, infatti sono sprovviste di bordo di tenuta sul volto e non hanno un sistema per filtrare bioaerosol solidi e liquidi. Le uniche mascherine per proteggersi correttamente dal Coronavirus sono quelle con standard FFP2 o FFP3. Esse infatti proteggono fino al 98% delle molecole presenti nell'aria.

Le Mascherine possono essere utilizzate come dispositivo di protezione solo in mancanza di mascherine con filtri migliori in quanto non offrono un adeguato livello di protezione.

Nell'ambito medico le mascherine vengono impiegate come mezzo di protezione da agenti patogeni e germi, i soggetti allergici le utilizzano principalmente per filtrare l'aria da agenti allergici presenti nell'aria (ad es. pollini, polvere o peli animali).

Molti dei nostri articoli presenti nel nostro assortimento sono adatte anche ad altri settori, oltre a quello medico, come alla protezione contro le allergie. Per la protezione da particelle di polvere grandi o piccole potrete acquistare la maschera FFP2. Le maschere risultano semplici da indossare grazie ai loro comodi ed elastici occhielli per le orecchie.

