


MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICO (Tipo Brazaletes - Brazo)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: SPBP-04

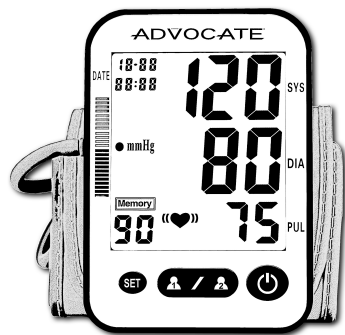

GUÍA DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

Gracias por hacer de Advocate® el monitor de su elección. Ante todo, lo más importante antes de usar su nuevo monitor Advocate® es registrar su monitor con nosotros en línea. Al registrar el monitor usted se asegura que:

1. Le podemos informar sobre las actualizaciones importantes o cambios en su monitor.
2. El registro confirma el período de garantía total de su monitor Advocate®.
3. El registro le proporciona la tranquilidad de que usted está protegido

Para registrar su nuevo monitor Advocate®:

1. Diríjase a la página web www.advocatemeters.com
2. Haga clic en REGISTRO DE GARANTÍA en la sección ENLACES.
3. Ingrese su información y número de serie del medidor ¡Ya está!

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Por favor, lea este manual de instrucciones para que pueda entender completamente las operaciones, las precauciones, el rendimiento y las limitaciones con este monitor. Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.
- Usted no debe usar este monitor de presión arterial para el autodiagnóstico, autotratamiento o para cambiar la medicación sin consultar a su médico u otro profesional de la salud. Si tiene alguna duda o pregunta sobre sus medidas de presión arterial, usted debe consultar a su médico u otro profesional de la salud.
- Este dispositivo contiene piezas de alta precisión; por lo tanto, evitar la exposición a temperatura o humedad extrema o de la luz solar directa, golpes y polvo. Pharma Supply, Inc., garantiza la precisión de este monitor sólo cuando se almacena y se utiliza correctamente.
- No intente calibrar o reparar este monitor. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la función o el funcionamiento de este monitor, por favor póngase en contacto con nuestro agente de servicio para que podamos proporcionarle información precisa.
- En caso de que el monitor o el brazalete requiera de limpieza, utilice un paño suave y seco o un paño humedecido con agua y un detergente suave. Nunca utilice alcohol, benceno, disolventes u otros productos químicos agresivos para limpiar el monitor o el brazalete.
- Retire y reemplace las pilas si el monitor no se utiliza durante un periodo de 6 meses. Se recomienda utilizar pilas alcalinas desechables.


PRECAUCIONES PARA EL USO

El monitor de presión arterial automático de brazo ADVOCATE está diseñado para ser operado por cualquier persona mayor a 18 años: médicos y profesionales de la salud, para monitorear la presión arterial (sistólica y diastólica) y la frecuencia del pulso.

ANTES DE EMPEZAR


Por favor, asegúrese de que ha instalado 4 baterías AA (1,5 voltios) (se recomienda utilizar pilas alcalinas desechables) o utilizar el adaptador AC-DC opcional. Siempre coloque el brazalete en el monitor antes de encenderlo. Para instalar las pilas o reemplazarlas cuando el símbolo de "batería baja" aparece en pantalla, haga lo siguiente:

Instalar las Baterías

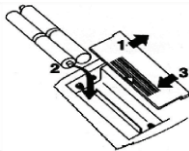



1. Retire la tapa del compartimento de batería empujando suavemente hacia abajo y deslizando la tapa hacia adelante.
2. Coloque las pilas dentro del compartimento asegurándose de que hayan quedado ubicados los polos positivo con "+" y negativo con "-" como indican los terminales del compartimento.
3. Cierre la tapa de la batería Deslizandola suavemente en el compartimento y presiónela en su lugar.

Nota:


- ★ Cuando la pantalla LCD muestra la señal de "Batería baja" , las baterías deben ser reemplazadas para una lectura precisa.
- ★ No use baterías recargables (voltaje 1.2V). No son adecuadas para este producto, pueden alterar el funcionamiento del monitor o causar lecturas incorrectas.
- ★ Retire las baterías si el monitor no será utilizado durante un periodo de seis meses o más, para evitar daño debido a la posibilidad de fugas de líquido de las baterías.
- ★ Todas las medidas se mantendrán en la memoria, si las baterías se drenan, son reemplazadas o removidas.

COMPONENTES DEL MONITOR

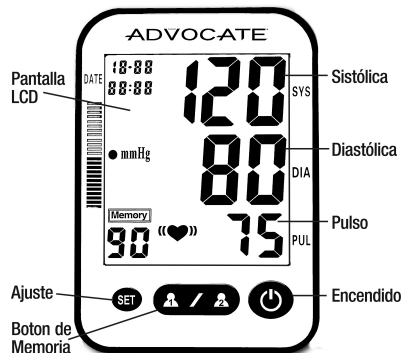

- ★ Botón: "MEMORIA" /Ajuste del Reloj:
- ★  Seleccione Usuario, muestra memoria de resultados y ajusta los números del reloj
- ★ Botón: De Inicio
- ★ Pantalla LCD
- ★ Indicador sistólica
- ★ Indicador diastólica
- ★ Indicador de pulso

PANTALLA LCD

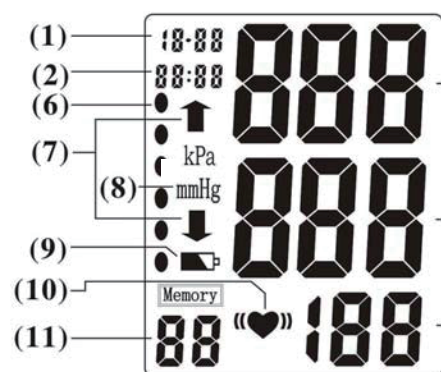

Modo de Pantalla LCD:

- (1) Fecha: Mes - Día
- (2) Tiempo: Hora - Minuto
- (3) Presión arterial sistólica (unidad: mmHg)
- (4) Presión arterial diastólica (unidad: mmHg)
- (5) Pulso (unidad: latido/minuto)
- (6) Indicador de clasificación OMS BP
- (7) Indicador de Inflado / Desinflado
- (8) Unidad de medida de la tensión arterial
- (9) Indicador de batería baja
- (10) Indicador de latido irregular del corazón
- (11) Número de registro de memoria


CONSEJOS PARA EL CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL

- ★ Relájese durante aproximadamente 5 minutos antes de la medida.
- ★ No fumar o ingerir cafeína por lo menos 30 minutos antes de la medición.
- ★ Retire cualquier prenda de vestir estrecha y coloque el brazalete en su brazo.
- ★ Manténgase quieto y no hable hasta que la medida sea completada.
- ★ El brazalete no debe quedar ni demasiado apretado, ni demasiado suelto. Usando una pequeña fuerza, debería ser capaz de colocar dos dedos entre el brazalete y su brazo.

TOMAR UNA MEDIDA


POSTURA CORRECTA PARA TOMAR MEDIDA DE LA TENSION ARTERIAL

- ★ Siéntese cómodo y derecho.
- ★ Coloque el brazo con el brazalete en frente de usted sobre la mesa con la palma de la mano hacia arriba.
- ★ El brazalete debería estar aproximadamente a la misma altura que su corazón.

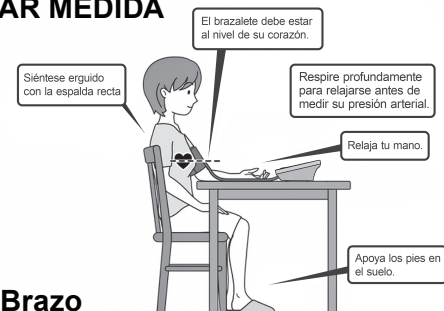

Cómo Envolver el Brazalete en Su Brazo

- ★ Coloque el brazalete alrededor de un brazo "a ¼" por encima de la articulación del codo. El tubo de presión debe estar orientado a correr por el centro de la parte interior del brazo. (Consulte el diagrama del brazalete para la colocación correcta.)
- ★ Mantenga el brazalete aproximadamente al mismo nivel que su corazón.
- ★ A menos que su médico recomiende lo contrario, utilice siempre el brazo izquierdo para medir su presión arterial.
- ★ El brazalete debe quedar ajustado, pero no demasiado. Usted debe ser capaz de introducir dos dedos entre el brazalete y el brazo.

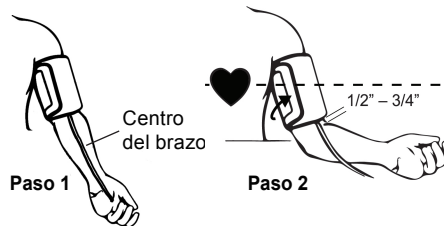


Nota:


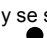
1. Refiérase al diagrama impreso en el brazalete para la colocación Apropiaada.
2. Para lecturas precisas, el brazalete debe ser orientado correctamente y Alineado con la arteria.



TOMAR LA PRESION ARTERIAL (Pantalla LCD)

Después de que usted este en una posición cómoda, presione el botón "ON/OFF". El dispositivo realiza una verificación / check. Durante esta verificación / comprobación la pantalla LCD mostrará todos "8". En la conclusión de la verificación / comprobación de la pantalla LCD mostrará "00".

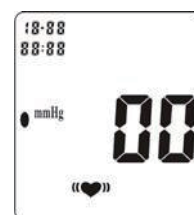

PROGRAMANDO - FECHA Y RELOJ


1. Pulse el botón **SET** durante 5 segundos cuando el dispositivo esté apagado, el número del año comenzará a parpadear en la Pantalla LCD. Pulse el botón  para avanzar en el AÑO visualizado. Cuando haya llegado a la fecha correcta, pulse el Botón **SET** y suéltelo. (No sostenga el botón **SET** oprimido durante la programación.) Cuando el **SET** se pulsa y se suelta, el AÑO dejará de parpadear y EL MES comenzará a parpadear. Presione y suelte el botón  hasta que se alcance el mes deseado. Repita este proceso para ajustar el DÍA, HORA, MINUTOS.

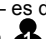NOTA: Cuando el número que usted desea programar – es decir, AÑO, MES, DÍA, HORA, MINUTO – está parpadeando, cada vez que pulse y suelte el botón  el número aumentará en uno. Cada vez que pulse y suelte el botón  el número decrece de uno en uno. El tiempo se muestra usando un reloj de 24 horas. AM/PM no se muestran en la pantalla.


2. Después de que ha establecido el AÑO, MES, DÍA, HORA y MINUTO presione el botón **SET**. El monitor se apagará.

FUNCIÓN DE AJUSTE DE MEDIDAS PARA 2 PERSONAS

1. Este modelo dispone de 2 bancos de memoria / 2 usuarios cada uno con 90 memorias de almacenamiento.
2. Presione y suelte el botón 'SET' pueden llevar a P1 (Persona 1) como su ID para acceder a la medida para la primera operación cuando el dispositivo está apagado. Cada vez, antes de tomar la medición o comprobar la memoria del almacenamiento, por favor asegúrese de haber seleccionado el ID correcto P1 que usted ya ha establecido antes de encender el dispositivo.
3. Para configurar el monitor para la Persona 2: Siga los pasos anteriores presionando y soltando el botón "Persona 2" en lugar del botón "Persona 1".

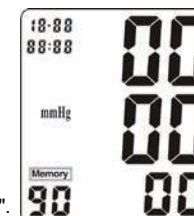


INDICADOR DE LATIDOS IRREGULARES DEL CORAZÓN

Si se detecta un latido irregular de corazón, el símbolo de Latido Irregular del corazón () aparecerá parpadeando en la pantalla

LA LECTURA DEL PROMEDIO DE LAS TRES ÚLTIMAS MEDIDAS (AUG)

1. Cuando el monitor está apagado, presione y suelte el botón P1. La pantalla mostrará el mensaje "AUG" en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. El resultado que aparece primero es el promedio de las tres mediciones más recientes.
2. Para revisar los resultados que están en la memoria, presione el botón P1 para desplazarse a través de mediciones anteriores. Cada vez que usted presione y suelte el botón P1 se mostrará el siguiente resultado más antiguo.
3. Presione el botón de encendido para apagar el monitor.

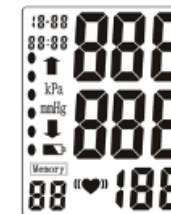

PARA ELIMINAR RESULTADOS DE LA MEMORIA

Presione y sostenga el BOTON " " hasta que todos los numeros cambien a "CERO".

INSTRUCCIONES PARA USAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL ADVOCATE® O SU PROPIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB

En lugar de baterías, puede alimentar su monitor de presión arterial (BPM) de brazo ADVOCATE® SPBP-04 con la fuente de alimentación de A/C opcional con conector MICRO USB (Figura A). Este es un producto opcional que puede ser comprado como un artículo separado a través de nuestro sitio web (www.AdvocateMeters.com). Alternativamente puedes alimentar su BPM de brazo con una fuente de alimentación USB con un conector USB a MICRO USB (Figura B). Con Cualquiera de las opciones, encienda su BPM de brazo insertando el conector MICRO USB en la ranura MICRO USB (puerto) en el BPM de brazo y enchufar la fuente de alimentación a una toma de corriente.

Figura A: Fuente de alimentación de A/C opcional con una conexión MICRO USB*

Figura B: Cualquier fuente de alimentación a una conexión/cable USB MICRO USB*



- * Tanto la fuente de alimentación de CA opcional como la fuente de alimentación USB son solo para alimentar su BPM de brazo – sin cargarlo.

Su BPM de brazo se puede operar de 3 formas: utilizando la fuente de alimentación de A/C opcional (Figura A), una fuente de alimentación USB con un cable USB a MICRO USB (Figura B) o con 4 pilas AA.

