


# cimilre E1


## Guía de inicio rápido

### Montaje

Para el uso de un solo lado del extractor, conecte solo uno de los tubos más largos a el extractor de leche.

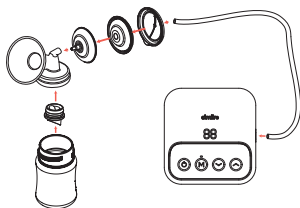


Para ordenarse los dos senos a la misma vez, conecte un extremo del pequeño trozo de tubo a el extractor y el otro al conector de 3 vías. Luego, conecte los dos trozos largos de tubo al conector de 3 vías.

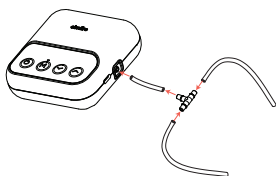

### Controles de botones

El extractor tiene 4 botones.

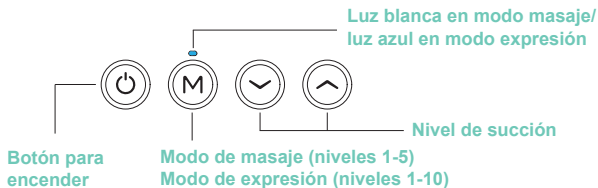

Consulte la parte posterior para obtener más instrucciones.



### ¡Registre su extractor

para recursos educativos y actualizaciones de productos!

## Operación del extractor de leche

Presione el botón de encendido para encender el extractor.

Presione "M" para cambiar entre Masaje (luz blanca) y Modo de expresión (luz azul).

Iniciar sesiones en Modo Masaje (luz blanca).


Utilice las flechas para ajustar los niveles de succión.



Al ajustar los niveles de succión, la pantalla parpadeará, indicando qué nivel está seleccionado.



Después de seleccionar el nivel preferido, la pantalla parpadeará tres veces más y, a continuación, cambiará a la pantalla del temporizador, que permanecerá encendida, indicando el número de minutos de la sesión de extracción.

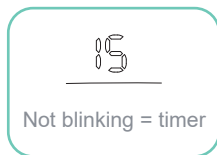

Después de que la leche comience a fluir, presione "M" para comenzar el modo de expresión (luz azul). Ajuste la fuerza de succión para su comodidad usando los botones de nivel de flecha.

La luz indicadora de batería se encuentra al lado del puerto de carga.

- Verde = carga complete
- Amarillo = dos tercios

- Rojo = un tercio
- Rojo parpadearante = Batería

Gracias por elegir a Cimilre para ser parte de su lactancia maternal.

