

MASK-IN 002

MASK-IN è una mascherina di protezione per il distanziamento sociale, può essere **personalizzata** con le nostre grafiche disponibili in campionario o con la propria grafica.

È un **dispositivo lavabile, traspirante e stampato con inchiostri a base acqua.**

Dotata di elastici auricolari e ferretto nasale modellante.

Dim. 180 x 95 mm, taglia **unica adulti** con ottima vestibilità.

È un prodotto **SANIFICATO** e **LAVABILE**.

È un prodotto che **NON COSTITUISCE** nè DM nè DPI.

Saranno presto certificate. **NON STERILE.**

1° strato di tessuto: Strato esterno

In tessuto 100% poliestere antibatterico con trattamento impermeabilizzazione C6 con fluoro.

Certificazione **OEKO-Tex®** e conforme a **ZTHC**.

Stampato con colori totalmente a base acqua.

2° strato di TNT: Strato intermedio

È lo strato filtrante, traspirante e idrorepellente composto da TNT (tessuto non tessuto) di 50 gr/m², prodotto con polipropilene 100% non irritante.

3° strato di TNT: Strato interno

È lo strato resistente, traspirante e idrorepellente composto da TNT (tessuto non tessuto) di 30 gr/m², prodotto con polipropilene 100% non irritante.

A cosa servono?

Le mascherine, se ben indossate, sono molto efficaci nell'impedire a chi le indossa di contagiare altre persone impedendo la fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline di secrezione respiratorie, purché si rispetti la distanza di sicurezza.

Come indossarla?

Prima di indossare la mascherina pulire le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica.

Appoggiare la mascherina sopra bocca e naso, accompagnare gli elastici dietro le orecchie e piegare il ferretto sul naso così da farla aderire bene.

Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se è necessario farlo, pulire prima le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica.

Indossare la mascherina utilizzando gli elastici auricolari. Rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e tutte le altre norme introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Per rimuovere la mascherina dalla parte posteriore utilizzare unicamente gli elastici di supporto (non toccare con le mani). Riporla subito in lavatrice; pulire le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica.

Lavare dopo ogni utilizzo a 60° con detersivi neutri.



Prodotto in Italia da:

Agile s.r.l.

Via del Vicano, 2 50060 Pelago (FI)

Tel. 055 831138

mask-in@mask-in.it



Dispositivo ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020 n°18.



@maskin_byagile
www.mask-in.it