


# Holland Dental Products

## 20 Minute Heat Cure


1

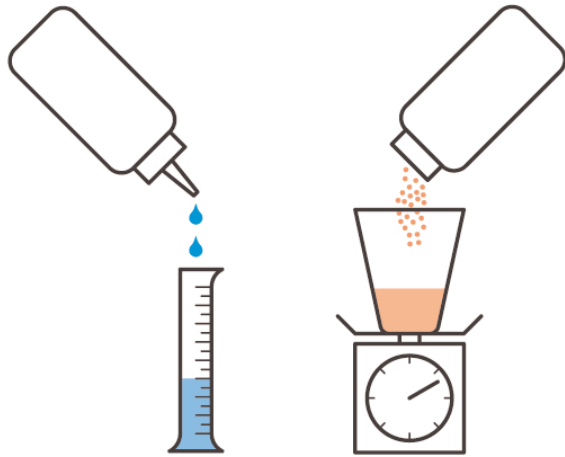


1 ml : 2,3 g

En - Mix the ratio  
Fr - Taux de mixage

2

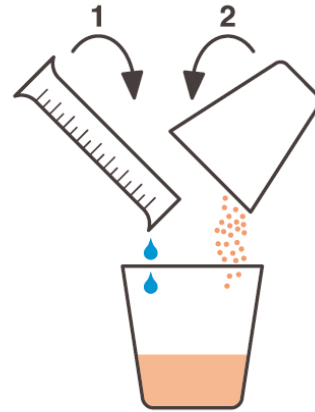

3

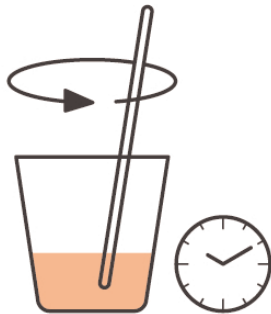

30 sec

4



15 min

En - Dough time  
Fr - Temps de fermentation

5




6



max 30 min



7

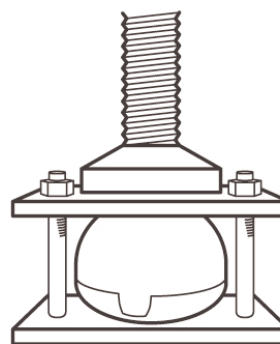

En - Manual handling time

Fr - Temps de traitement manuel

8

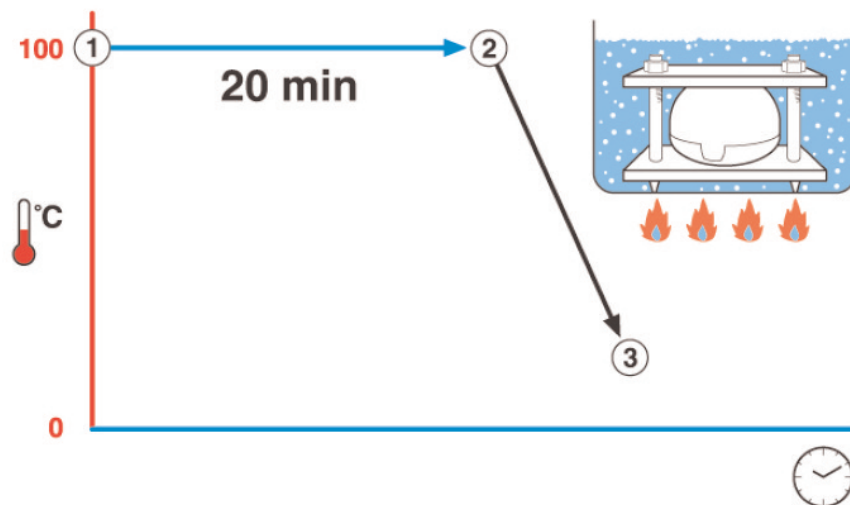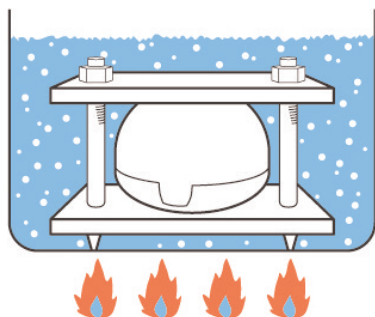

En - 1). Start curing process in hot water + Maintain water temperature. 2). Stop curing + Air cooling to ambient temperature . 3). End of total curing process.

Fr - 1). Début du processus de traitement dans l'eau chaude + Maintien de la température de l'eau. 2). Fin du traitement + refroidissement de l'air à la température ambiante. 3). Fin d e l'ensemble du processus de traitement .