

# BACTIUM PLUS 464 SN®

Solución desinfectante

## DESCRIPCIÓN

BACTIUM® PLUS es una solución concentrada que elimina más del 99.999% de los microorganismos patógenos, formulado por un complejo de cuaternarios de amonio de 5ta y 6ta generación y agentes tensoactivos. Solución desinfectante de alto nivel para material e instrumental médico y desinfectante de áreas. Por lo anterior es un excelente bactericida, fungicida, viricida, y esporicida, que conserva sus propiedades hasta por 24 meses.

REGISTRO SANITARIO NÚMERO: 2508C2011 SSA.

“LA SOLUCION PARA EVITAR INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS”

## CARACTERÍSTICAS

El producto concentrado o diluido no causa ningún riesgo en su manejo, ya que no lo absorbe la piel, no causa irritación o sensibilidad y no genera vapores tóxicos.

**DE ACCION RAPIDA:** Solo bastan 10 minutos de acción del BACTIUM PLUS 464 SN® para eliminar más del 99,999% de los microorganismos.

**NO ES CORROSIVO:** no ocasiona ningún daño por corrosión al equipo médico e instrumental. Ni daña el filo del instrumental de corte.

**BIODEGRADABLE:** debido a su balance en la fórmula es totalmente biodegradable y soluble en agua.

**ECONOMICO:** Por su alta concentración, reduce substancialmente los costos de aplicación. Por su alta concentración, reduce substancialmente los costos de aplicación.

**DURABLE** Puede utilizarse la misma solución de BACTIUM PLUS 464 SN® hasta por 30 días para inmersión dependiendo de la frecuencia de uso de esta.

**VERSATIL:** Puede desinfectar de alto nivel instrumental médico y dental, equipo de anestesia, de inhalo terapia, de urología, etc. así como desinfectar salas de parto, quirófanos, salas de terapia intensiva, etc.

**CONFIABLE:** Los activos han pasado los más estrictos controles de calidad, cuenta con registros como la

**F.D.A.** (Food and Drugs Administration): 21CFR178.1010 y 40CFR180.940,

**E.P.A.** (Environmental Protection Agency U.S.): 6836-139,

## APLICACIONES

**INMERSION:** En un recipiente se prepara la solución deseada, usando una dilución de 60 ml de BACTIUM PLUS 464 SN® por cada litro de agua destilada o corriente según sea el caso, la solución deberá usarse hasta por 30 días como máximo, el material deberá quedar sumergido durante 10 minutos para garantizar la eliminación de más del 99.999% de los microorganismos. SE TIENE QUE RETIRAR AL 100% CON AGUA BIDESTILADA ESTÉRIL del equipo médico e instrumental que vaya a ser reutilizado inmediatamente, por ejemplo: instrumental quirúrgico, endoscopios, colonoscopios, inhaladores, material de inhalo terapia, incubadoras, ambus, etc

*Los usos o modos de empleo y dosificaciones antes señalados son recomendaciones generales por lo que se recomienda que cada empresa realice sus propias pruebas de aplicación, ya que éstas pueden variar por factores ajenos al producto.*



# BACTIUM PLUS 464 SN®

SOLUCIÓN DESINFECTANTE

## DESINFECCION DE AREAS

Se utiliza una solución al 2%, es decir, 20 ml de BACTIUM PLUS 464 SN® por cada litro de agua, para desinfección de baños, lavabos, mesas, pisos, paredes, etc. Se recomienda el sistema de 3 cubos: uno con la solución preparada con BACTIUM PLUS 464 SN®, otro vacío para exprimir el agua con carga microbiana del trapo o trapeador y otro con agua limpia para enjuagar el trapeador o trapo antes de volver a introducirlo en la cubeta con la solución preparada.

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL: Se recomienda dejar el instrumental inmerso hasta por 30 minutos en la solución preparada con BACTIUM PLUS 464 SN® al 6%, es decir, 60 ml por cada litro de agua que contenga la palangana o recipiente a utilizar.

*Los usos o modos de empleo y dosificaciones antes señalados son recomendaciones generales por lo que se recomienda que cada empresa realice sus propias pruebas de aplicación, ya que éstas pueden variar por factores ajenos al producto.*

## PRESENTACION

Frasco de 1000 ml con dosificador graduado hasta 30 ml.


GARANTIA: Estabilidad del producto de 24 meses a partir de la fecha del número de lote correspondiente.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco. No Exponer a la luz solar directa.

## IMPORTANTE

El fabricante y sus distribuidores solo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenaje, transporte, manejo, aplicación y dilución están fuera de nuestro control.® Marca Registrada.

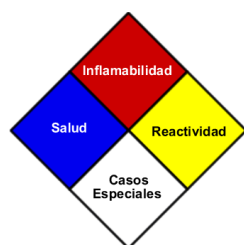

Inflamabilidad 0

Salud 1

Reactividad 0

Casos especiales 0

