

Globe Hope Kestomaski 2.0



GLOBE HOPE

Pestävä, kestävä ja suodattava kasvomaski

Uudelleenkäytettävä | Aikuisille | Ei sovellu alle 3-vuotiaille

Vähentää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Suodatusteho yli 85% (0,65–7 µm) /VTT-CRM-167898-20,VTT-CRM-168969-20.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa tai puhtaassa pakkauksessa kuivana, erillään käytetyistä maskeista ja auringonvalolta suojaassa.

Käyttöohje

- 

Pese kädet ja pue puhdas ja kuiva Kestomaski. Huomaa, että kostunut maski läpäisee mikrobeja ja kuivaa helpommin.
- 

Älä kosketa maskia käytön aikana. Maskin koskettelu lisää epäpuhtauksia hengitysteiden edessä. Käytön aikana maskia ei saa riisua pois tai siirtää kaulalle.
- 

Pese kädet ennen maskin riisumista. Riisu maski koskettaen vain sen kiinnitysnauhoihin ja laita maski suoraan pesuastiaan tai muovipussiin.
- 

Pese kädet ja Kestomaski käytön jälkeen. Pese Kestomaski kiehuvaassa vedessä 5 min ajan. Kuivaa Kestomaski huolellisesti pesun jälkeen.

HUOMIOITAVAA

Sydän- ja verenkiertosairauksien, astman tai keuhkohtaumataudin oireet voivat olla este käyttää kasvomaskia. Väärinkäytetystä maskista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Älä tuputa maskin käyttöä muille. Maskia ei ole viranomaistestattu. Tuotetta ei pidä käyttää olosuhteissa, joissa henkilönsuojaimen käyttäminen on tarpeen.

VAROITUKSET

On tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita. Tämä kasvomaski ei ole lääkinnällinen laite (direktiivi 93/42/CEE) tai kirurginen maski (EU/2017/745) eikä se ole henkilösuojain (EU/2016/425). Tarkista, että kasvomaski on asetettu suoraan ihoa vasten suojaamaan nenää, suuta ja leukaa. Parta voi vähentää kasvomaskin suodatustehoa. Mikäli kasvomaski vaikeuttaa hengittämistä, sitä ei pidä käyttää. Kasvomaskin käyttöön tottuu ajan kanssa. Kasvomaskin käyttö ei korvaa säännöllistä käsiinpesua, fyysisistä etäisyyttä eikä kontaktien vähentämistä. Älä käytä kasvomaskia fyysisesti raskaassa toimenpiteessä. Lopeta kasvomaskin käyttö, jos huomaat siinä rikkoutumisen merkkejä. Kasvomaski suositellaan pestäväksi ennen ensimmäistä käyttöä.

Valmistaja: Globe Hope Oy | y-tunnus: 1837507-0 | www.globehope.com

Globe Hope Återanvändbar mask 2.0



GLOBE HOPE

Tvättbar, hållbar och filtrerande ansiktsmask

Återanvändbar | För vuxna | Lämpar sig inte för barn under 3 år

Minskar droppspridning i omgivningen. Filtreringseffekten över 85 % (0,65–7 µm) / VTT-CRM-167898-20, VTT-CRM-168969-20.

Förvaras torr och skyddad för solljus i originalförpackningen eller i en ren förpackning skilt från använda masker.

Brukanvisning

1.	2.	3.	4.
			
<p>Tvätta händerna och ta på dig den rena och torra masken. Observera att en fuktig mask lättare släpper igenom mikrober än en torr.</p>	<p>Rör inte vid masken medan du använder den. Om du rör vid masken ökar orenheterna framför andningsvägarna. Dra inte ner skyddet mot halsen under användningen.</p>	<p>Tvätta händerna innan du tar av dig masken. Rör endast vid banden när du tar av dig masken och lägg den direkt i tvättfat eller i en plastpåse.</p>	<p>Tvätta händerna och masken efter användningen. Tvätta den återanvändbara masken i kokande vatten i 5 minuter. Låt den torka ordentligt efter tvätten.</p>

OBSERVERA

Hjärt- och blodcirkulationssjukdom, astma eller lungsjukdom kan vara ett hinder för att använda ansiktsmask. En fel använd mask kan vara till mera skada än nytta. Försök inte tvinga andra att bära mask. Masken är inte myndighetstestad. Produkten ska inte användas under förhållanden där det krävs personlig skyddsutrustning. Syftet med produkten är att minska droppspridning, den klassas inte som personlig skyddsutrustning.

WARNING

Det är viktigt att du följer de här instruktionerna: Den här ansiktsmasken betraktas inte som medicinsk utrustning (direktiv 93/42/CEE), kirurgisk mask (EU/2017/745) eller personlig skyddsutrustning (EU/2016/425). Kontrollera att ansiktsmasken ligger tätt mot huden och skyddar näsa, mun och haka. Skägg kan minska maskens filtreringseffekt. Använd inte ansiktsmask ifall den försvårar andningen. Ansiktsmasken ersätter inte regelbunden handtvätt, fysiskt avstånd och färre kontakter. Använd inte ansiktsmasken vid tung fysisk ansträngning. Avbryt genast användningen av ansiktsmask om du märker att den gått sönder. Vi rekommenderar att ansiktsmasken tvättas före första användningen.