

PATVIRTINTA

UAB "NORMA" vyriausiasis inžinierius UAB "NORMA"

O.V. Samsonnikovas

—

direktorius

S.I. Koučeris

Paskutinės instrukcijos peržiūros data 2020-04-14

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

indikatoriaus juostelės "Sterilan Up 180/60"

karšto oro sterilizavimo kontrolei

5 klasė

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Indikacinės juostelės „Sterilan Pack 180/60“ skirtos vizualiai kontroliuoti, kaip laikomasi sterilizacijos režimo pakuotėse (bixes ir kt.) su produktais, sterilizuotais sausu karšto oro sterilizatoriuose 180 ° C temperatūroje 60 minučių.

1.2. Indikatoriaus juostelės "Sterilan Pack 180/60" gaminamos su lipniu sluoksniu kitoje indikatoriaus pusėje, padengtos apsaugine danga ir tiekiamos su blokeliais perforuotų lakštų pavidalu.

Priekinėje lapo pusėje yra dvi spalvos žymos (indikatoriaus sluoksnis ir standartas palyginimui) ir žymėjimas, nurodantis sterilizavimo režimo būdą ir parametrus.

1.3. Juostelės "Sterilan Pack 180/60" priklauso 5 rodiklių klasei pagal ISO 11140-1 standartą.

Juostelės "Sterilan Pack 180/60" yra vienkartinio naudojimo

2. APIMTIS

Taikymo objektas: karšto oro sterilizatoriai

3. NAUDOJIMAS

3.1. Prieš tai sulenkę perforavimo liniją, atskirkite indikatoriaus juostelę nuo lakšto.

3.2 Juostelės "Sterilan Pack 180/60" dedamos į pakuotes (bixes) su sterilizuotais produktais.

Į kiekvieną pakuotę dedama bent viena juostelė (galima dėti kelias juosteles, priklausomai nuo pakuotės tūrio ir matmenų).

3.3. Pasibaigus sterilizavimo procesui, juostelės indikatoriaus sluoksnio spalva turi atitikti standartinę arba būti tamsesnė už ją.

3.4. Kontrolės rezultatą patvirtinantys rodikliai įklijuojami į „Sterilizacijos įrašų knygą“, kuri saugoma kaip archyvinis dokumentas.

4. TAIKYMO SAVYBĖS

Po sterilizavimo indikatoriaus sluoksnio spalva gali būti skirtingo sodrumo, bet bet kuriuo atveju ne šviesesnė už standartinę.

Jei indikatoriaus sluoksnio spalva yra šviesesnė nei etaloninė arba nepsikeitė, tai rodo sterilizavimo parametrų nesilaikymą.

Pakuotės su indikatoriais, kurios nepasiekė reikiamos spalvos, laikomos nesteriliomis ir turi būti iš naujo sterilizuotos.

Sterilizacijos proceso metu galima nedidelė indikatorių deformacija, kuri neturi įtakos kontrolės rezultatams.

5. LAIKYMO SĄLYGOS IR TINKAMUMO LAIKAS

Juostelės „Sterilan Up 180/60“ laikomos gamintojo uždaroje pakuotėje, esant temperatūrai nuo +8 iki +25°C ir santykinei oro drėgmei iki 80% atstumu nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamumo laikas nuo išdavimo datos yra 36 mėnesiai.

Partijos numeris ir pagaminimo data nurodyti ant pakuotės

6. TRANSPORTO SĄLYGOS

Gamintojo pakuotėje esančios juostelės „Sterilan Pack 180/60“ gali būti gabenamos visomis transporto rūšimis pagal galiojančias krovinijų gabenimo taisykles.

7. GAMINTOJO GARANTIJA

Gamintojas garantuoja, kad juostelės atitinka TU U 20.5-16292890-010:2015 standarto reikalavimus, atsižvelgiant į transportavimo, laikymo ir naudojimo taisykles.

8. PAKAVIMAS

Juostelės „Sterilan Pack 180/60“ supakuotos į tam skirtus popierinius vokus, po 1000 vnt. kiekviename voke.

9. IŠMETIMAS

Indikacinės juostelės „Sterilan Pack 180/60“ nekenkia žmonių sveikatai ir aplinkai ir gali būti išmestos kaip buitinės atliekos.

Gamintojas

TOV "NORMA"

Gamybos adresas: 03148, Kijevas, pr. Lesya Kurbasa, 2B.

