



**Bedienungsanleitung | AT-8701**



# Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise .....	1
Produktbestandteile .....	4
Vor dem Gebrauch .....	6
Erklärung Bedienteil .....	13
Bedienereführung .....	14
Nach der Massage .....	23
Reinigung und Wartung .....	24
Q&A .....	25
Fehlersuche .....	26
Spezifikationen .....	28

# Wichtige Sicherheitshinweise

Muss befolgt werden


**Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen diese Sicherheitshinweise bei der Verwendung unbedingt befolgt werden:**

- Der Stecker des Massagesessels muss vollständig in eine geeignete Steckdose eingesteckt sein. Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräteerdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Fragen Sie einen qualifizierten Elektriker und Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Bitte verändern Sie den mitgelieferten Stecker des Produkts nicht. Wenn die Steckdose nicht geeignet ist, lassen Sie unbedingt eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Bei der Verwendung des Massagesessels sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, um das Risiko von Stromschlägen, Verbrennungen, Bränden oder Verletzungen zu verringern. Lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Details:
  - (1) Achten Sie darauf, den Stecker des Massagestuhls in die richtige Steckdose einzustecken.
  - (2) Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der richtigen Steckdose steckt, um die Gefahr von Kurzschlüssen und Bränden zu verringern.
  - (3) Trennen Sie den Massagesessel immer unmittelbar nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz.
  - (4) Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
  - (5) Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht im Freien und meiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
  - (6) Wenn der Strom während des Gebrauchs ausfällt, stellen Sie den Netzschalter unbedingt auf die Position „O“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um Schäden zu vermeiden, wenn der Strom wiederhergestellt ist..
  - (7) Betreiben Sie den Massagesessel niemals, wenn das Netzkabel nass oder beschädigt ist.
  - (8) Stecken Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen aus der Steckdose.
  - (9) Eine sorgfältige und ständige Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern, Behinderten oder behinderten Personen verwendet wird.
  - (10) Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
  - (11) Bitte verwenden Sie keine anderen als die von unserem Unternehmen empfohlenen Aufsätze.
  - (12) Bitte stehen, sitzen oder springen Sie nicht auf der Fußstütze. Dies kann zu einem Unfall oder einer Verletzung führen.
  - (13) Bitte versuchen Sie nicht, auf der Rückenlehne und Armlehne zu stehen. Dies kann zu einem Unfall oder einer Verletzung führen.
  - (14) Achten Sie darauf, während der Massage nicht einzuschlafen.
  - (15) Halten Sie den Massagesessel immer sauber und stecken Sie niemals Gegenstände in die Lücken am und um den Massagesessel.
  - (16) Bitte entfernen Sie den Massagesessel nicht, indem Sie das Netzkabel herausziehen.
  - (17) Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen (insbesondere Kinder), Haustiere oder Hindernisse unter dem Massagesessel befinden, bevor Sie die Fußstütze/Rückenlehne absenken.

- (18) Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob die Oberfläche des Massagesessels Risse oder Risse aufweist. Sollten Sie an einer Stelle des Stoffes der Rückenlehne ungewöhnliche Risse feststellen, benutzen Sie den Massagesessel bitte nicht. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte umgehend an uns.
- (19) Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- (20) Bei Erkrankungen konsultieren Sie bitte im Zweifelsfall Ihren Arzt, ob Sie den Massagesessel nutzen dürfen.
- (21) Folgende Personen werden gebeten, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren, um das Risiko von Unwohlsein oder Verletzungen zu verringern:
- Menschen mit einem bösartigen Tumor;
  - Menschen mit Herzerkrankungen;
  - Personen, die schwanger sind, menstruieren oder im Wochenbett sind;
  - Personen, die absolute Ruhe benötigen;
  - Personen die sich unter medizinischer Behandlung befinden;
  - Menschen, die unter Rückenproblemen leiden oder deren Wirbelsäule abnormal oder verbogen ist.
- (22) Sollten Sie während der Benutzung Schmerzen verspüren, stoppen Sie den Massagesessel sofort. Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen.
- (23) Massieren Sie niemals geschwollene oder entzündete Körperstellen.
- (24) Das Produkt ist kein Medizinprodukt, es wurde für eine angenehme Massage entwickelt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung. Benutzen Sie diesen Massagesessel nicht länger als 30 Minuten am Stück und beschränken Sie die Massage bitte auf einen konzentrierten Bereich für nicht mehr als 15 Minuten. Übermäßiges Massieren kann zu einer Überhitzung führen und somit die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- (25) Bitte betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- (26) Der Massagesessel ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
- (27) Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- (28) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
- (29) Aus Sicherheitsgründen stoppt der Motor automatisch (zum Schutz), wenn während des Gebrauchs eine zu starke äußere Kraft ausgeübt wird. Sobald oben angezeigt wird, schalten Sie den Strom aus und nach 10 Sekunden wieder ein. Bitte beachten Sie dies insbesondere bei Personen mit einem Gewicht von über 100 kg.
- (30) Stellen Sie den Sessel stets auf einen unempfindlichen, geraden Untergrund.
- (31) Bauartbedingt gibt es während der Nutzung Geräusche vom Polster und der Technik. Dies ist vollkommen normal und unvermeidbar.

## Erdungsanleitung

Dieses Produkt muss geerdet werden. Sollte es zu einer Fehlfunktion oder einem Ausfall kommen, stellt die Erdung einen Weg mit dem geringsten Widerstand für den elektrischen Strom dar, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel mit Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Gefahr: Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräteerdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Modifizieren Sie den mit dem Produkt gelieferten Stecker nicht. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

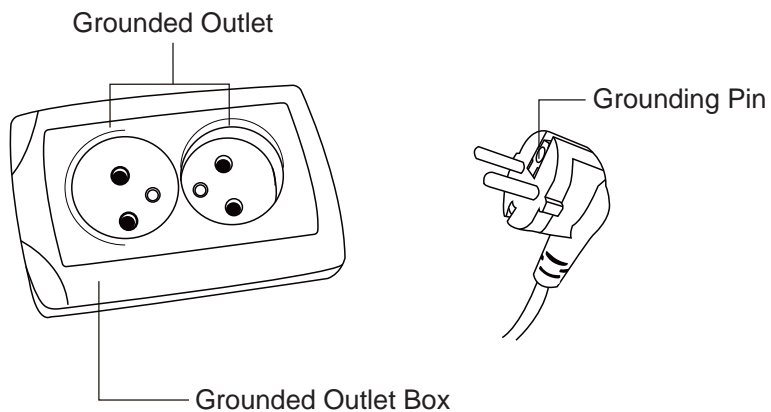

# Produktbestandteile



# Produktbestandteile

## Luftkissen Massageposition







# Vor dem Gebrauch

## 1 Installation





### ● Installation der Haube

1. Legen Sie zunächst die Schrauben zurecht.
2. Verbinden Sie alle Kabel.
3. Bringen Sie die dekorative Abdeckung an.
4. Auf jeder Seite sind Schrauben erforderlich.

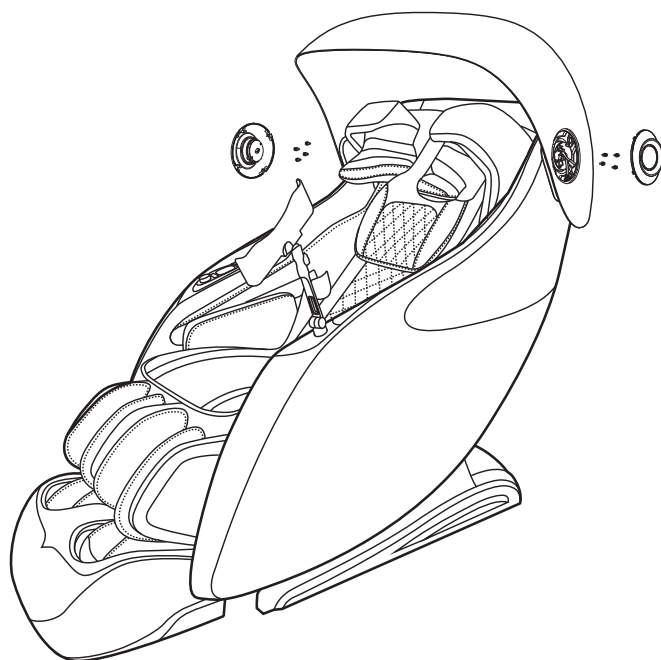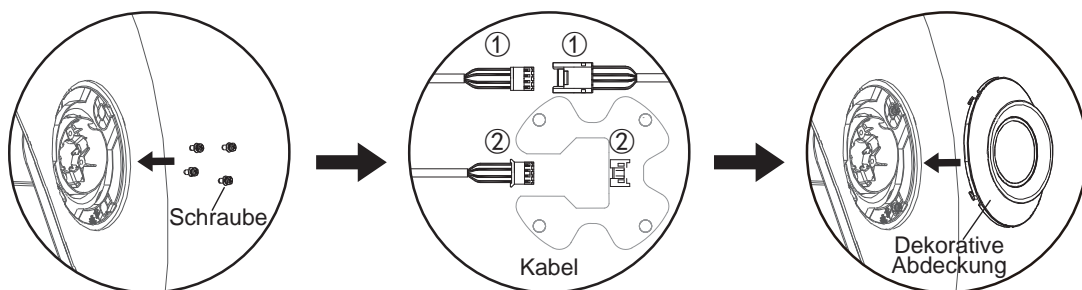


● Installation der Fußstütze


1. Schließen Sie den Luftanschluss an: A2 (an der Beinstütze) und A1 (am Hauptgerät).
2. Schließen Sie den elektrischen Anschluss an: B1 (an der Beinstütze) und B2 (am Hauptgerät).

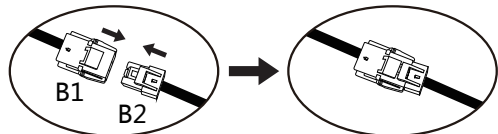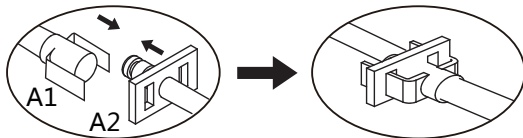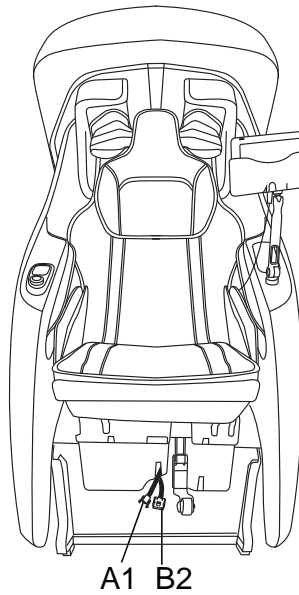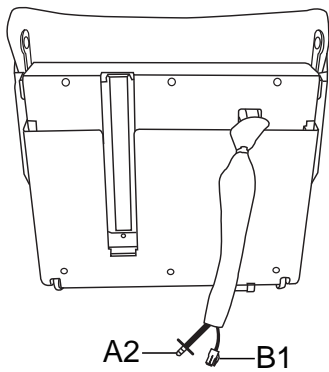

3. Richten Sie das Loch C2 (an der Beinstütze) an der Welle C1 (am Hauptgerät) aus. Verbinden Sie H1 und H2 miteinander. Sichern Sie die Wellen mit den mitgelieferten Sicherungsringen.

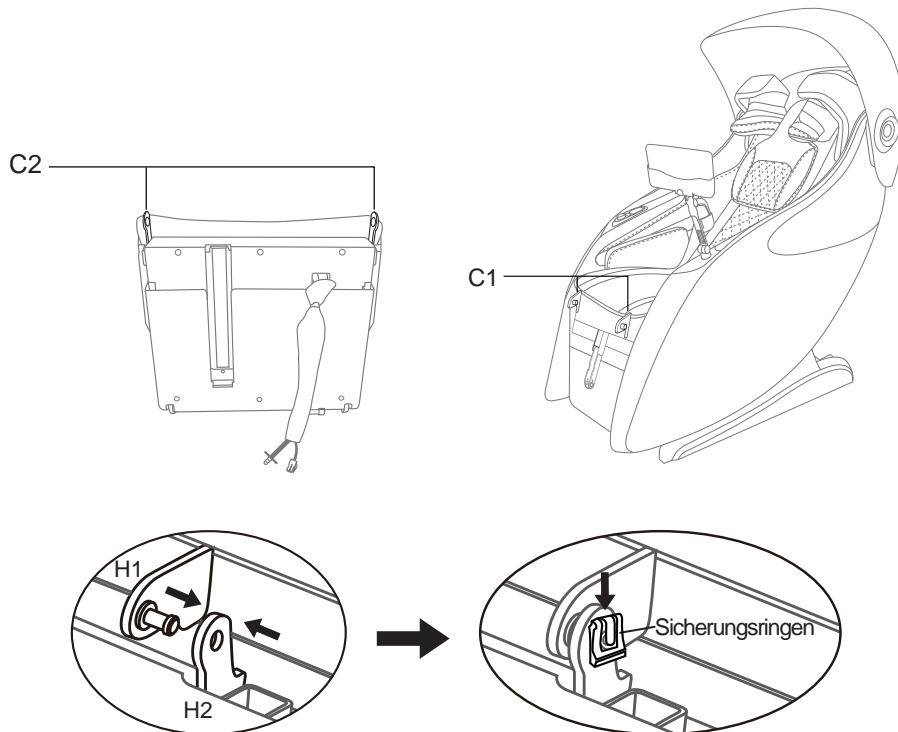


4. Schließen Sie den Reißverschluss, der Beinstütze und Sitzkissen verbindet.

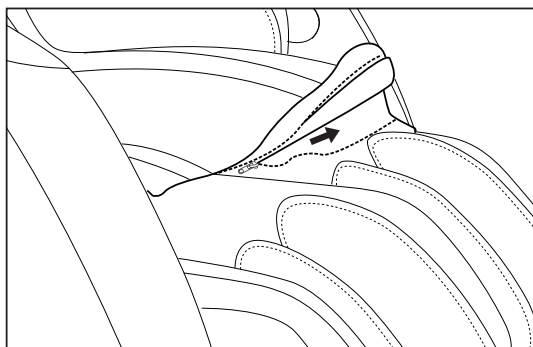

5. Installation abgeschlossen.

## 2 Den Sessel positionieren

- Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zum Zurücklehnen des Stuhls vorhanden ist und dass der Benutzer frei in den Stuhl ein- und aussteigen kann. Bitte achten Sie darauf, einen Teppich oder eine unempfindliche Unterlage unter dem Stuhl zu verwenden, wenn Sie den Stuhl auf einer harten Oberfläche wie Hartholz- oder Keramikböden aufstellen.

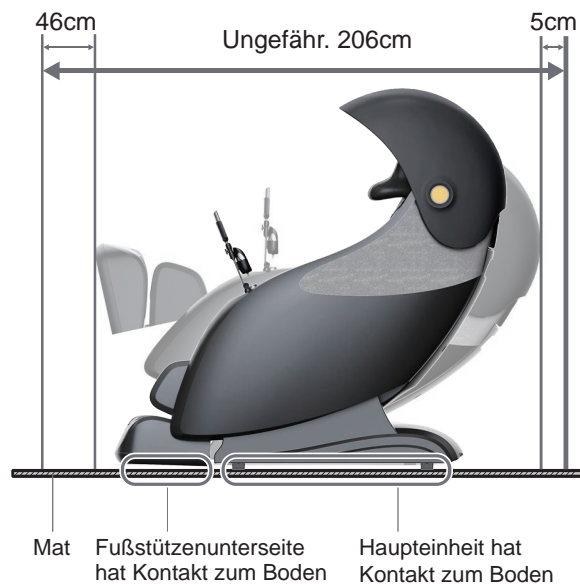


- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder an einem Ort mit hoher Temperatur aus (z. B. vor Heizgeräten oder an einem Fenster, wo Sonnenlicht dazu führen kann, dass das Kunstleder verblasst, schmilzt oder reißt).
- Legen Sie eine Matte unter das Produkt, um Bodenschäden zu vermeiden. Die Matte sollte den Bodenkontaktbereich des Produkts und den Bodenkontaktbereich der Fußstütze abdecken (Mindestmaße: 160 x 80 cm). Siehe Abbildung.
- Installieren Sie das Produkt in der Nähe einer Steckdose.

## 3 Überprüfen Sie den Platz um das Produkt herum

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Produkts befinden.



## 4 Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Nähten des Produkts befinden

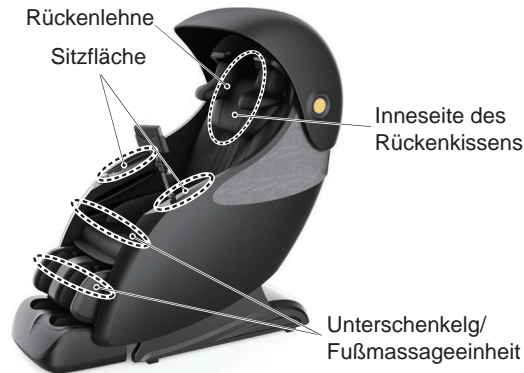

### ⚠ Vorsicht

- Hände oder Füße nicht zwischen Fußstütze und Sitzfläche stecken.
- Hände oder Füße nicht zwischen Fußstütze und Seitenwand stecken.
- Hände oder Füße nicht zwischen Sitzfläche und Seitenwand stecken.
- Hände oder Füße nicht zwischen den oberen und unteren Teil der Fußstütze bringen.
- Stecken Sie weder Hände noch Füße in den Spalt der Sitzfläche.  
Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

## 5 Überprüfen Sie die Stromleitung und den Netzstecker

### ⚠ Warnung

- Untersuchen Sie das Netzkabel auf eventuell angesammelten Schmutz oder Staub. Stellen Sie sicher, dass das Kabel sauber und KEINE sichtbaren Schäden aufweist.  
Andernfalls kann es durch Flusen und Staub zu einem elektrischen Brand kommen. Wischen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch ab.
- Beschädigen Sie nicht das Stromkabel oder den Netzstecker. Biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel auf keinen Fall.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter schwere Gegenstände wie den Stuhl selbst. Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen wie den Lüftungsmotoren der Heizung und allem, was Wärme erzeugen könnte, fern.  
Eine beschädigte Stromleitung oder ein beschädigter Netzstecker kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Bitte wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an ein autorisiertes Servicecenter, um Informationen zur Wartung des Stromkabels oder des Netzsteckers zu erhalten.



Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzkabel entwirrt ist.


**Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist.**

## 6 Schalten Sie das Produkt ein

- 1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 2 Drehen Sie den Schalter in die Position „I“ (EIN), um den Stuhl zu aktivieren.

### ⚠️ Warnung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest und vollständig in der Steckdose steckt. Andernfalls kann es aufgrund von Überhitzung oder Kurzschlüssen zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Halten Sie sich strikt an die Vorschriften zur Nutzung der Steckdose und der Elektrogeräte.
- Verwenden Sie eine Stromversorgung mit 220–250 V~, 50/60 Hz. (Verwenden Sie das Produkt nicht im Ausland und schließen Sie es nicht ohne Genehmigung an einen Transformator an.) Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Produktfehlern oder Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn heraus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

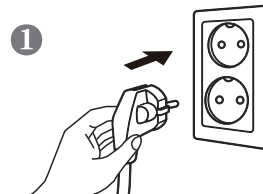

## Vor dem Gebrauch (Fortsetzung)

## 7 Stellen Sie sicher, dass die Massagerollen eingefahren sind



Wenn sich die Rollen in der eingefahrenen Position nicht oben an der Rückenlehne befinden, drücken Sie die „ON“-Taste, um in die Standardposition zurückzukehren.

## 8 Stellen Sie sicher, dass der Stoff weder beschädigt noch rissig

Untersuchen Sie den Kunstlederbereich, in dem sich die Massagerollen entlang der Rückenlehne bewegen. Stellen Sie sicher, dass keine Beschädigungen oder ungewöhnliche Abnutzungserscheinungen vorliegen.



### **Warnung**

- **Heben Sie vor dem Gebrauch das Rückenkissen an und prüfen Sie, ob die in der Abbildung gezeigten Stoffbezüge unbeschädigt sind. (Auch wenn der Stoff leicht beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein. Ziehen Sie den Netzstecker und benachrichtigen Sie den Hersteller, um einen Ersatzbezug zu erhalten.)**

Wenn das Produkt verwendet wird, während das Gewebe beschädigt ist, kann es zu Beschädigungen oder einem Stromschlag kommen.

# Die Bedienteilanweisungen


## Netzschalter oben auf dem Controller



1. Netzschalter oben am Controller. EIN/AUS-Taste. Drücken Sie diese Taste, um den  
● Massagestuhl zu starten. Berühren Sie ein beliebiges Massagefunktionssymbol, um die Massage zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Massagesessel auszuschalten und er kehrt in seine ursprüngliche Position zurück.

### 2. Touch screen

- Auf dem Touchscreen stehen dem Benutzer 7 Funktionsoptionen zur Auswahl.
- ⚙ Die Einstellung befindet sich in der oberen linken Ecke.
- ⏸ Die Pause Taste befindet sich in der oberen rechten Ecke.




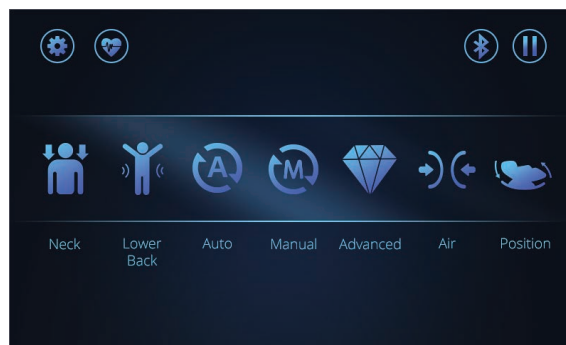




# Bedienerführung

## 1. Auto

- Drücken Sie die Taste [Auto] , um zu den Automatikprogrammen zu gelangen.
- Es gibt 16 automatische Massageprogramme: Master's Choice, Signature, Cradle, Stretching, Wirbelsäule, Tiefengewebe, Core, The Golfer, Pilates, Mobile-Modus, Relax, Shop N Relax, Chinesisch, Sport, Morgen, Abend. Wählen Sie eine davon aus, um mit der Massage zu beginnen. Hinweis: Es gibt 4D-Mechanismus, Stärke, Intensität und Geschwindigkeit, die bei der Massage angesteuert werden können.

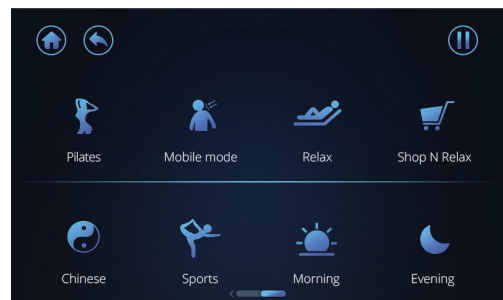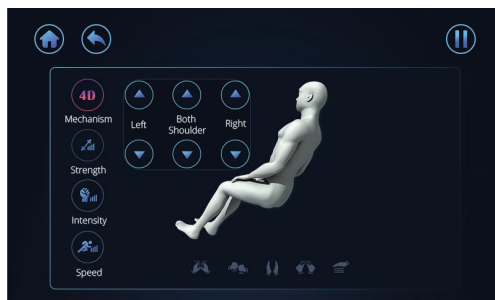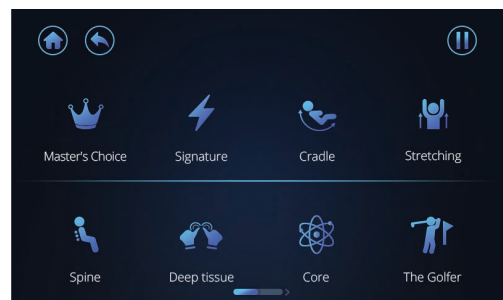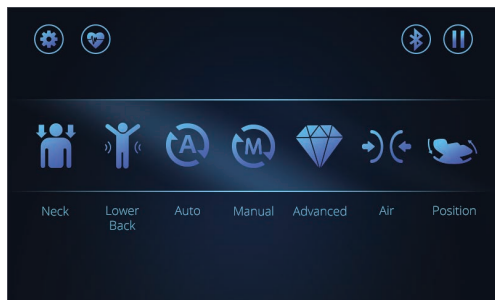

- Wählen Sie „Health Pro“, um die Muskelverspannungserkennung zu starten.
- ① Bitte lehnen Sie sich zurück und halten Sie den Körper gegen die Sensoren, um sicherzustellen, dass alle Testpunkte abgedeckt sind. Drücken Sie die Taste, um die Erkennung zu starten.
- ② Sie werden aufgefordert, Ihre Handfläche fest gegen die KI-Handsensorrofläche zu drücken. Entfernen Sie Ihre Handfläche erst, wenn der Health Pro-Diagnosebildschirm angezeigt wird.
- ③ Es gibt zwei Stufen: den Grad der Ermüdung und den Grad der Muskelspannung. Und es wird auch angezeigt, welches Gesundheitsniveau Sie haben: leicht, mittel oder schwer. Der Stuhl generiert automatisch über die KI Massageprogramme entsprechend dem Scanstatus Ihres Gesundheitsexperten.





**Hinweis:** Um Health Pro richtig zum Scannen Ihres Körpers verwenden zu können, müssen Sie sich an die Elektroplatten des Körperschmerzdetektors lehnen und guten Kontakt mit ihnen haben, sonst stoppt er und der Scan schlägt fehl.  
Nicht bei jedem und jeder Messung funktioniert der Scan, insbesondere wenn uneindeutige Informationen ausgelesen werden



Der Chair Doctor ermittelt in Echtzeit den Verspannungsgrad und erstellt mit Hilfe der KI ein individuelles Automatikprogramm.

## 2. Nacken

- Berühren Sie dieses Symbol. Der Bildschirm wechselt zur Seite [Nacken].
- Auf der nächsten Seite gibt es 3 Modi: Leicht, Fokus, Schulter konzentriert. Sie können (Leicht/Fokus) direkt auswählen, um das Nackenmassageprogramm zu starten. Wenn Sie das Symbol (Schulter konzentriert) berühren, gibt es links und rechts Optionen für Optionen. Wählen Sie eine aus, um zu starten [Schulter konzentriert] Massage

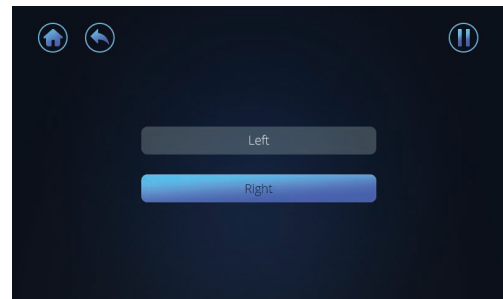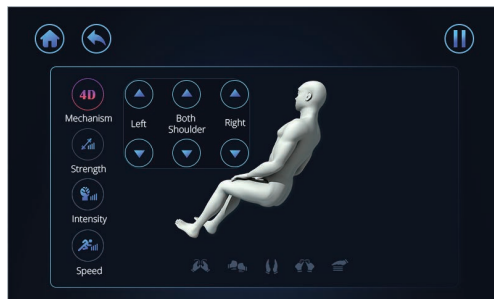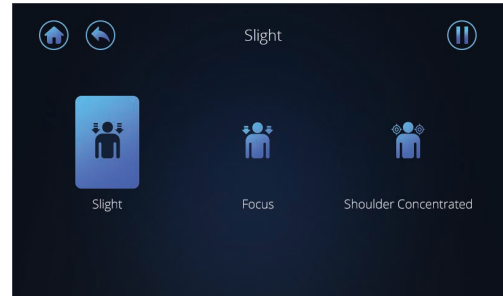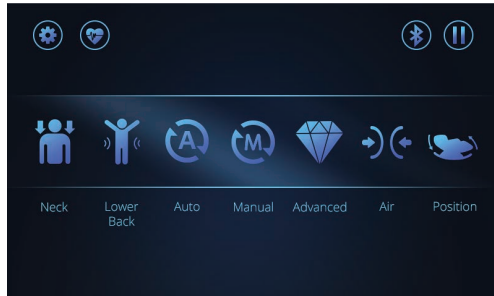

### 3. Unterer Rücken

- Berühren Sie das Symbol. Der Bildschirm wechselt zur Seite [Unterer Rücken].
- Es gibt 4 automatische Massageprogramme. Wählen Sie eines beliebigen aus, um mit der Massage zu beginnen



### 4. Manuell

- Berühren Sie dieses Symbol. Der Bildschirm wechselt zur Seite [Manuell].
- Es gibt 4 verschiedene Massageprogramme für die Teile des Rückenbereichs. Benutzer können das von ihnen bevorzugte Programm auswählen und starten.
- Beim Klopfen/Shiatsu stehen zwei Arten von Massagetechniken zur Auswahl.



Notiz:

(1) 4D Mechanismus:

- Es gibt 4 einstellbare Stufen für die Intensität des 4D-Mechanismus.
- Im Massagemodus wird die Intensität des Mechanismus auf die Standardeinstellung eingestellt.

(2) Intensität/Stärke/Geschwindigkeit:

- Es gibt 5 verschiedene Stufen zur Anpassung.

(3) Aufwärts/Abwärts Symbol:

- Wenn Sie die Taste [Spot] drücken, wird die Bewegung der Massagerollen nach oben oder unten gestoppt und die Massagerollen bleiben an diesem Punkt.
- Um die Position der Massagerollen zu ändern, drücken Sie einfach das Auf- oder Ab-Symbol und bleiben Sie an der gewünschten Position.

(4) Weite:

- Die Breite der Massage kann für Klopfen, Shiatsu und Rollen angepasst werden.
- Drücken Sie die Pfeilsymbole nach links und rechts.

(5) Punktt:

- Die Punktmassage ermöglicht es Benutzern, einen Punkt für jeden Teil des Rückenbereichs auszuwählen.
- Berühren Sie das Symbol einmal, um die Punktmassage an der gewünschten Stelle zu aktivieren.
- Berühren Sie das Symbol erneut, um die Funktion zu stoppen.

(6) Partiel:



- Die Teilmassage ermöglicht es Benutzern, eine Region (1/4 des Rückens) auszuwählen.
- Berühren Sie das Symbol einmal, um die Teilmassage zu aktivieren.
- Berühren Sie das Symbol erneut, um die Funktion zu stoppen.

5. Erweitert

- Wenn Sie auf [Erweitert] drücken, wechselt der Bildschirm zur entsprechenden Seite.
- Es stehen 4 Programme zur Auswahl.
- Benutzer können das von ihnen bevorzugte Programm auswählen und starten.

Notiz:

- Fußwärme unterstützt während der Massage  
Berühren Sie dieses Symbol, um die Fußwärme der Rollen auszuschalten. Berühren Sie es erneut, um es einzuschalten.
- Rückenwärme unterstützt während der Massage  
Berühren Sie dieses Symbol, um die Rückwärme der Massagerollen auszuschalten. Berühren Sie es erneut, um es einzuschalten.
- Wadenmassage  
Drücken Sie diese Taste um die Wadenmassage Ein/Aus zuschalten.
- Fußrollen  
Drücken Sie diese Taste um die Fußrollen Ein/Aus zuschalten.

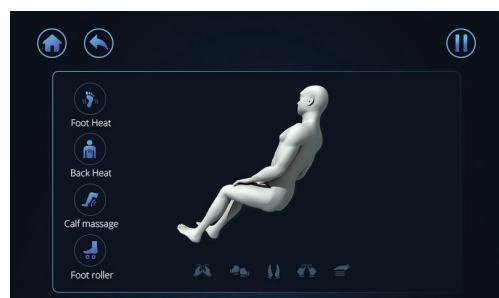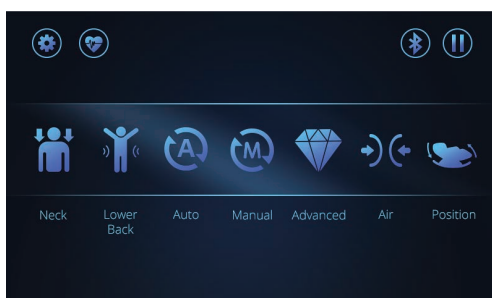

## 6. Luft Massage

- Berühren Sie das Symbol [Luftmassage] und der Bildschirm wechselt zur entsprechenden Seite.
- Es gibt 3 Programme zur Auswahl.
- Wählen Sie ein Programm und starten Sie die Massage.
- Zur Einstellung stehen 5 verschiedene Stufen der Luftintensität zur Verfügung.




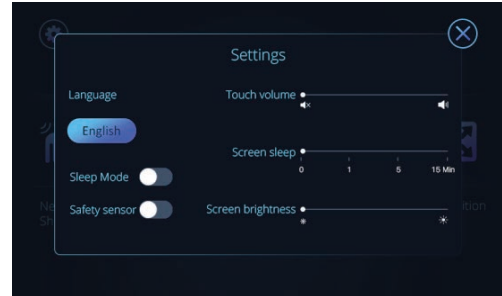
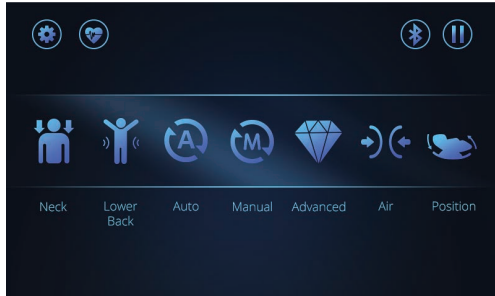
## 7. Position

- ⤴ Benutzer können die Neigung der Rückenlehne und der Fußstütze durch Berühren des Symbols anpassen. Wenn Sie glauben, dass dies die gewünschte Position ist, berühren Sie das Symbol erneut, um die Einstellung zu stoppen.
- Mit dem Knopf der Beinstütze können Sie die Länge der Beinstütze verlängern oder verkürzen.
- Berühren Sie das Symbol [Zero Gravity], um die Schwerelosigkeitsposition des Stuhls anzupassen. Drücken Sie die Taste erneut, um zur ursprünglichen Position zurückzukehren.
- Berühren Sie das [LED]-Symbol, um das Licht unter der Haube zu steuern.




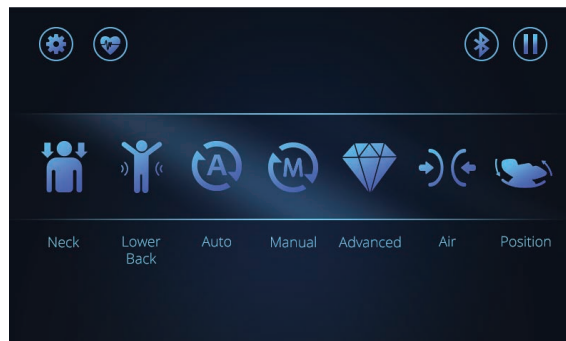
## 8. Einstellungen

-  Berühren Sie das Symbol in der oberen linken Ecke. Der Bildschirm wechselt zum Menü [Einstellung].
- Benutzer können auf dieser Seite nach Bedarf den Schlafmodus, die Touch-Lautstärke, den Ruhezustand des Bildschirms und die Bildschirmhelligkeit auswählen.





## 9. Bluetooth

-  Berühren, um Bluetooth zu steuern. Wenn Sie darauf drücken, leuchtet dieses Symbol auf. Das bedeutet, dass Bluetooth dieses Stuhls aktiviert ist und Sie eine Bluetooth-Verbindung per Telefon herstellen können. Sie können dieses Symbol auch erneut berühren, um es auszuschalten.




Notiz:

1- Warnerinnerung Schalten Sie den Controller ein. Es werden zwei Seiten mit Warnhinweisen wie unten angezeigt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Massage beginnen. Drücken Sie „OK“, um mit dem nächsten Programm fortzufahren

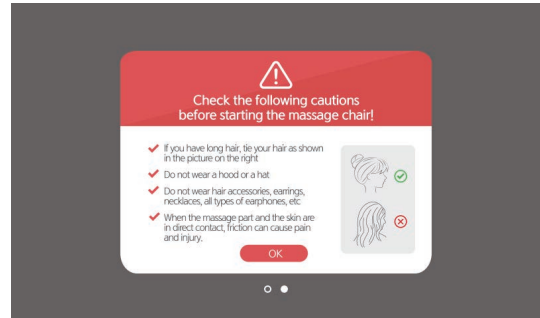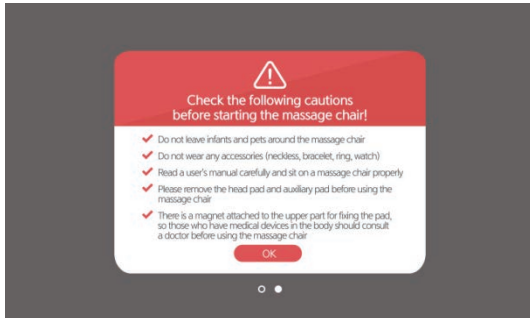


2- Manchmal finden Sie ein Warnschild wie unten dargestellt. Das bedeutet, dass ein Fremdkörper die ordnungsgemäße Funktion der Fußstütze verhindert. Und Benutzer sollten das Hindernis entfernen und dann „OK“ drücken, um mit der Massage fortzufahren.

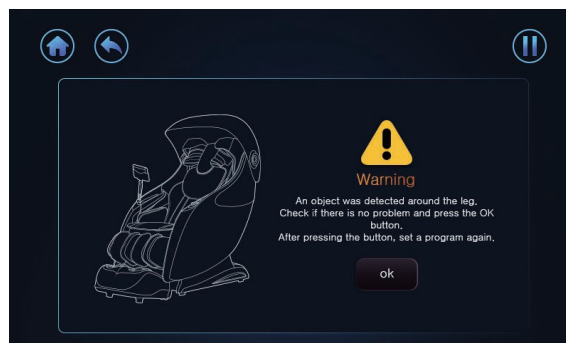

3- Warnung beim Anheben des Kopfes bei Schulter- und Nackenmassage


Wenn der Stuhl erkennt, dass Sie aufstehen müssen, wird ein Dialogfeld wie unten angezeigt. Klicken Sie auf „Ja,

Weiter“, Massage fortsetzen; Klicken Sie auf „Nein, ausschalten“, der Stuhl wird ausgeschaltet.

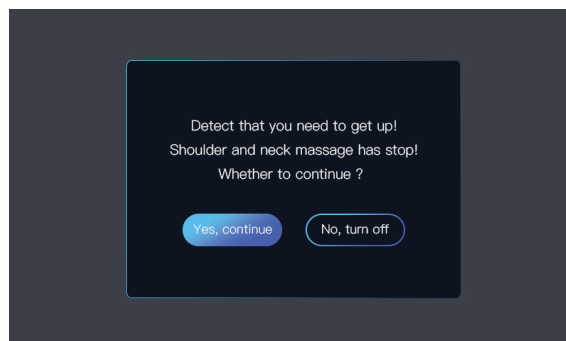



## Controll Tasten auf dem Seitenteil

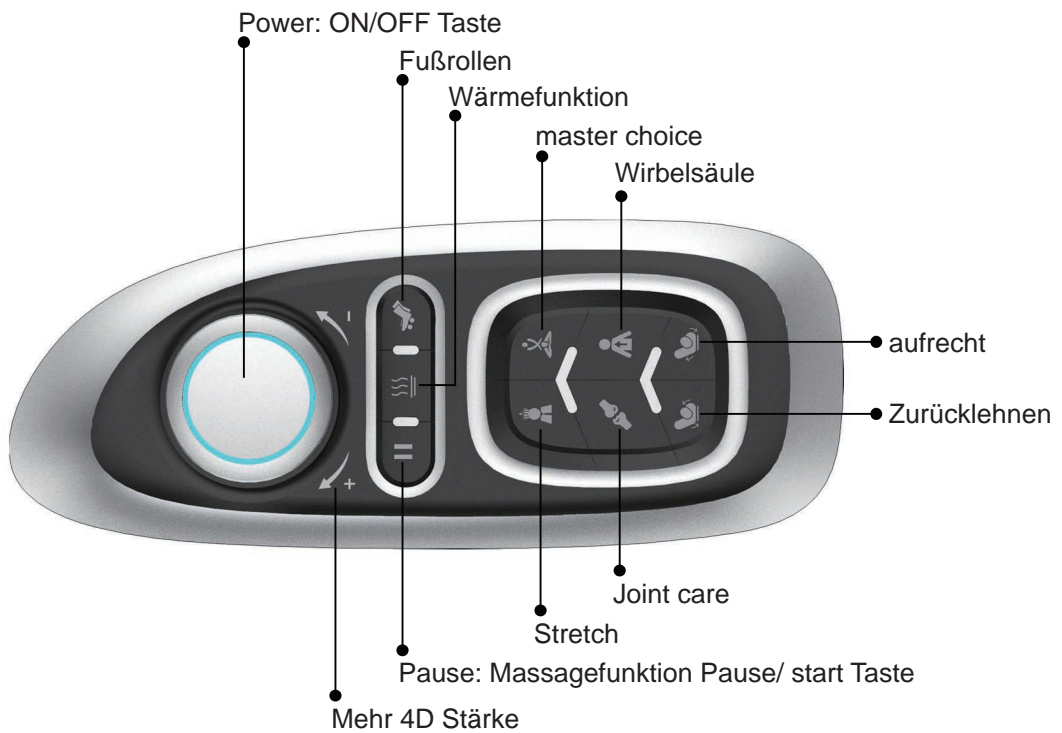

## Kabelloses Laden



# Nach der Massage

- 1 Schalten Sie den Sessel am Bedienteil aus.
- 2 Stellen Sie den Hauptschalter in die O-Stellung.
- 3 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



## **Warnung**


- **Nach der Verwendung wird empfohlen, den Netzschalter auf AUS zu stellen und den Netzstecker zu ziehen; Andernfalls kann es durch das Spielen von Kindern zu Unfällen und Verletzungen kommen.**

# Reinigung und Wartung

## Reinigung des Kunstleders

Wischen Sie das Kunstleder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Lösungen, die Chemikalien wie Verdünner, Benzin und Alkohol enthalten. d alcohol.
- Stellen Sie anhand des Etiketts sicher, dass Lederreiniger das Kunstleder nicht angreift.
- Wenn das Kunstleder sehr verschmutzt ist, reinigen Sie es wie folgt:
  - ① Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser oder 3 bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und heißem Wasser und wringen Sie es aus.
  - ② Stellen Sie sicher, dass das weiche Tuch gut ausgewrungen ist, bis KEIN Wasser aus dem Tuch tropft.
  - ③ Wischen Sie die Oberfläche des Kunstleders mit einem weichen Tuch ab.
  - ④ Achten Sie darauf, das Tuch beim Abwischen mehrmals auszuspülen.
  - ⑤ Lassen Sie das Kunstleder an der Luft trocknen. Verwenden Sie keinen Trockner.
- Wenn es schwierig ist, die Flecken auf dem Kunstleder zu entfernen, versuchen Sie, ein Stück Melaminschaum in einem neutralen Reinigungsmittel einzuweichen und mehrmals abzuwischen.
- Trocknen Sie die Oberfläche nicht mit einem Fön.
- Die Oberfläche des Kunstleders kann ausbleichen oder sich verfärben, wenn ein ungeeignetes Reinigungsmittel verwendet wird. Testen Sie die Reinigungslösung in kleinen Abschnitten, bevor Sie sie vollständig auftragen.
- Reinigen Sie die Hartplastikteile nicht mit Alkohol, Verdünner oder benzinhaltigen Mitteln. Dies kann zu einer Verfärbung oder zum vollständigen Entfernen der Farbe führen.

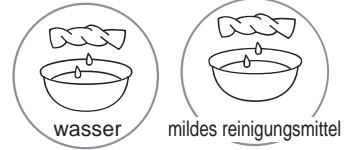

## Reinigen der Plastikteile

**1** Legen Sie ein weiches Tuch in heißes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, wringen Sie es aus und wischen Sie die Kunststoffteile ab.

- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien wie Verdünner, Benzin und Alkohol.

**2** Mit einem in klarem Wasser ausgewrungenen Mikrotuch oder weichen Tuch abwischen.

- Stellen Sie sicher, dass das Tuch gut ausgewrungen ist, ohne dass Wasser tropft und das Tuch feucht bleibt.

**3** Lassen Sie die Kunststoffteile an der Luft trocknen.



# Fragen und Antworten (Q&A)

**Q** Kann jemand mit einer Krankheit dieses Produkt verwenden?

**A** Sie müssen Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie das Produkt verwenden. **Massagen können**

Muskelverletzungen, Knochenkrankungen, Wirbelsäulenanomalien und Hauterkrankungen verschlimmern oder verschlimmern und bei Personen mit implantierten medizinischen Geräten zum Tod führen.

**Q** Gibt es eine Körpergröße und ein bestimmtes Gewicht für die Verwendung dieses Stuhls?

**A** Die empfohlene min. Die Höhe beträgt **140 cm** mit einer max. Höhe von **213 cm**. Die maximale Gewichtskapazität beträgt **118 kg**.

Wenn der Benutzer kleiner oder größer als die zulässige Körpergröße ist, sitzt er nicht bequem im Stuhl und kann sogar Verletzungen verursachen. Die maximale Gewichtsgrenze muss eingehalten werden, um eine Beschädigung des Stuhls und möglicherweise auch schwere Verletzungen bei der Verwendung des Geräts zu vermeiden. Die Grenzwerte dienen der Sicherheit der Benutzer.

**Für eine größere Person mit gebeugten Knien bei der Verwendung des Produkts.**

Neigen Sie die Rückenlehne und senken Sie das Unterschenkel-/Fußmassagegerät in die untere Position ab, wobei Sie die Länge von oben nach unten verlängern.

**Für eine kleine Person ist es schwierig, den Fußmassagebereich zu berühren:**

Heben Sie die Rückenlehne und die Beinstütze an, um den Abstand von oben nach unten zu verkürzen.

**Q** Wo befindet sich die Seriennr. des Produkts?

**A** Sie befindet sich hinter der Rückenlehne an der Rückseite des Stuhls beim Netzkabel.



**Q** Wenn ich den Sessel benutze macht er Geräusche

**A** Dies gehört zur normalen Funktion des Stuhls.

Der Stuhl ist mit einer Luftpumpe und mehreren Motoren ausgestattet. Die Geräusche sind Teil des Stuhls, wenn er bedient wird.

**Q** Wie lang sollte ich den Sessel am Tag benutzen?

**A** **20 Minuten pro Tag ohne gesundheitliche Beschwerden.**

In der ersten Woche der Nutzung des Stuhls darf der Stuhl höchstens 20 Minuten lang verwendet werden, vorausgesetzt, der Benutzer befindet sich in einem guten Gesundheitszustand. Wenn Sie Beschwerden verspüren, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. In den ersten Tagen der Anwendung kann es zu leichten Schmerzen kommen. Achten Sie darauf, die Schmerzstärke zu überwachen. Wenn die Schmerzen nach dem nächsten Tag nicht nachlassen, konsultieren Sie vor der erneuten Anwendung Ihren Arzt.

**Achten Sie darauf, nach jeder Massage reichlich Wasser zu trinken.**

# Fehlersuche

**Wenn ein Problem auftritt, überprüfen Sie es und beheben Sie das Problem gemäß der entsprechenden Methode unten.**

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Anweisungen oder Service an den Hersteller.

Fehler	Ursache und Beseitigungsmethode
<p><b>Die Massagerollen stoppen während des Gebrauchs</b> (Das Produkt piept und alle Symbole und Tasten auf der Fernbedienung flackern und erlöschen dann.)</p>	<p><b><u>Aus Sicherheitsgründen stoppen die Massageköpfe, wenn die Druck-/Gewichtsbelastung ihren Grenzwert überschreitet.</u></b> Um eine mögliche Überhitzung oder Beschädigung des Massagemechanismus zu vermeiden, ist der Stuhl so konzipiert, dass er sich bei Überlastung oder Überhitzung automatisch abschaltet. Die Fernbedienung blinkt einige Male und schaltet sich dann aus Sicherheitsgründen aus. Schalten Sie in diesem Fall den Netzschalter auf der Rückseite aus. Warten Sie 30 Sekunden. Und schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn die Gewichtskapazität von 118 kg Pfund nicht überschritten wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie den Hersteller.</p>
<p><b>Das Produkt kann nicht gekippt werden oder die Fußstütze kann nicht angehoben oder abgesenkt werden</b> (Das Produkt piept, das Lauflicht auf der Fernbedienung erlischt und das Produkt stoppt)</p>	<p><b><u>Dieses Produkt stoppt, wenn ein Hindernis oder eine zu große Kraft den Betrieb verhindert.</u></b> Wenn alle Bildschirme und Tasten flackern und die Rückenlehne oder Fußstütze angehalten hat, schalten Sie die Stromversorgung aus und 10 Sekunden lang wieder ein. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg der Fußstütze oder des Rollmechanismus der Rückenlehne befinden.</p>
<p><b>Die Massagerollen können den Nacken- und Schulterbereich nicht erreichen</b></p>	<p>Wenn Ihr Kopf während des Computer-Körperscans nicht richtig an der Rückenlehne anliegt, kann dies zu einem falschen Messwert führen und dazu führen, dass die Rollen in eine niedrigere Position starten, was zu einer ungenauen Massage führt. Schalten Sie in diesem Fall die Fernbedienung aus. Beginnen Sie noch einmal von vorne, um eine korrekte Position zu erhalten .</p>
<p><b>Die rechte und die linke Massagerolle sind auf unterschiedlicher Höhe und/oder haben eine andere Intensität</b></p>	<p>Dies ist eine normale Funktion des Massagemechanismus, da dieser so programmiert ist, dass er während bestimmter Programmintervalle abwechselnde Stellen von der rechten Seite massiert.</p>
<p><b>Die Massage funktioniert nicht</b> ● Oberer Rücken (Nacken bis Lendenwirbel) ● Unterer Bereich Beine und Wadenmassage</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Stromleitung ist unterbrochen.</li> <li>● Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet.</li> <li>● Wenn nach dem Drehen kein Programm ausgewählt wird, pausiert der Stuhl und schaltet sich ab. Ausschalten und neu starten.</li> </ul>
<p><b>Die Rollenköpfe sind nach dem Ausschalten der Heizung noch warm. Oder das Produkt ist beschädigt.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Da sich die Massageköpfe erhitzen, dauert es einige Zeit, bis die Restwärme abgebaut ist.</li> <li>● Wenn die Massageköpfe leicht erwärmt sind, können die Rollen durch die Reibung der Massage Wärme aufnehmen.</li> </ul>
<p><b>Das Stromkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich warm bis heiß.</b></p>	<p>Ziehen Sie den Netzstecker Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter</p>

Wenn Die oben genannten Lösungen nicht anwendbar sind, wenden Sie sich bitte an den Servicepartner.

# Fehlersuche (Fortsetzung)

## Erwartete Geräusche und Empfindungen bei der Verwendung des Massagesessels:

**Bei der Verwendung des Produkts werden Sie die folgenden Geräusche hören oder Empfindungen verspüren. Dies sind keine defekten Indikatoren, Diese sind bauartbedingt und vollkommen normal.**

- Wenn der Stuhl aus- oder eingefahren wird, hören Sie, wie sich die Zahnräder bewegen und klicken.
- Wenn die Massageköpfe aktiviert sind, ist ein leichtes Reibgeräusch zu hören. Beim Klopfen der Massageköpfe ist möglicherweise ein leichtes Klicken zu hören.
- Beim Aktivieren der Rollen sind Reibungsgeräusche zu hören.
- Während sich die Rollen auf und ab bewegen, erzeugt der Motor ein Geräusch.
- Wenn die Rollen aktiviert werden, hören Sie, wie sich die Riemen drehen.
- Motorgeräusche werden wahrgenommen.
- Während die Massageköpfe zusammendrücken, ist ein leichtes Quietschen zu hören.
- Wenn Sie auf dem Stuhl sitzen und die Rollenköpfe klopfen und rollen, kann ein leichtes Quietschgeräusch aus den Gelenken entstehen. may be produced from the joints.
- Gelenke in den Seitenwänden könnten quietschen.
- Reibungsgeräusch zwischen den Massagerollen und dem Stoff.
- Während die Airbags aktiviert sind, hören Sie den Wechsel der Luftventile. Wenn sich die Beinstütze bewegt, hören Sie ein leichtes Quietschen und den Betrieb eines Motors.



**Wenn der Ton sehr laut ist, ist es auch möglich, dass das Produkt einen Fehler hat.**

- Lassen Sie das Produkt in diesem Fall von einem autorisierten Servicecenter überprüfen und reparieren.

### **Warnung**

- **Das Produkt darf nicht ohne Erlaubnis nachgerüstet, demontiert oder repariert werden.** Andernfalls kann es zu Bränden, abnormalen Bewegungen oder Personenschäden kommen.

### **Warnung**

- **Im Falle einer Anomalie oder eines Fehlers stoppen Sie das Produkt sofort und ziehen Sie den Netzstecker heraus, um Dämpfung, Brände und Stromschläge zu vermeiden.**  
<Anomalie und Fehlerbeispiel>
  - Das Produkt funktioniert nicht, nachdem der Netzschalter in die EIN-Position gedreht wurde;
  - Wenn das Stromkabel bewegt wird, schaltet sich der Stuhl aus und ein.
  - Im Gebrauch gibt das Produkt einen brennenden Geruch oder einen abnormalen Ton ab; Die Produktpolsterung ist verformt oder ungewöhnlich heiß. Wenn eines dieser Symptome auftritt, lassen Sie das Produkt sofort von einem autorisierten Servicecenter inspizieren und reparieren.

# Spezifikation

<b>Produktbezeichnung</b>		AT-8701
<b>Stromverbrauch</b>		220-240V~ 50-60Hz
<b>Strom</b>		1A
<b>Laufzeit</b>		15 Minuten
4D Massagerollen	<b>Vorwärtsbewegung</b>	4 Stufen
	<b>Stärke</b>	5 Stufen
	<b>Geschwindigkeit</b>	5 Stufen
<b>Luftkissen</b>	<b>Intensität</b>	5 Stufen
<b>Verstellwinkel</b>	<b>Rückenlehne</b>	Ca.128°-155° (Bodenwinkel)
	<b>Fußstütze</b>	Ca. 9°-75° (Wandwinkel)
<b>Abmessungen</b>	<b>Aufrecht</b>	1650×800×1540mm
	<b>Liegend</b>	2060×800×1380mm
<b>Verpackungsmaße (L*W*H)</b>		BOX 1: 1405×860×1270mm BOX 2: 595×515×570mm
<b>N.W./G.W.</b>		BOX 1: 101kg/118.5kg BOX 2: 19.5kg/22.5kg
<b>Gewicht</b>		Ungefähr 120.5kg
<b>Nutzungsbedingungen</b>		Umgebungstemperatur: "32°F~95°F" Kontrastierende Luftfeuchtigkeit: "20-80RH"
<b>Lagerbedingungen</b>		Lagertemperatur: "23°F~95°F" Lagerfeuchte: "20-80RH"
<b>Max. Belastungsgewicht</b>		ca.118kg



## **Hinweis gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG**

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### **1. Getrennte Erfassung von Altgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### **2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Bei Fragen oder Rückgabe rufen Sie uns unter 09341-9285-0 gerne an.

### **3. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Viel Freude mit Ihrem neuen Sessel,  
Kundenservice:

### **Alpha Techno GmbH**

Ernst-Bauer-Str. 1

D-97941 Tauberbischofsheim

Tel.: 09341 / 9285-0

Fax: 09341 / 9285-28

Email: [Info@alpha-techno.com](mailto:Info@alpha-techno.com)

Germany