



GUARDIAN III

Guida Avanzata per l'Utente




THE QUEEN'S AWARD
FOR ENTERPRISE:
INTERNATIONAL TRADE
2018/2020


The CPR Guardian III

III CPR Guardian è progettato per mantenere chi lo indossa al sicuro, indipendente e attivo in ogni momento con un pulsante di assistenza di emergenza integrato, un cardiofrequenzimetro, telefono cellulare e localizzazione GPS.


III GUARDIAN III offre a te e ai tuoi cari tranquillità e rassicurazione sapendo che puoi sempre essere lì per loro ogni volta che hanno bisogno di te.

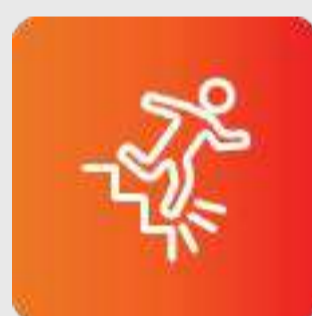


Rilevamento
Caduta

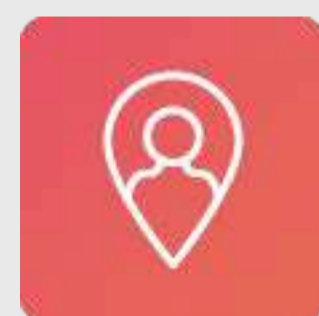


Pulsante SOS

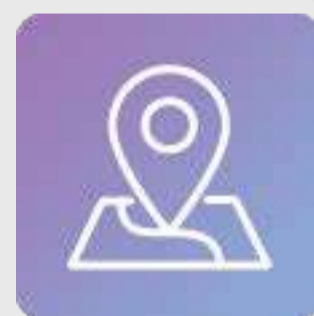

Localizzazione GPS

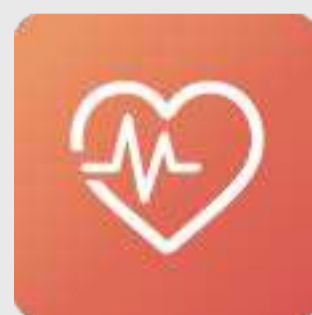

Monitora la
frequenza
cardiaca

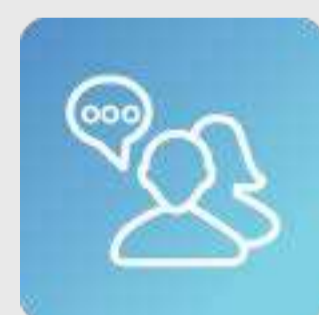

Chiamate



Temperatura


Introduzione

Conoscere il tuo Guardian III

Accesso al portale SIM

Dettagli SIM

Utilizzare il numero SIM e il PIN stampati sulla scheda informativa SIM per accedere al portale SIM CPR. Se il numero della tua sim non è sul supporto della scheda sim, controlla sotto lo scatolo dell'orologio CPR Guardian.

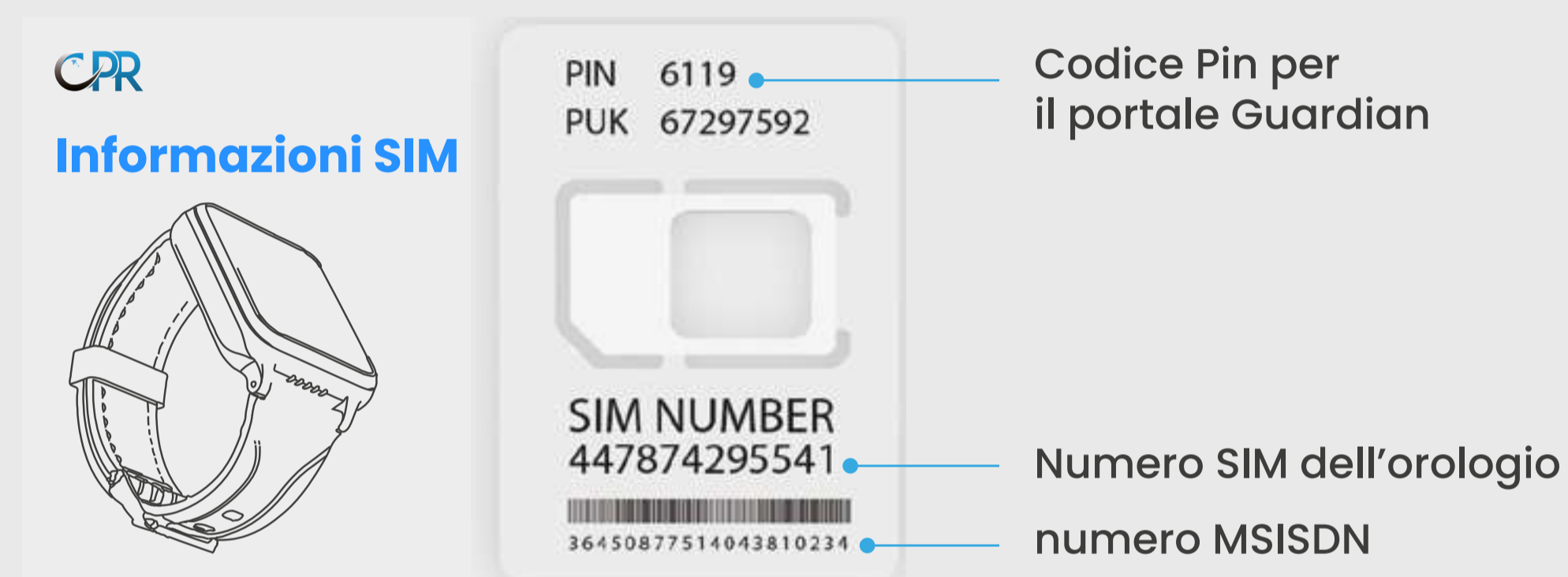

Step 1

per gestire la tua SIM, visita

<https://www.cprguardian.com/simlogin>

Step 2

Accedi al portale utilizzando il tuo numero di SIM che inizia con "44" seguito dal codice PIN.

Step 3

Quando accedi, registrati come nuovo utente e quindi seleziona il tuo piano SIM.

Contenuto dello scatolo

- 1x smartwatch Guardian III
- 1x Cavo USB
- 1x Scheda SIM (già all'interno dell'orologio)
- 1x scheda informativa SIM)
- 1x guida rapida

cura e ricarica della batteria

Per proteggere e ottimizzare le prestazioni della batteria, ti consigliamo di caricare l'orologio per almeno 12 ore per la 1a carica e per oltre 8 ore per la 2a e la 3a carica. Utilizzare sempre il cavo USB in dotazione e una presa di ricarica USB approvata UE per evitare danni irreparabili.

Allinea il connettore del cavo di ricarica magnetico ai contatti metallici a 4 punti sulla parte posteriore dell'orologio e assicurati che sia collegato correttamente (il cavo magnetico non caricherà se è invertito). Quando l'orologio inizia a caricarsi, l'icona di ricarica apparirà sullo schermo del display dell'orologio.

Introduzione


1.1 Conoscere il tuo Guardian III



Configurazione e Guida introduttiva

1.2 Sincronizzare l'orologio con l'app


1

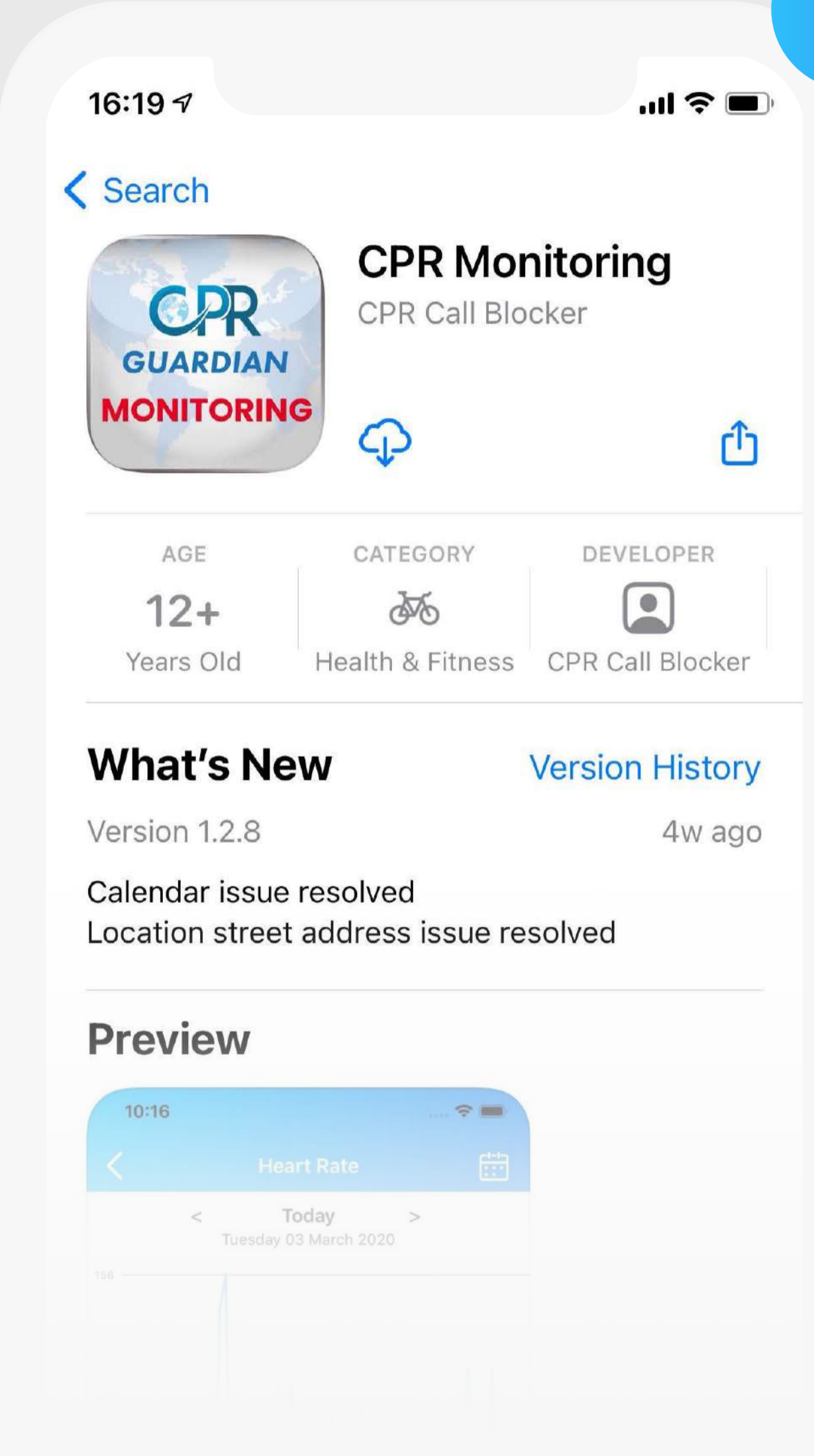

The screenshot shows the App Store page for 'CPR Monitoring' by CPR Guardian. The app is categorized as 'CPR Call Blocker' and is suitable for ages 12 and up. It is part of the 'Health & Fitness' category. The 'What's New' section indicates version 1.2.8 was released 4 weeks ago, with updates for calendar and location issues. A preview of the app's heart rate monitoring interface is shown at the bottom.

Scarica l'app di monitoraggio CPR dall'[App Store](#) / [Google Play Store](#)

2

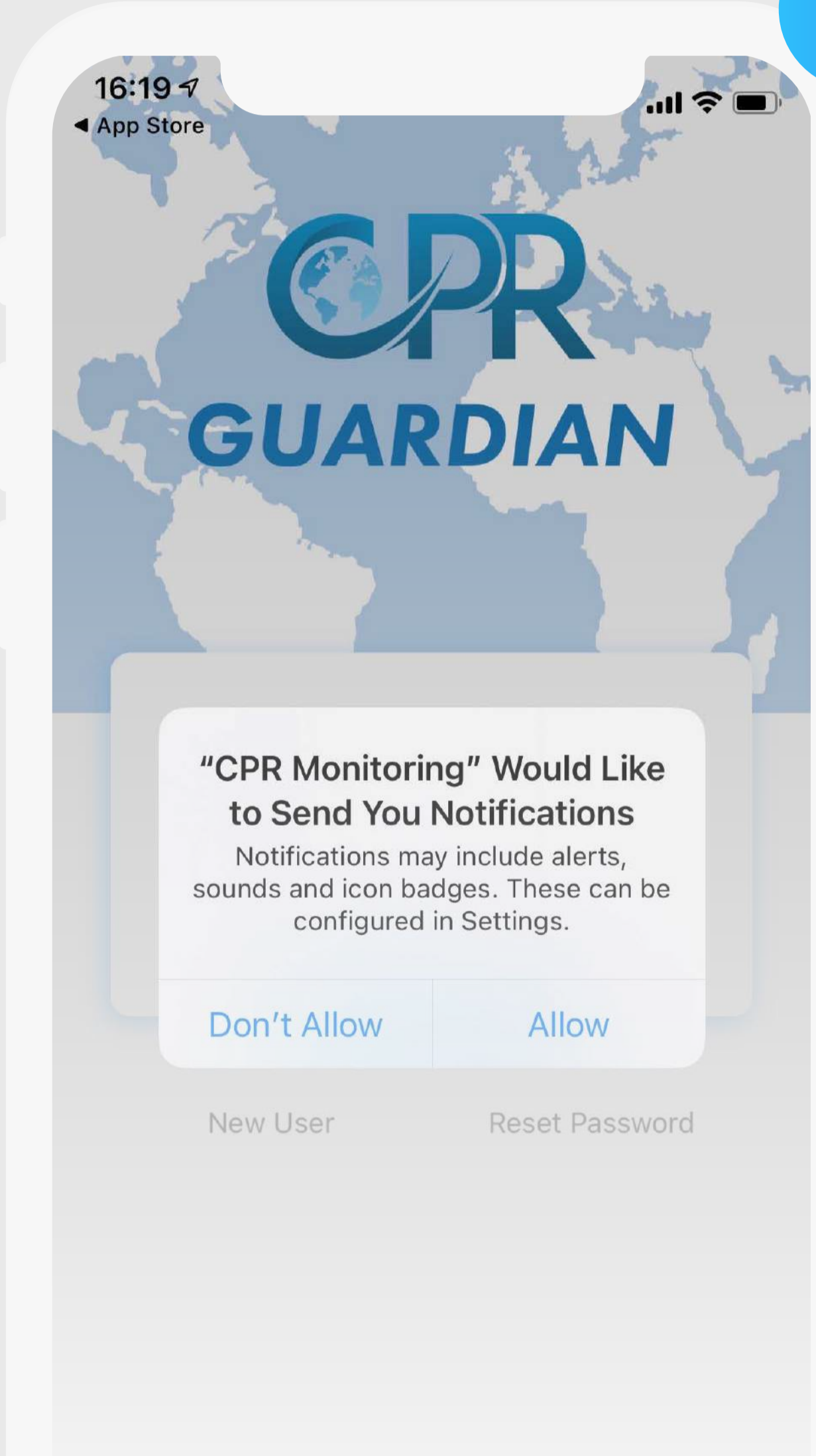

The screenshot shows the notification permission dialog for the CPR Guardian app. The dialog asks for permission to send notifications, which may include alerts, sounds, and icon badges. The user can choose to 'Don't Allow' or 'Allow'. Below the dialog, there are links for 'New User' and 'Reset Password'.

Una volta scaricata l'app, è necessario consentire le notifiche premendo "Ok"

3




The screenshot shows the home screen of the CPR Guardian app. The background features a world map with the app's logo 'CPR GUARDIAN' overlaid. Below the logo, it lists the app's features: 'Phone • Location Tracker • HR Monitor'. At the bottom, there are three right-pointing arrows indicating the next steps in the tutorial.


Successivamente, familiarizza con le funzioni dell'app scorrendo il riepilogo dell'app

Configurazione e Guida introduttiva


1.2 Sincronizzare l'orologio con l'app

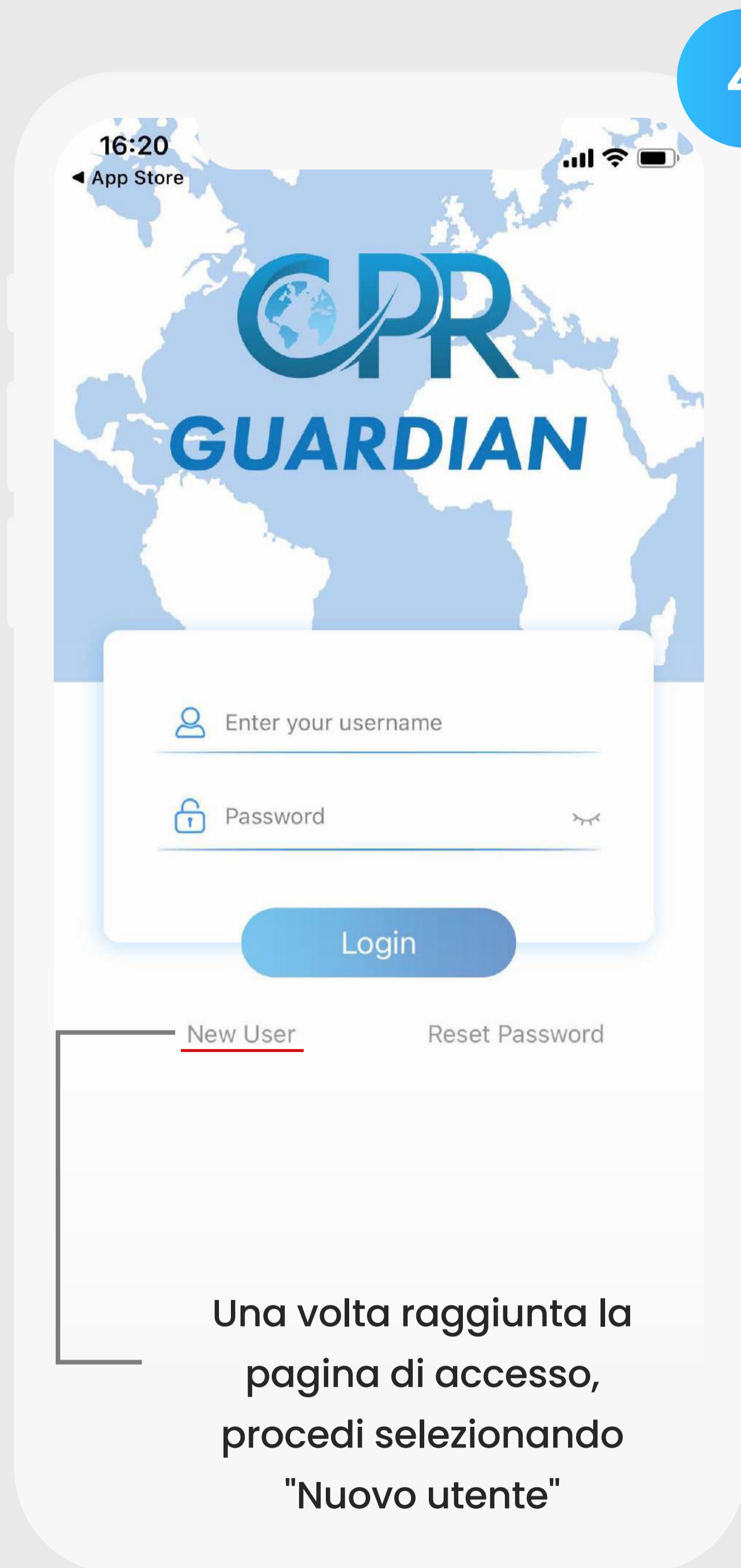

Una volta raggiunta la pagina di accesso, procedi selezionando "Nuovo utente"

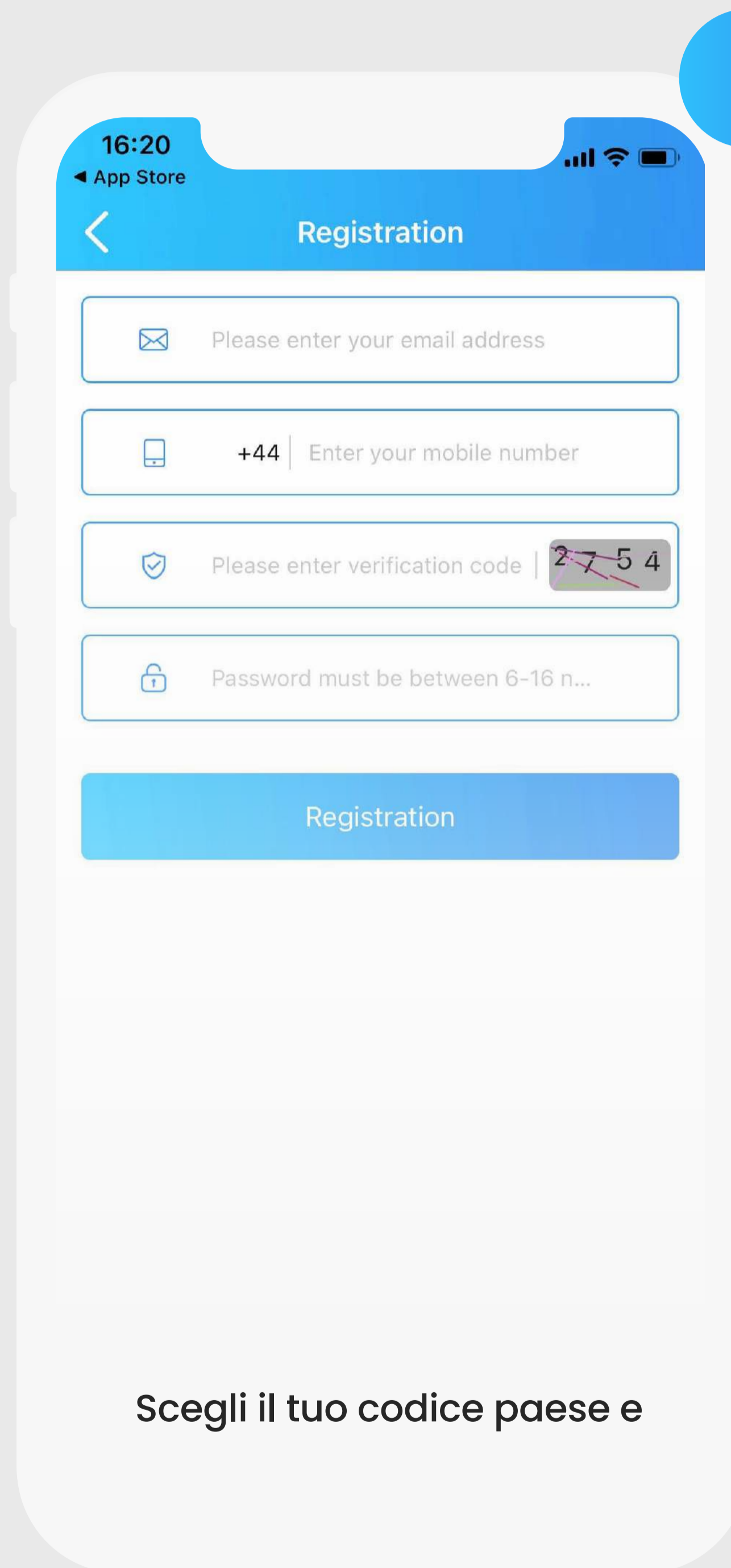

Scegli il tuo codice paese e

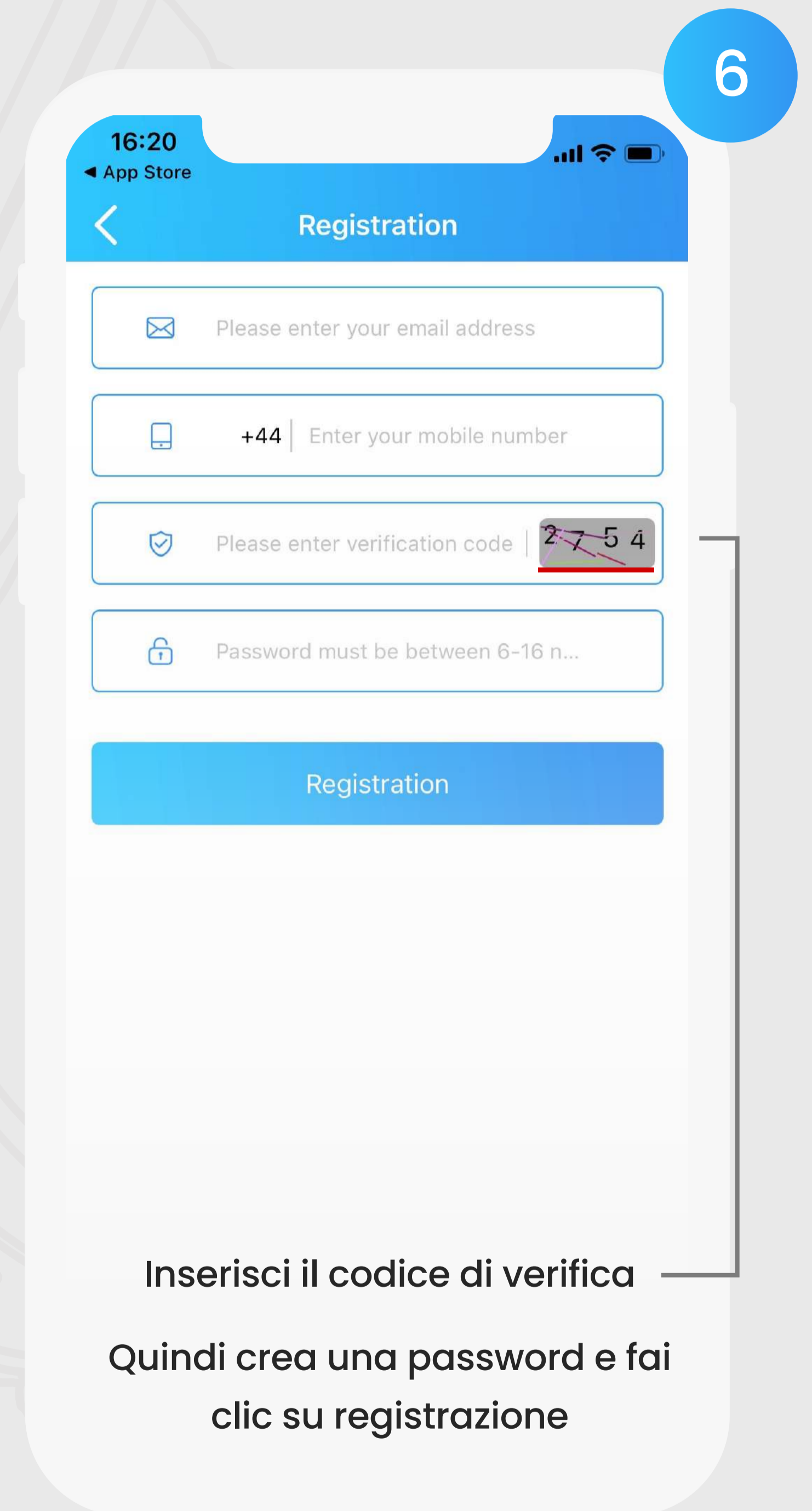


Inserisci il codice di verifica
Quindi crea una password e fai clic su registrazione

Configurazione e Guida introduttiva


1.2 Sincronizzare l'orologio con l'app

10

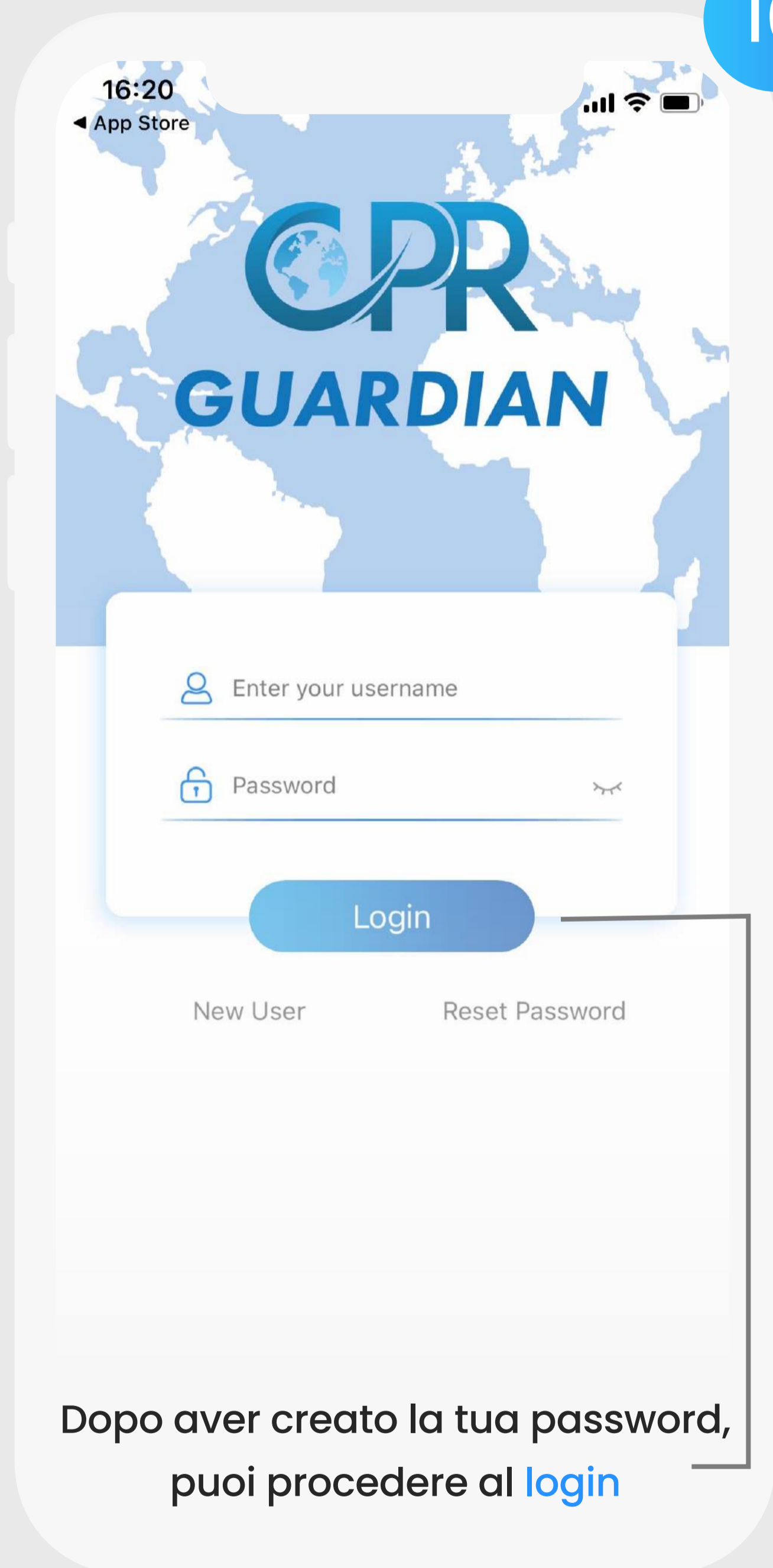


Dopo aver creato la tua password, puoi procedere al [login](#)

11

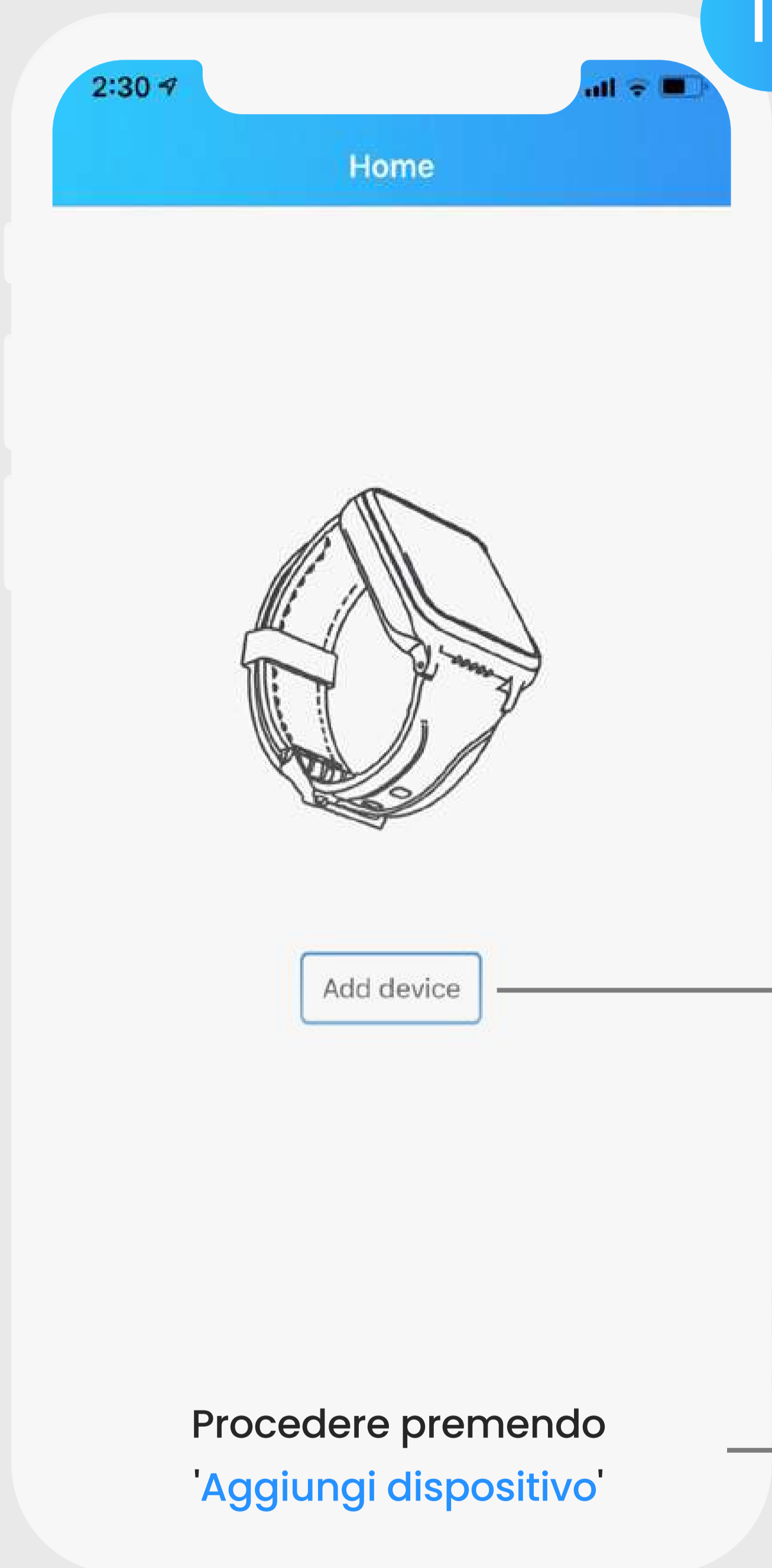

Procedere premendo ['Aggiungi dispositivo'](#)

12

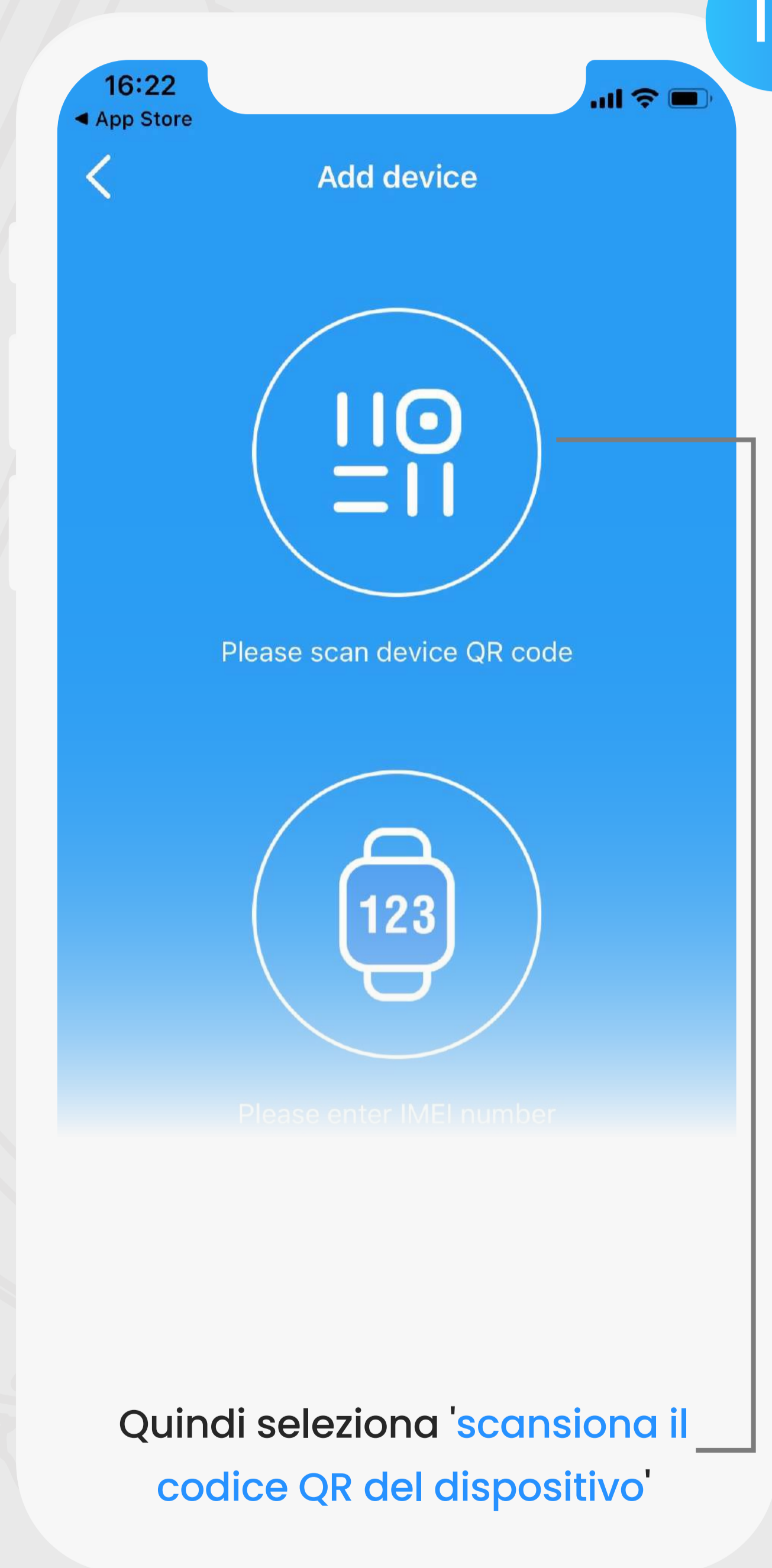


Quindi seleziona ['scansiona il codice QR del dispositivo'](#)

Configurazione e Guida introduttiva

1.2 Sincronizzare l'orologio con l'app


13

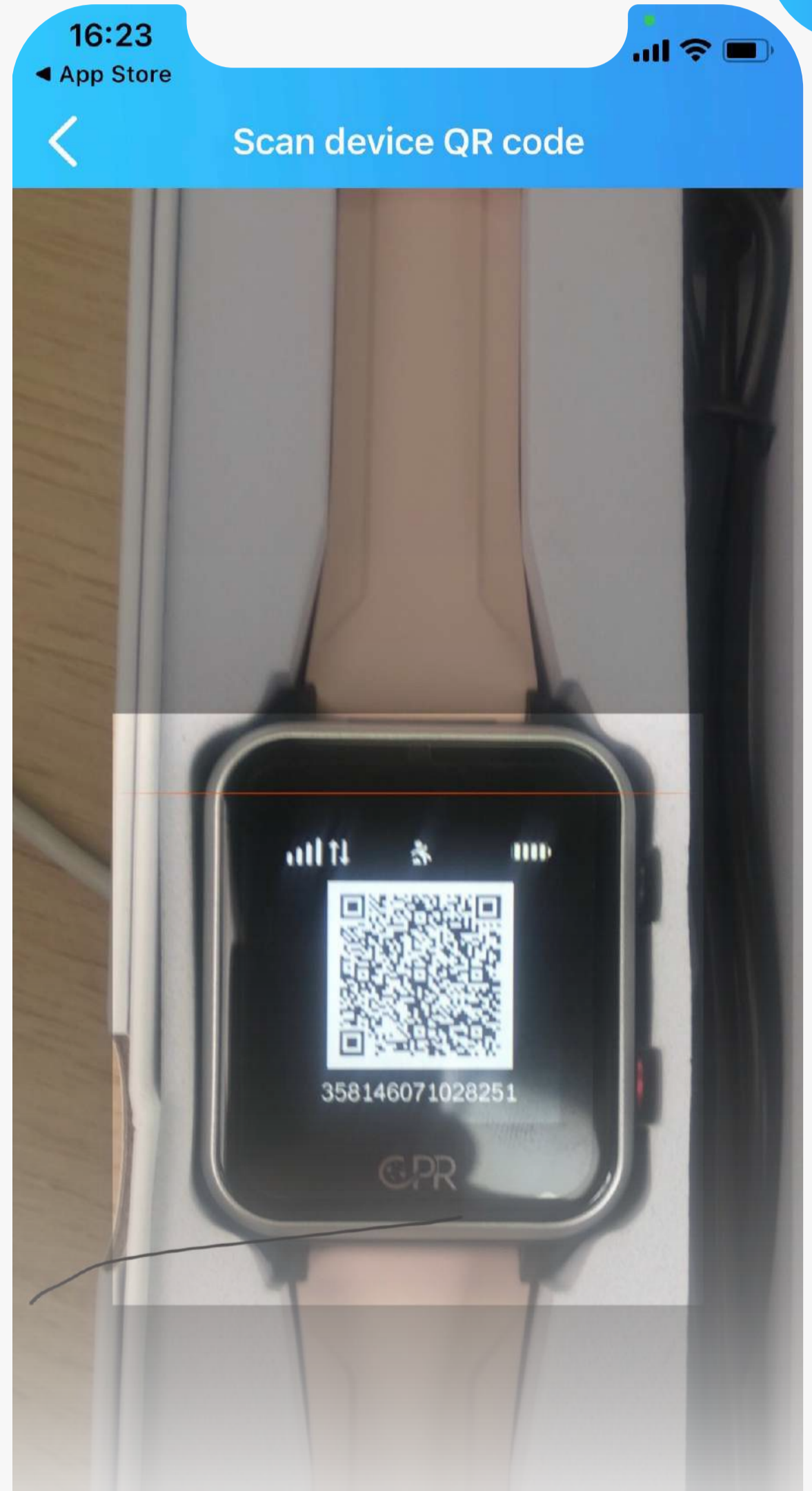

Per rivelare il codice QR del tuo orologio, scorri verso l'alto sul quadrante.


Nota: la visualizzazione del codice QR può richiedere fino a 10 minuti dopo l'accensione dell'orologio.

14

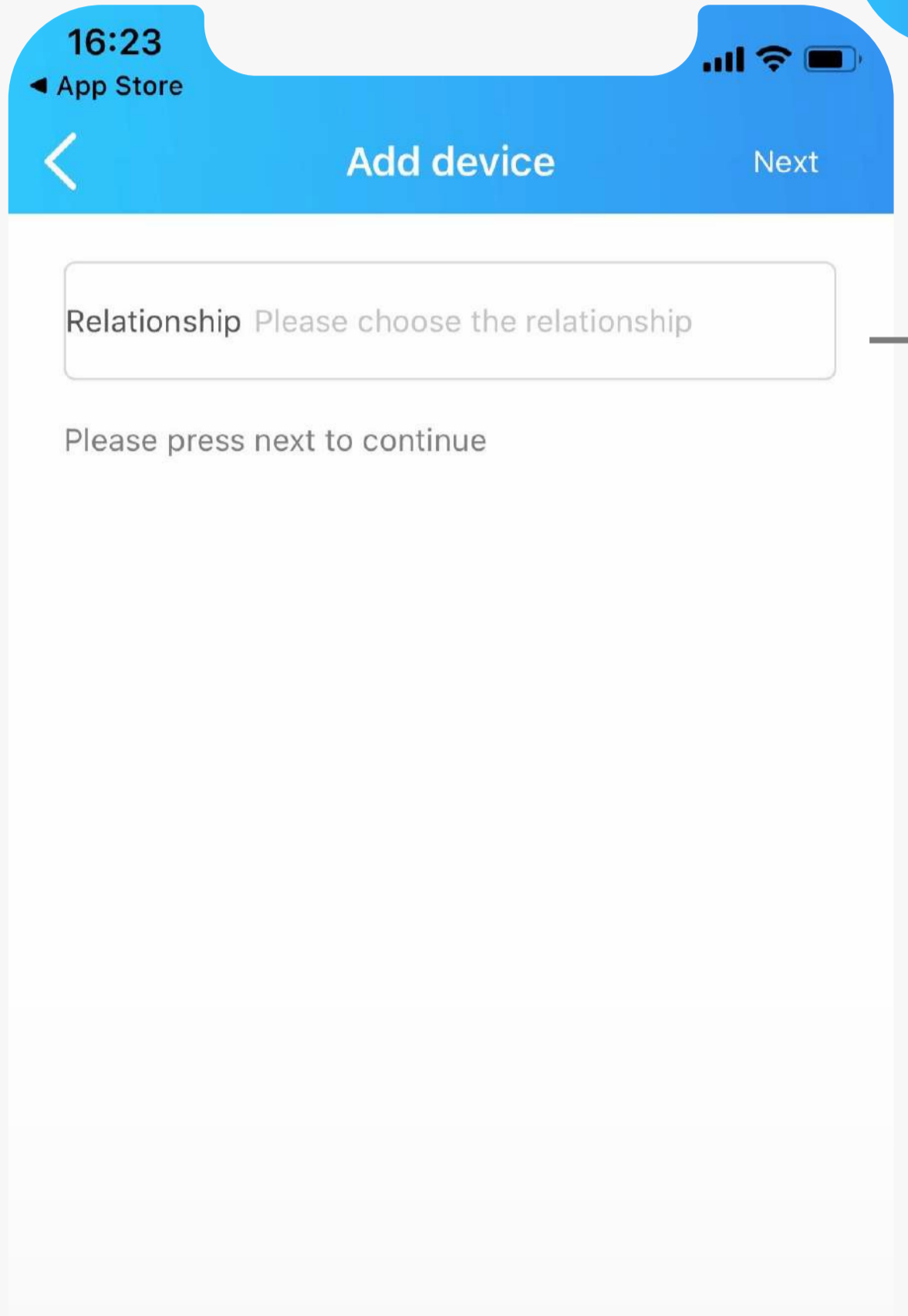

Una volta scansionato, procedi aggiungendo la tua relazione con chi lo indossa

15

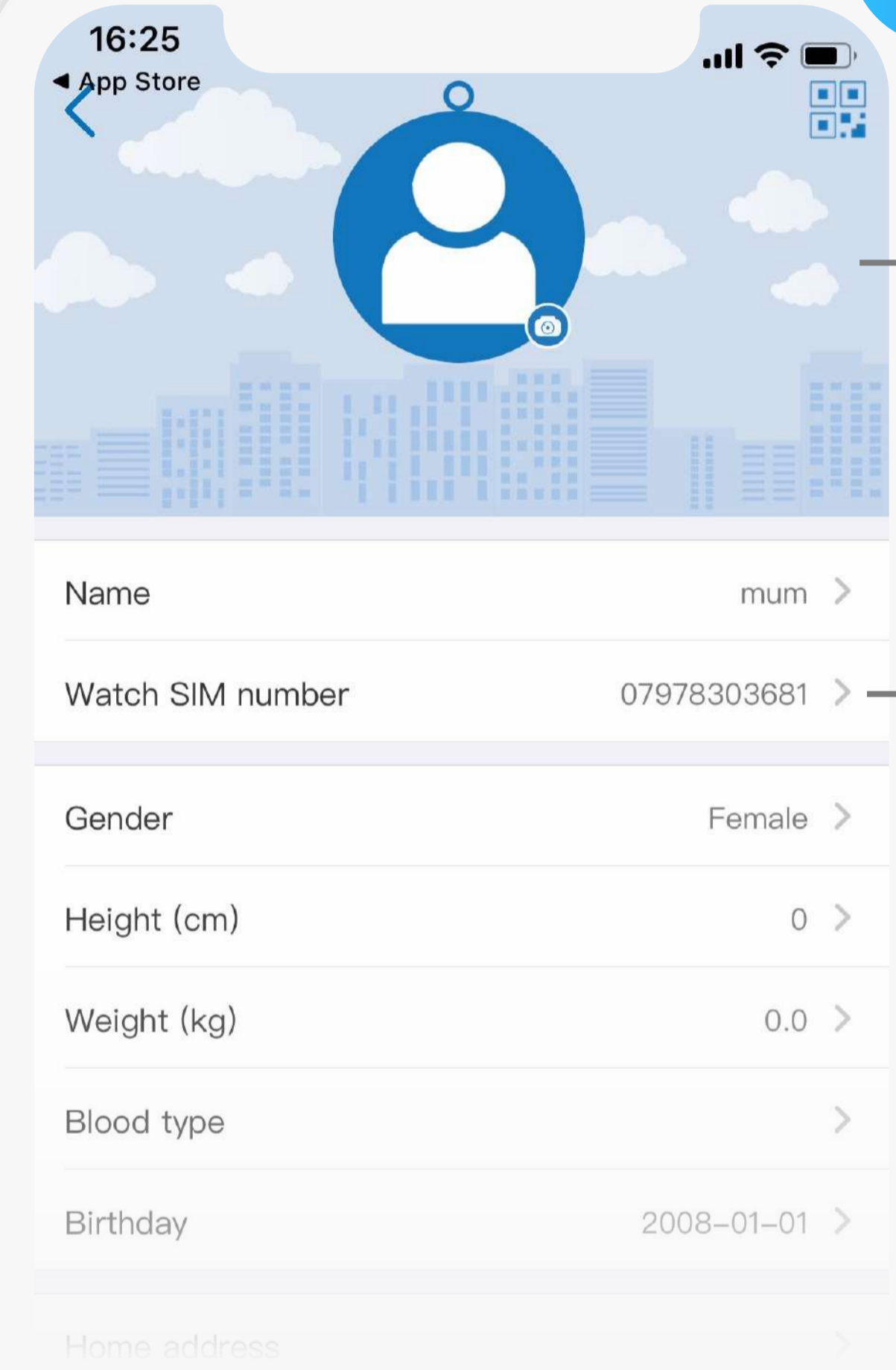


Inserisci i dettagli dell'utente dell'orologio, assicurandoti che il numero della SIM dell'orologio inizi con "0"

Configurazione e Guida introduttiva


1.2 Sincronizzare l'orologio con l'app

16

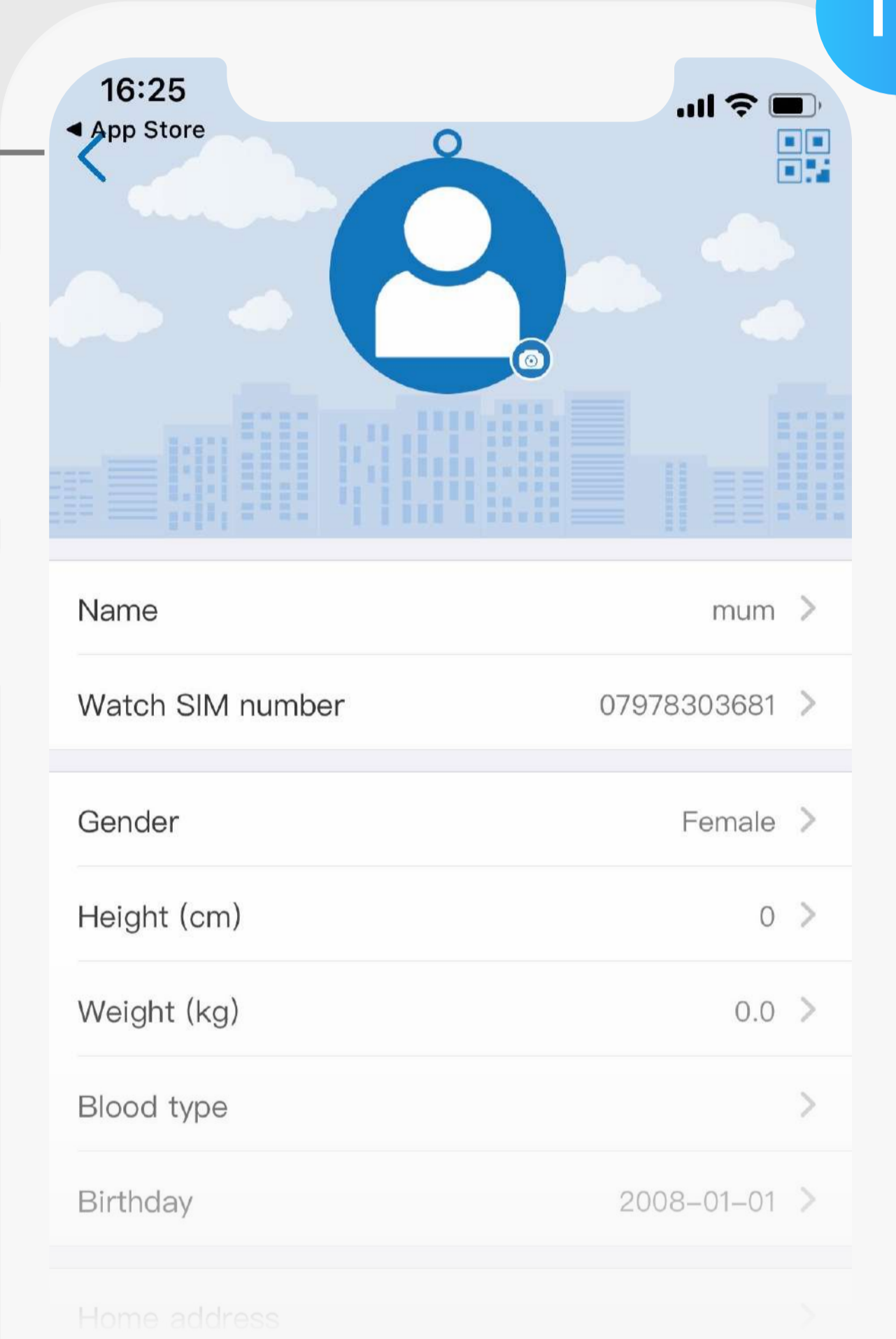

Al termine, premi il pulsante Indietro per salvare i tuoi dettagli

17

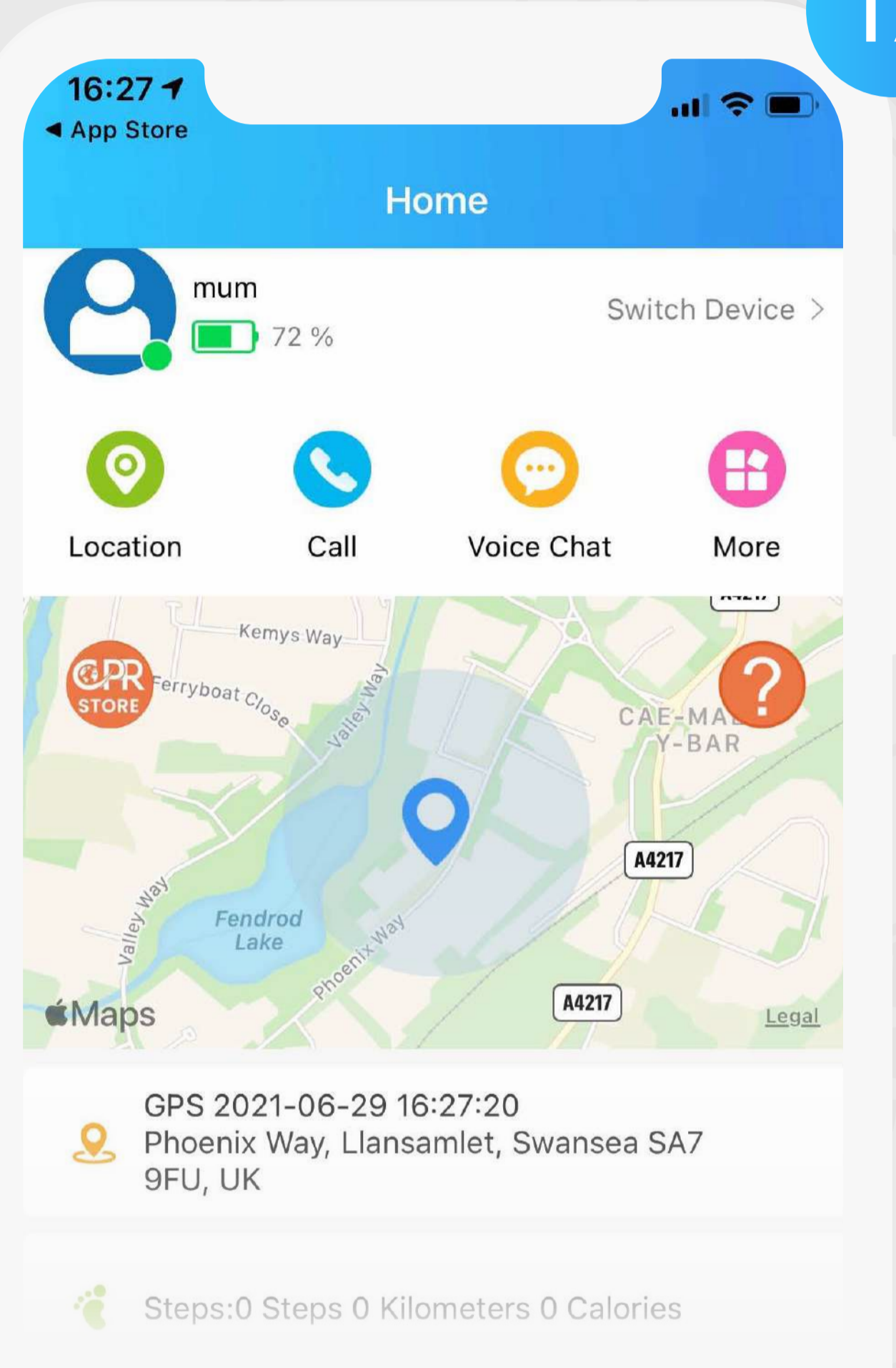


Una volta aggiunto l'orologio, premere [📍] per aggiornare l'orologio, l'operazione può richiedere fino a 5 minuti

Utilizzo dell'app Guardian


2.1 Aggiungi contatti

1

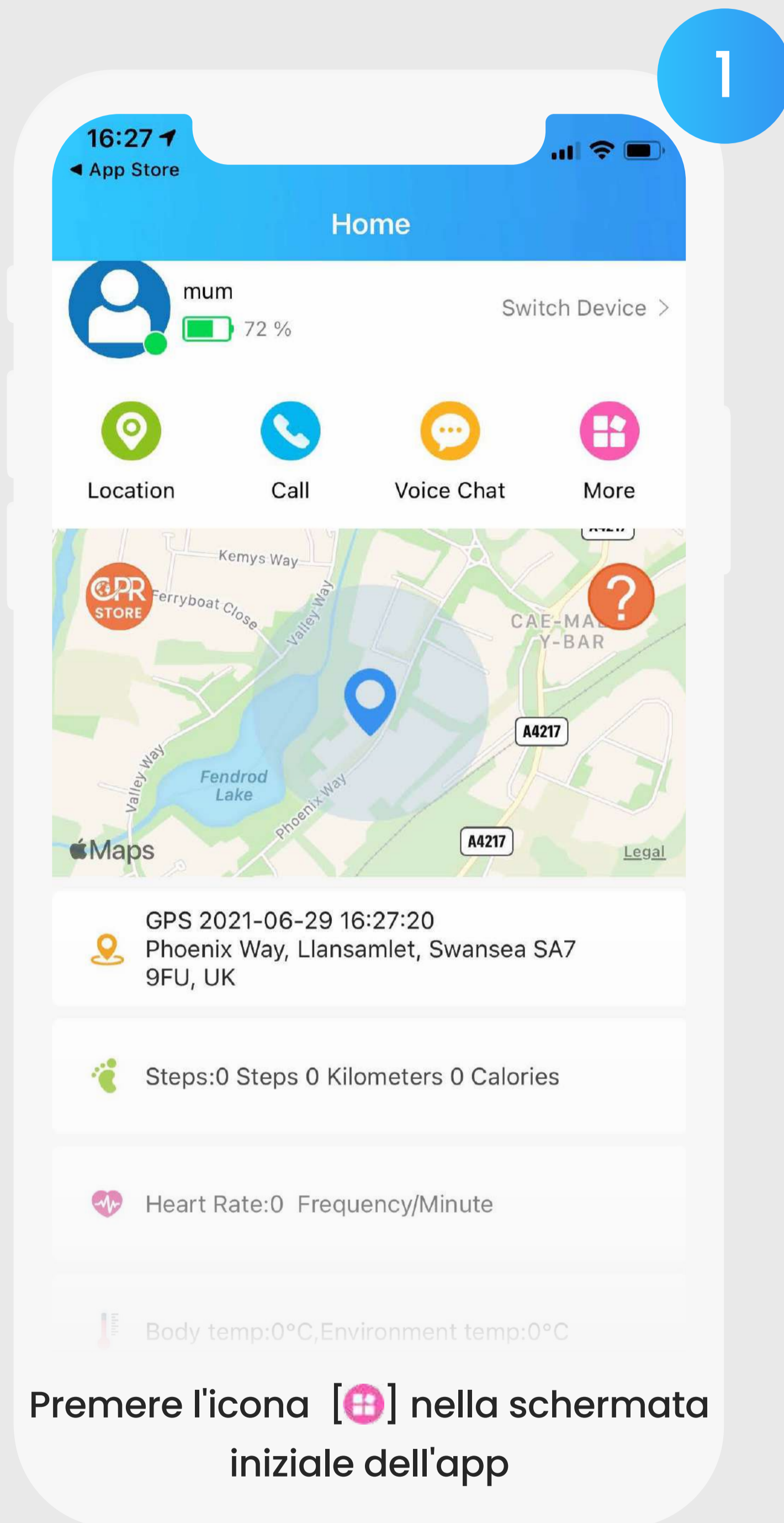


Premere l'icona [🗄️] nella schermata iniziale dell'app

2

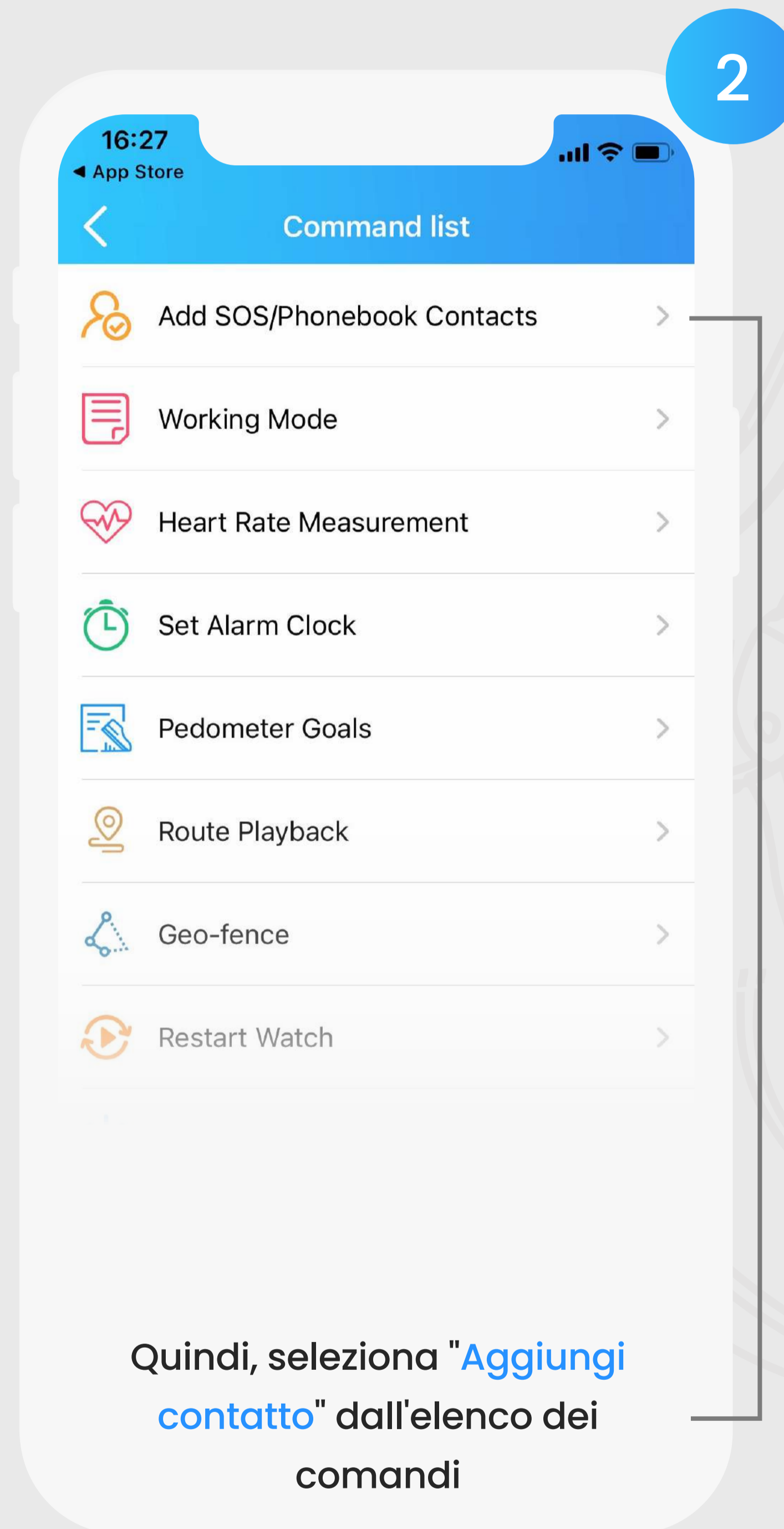

Quindi, seleziona "Aggiungi contatto" dall'elenco dei comandi



3

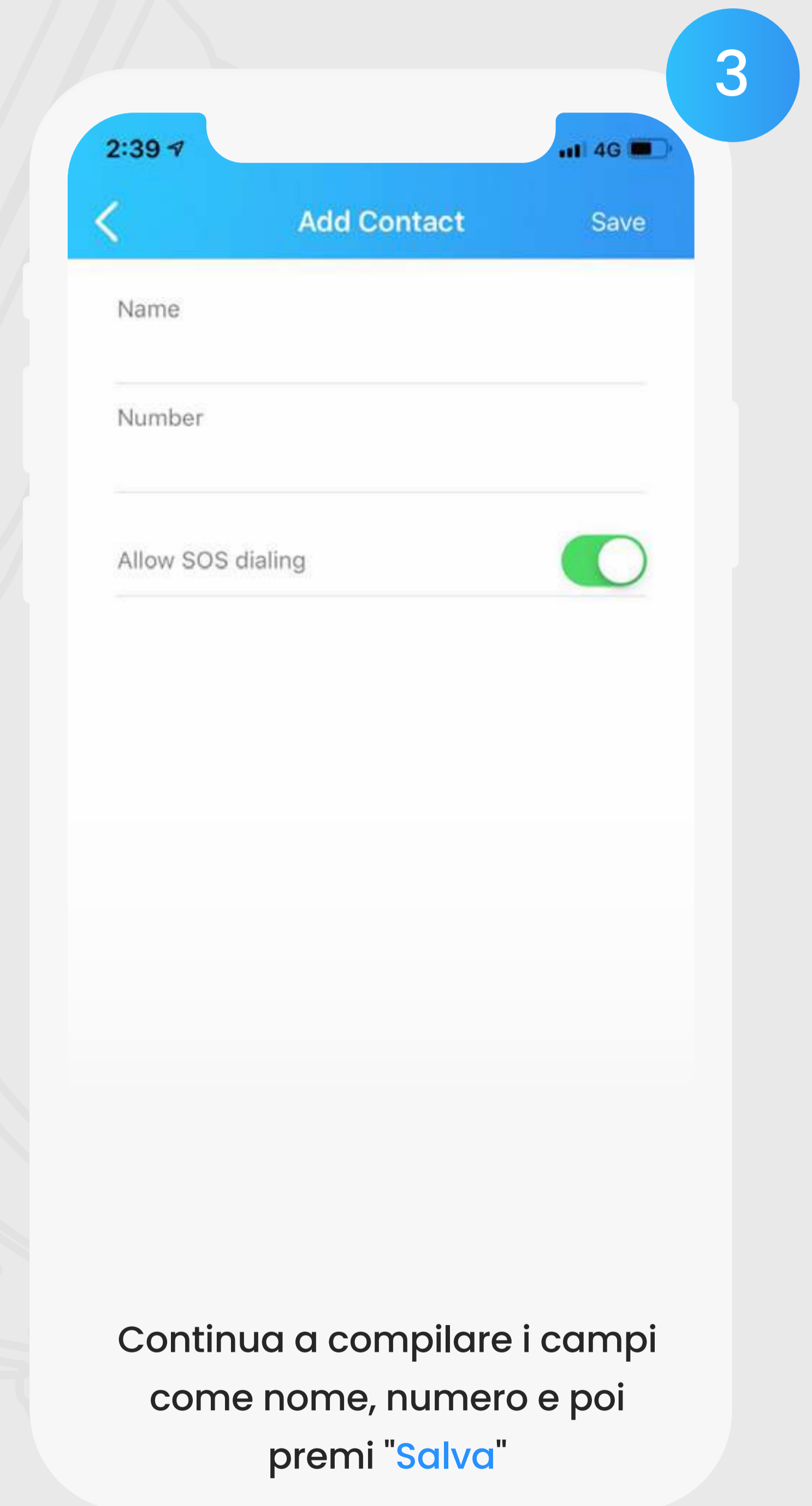

Continua a compilare i campi come nome, numero e poi premi "Salva"



Utilizzo dell'app Guardian

2.2 Chiama l'orologio

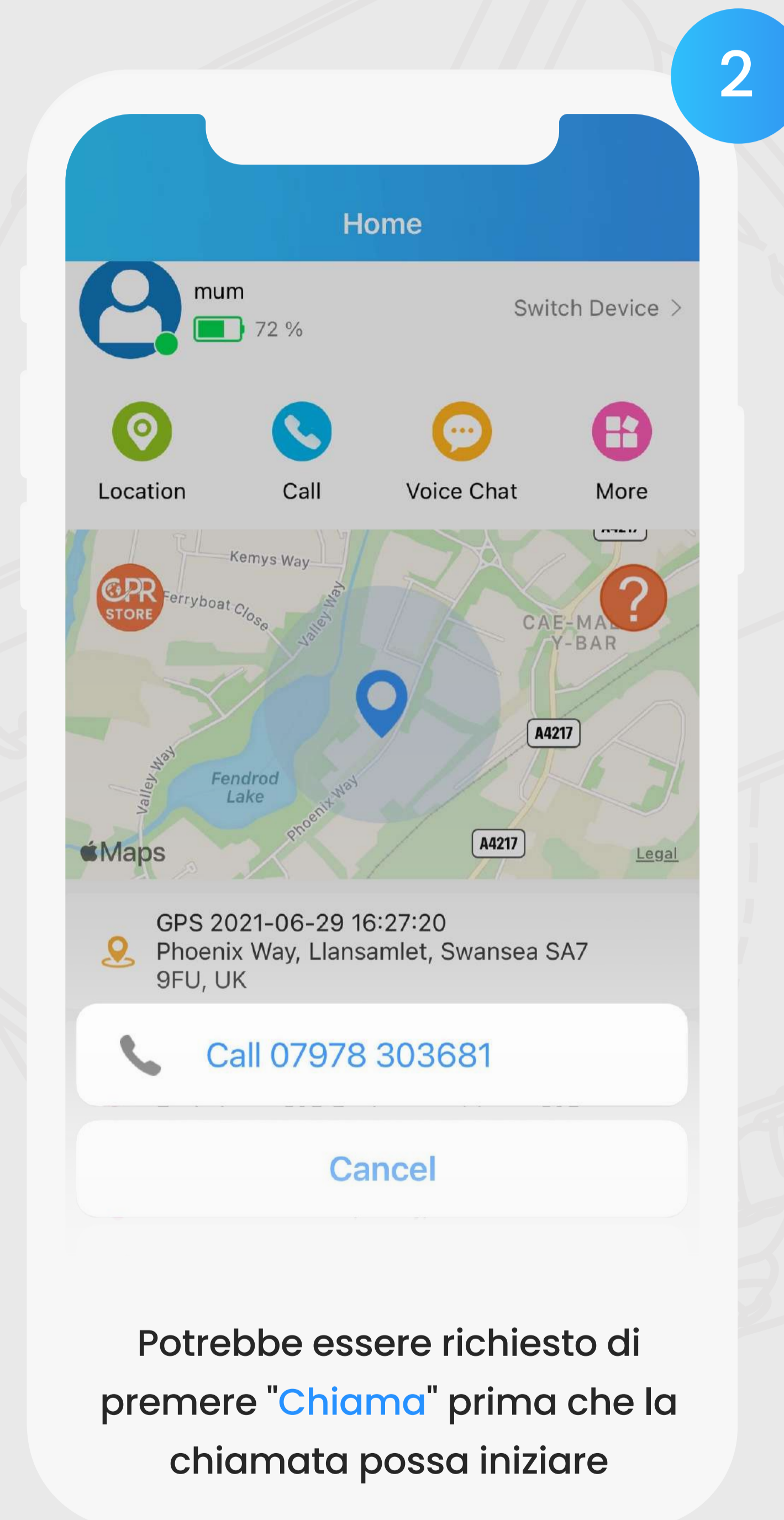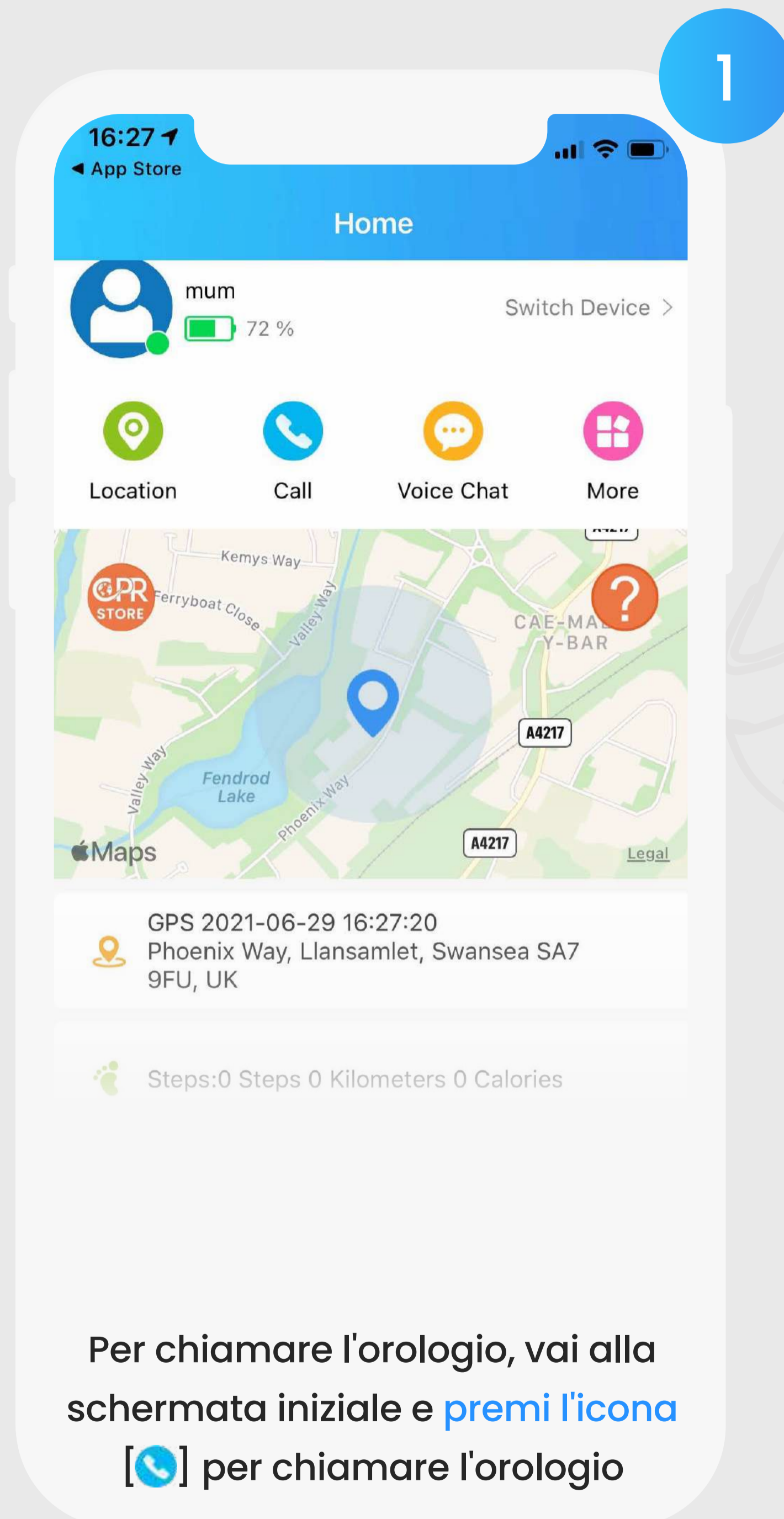

Utilizzo dell'app Guardian


2.3 Misurare la frequenza cardiaca di chi lo indossa

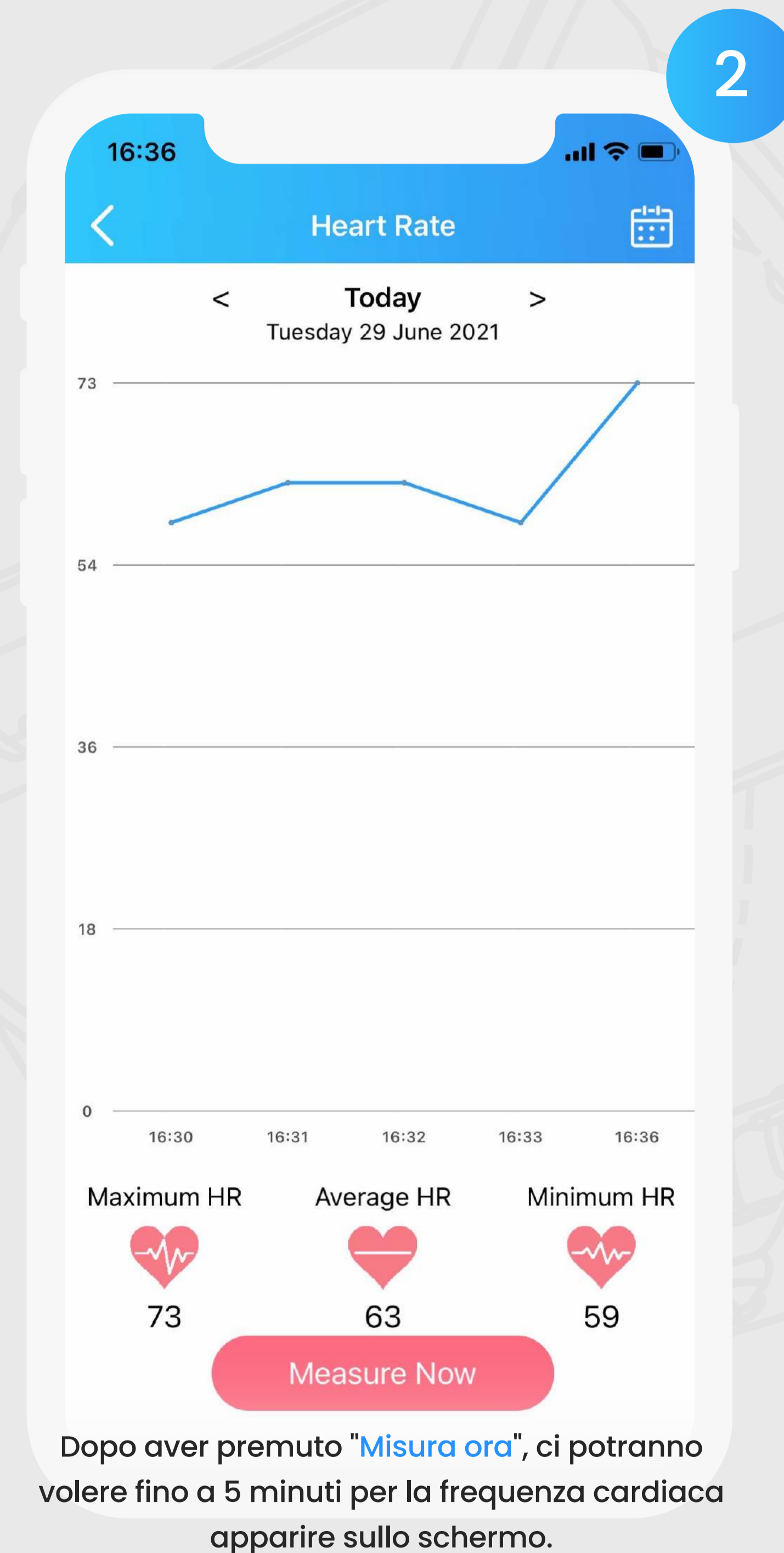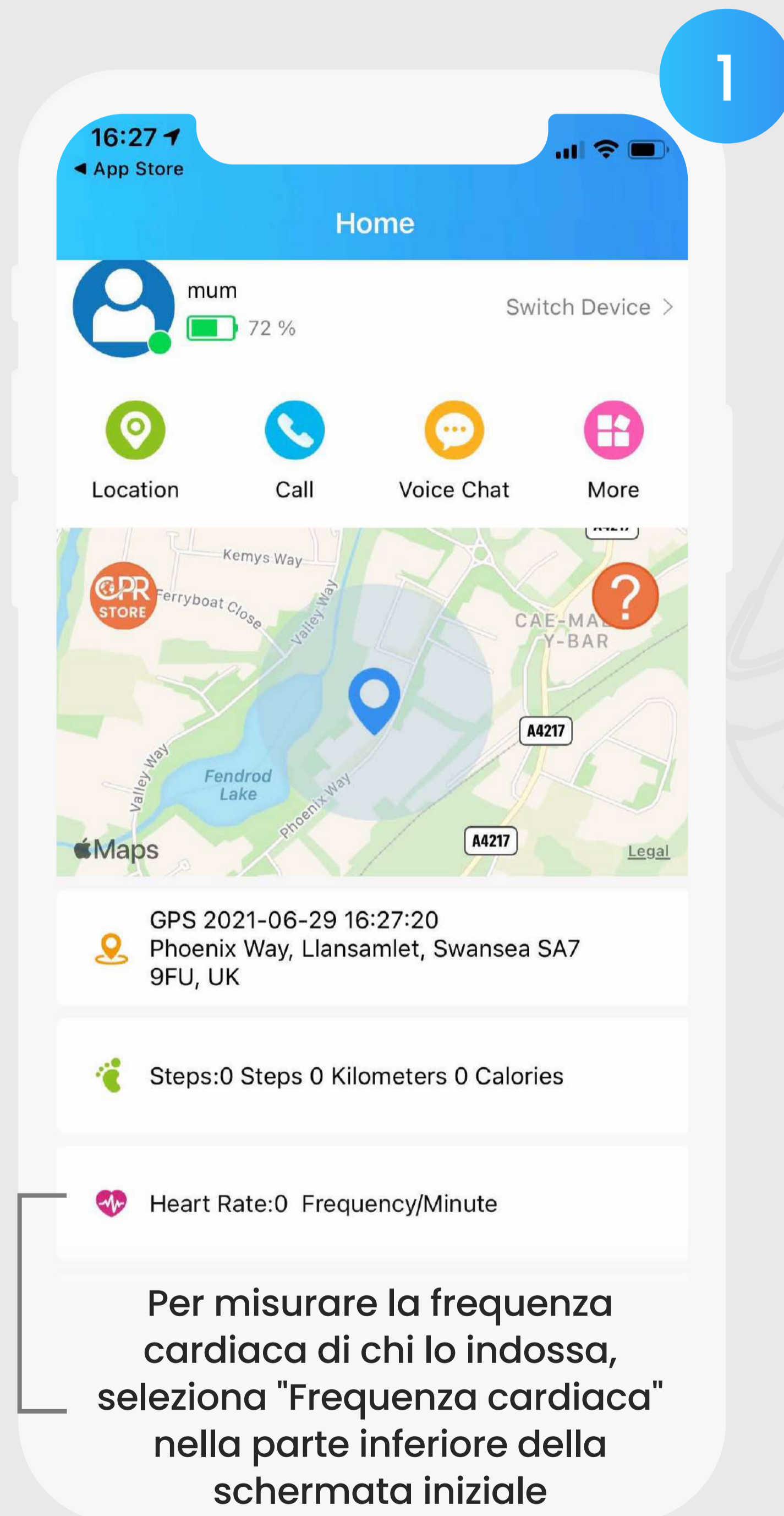

Utilizzo dell'app Guardian

2.4 localizzare chi lo indossa

1

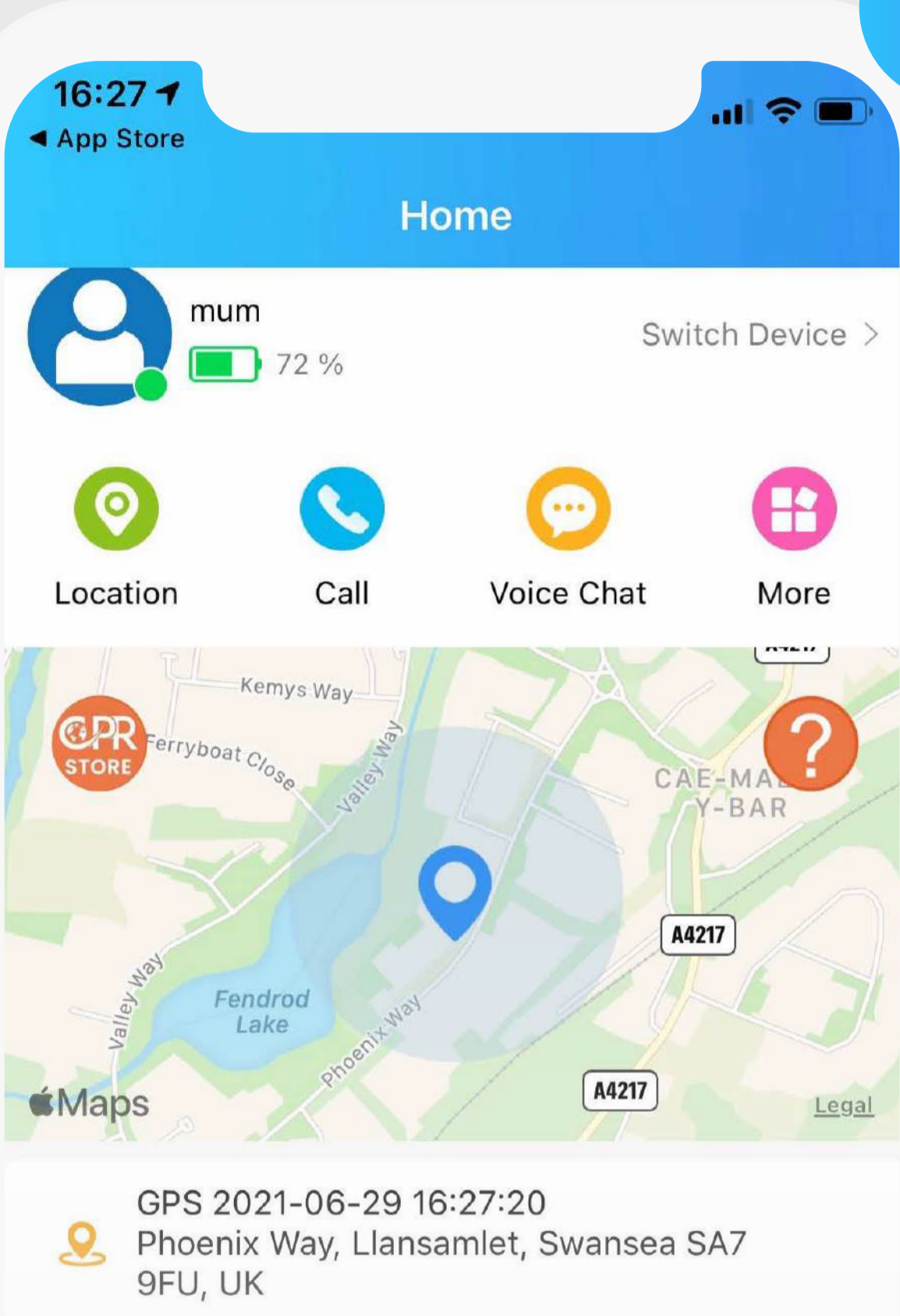

16:27
App Store

Home

mum 72 % Switch Device >


Location Call Voice Chat More

GPS 2021-06-29 16:27:20
Phoenix Way, Llansamlet, Swansea SA7 9FU, UK

Steps:0 Steps 0 Kilometers 0 Calories

Per localizzare chi lo indossa, inizia premendo l'icona [📍] nella schermata iniziale dell'app

2

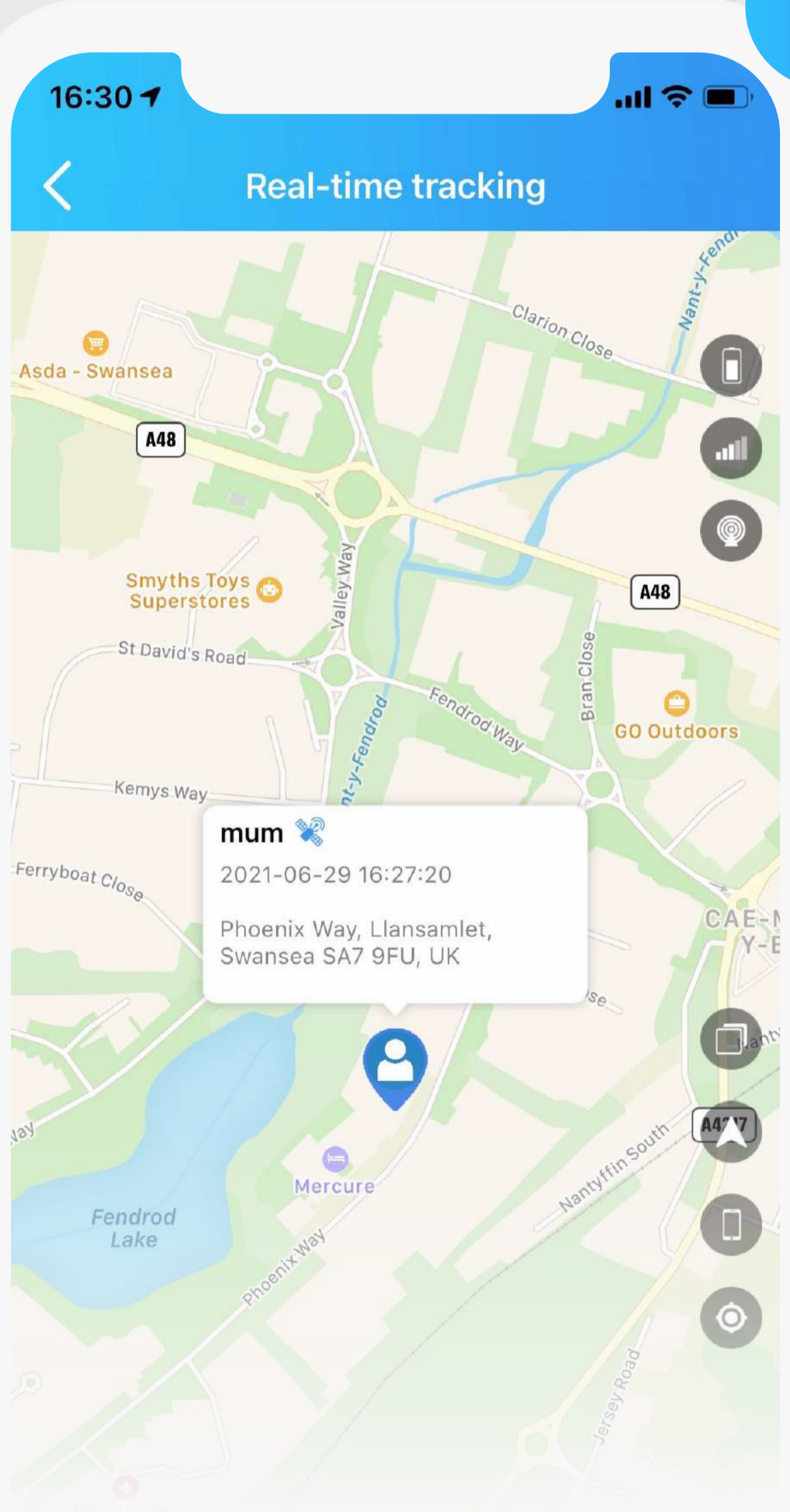

16:30

Real-time tracking

mum
2021-06-29 16:27:20
Phoenix Way, Llansamlet, Swansea SA7 9FU, UK

In tempo reale l'app individuerà la posizione di chi lo indossa

Utilizzo dell'app Guardian

2.5 Impostare gli obiettivi del contapassi

1

Home

mum 72 % Switch Device >

Location Call Voice Chat More

GPS 2021-06-29 16:27:20
Phoenix Way, Llansamlet, Swansea SA7 9FU, UK

Steps:0 Steps 0 Kilometers 0 Calories

Heart Rate:0 Frequency/Minute

Body temp:0°C,Environment temp:0°C

Inizia **premendo l'icona** [More] nella schermata iniziale dell'app

2

Command list

- Add SOS/Phonebook Contacts >
- Working Mode >
- Heart Rate Measurement >
- Set Alarm Clock >
- Pedometer Goals >
- Route Playback >
- Geo-fence >
- Restart Watch >

Seleziona Obiettivi del contapassi dall'elenco delle opzioni

3

Pedometer Goals

10000




Tip: set up your daily pedometer goals

Apply

Inserisci il numero di passi che vorresti raggiungere giornalmente



Utilizzo dell'app Guardian

2.6 Aggiungi un altro orologio all'app

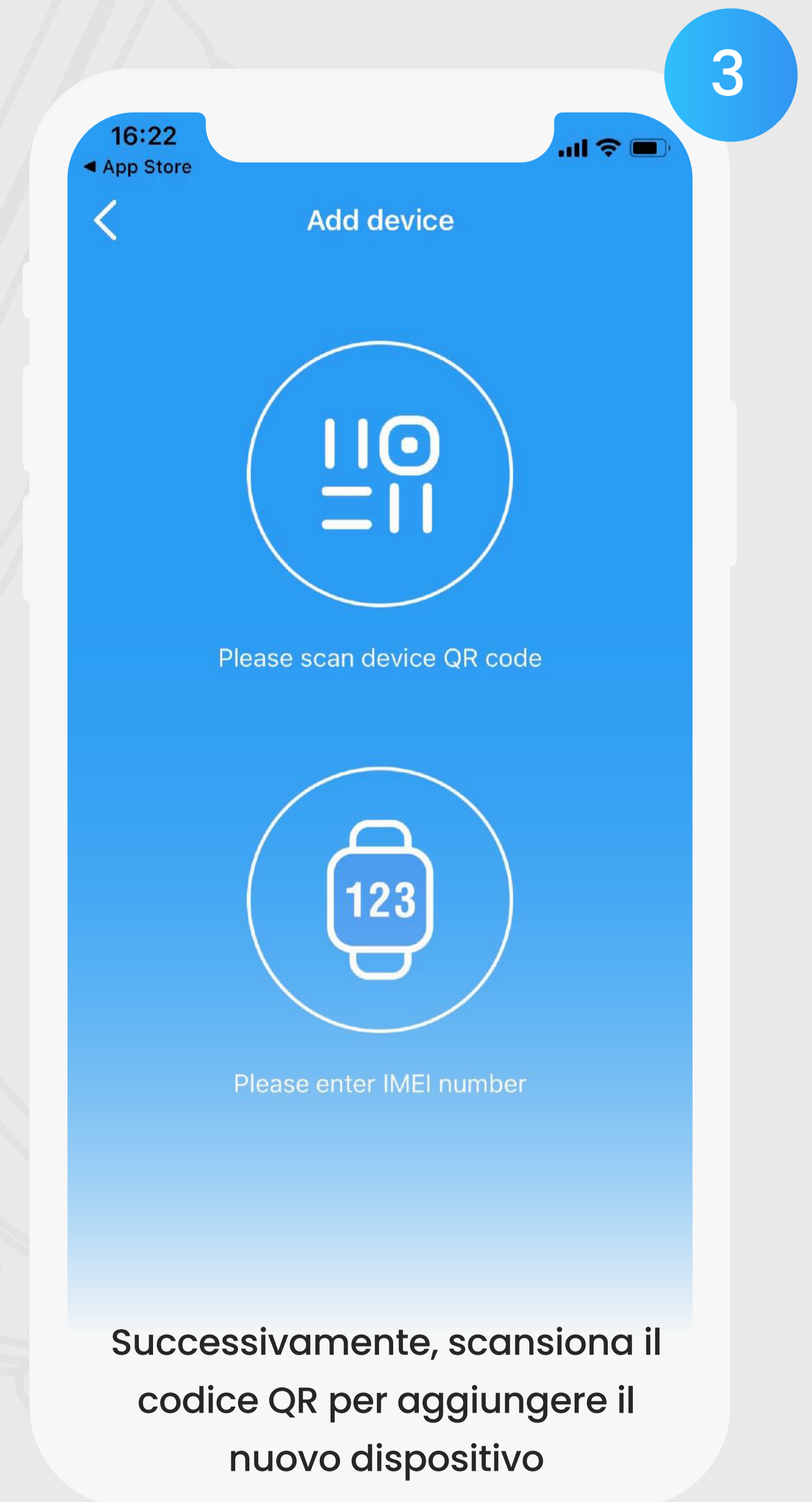
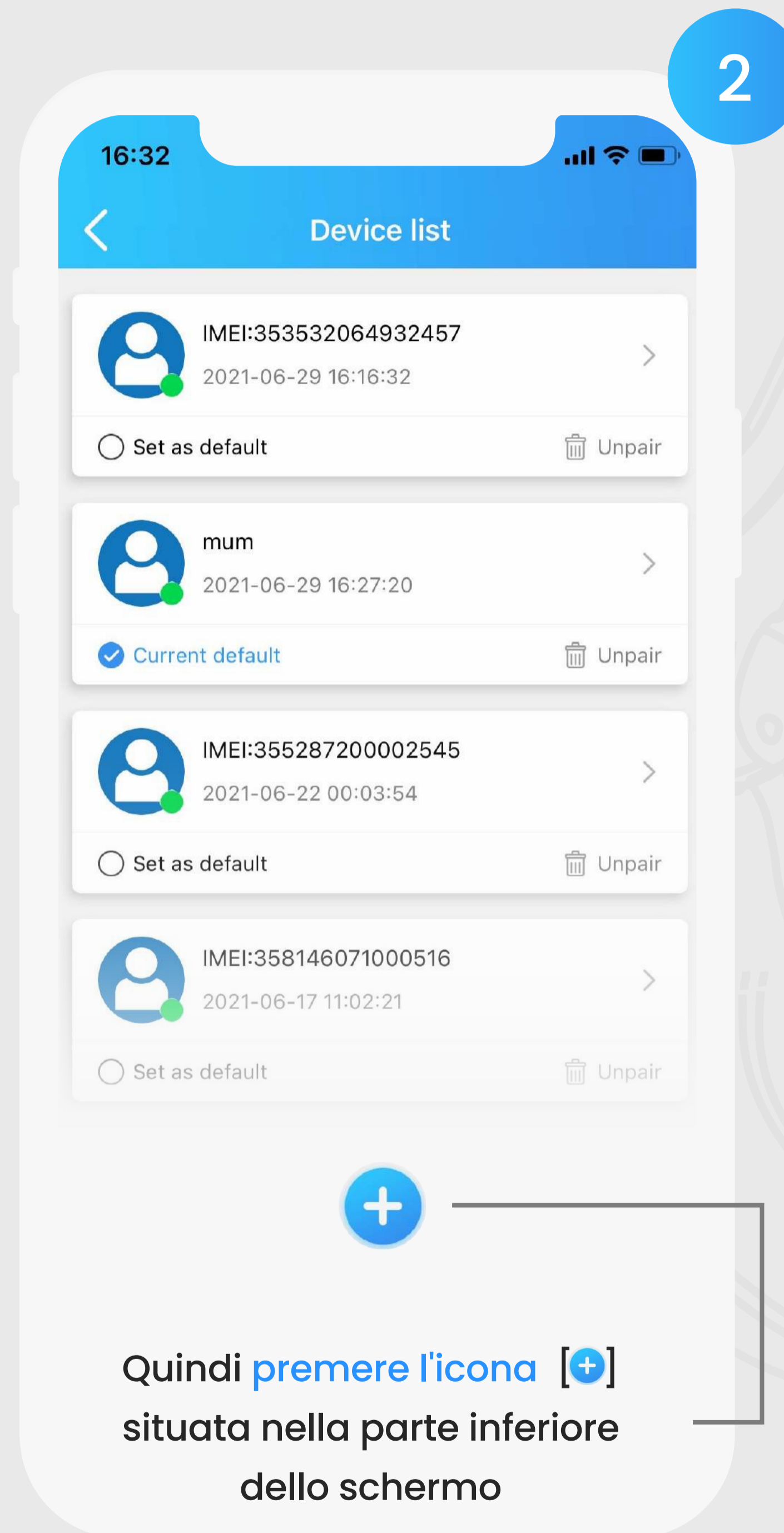
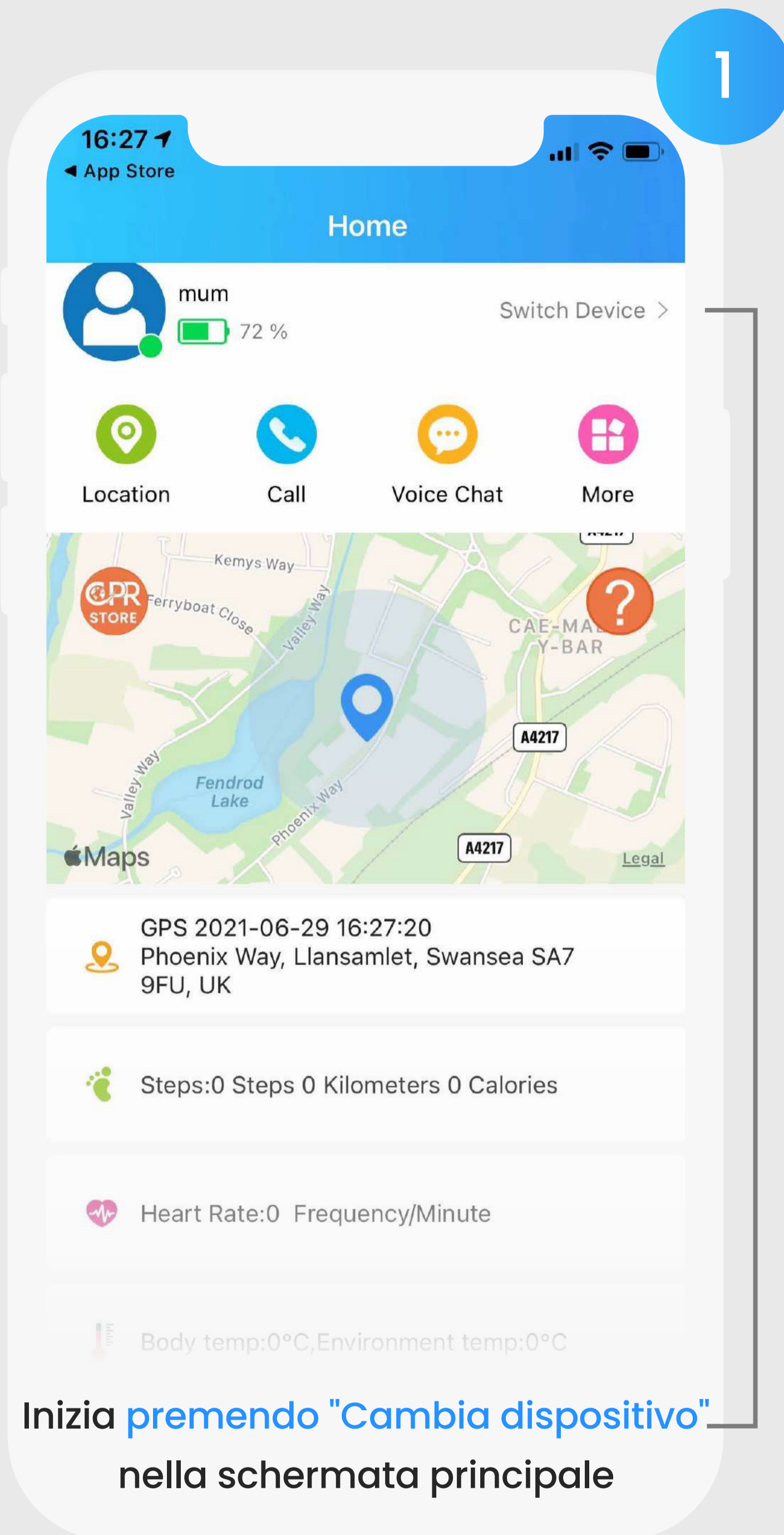


Utilizzo dell'app Guardian



2.6 Disconnetti l'orologio dall'app

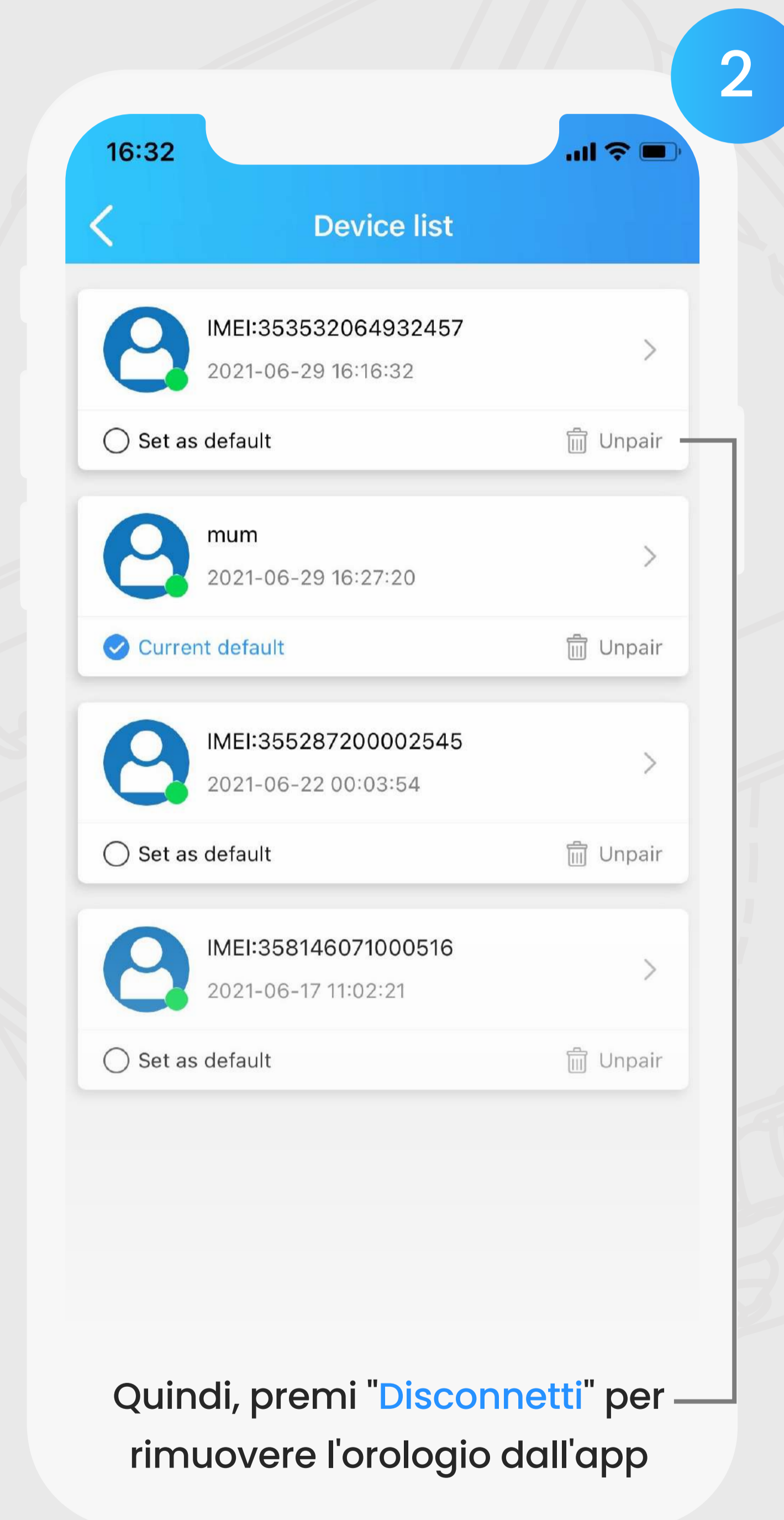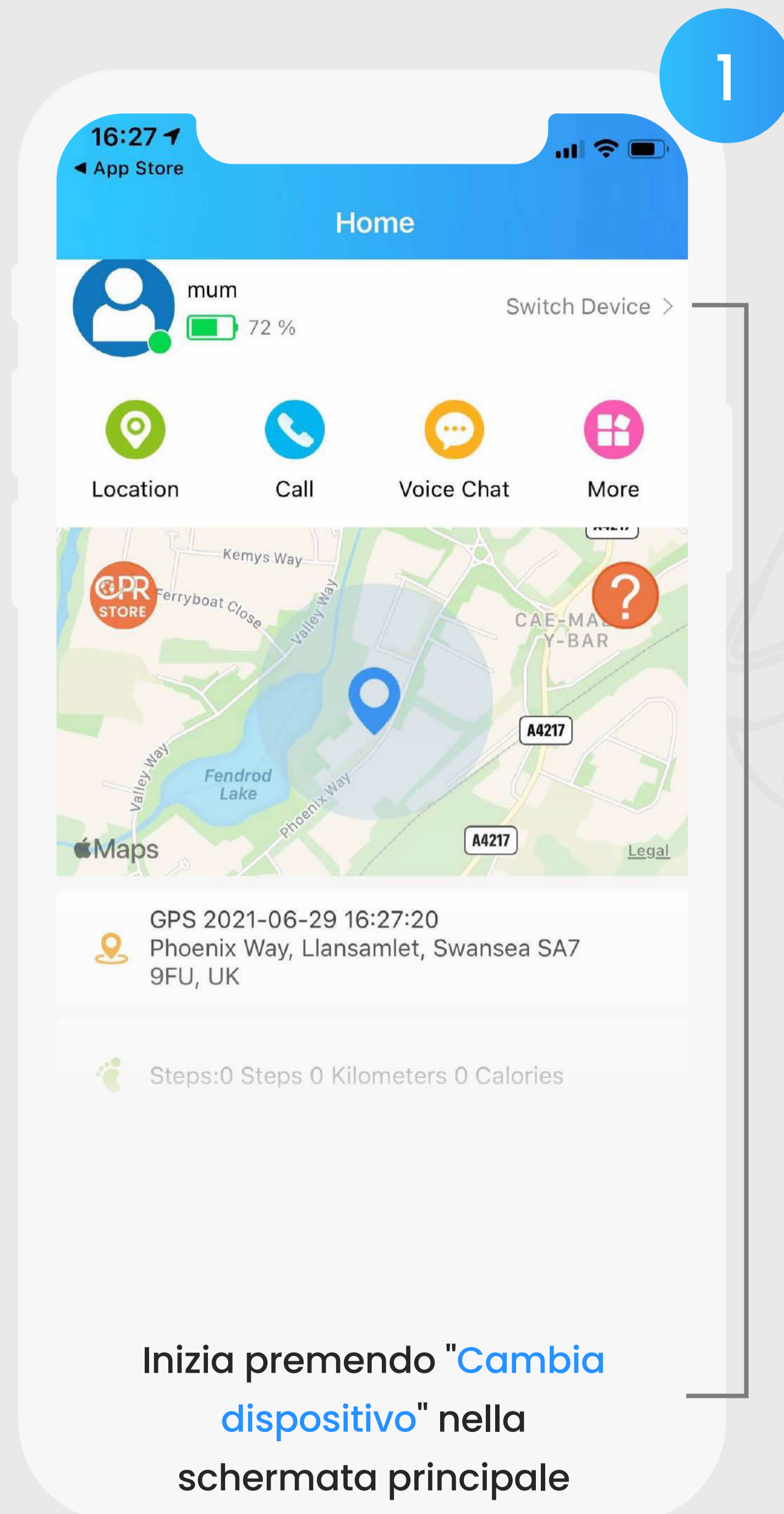



Rilevamento Caduta

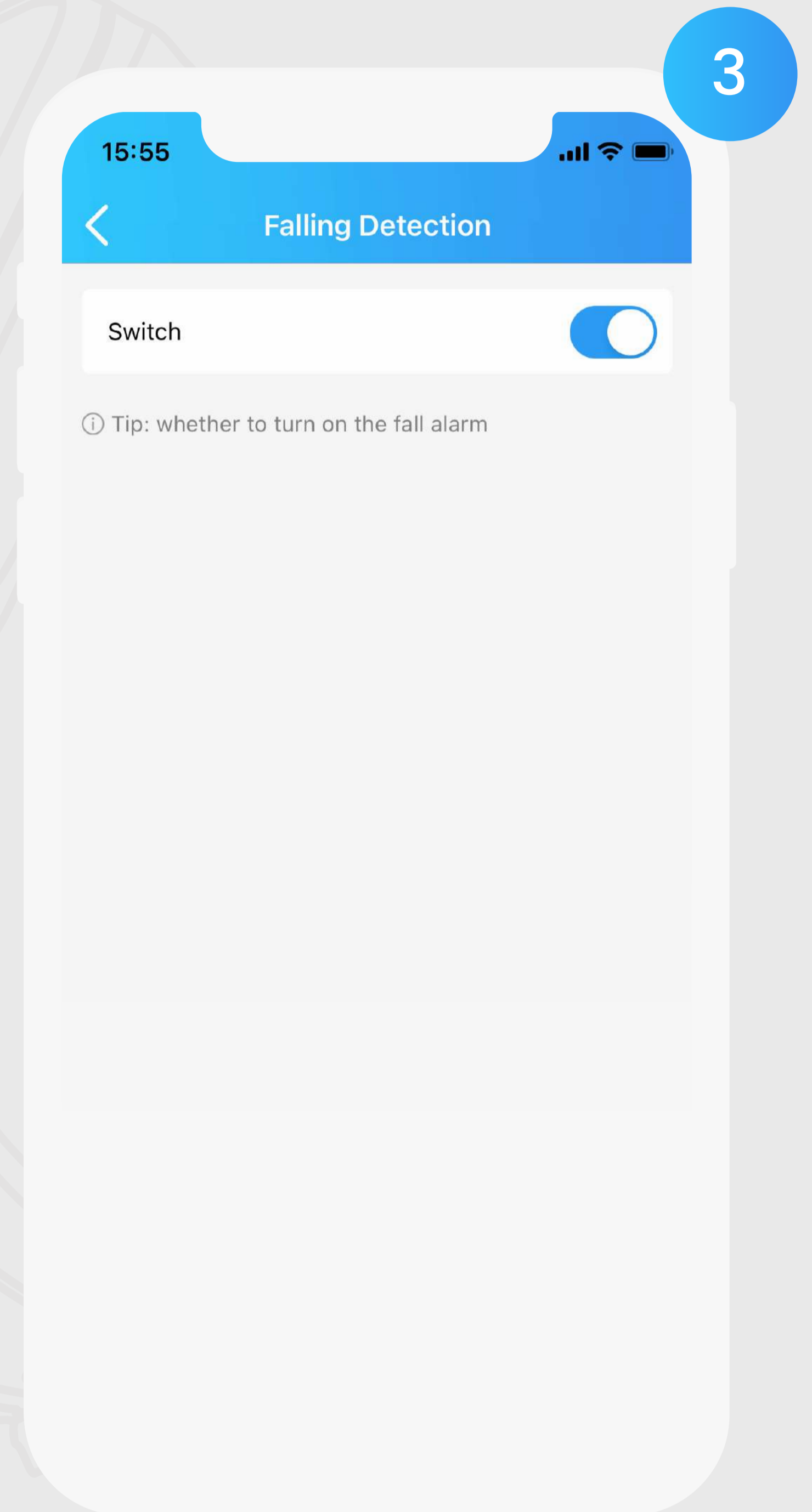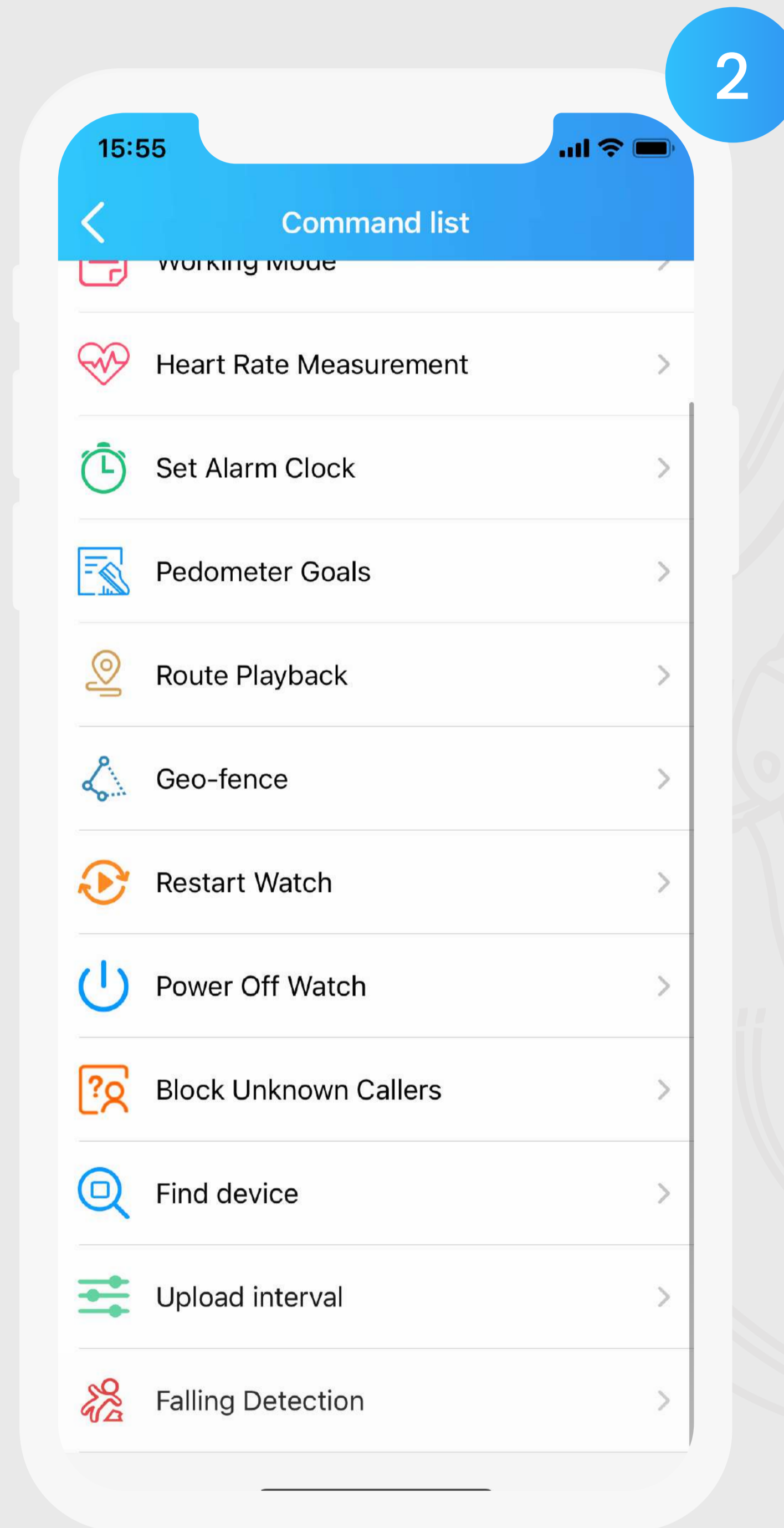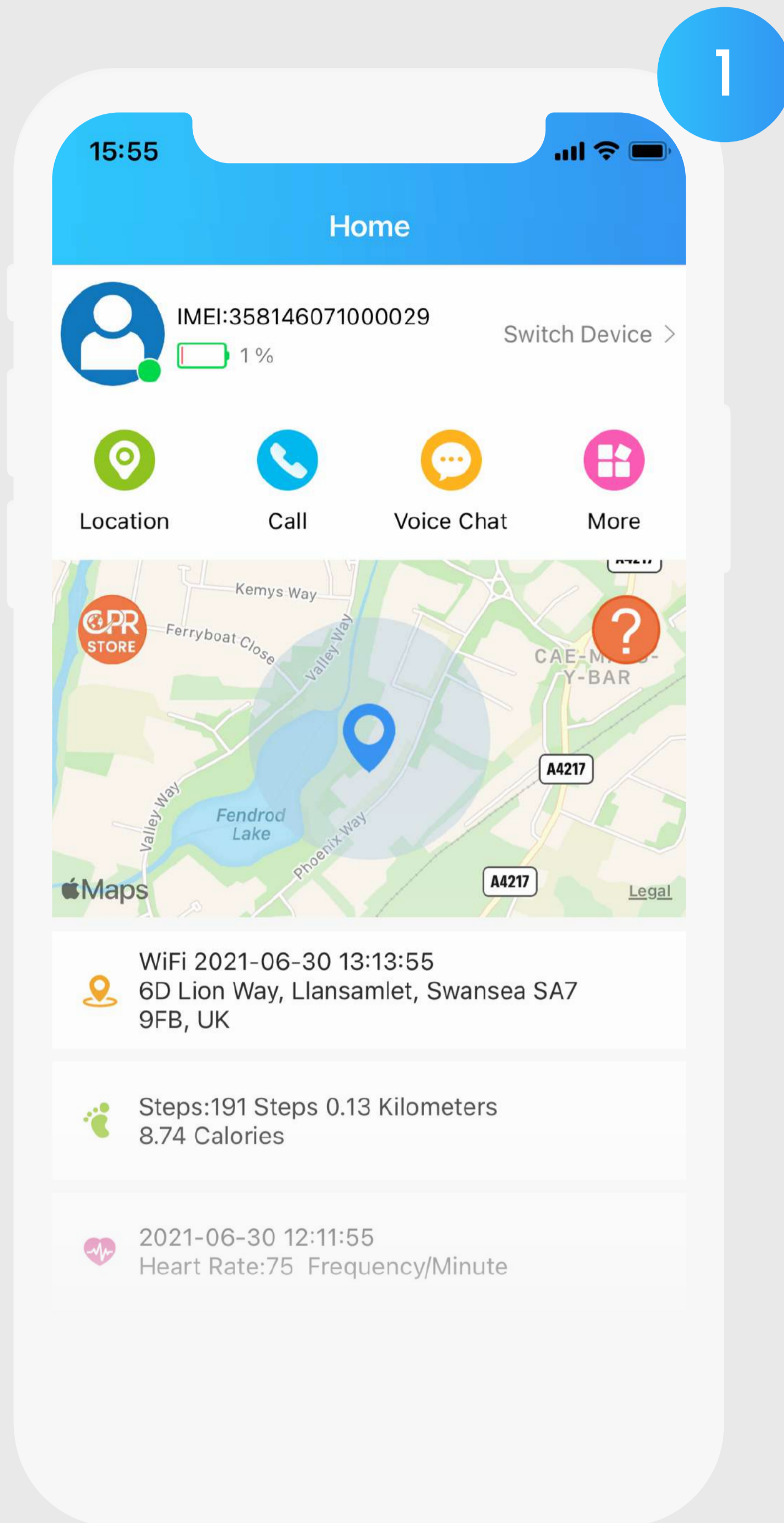

Zone di Sicurezza

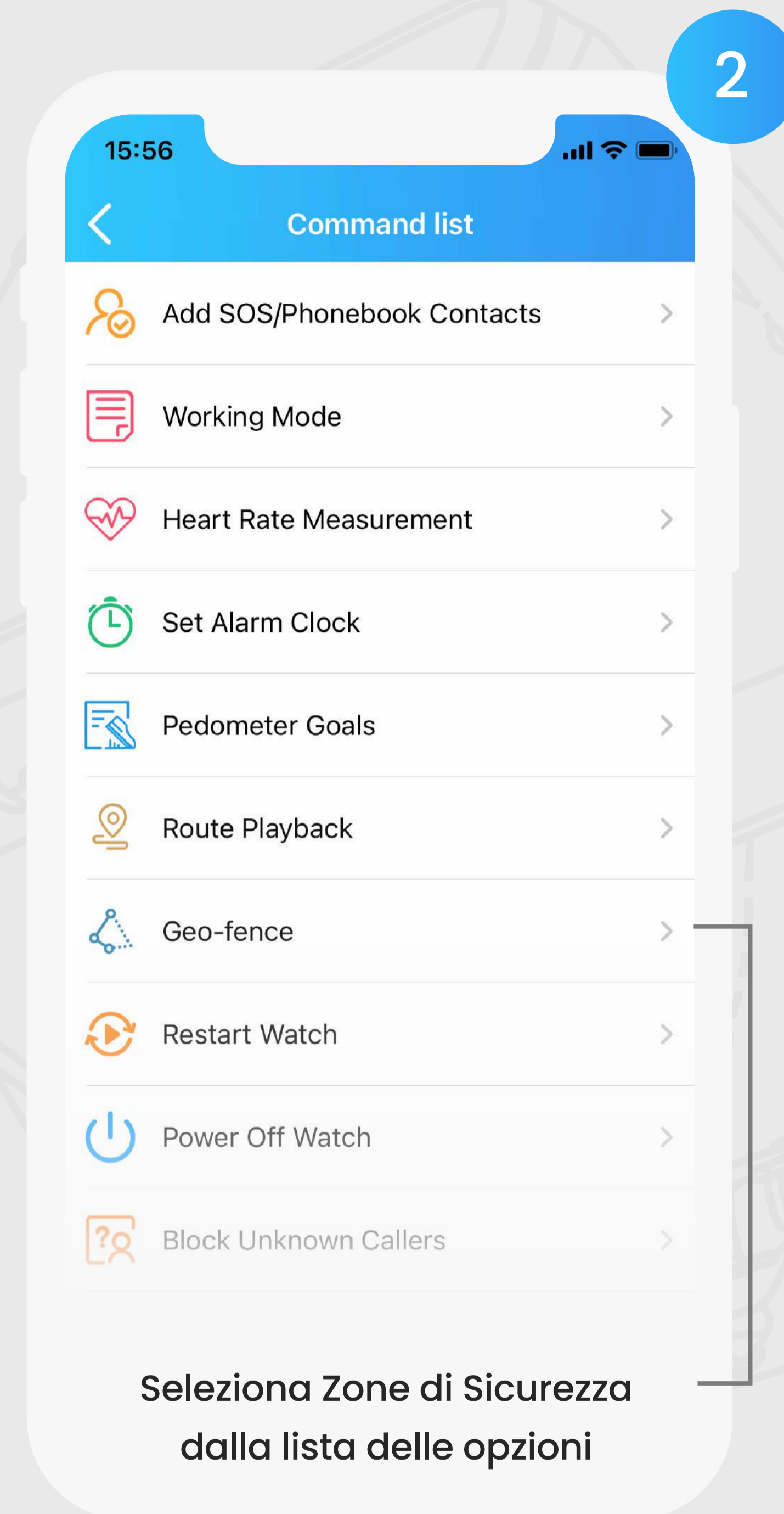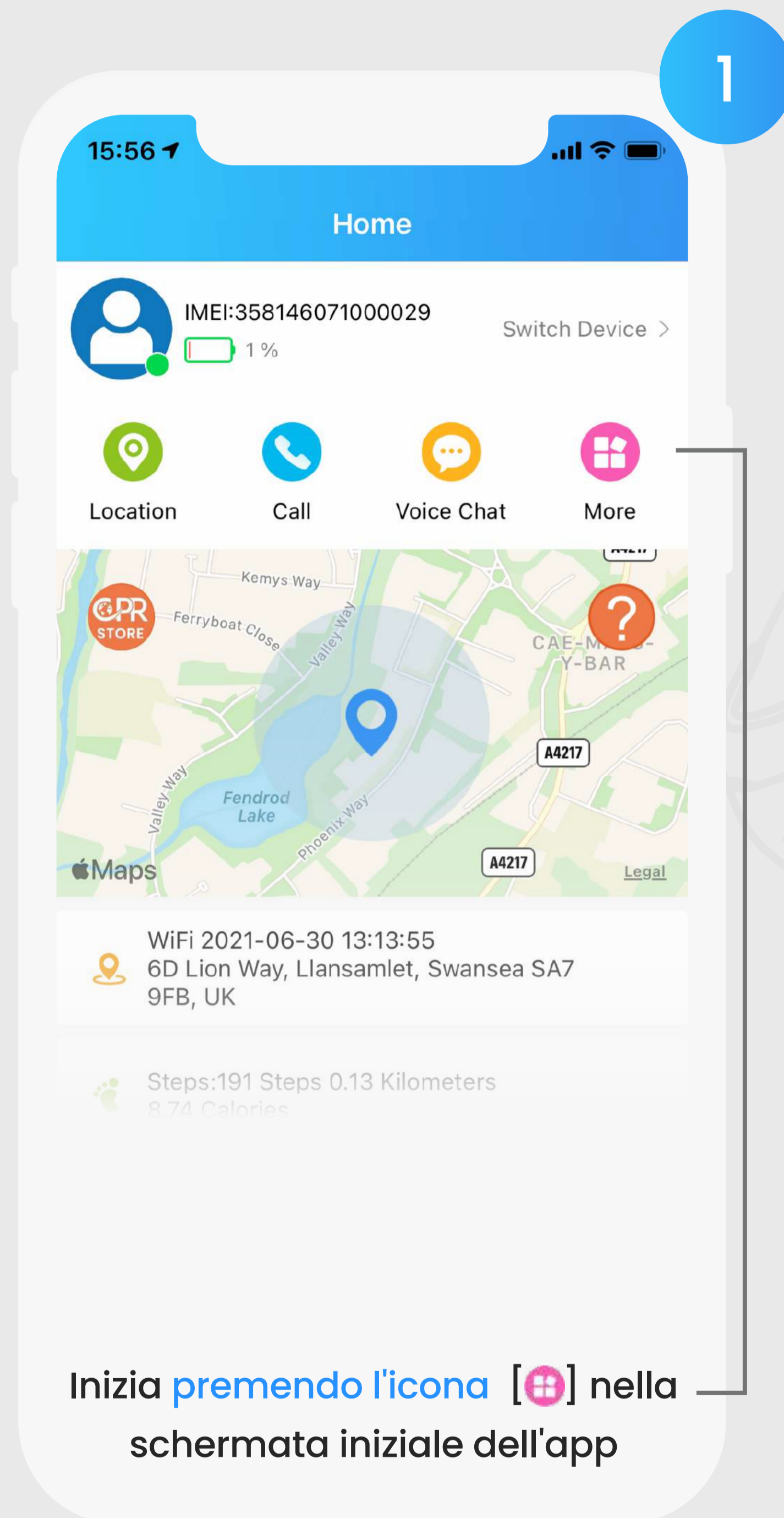

Zone di Sicurezza

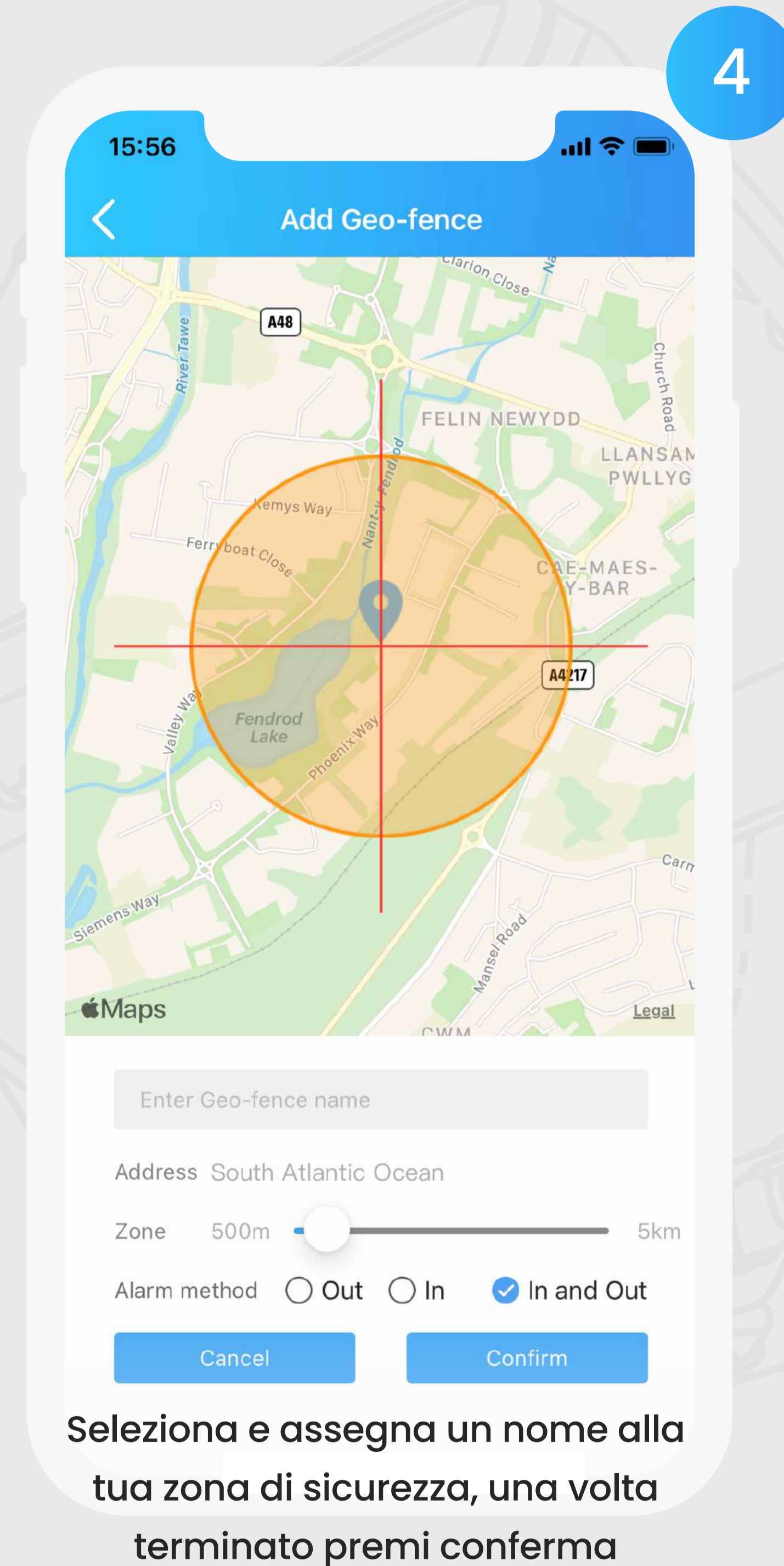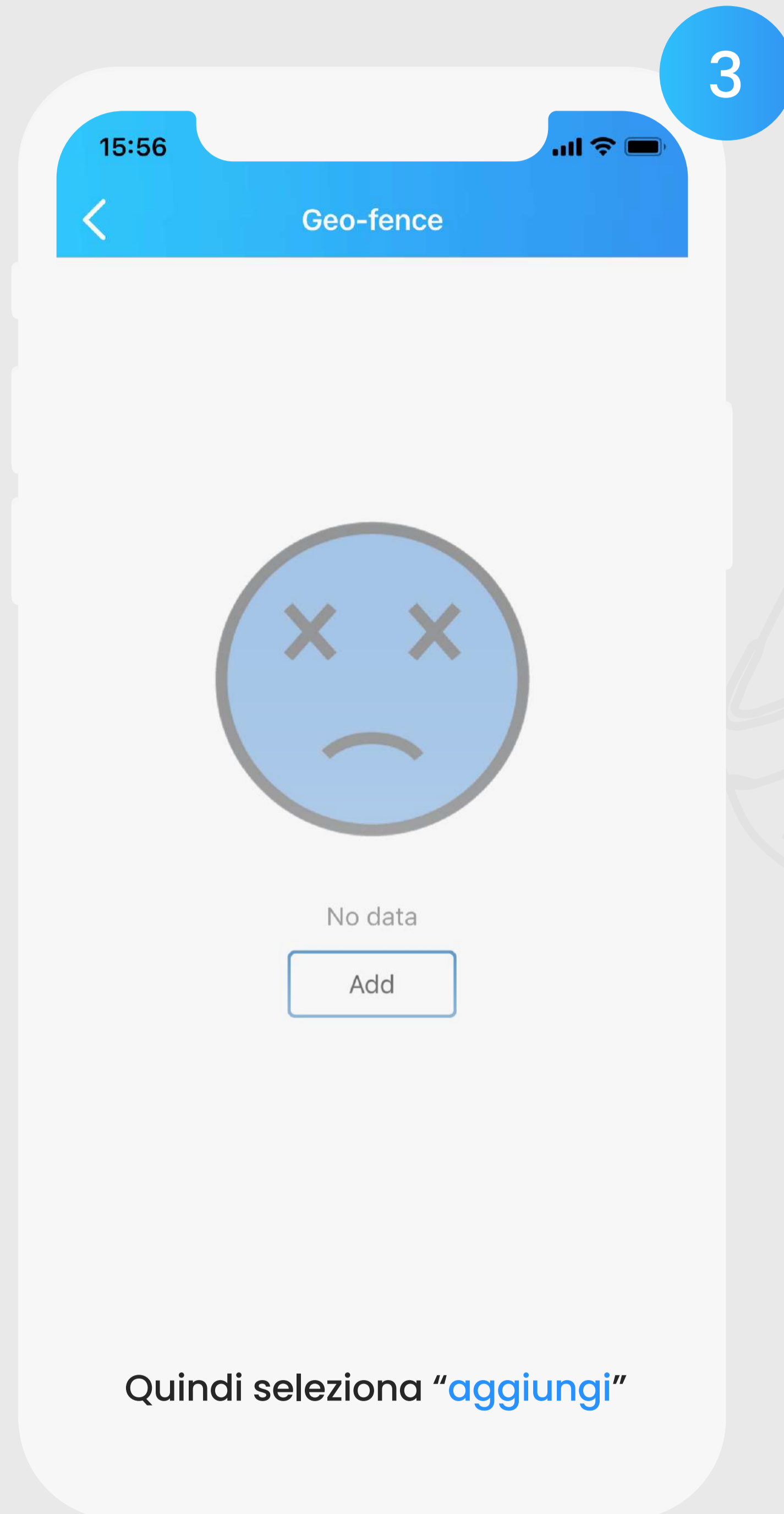

Da automatico a manuale

1

15:55

Home

IMEI:358146071000029 Switch Device >

1 %

Location Call Voice Chat More

WiFi 2021-06-30 13:13:55
6D Lion Way, Llansamlet, Swansea SA7 9FB, UK

Steps:191 Steps 0.13 Kilometers
8.74 Calories

2021-06-30 12:11:55
Heart Rate:75 Frequency/Minute

Inizia premendo l'icona [More] nella schermata iniziale dell'app

2

15:57

Command list

- Add SOS/Phonebook Contacts >
- Working Mode >
- Heart Rate Measurement >
- Set Alarm Clock >
- Pedometer Goals >
- Route Playback >
- Geo-fence >
- Restart Watch >
- Power Off Watch >
- Block Unknown Callers >
- Find device >
- Unload interval >

3



15:57

Working Mode Save

- Auto Mode ✓
- Manual Mode

Dopo aver selezionato la modalità preferita, premere **Salva**

Riproduzione del percorso

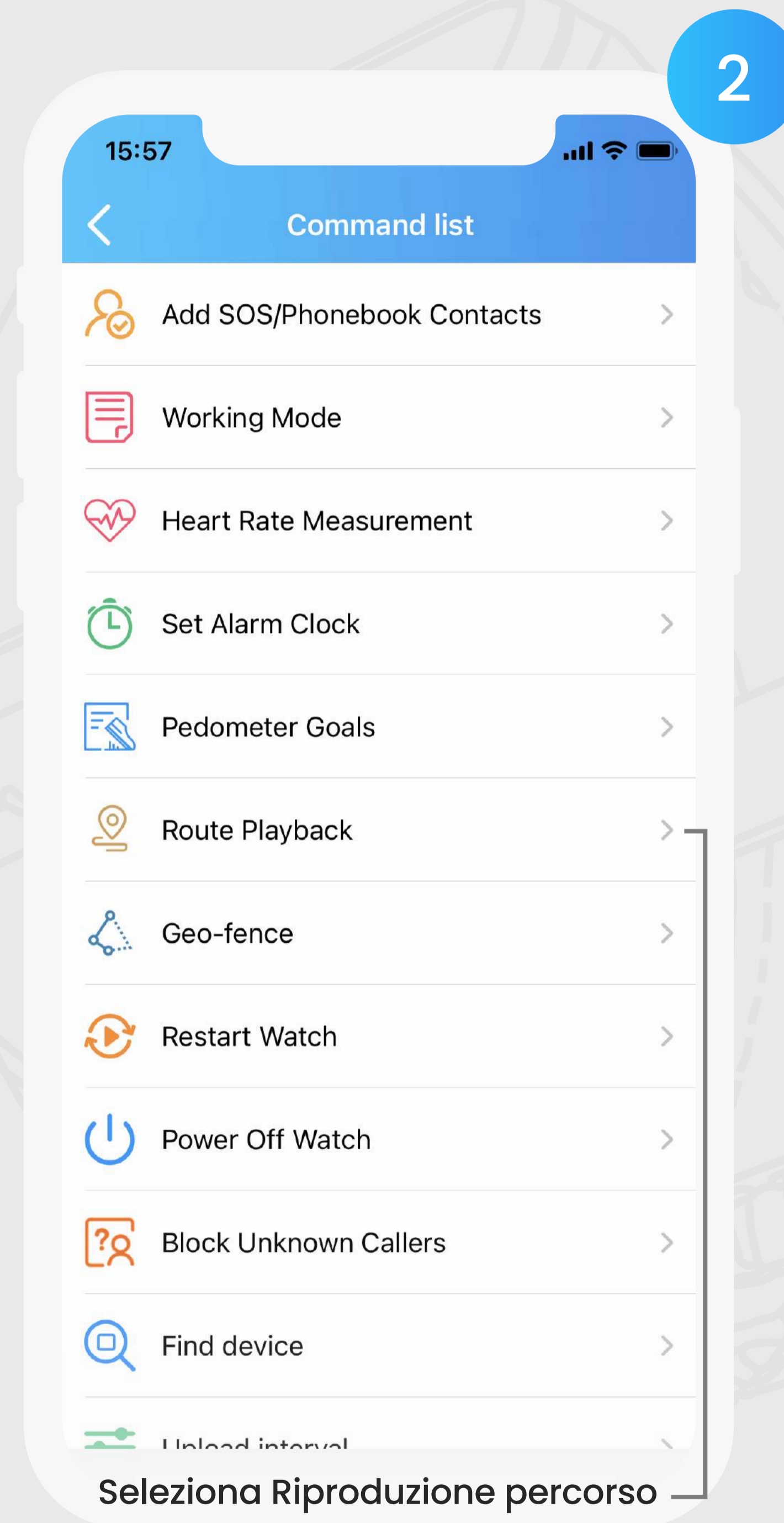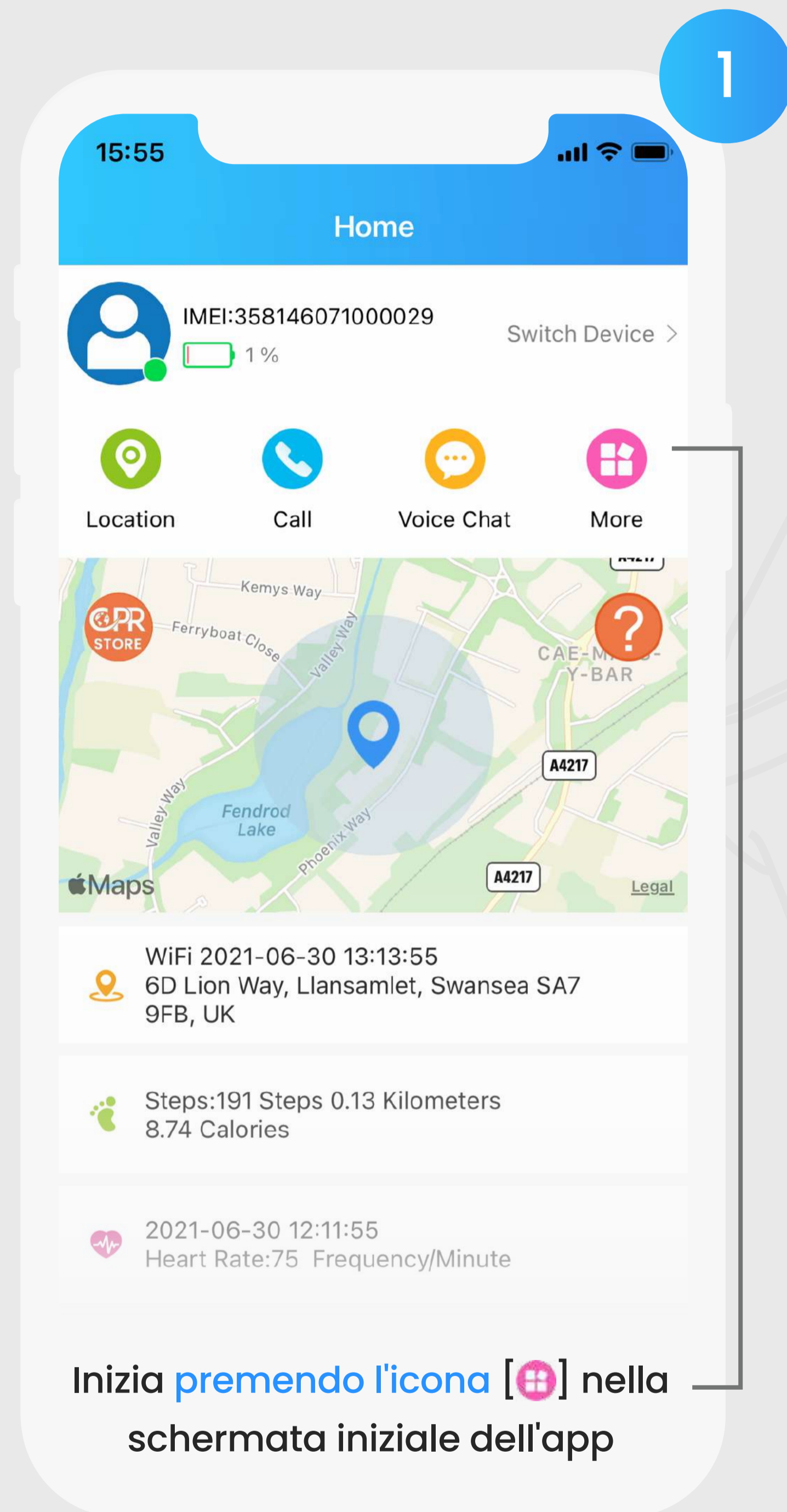

Riproduzione del percorso

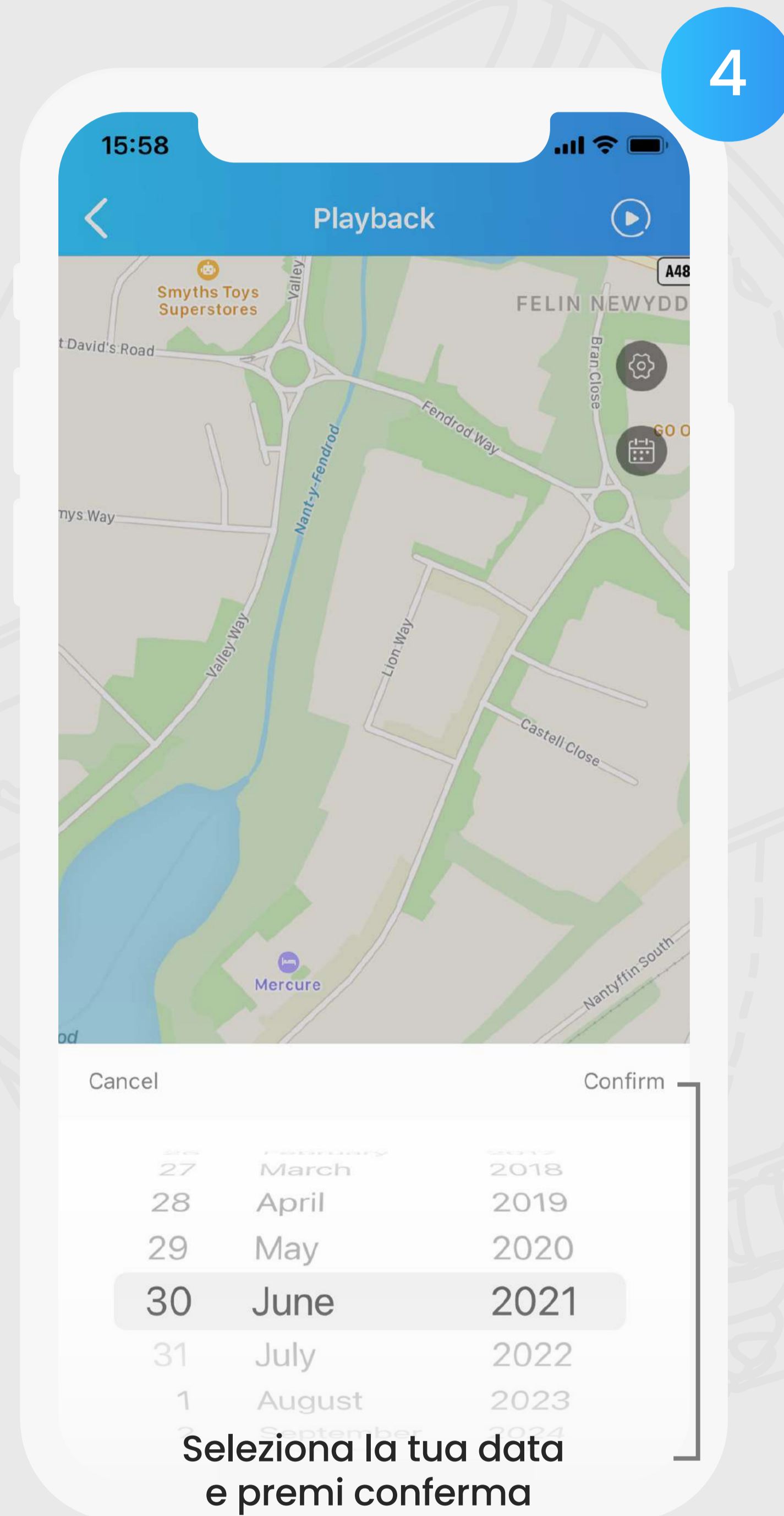
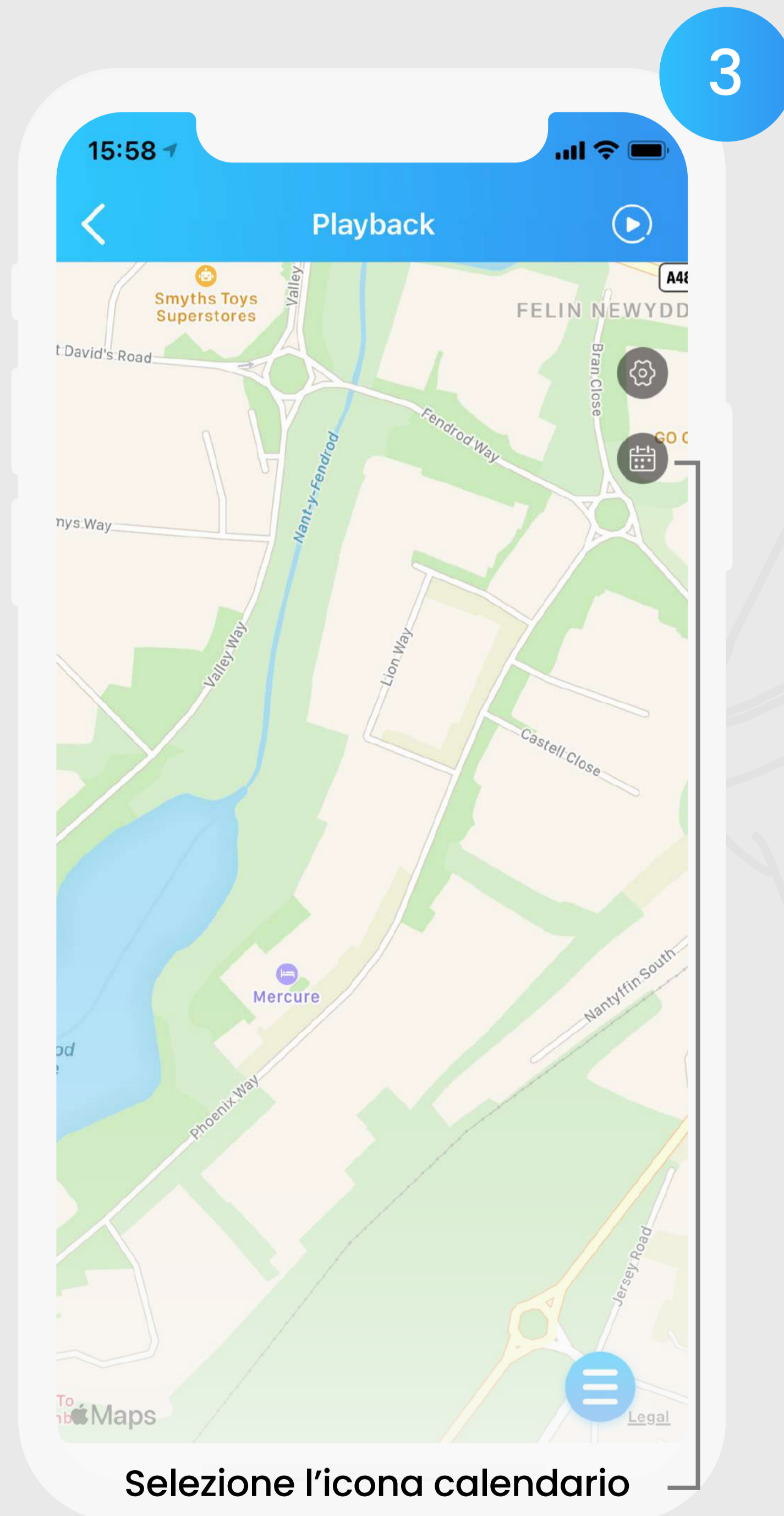


Grafico della frequenza cardiaca




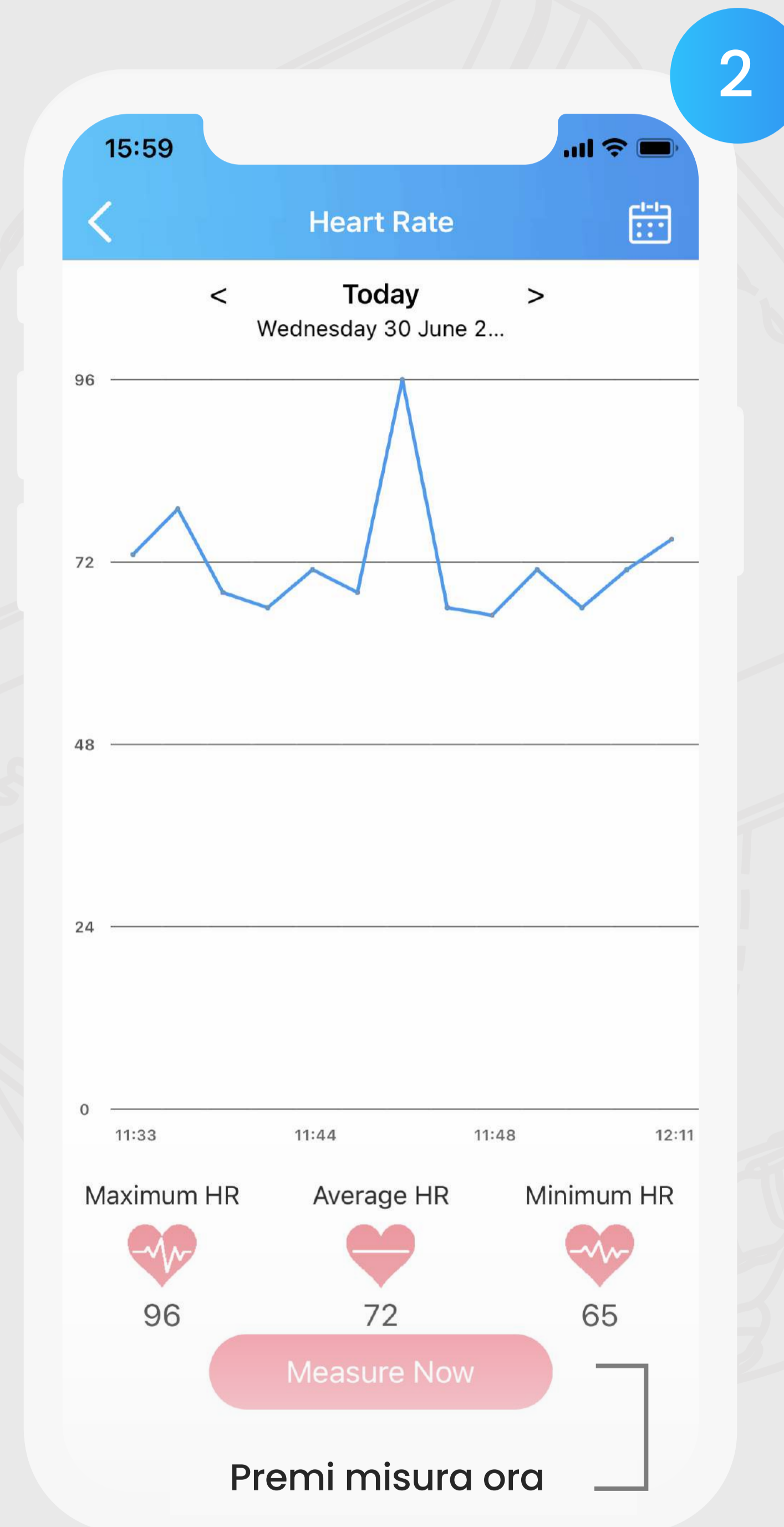


Grafico della temperatura

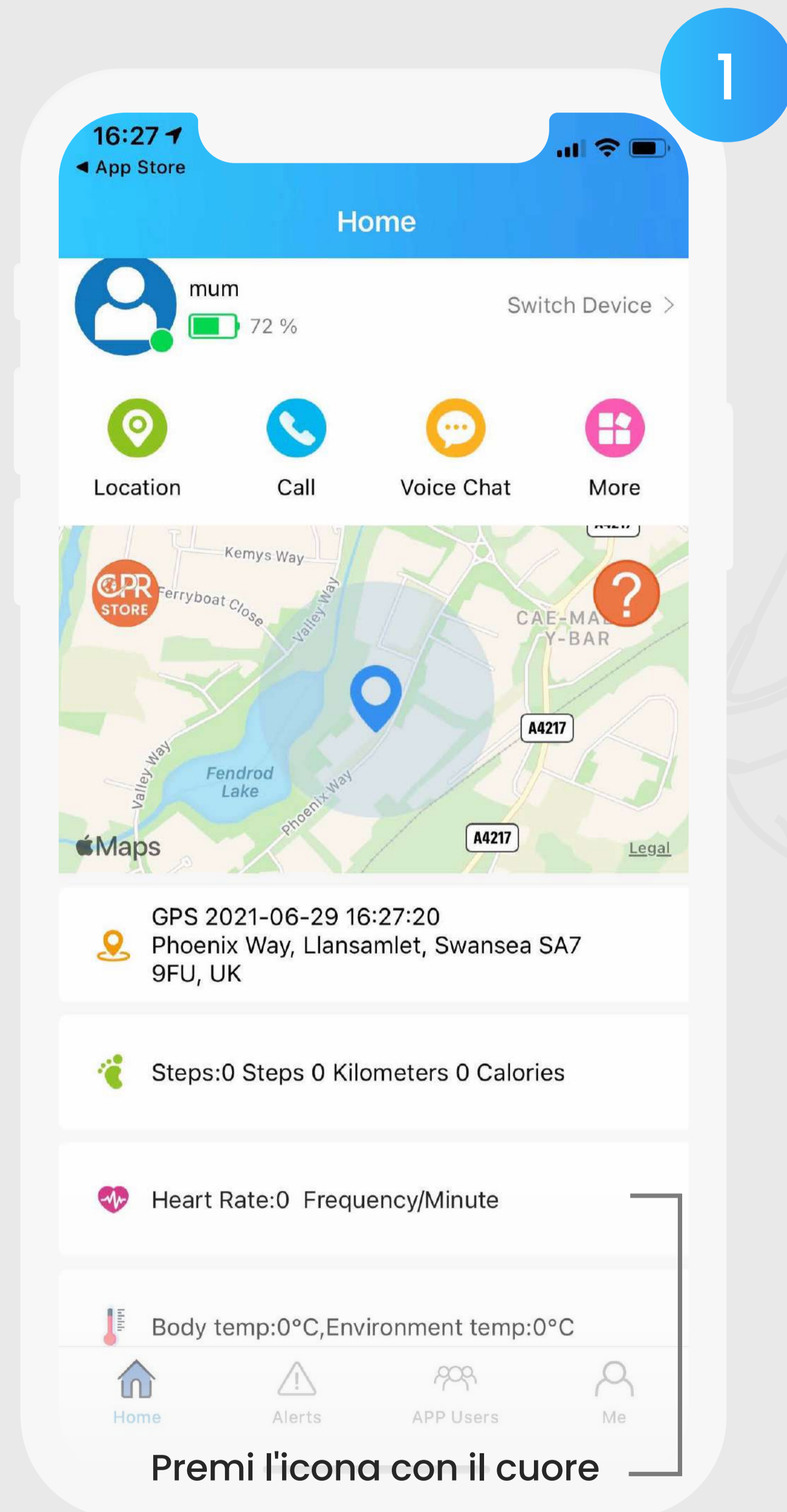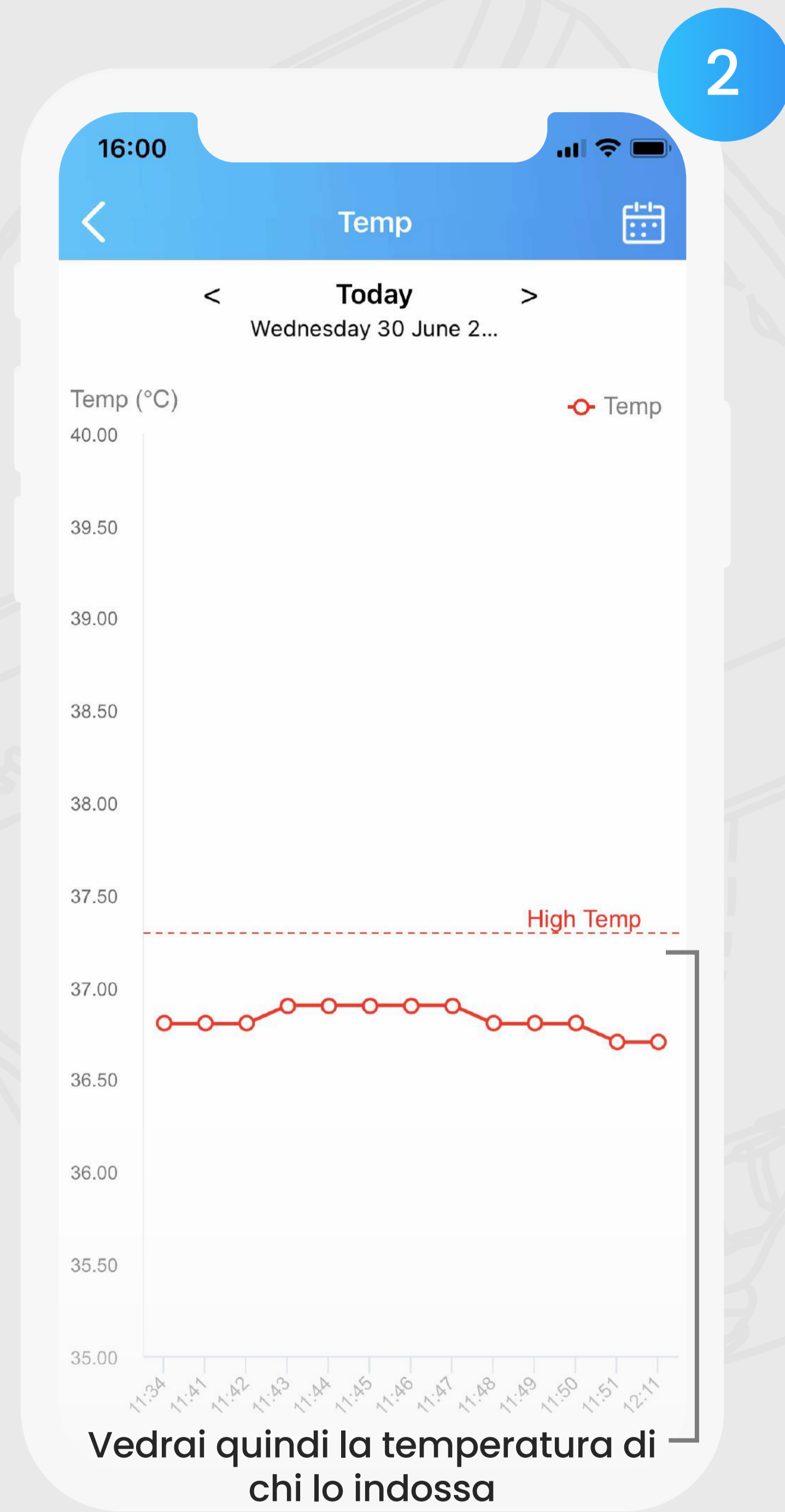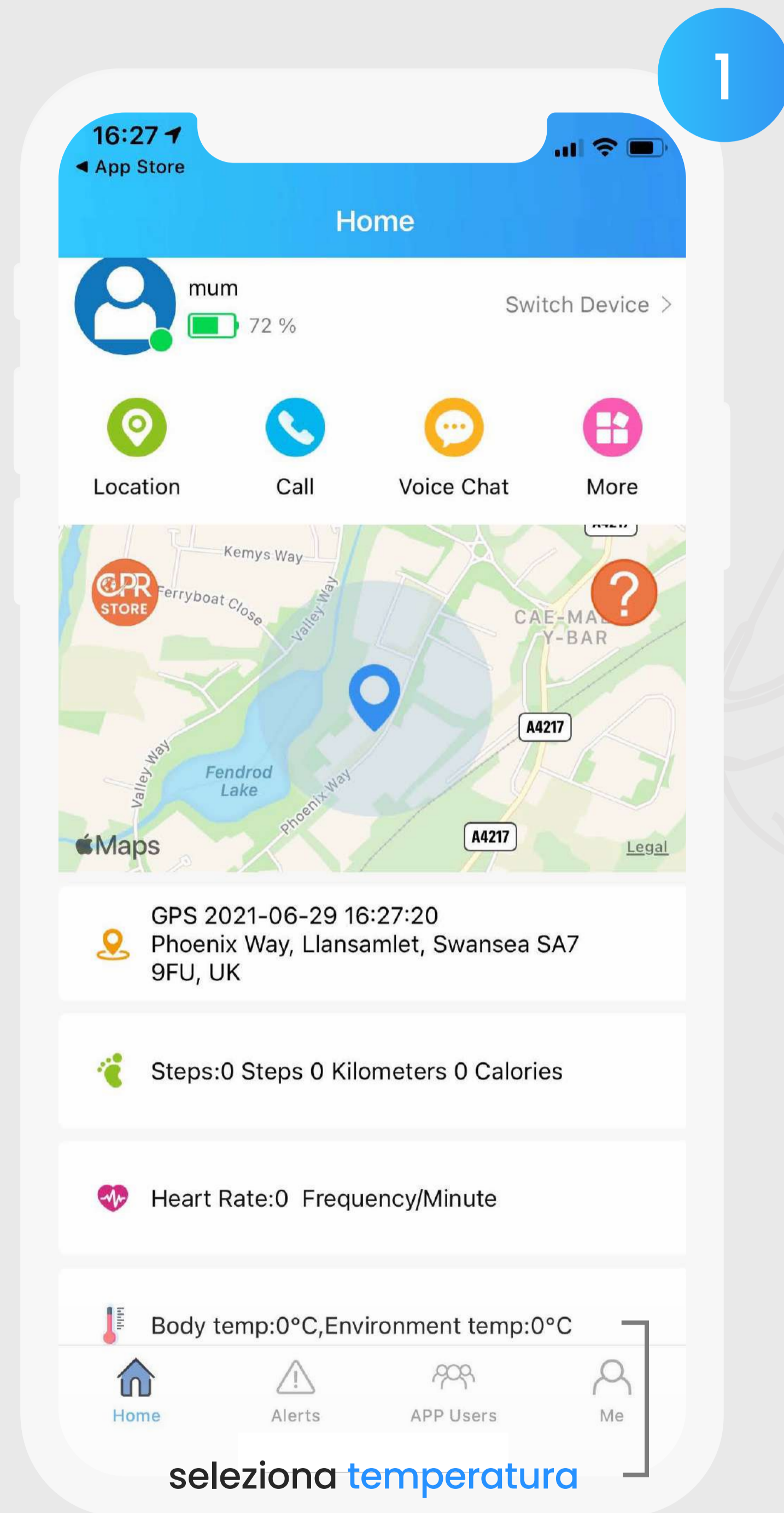

Utilizzo del CPR Guardian

3.1 effettuare una telefonata

1



Per effettuare una chiamata normale, scorri da destra a sinistra sul quadrante

2



Quindi, premi l'icona "Phonebook"

3



Seleziona chi vuoi chiamare e tieni premuto il contatto da chiamare

Utilizzo del CPR Guardian

3.2 fare una chiamata d'emergenza

1

Per effettuare chiamate d'emergenza dall'orologio, tenere premuto il pulsante SOS rosso per 3 secondi



L'orologio inizierà a chiamare ripetutamente i contatti SOS fino a quando la chiamata non verrà risposta.

Utilizzo del CPR Guardian

3.3 mandare un messaggio vocale

1



Per inviare un messaggio vocale, scorri verso destra finché non vedi l'icona "Chat vocale".

2



Quindi, premi l'icona "voice chat"

3



Per registrare il tuo messaggio, tieni premuta l'icona del microfono

Utilizzo del CPR Guardian

3.4 misura il tuo battito cardiaco

1



Per calcolare la frequenza cardiaca, scorri verso destra sul quadrante dell'orologio finché non vedi l'icona della frequenza cardiaca.

2



Attendi fino a 60 secondi per il risultato. Per ripetere il test, tocca di nuovo lo schermo

Utilizzo del CPR Guardian

3.5 Cambia il quadrante dell'orologio



Per cambiare il quadrante dell'orologio, premere la schermata iniziale dell'orologio per 3 secondi



Ripetere il primo passaggio per scorrere i quadranti dell'orologio

Utilizzo del CPR Guardian

3.6 caricare l'orologio

1



Per caricare l'orologio, inserire l'estremità USB in un alimentatore

2



presa per la ricarica

Quindi, collega l'estremità magnetica al retro dell'orologio

Informazioni aggiuntive

2.2 Funzioni e utilizzo

Pulsante SOS Tenere premuto il "pulsante SOS" per 3 secondi, l'orologio aggiornerà automaticamente la posizione GPS e continuerà a comporre i numeri della rubrica fino alla risposta.

Telefonata Effettua una telefonata: entra nella "Rubrica", scegli il contatto preimpostato dell'App e premi per comporre il numero.

Rispondere a una telefonata: quando si riceve una chiamata in arrivo sull'orologio, basta premere l'icona verde sullo schermo dell'orologio per rispondere alla chiamata.

* Solo i numeri di contatto preimpostati nell'app possono effettuare chiamate all'orologio e l'orologio può comporre solo i numeri di contatto mobili preimpostati nella rubrica.

Posizione Accedi all'app per verificare la posizione corrente dell'orologio.

Contapassi Accedere all'interfaccia "Contapassi" dell'orologio e premere il tasto Icona "Contapassi" per controllare Passi/Distanza/Calorie e tutti i dati verranno trasferiti automaticamente all'app.

Frequenza cardiaca Accedere all'interfaccia "Frequenza cardiaca" dell'orologio e premere l'icona per avviare il test della frequenza cardiaca. I dati del test verranno visualizzati sull'orologio dopo che il test è stato completato.

Messaggi Vocali Invia un messaggio vocale: entra nell'interfaccia dell'orologio "Messaggi Vocali", clicca sull'icona del microfono sullo schermo per avviare e registrare il messaggio vocale, quindi invia il messaggio vocale al termine. Ogni messaggio vocale può essere registrato per un massimo di 15 secondi.

> **Accensione** Premere il pulsante di accensione per 3 secondi.

* Se il nuovo orologio non si accende, potrebbe non essere sufficientemente carico, quindi ricaricare l'orologio.

* Se si verifica un problema con il display dell'orologio (ad esempio: Schermo tutto nero), tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per riavviare l'orologio.

> **Spegnimento** Tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per spegnere l'orologio.

* Illumina lo schermo: premi una volta il pulsante di accensione.

* Luce spenta/Blocco schermo: premere una volta il pulsante di accensione (quando non ci sono operazioni sull'orologio, lo schermo si spegne dopo 5 secondi).

> **Cambia i quadranti dell'orologio** Tieni premuto sullo schermo dell'orologio, per accedere e modificare i diversi quadranti.

* Scorri verso sinistra/destra: accedi al menu delle funzioni dell'orologio Rubrica, Battito cardiaco, contapassi, messaggi vocali

* Scorri dall'alto verso il basso: visualizza lo stato dell'orologio come il segnale di connessione alla rete della scheda SIM e durata della batteria.

Informazioni aggiuntive

2.2 Avvertenze e garanzia

Cautions

- III GPS e altre funzioni telefoniche richiedono un credito sulla SIM. III GPS non funziona quando l'orologio è spento o la scheda/rete SIM GSM non ha copertura o è fuori servizio.
- III Guardian III è resistente all'acqua IP67.
- Non permettere ai bambini di masticare o ingerire parti dell'orologio.
- Evitare di utilizzare l'orologio a temperature eccessive.
- L'apertura dell'orologio renderà nulla la garanzia.

Garanzia

Questo prodotto è garantito dal produttore per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. Questa garanzia non copre i difetti derivanti da danni accidentali, uso improprio o usura ed è disponibile solo per l'acquirente originale del prodotto.





GUARDIAN III

Customer Service +44 (0) 800 652 7780

Email Support support@cprguardian.com

Website cprguardian.com



**THE QUEEN'S AWARD
FOR ENTERPRISE:
INTERNATIONAL TRADE
2018/2020**