

# FEMMAX DILATATOREN

---



**Vrouwelijke verzorging  
voor vrouwen van  
alle leeftijden.**

# FEMMAX DILATATOREN

---



# FEMMAX DILATATOREN

---

De dilatatorset bestaat uit 4 dilatatoren met een maatverdeling in diameter en lengte voor een natuurlijke progressie tijdens de behandeling. De 4 dilatatoren worden opgeslagen door ze in elkaar te schuiven en in de bijbehorende behuizing te plaatsen.

Een etui beschermt de dilatatoren en biedt ook ruimte voor een klein flesje met lubricant. Gefabriceerd van duurzaam, hoogwaardig materiaal. Het wordt aanbevolen dat het product voor slechts één gebruiker is en moet worden vervangen als het op de een of andere manier wordt bekrast of beschadigd.

Geleverd met volledige gebruiksaanwijzing en een gratis cd. De cd biedt de instructies in visueel formaat samen met ontspanningsmuziek, waardoor de gebruiker een geschikte omgeving voor het gebruik van de dilatator kan creëren om de fysieke en psychologische voordelen van de behandeling te maximaliseren.

De FEMMAX® dilatator is een innovatie ontwikkeld door klinische professionals binnen de National Health Service om een kosteneffectief product te bieden, waar voor uw geld, stimuleert meer therapievertrouwen en verbetert de behandeling en kwaliteit van leven voor vrouwen van alle leeftijden.


FEMMAX® dilatatoren worden gebruikt om de vagina gezond en soepel te houden en om het risico op verklevingen (fusie van zacht weefsel) na radiotherapie of chirurgie te verminderen. Dit kan helpen om ongemak te verminderen tijdens vervolgonderzoeken, verdere behandelingen en geslachtsgemeenschap.

# FEMMAX DILATATOREN

---

- Na klinische behandelingen waarvan bekend is dat ze verklevingen (fusie van zacht weefsel) in de vagina veroorzaken, zoals interne en externe bekken- en vaginale hysterectomie of radiotherapie.
- Om spasmen / klemmen te verminderen en om vaginale spieren opnieuw te trainen (bijvoorbeeld in geval van vaginisme, dyspareunie of na een bevalling).
- Om te helpen bij het overwinnen van psychologisch trauma geassocieerd met geslachtsgemeenschap.

FEMMAX™ dilatators worden geleverd als een set van 4 dilatators die worden bewaard door ze in elkaar te schuiven en in de bijbehorende behuizing te plaatsen. Om de behuizing te openen, drukt u op het vlakke gedeelte aan de voorkant van de behuizing. De twee kleinste dilatators worden aan elkaar vastgeschroefd om een dilatator met dubbel uiteinde te worden. De twee grootste dilatators passen ook samen om een paar te vormen. Eén dilatator wordt in de vagina ingebracht en de andere wordt een handvat om ondersteuning en stabiliteit te bieden tijdens het inbrengen.

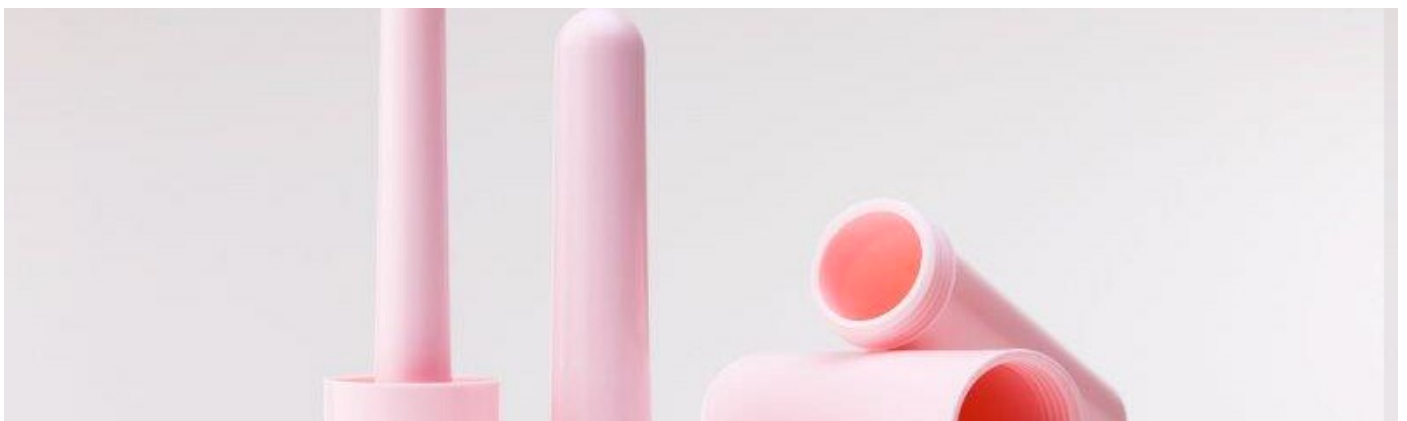

# FEMMAX DILATATOREN

---

Volledige instructies voor gebruik zijn bij het product geleverd. Het is erg belangrijk dat gebruikers vóór gebruik deze instructies raadplegen.

De uitlijning begint met de dilatator met de kleinste maat en neemt geleidelijk, in de loop van de tijd, in omvang toe. Het is belangrijk om de vagina uit te rekken om haar gezond en soepel te houden en de gebruiker moet ernaar streven om uiteindelijk de grootste dilatator te gebruiken die voor haar comfortabel is.

Een kleine hoeveelheid vaginaal glijmiddel moet, vóór het inbrengen, op het uiteinde van de dilatator worden aangebracht. De dilatator wordt voorzichtig en zo diep mogelijk in de vagina gestoken zodat de gebruiker de bovenkant van de vagina kan voelen zonder ongemak te veroorzaken.

De dilatator wordt stevig vastgehouden en bewogen in kleine cirkelvormige (slijp) bewegingen. Sommige patiënten kunnen worden geadviseerd om de dilatator stevig op hun plaats te houden gedurende een bepaalde periode of kunnen worden geadviseerd om de dilatator in te brengen, te verwijderen en opnieuw in te brengen, waarbij dit proces verschillende keren wordt herhaald. De arts of verpleegkundig specialist moet de gebruiker hier volledig over adviseren.

Indien er bij gebruik 'spotting' of lichte bloeding optreden, dan wordt dit als normaal beschouwd vanwege de afbraak van littekenweefsel (verklevingen).

De dilatatoren moeten in het algemeen twee keer per dag worden gebruikt gedurende een periode van zes weken (dwz 's morgens en' s avonds, of wanneer het schikt) en daarna 3 keer per week gedurende 6 maanden of zolang de arts of verpleegkundig specialist het adviseert.