
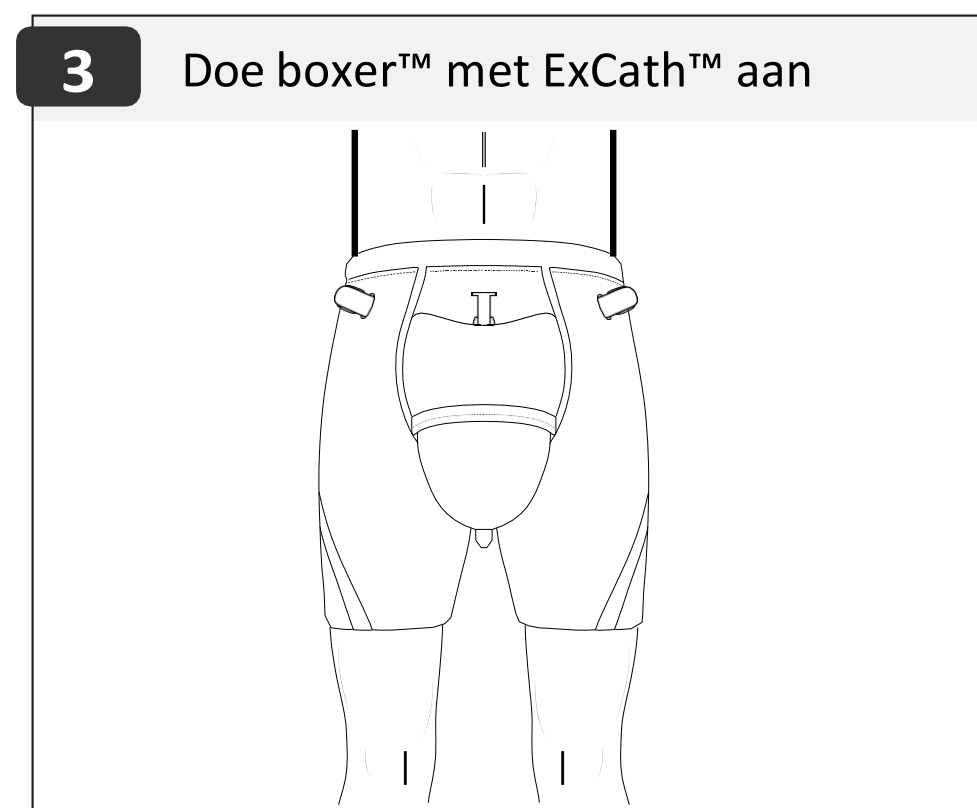
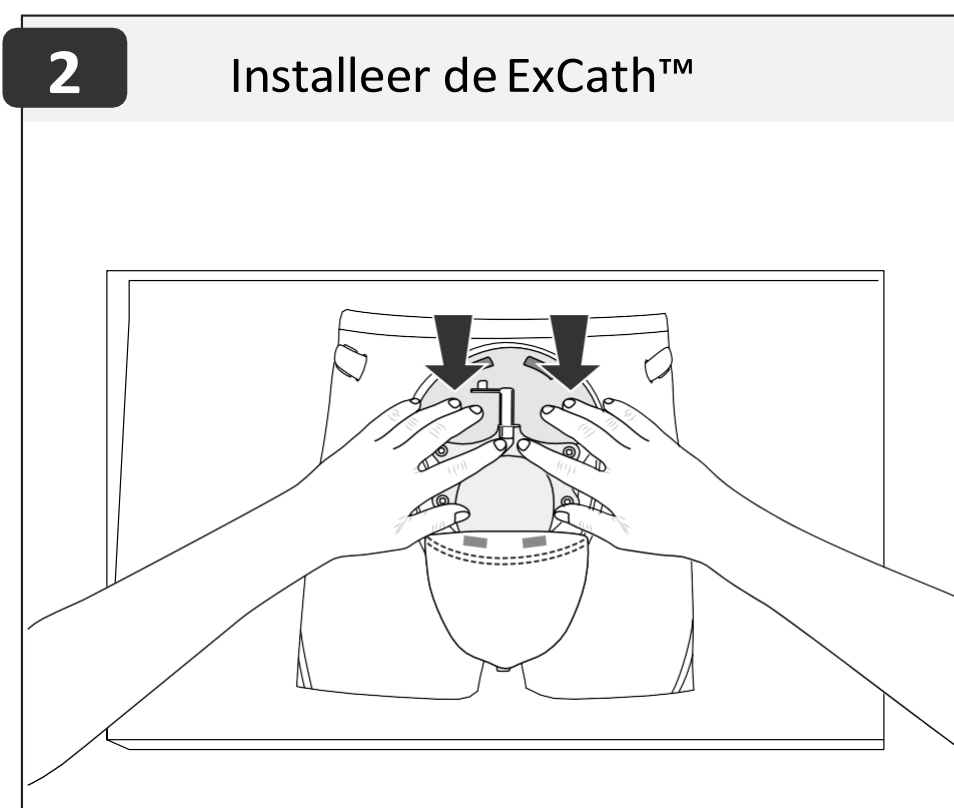
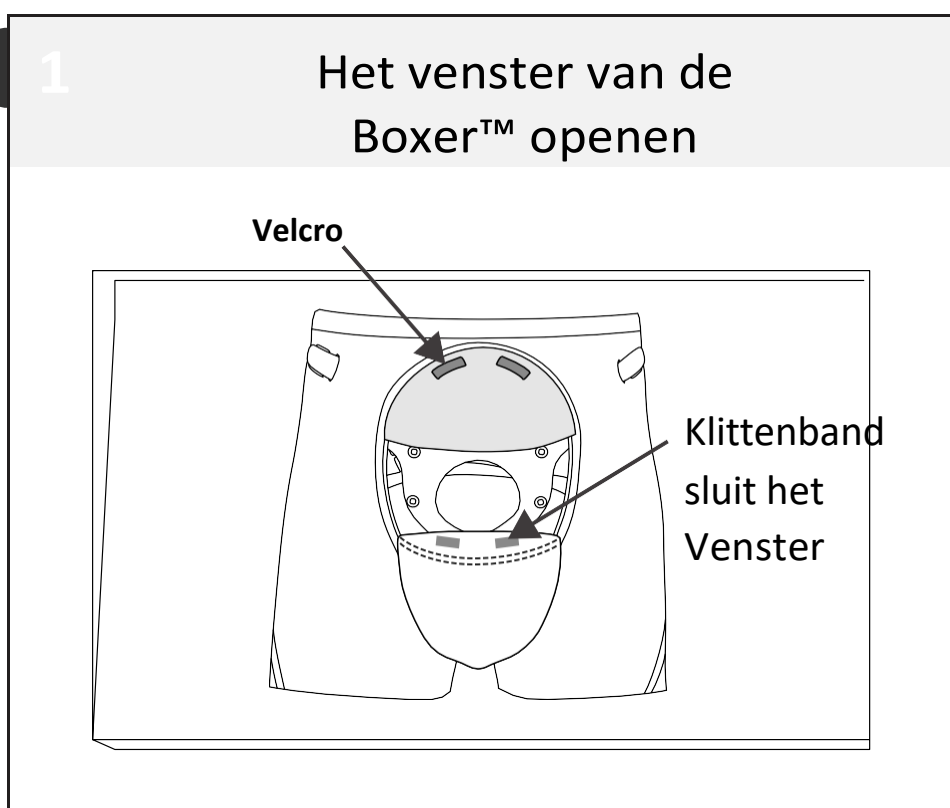
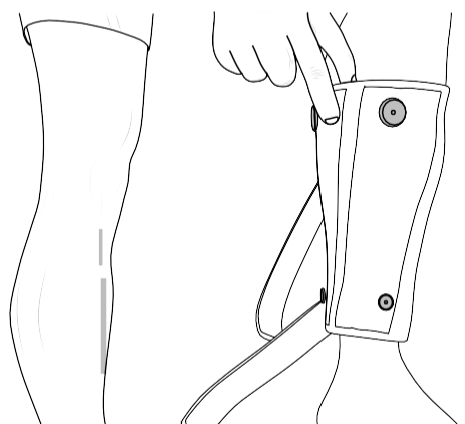
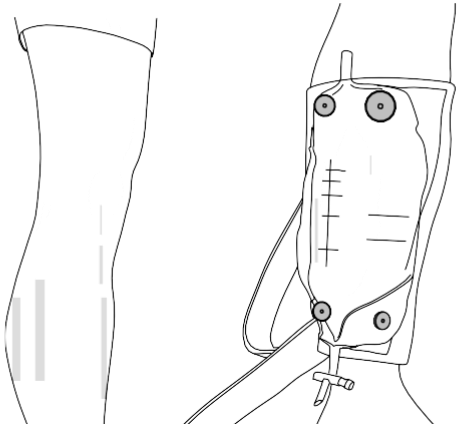
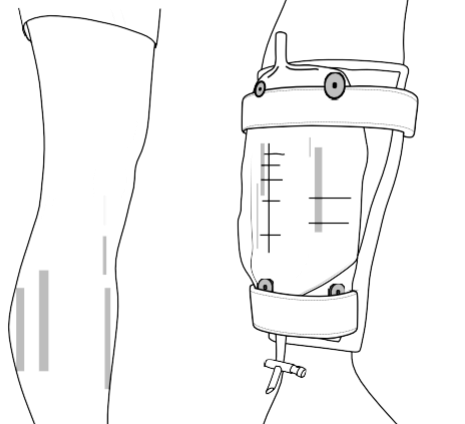
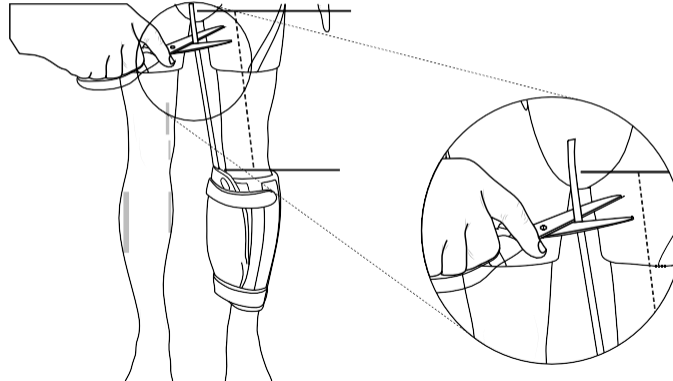
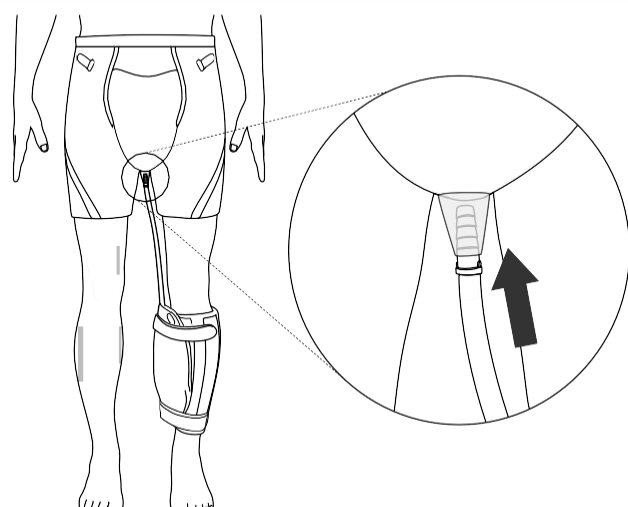
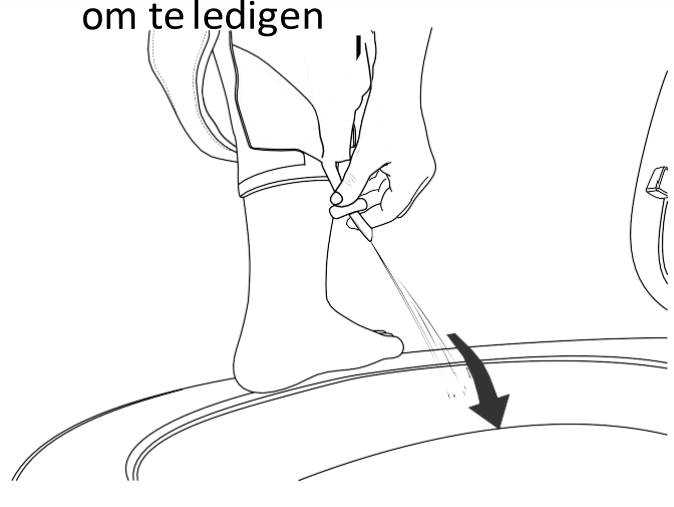



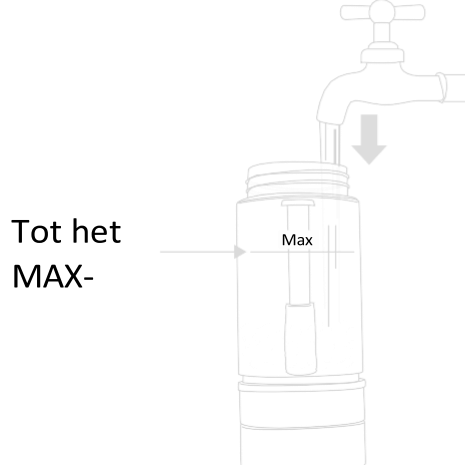
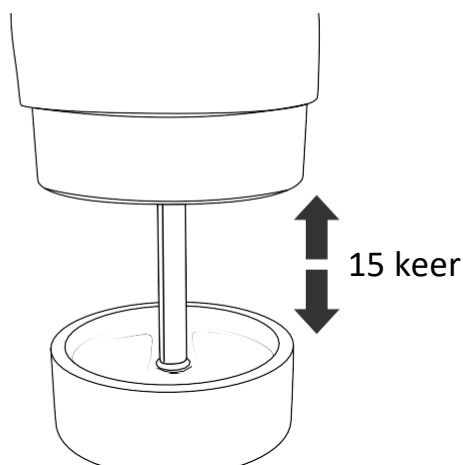
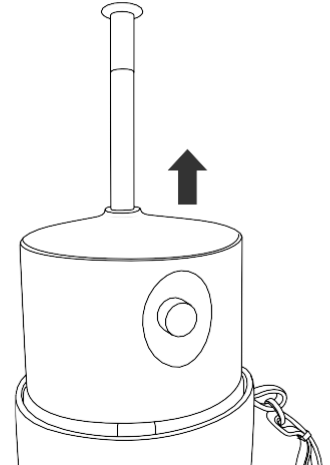
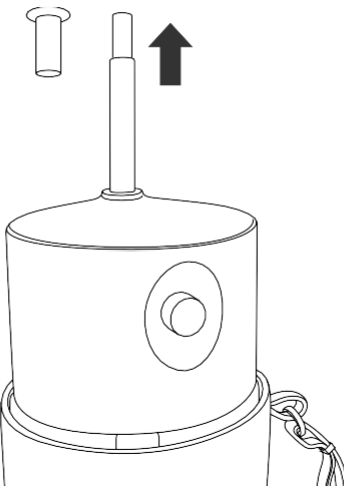
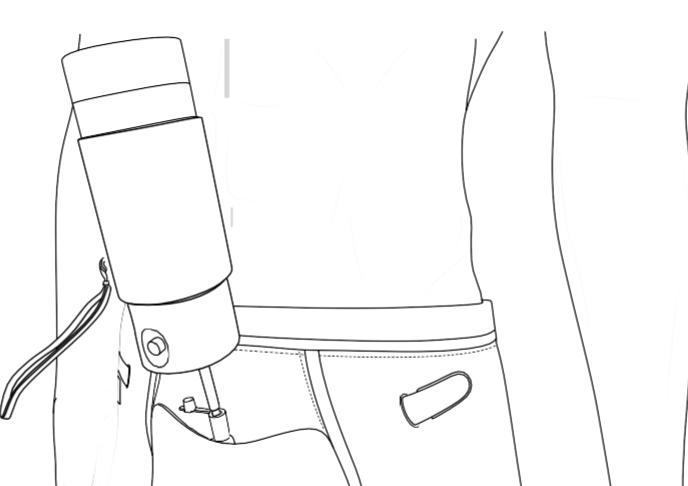
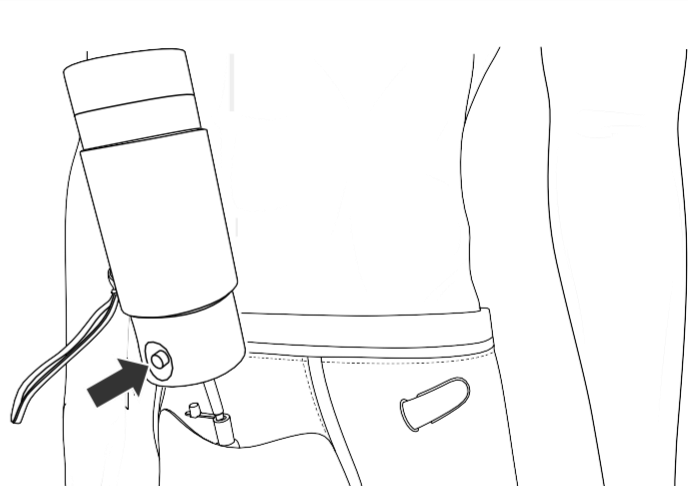
## Vastzetten van de ExCath™ in het Boxer™ venster

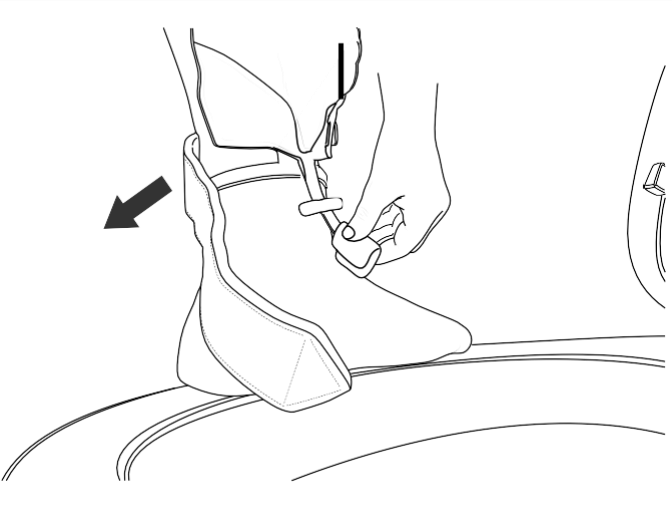





# Pas de catheter aan en installeer de UrineBag™ aan de UriSocks™.

<b>1</b> Draag de UriSocks™ op het gekozen been 	<b>2</b> Installeer de UrineBag™ 	<b>3</b> Sluit de riempjes 	<b>4</b> Pas de lengte van de catheter aan 
<b>5</b> Sluit de catheter aan op de ExCath™ 	<b>6</b> Openen van het onderste riempje om te ledigen 	<b>7</b> Veeg de drainage-opening proper 	<b>8</b> Plooi de drainage-klem terug naar de UriSocks™ 

# Was de genitaliën en de ExCath™ met behulp van de Bidet™

<b>1</b> Open de Bidet™ en vul met water  <p>Tot het MAX-</p>	<b>2</b> Pomp 15 keer  <p>15 keer</p>	<b>3</b> Trek het buisje naar omhoog 
<b>4</b> Verwijder het mondstuk 	<b>5</b> Sluit de Bidet™ aan op de ExCath™ 	<b>6</b> Druk op de knop om te flushen 

## Het reinigen van de ExCath
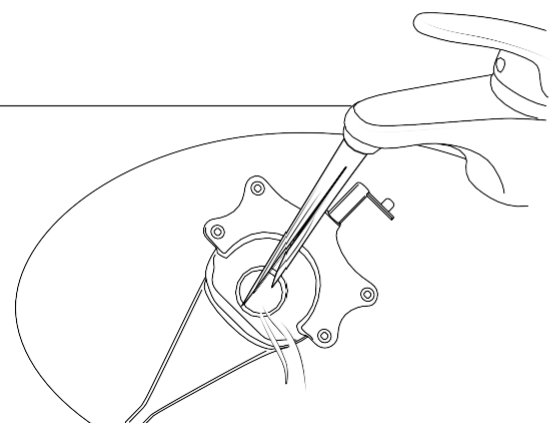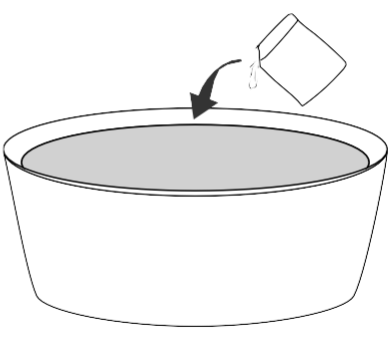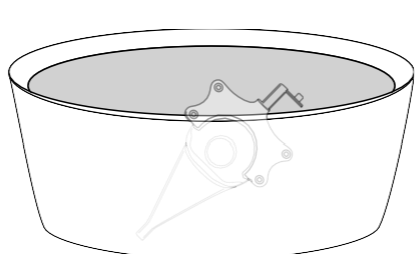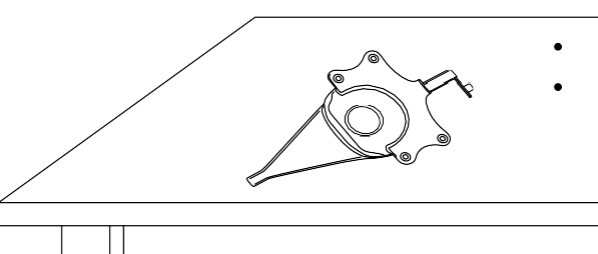
<b>1</b> Spoel de ExCath™ met water 	<b>2</b> Bereid een bassin van water en ontsmettingsmiddel of zeep 
<b>3</b> Dompel de ExCath™ onder gedurende 20 minuten 	<b>4</b> Haal de ExCath™ uit het bassin en laat het drogen. 

## Voorzorgsmaatregel

- Lees zorgvuldig alle instructies.

Niet aanbevolen voor patiënten met:

- \* De diagnose urineretentie.
- \* Allergie voor siliconen materiaal.
- \* Ervaring met huidirritatie.

- Niet gebruiken als ActivGo®ExCath™ pakket is beschadigd.

- ActivGo®ExCath™ moet worden gereinigd voor gebruik.

- Gebruik de ActivGo®ExCath™ niet langer dan 12 uur zonder dat u volgens de handleiding deze goed reinigt.

- Was en droog altijd uw handen voor en na het hanteren van uw ActivGo®UrineBag™. Als iemand anders uw ActivGo®UrineBag™ reinigt moeten ze hun handen wassen en drogen en eventueel gebruik maken van een paar schone handschoenen bij elke gelegenheid om kruisinfectie te voorkomen.

- Verander ActivGo®UrineBag™ elke 7 dagen. Pas eerder vervangen als het beschadigd of vervuild is.

- Zorg er altijd voor dat je een reserve ActivGo®UrineBag™ hebt. Voor verdere benodigdheden kunt u contact opnemen met uw verpleegkundige of arts.

- Na meerdere keren te hebben gebruikt, kan de ActivGo®UrineBag™ een potentieel biohazard zijn. Weggooien in overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving.

- De volumemarkering op de ActivGo®UrineBag™ is slechts een benadering. Voor een nauwkeurige registratie van de urine-output kunt u urine afvoeren in een schone meetkruik (gebruikt alleen voor uw urine)

### Disclaimer\*:

- Door dit product te kopen, accepteert u alle Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en disclaimer die in onze volgende websitelink worden vermeld.

\*www.provenmed.com/disclaimer



ProvenMed Global FZ-LLC Office  
201, North Tower, Dubai Science  
Park  
www.provenmed.com  
Wecare@provenmed.com  
ontworpen in de VAE  
geassembleerd in China

EG- Appelboom S.A.  
Bd-generaal Wahis 53  
1030 Brussel België  
Tel: +(32) 2 732-59-54  
Fax: +(32) 2 732-60-03  
mail@obelis.net