


INDICATIES VOOR GEBRUIK

De Pacey Cuff Ultra is geïndiceerd voor urinecontinentie bij mannen. Het apparaat wordt zo nodig gebruikt tijdens de uren dat men wakker is. We bevelen een lichte pad aan voor gebruik met dit het apparaat.

ONDERDELEN

Pacey Cuff - Urethrale beheersingsapparaat ter voorkoming van lekken zonder de bloedsomloop te beperken.

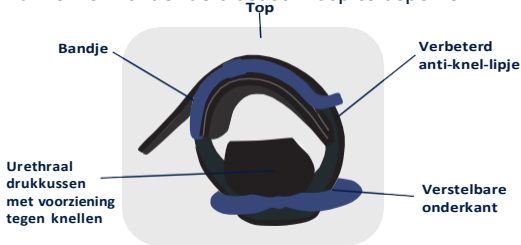

Power Sleeve - Bedoeld voor gebruik met het Pacey Cuff-apparaat om het geheel beter te kunnen afstellen.




GEBRUIKSINSTRUCTIES




- 1. De Power Sleeve bevestigen**
 - Sla, alvorens u de manchet aanbrengt, de Power Sleeve om het midden van de penis.
 - Verbind de uiteinden met elkaar. De Power Sleeve moet goed aansluiten.
 - De uiteinden moeten aan de zijkant van de penis met elkaar worden verbonden. Breng dan minder strak aan, als het ongemakkelijk aanvoelt.
 - Breng de Pacey Cuff over de Power Sleeve aan

Belangrijk: rek de Power Sleeve niet te veel uit.

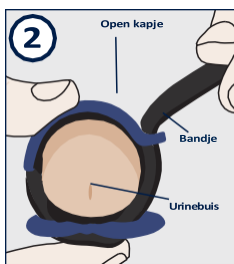

- 2. De Pacey Cuff aanbrengen**
 - Knijp met uw dominante hand de bovenste en onderste delen rondom de penis. Dit, ter verkrijging van de benodigde compressie om de urinestroom te stoppen.

Belangrijk: Gebruik de bandgeleider niet om de Pacey Cuff samen te drukken.

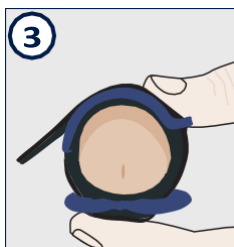

- 3. De Pacey Cuff bevestigen**
 - Maak het resterende bandje vast.
 - Zorg ervoor dat het kapje aan de bovenkant en het kussentje dat druk moet uitoefenen rondom de penis gecentreerd zijn. Zie erop toe dat de huid niet tussen de bovenste en onderste gedeeltes gekneld is.

Belangrijk: ter bepaling van de juiste druk moet u mogelijk de Velcro®-band (klittenband) een paar keer samendrukken en aanspannen.

Als het lekken aanhoudt:



Behalve het bovenste bandje, is ook het onderste gedeelte **verstelbaar**: naar links of rechts om het beter te laten passen.

Als zich na het eerste gebruik lekken voordoen:

1. Het onderste bandje moet standaard op 3 zijn ingesteld.
2. Schuif het onderste bandje naar een hogere stand (3,5-4).

Aanbevolen:

- Gebruik strak, nauwaansluitend ondergoed in plaats van losse boxershorts.
- Tegen mogelijke huidirritatie kan vaseline worden gebruikt
- Het apparaat kan tijdens het sporten en zwemmen worden gedragen.

Reinigen:

Was de Pacey Cuff Ultra en de Power Sleeve in warm water. Er mag een milde zeep worden gebruikt die vrij is van hydraterende middelen, parfums, deodorants, conserveermiddelen, detergenten of kleurstoffen. Niet in de wasdroger drogen.

Plassen:

- De Power Sleeve hoeft tijdens het plassen niet te worden verwijderd. Bij het plassen moet u slechts de Pacey Cuff losmaken en de manchet opnieuw vastmaken zodra de blaas leeg is.
- Plas elke 1 à 2 uur leeg en zorg voor een beperkte drankinname.

Levenscyclus van het product:

Pacey Medtech raadt aan om het apparaat zo nodig te vervangen (ongeveer elke 6 maanden).

Waarschuwingen: ⚠

- Verwijder de Pacey Cuff als pijn, zwelling, bloeding of ongemak optreedt.
- Gebruik het apparaat onder professionele supervisie als de patiënt speciale behoeften heeft.
- Gebruik het apparaat niet als u medicijnen gebruikt die uw vermogens nadelig beïnvloeden.
- Als de huid geïrriteerd raakt, stop dan met het gebruik totdat de irritatie is verdwenen.
- Mechanische krachten die de positie van de Pacey Cuff verdraaien of veranderen, kunnen pijn veroorzaken. Als dit gebeurt, verwijder dan de Pacey Cuff en laat de bloedtoevoer terugkeren. Raadpleeg uw arts als de pijn niet verdwijnt.
- De Power Sleeve is **niet MR-compatibel**.

Raadpleeg een arts als de volgende aandoeningen aanwezig zijn:

- Omstandigheden die abnormale bloedstolling veroorzaken. Aandoeningen die de bloedstolling verstoren en aandoeningen die bloed stollen, zoals coagulopathie. Een verhoogde bloedstolling kan aangeboren en / of verworven zijn.
- Geneesmiddelen die pijnherkenning verminderen (bijv. verdovende middelen en slaapmiddelen).
- Geneesmiddelen die de stolling verminderen en geneesmiddelen die de stolling verhogen.
- Aandoeningen zoals sikkelcelziekte die een langzame bloedstroom en stolselvorming veroorzaken.
- Raadpleeg uw arts bij ernstige medische aandoeningen.
- Voor gevorderde perifere of cardiale vasculaire aandoeningen of diabetes mellitus, dient u voor gebruik uw arts of medische zorgverleners te raadplegen.
- Raadpleeg voor gebruik uw arts of medische zorgverlener als u een urineweginfectie (UTI) heeft.

Symbol	Definitie
	Fabrikant
	Bevoegde vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Batchcode
	CE-markering
	Productcode
	MR Unsafe (uitsluitend Power Sleeve)
	Waarschuwingen



Pacey MedTech Ltd.
203 - 1099 West 8th Avenue
Vancouver, BC Canada V6H 1C3
Telefoon: + 1-877-377-2239
info@paceymedtech.com
paceycuff.com


Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Duitsland
Alle patenten zijn aangevraagd. Pacey manchet™ is een geregistreerd handelsmerk van Pacey Medtech Ltd.
© 2020

CONSEILS D'UTILISATION

Le Pacey Cuff Ultra est indiqué pour l'incontinence urinaire masculine. L'appareil peut être utilisé pendant les heures d'éveil si nécessaire. Un coussin lumineux est recommandé pour une utilisation avec l'appareil.

COMPOSANTS


Pacey Cuff - Dispositif de contrôle de l'urètre conçu pour arrêter les fuites sans restreindre la circulation.

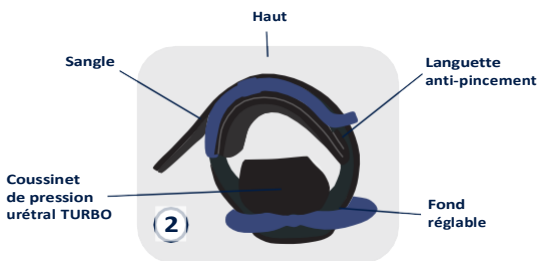

Power Sleeve - Conçu pour être utilisé avec le Pacey Cuff.




MODE D'EMPLOI

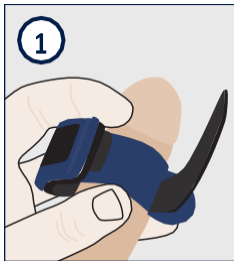


- 1. Fixez le Power Sleeve**
 - Enroulez l'axe médian du Power Sleeve autour du pénis avant d'appliquer le Cuff.
 - Fixez les extrémités ensemble. Le manchon doit être bien ajusté.
 - Les extrémités doivent être fixées sur le côté du pénis. Si vous ressentez un inconfort, appliquez en serrant moins fort.
 - Appliquez le Pacey Cuff par-dessus le Power Sleeve

Important : Ne pas trop étirer le Power Sleeve.

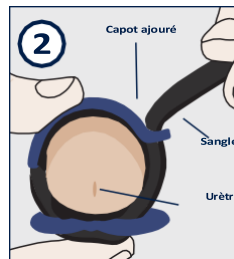

- 2. Positionnez le Pacey Cuff**
 - Serrez les parties du haut et du bas ensemble, autour du pénis, avec votre main dominante pour obtenir la compression nécessaire pour arrêter l'écoulement de l'urine.


Important : N'utilisez pas le guide de sangle pour comprimer le Pacey Cuff.

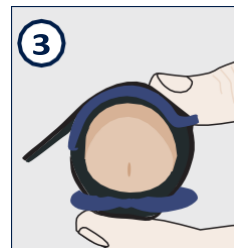

- 3. Pacey Cuff sécurisé**
 - Fixez la sangle restante.
 - Veillez à ce que le capuchon supérieur et le coussinet de pression inférieure sont centrés sur le pénis. Inspectez et empêchez tout éventuel pincement de la peau entre les parties supérieure et inférieure.

Important : Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs fois de comprimer et de resserrer la bande Velcro® pour déterminer la pression correcte.

Si la fuite persiste :

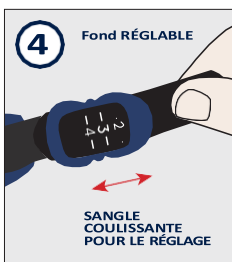

En plus de la sangle supérieure, la partie inférieure peut être ajustée vers la gauche ou la droite pour ajuster le réglage global.

Si une fuite se produit après la première application :

- Le réglage de la sangle inférieure devrait arriver à environ 3.
- Faites glisser la sangle inférieure vers le haut (3,5- 4).

Conseils:

- Utilisez des sous-vêtements courts et ajustés plutôt que des caleçons plus amples.
- Le gel de pétrole peut être utilisé pour protéger la peau des irritations possibles.
- L'appareil peut être porté pendant l'exercice et la natation.

Nettoyage :

Lavez le Pacey Cuff Ultra et le Power Sleeve dans l'eau chaude. Un savon doux sans parfums, déodorants, conservateurs, détergents ou colorants peut être utilisé. Ne pas sécher en machine.

Miction:

- Le Power Sleeve n'a pas besoin d'être retiré pendant la miction. Pendant la miction, desserrez simplement le Pacey Cuff, et resserrez-le une fois la vessie vide.
- Urinez toutes les 1-2 heures et faites de l'exercice avec un apport de liquide léger.

Cycle de vie du produit :









Cycle de vie du produit : Pacey Medtech recommande que l'appareil soit remplacé au besoin (environ tous les 6 mois).

Avertissements :

- Retirez le Pacey Cuff en cas de douleur, d'enflure, de saignement ou d'inconfort.
- Si le patient a des besoins particuliers, utilisez l'appareil sous la surveillance d'un professionnel.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments qui nuisent à vos capacités.
- Si la peau devient irritée, cessez l'utilisation jusqu'à ce que l'irritation disparaisse.
- Les forces mécaniques qui tordent ou altèrent le Pacey Cuff™ peuvent provoquer des douleurs. Si cela se produit, retirez le Pacey Cuff et laissez le sang revenir. Si la douleur ne disparaît pas, consultez votre médecin.
- Le Power Sleeve n'est pas Compatible MR.**

Consultez un professionnel de la santé si les conditions suivantes sont présentes :

- Conditions provoquant une coagulation sanguine anormale. Affections qui entravent la coagulation du sang et qui entraînent la coagulation du sang, telles que la coagulopathie. Une coagulation sanguine accrue peut être congénitale et / ou acquise.
- Médicaments qui altèrent la reconnaissance de la douleur (par exemple, stupéfiants et somnifères).
- Médicaments altérant la coagulation et médicaments augmentant la coagulation.
- Des pathologies telles que la drépanocytose qui ralentissent la circulation sanguine et provoquent la formation de caillots.
- En cas de problème médical grave, veuillez consulter votre médecin.
- En cas de maladie vasculaire périphérique ou cardiaque avancée ou de diabète sucré, consultez votre médecin ou un professionnel de la santé avant l'utilisation.
- En cas d'infection des voies urinaires (IVU), veuillez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé avant l'utilisation.

Symbole	Définition
	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Consulter le mode d'emploi
	Code de lot
	Marquage CE
	Code produit
	MR non sécurisé (Power Sleeve uniquement)
	Avertissements


Pacey MedTech Limited
1099 West 8th Avenue, Suite 203
Vancouver, BC Canada V6H 1C3
Téléphone : + 1-877-377-2239
info@paceymedtech.com
paceycuff.com

 
Représentant européen
Medical Device Safety
Service GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre, Allemagne

Tous les brevets en instance.
Pacey Cuff™ est une marque
déposée de Pacey Medtech
Ltd. © 2020