

Veel Gestelde Vragen:


Zullen mensen merken dat ik het ActiCuf-zakje draag? Wees gerust, het ActiCuf-compressiezakje is ontworpen en zorgvuldig getest met deze zorg in gedachten. De unieke vorm past zich op natuurlijke wijze naar uw lichaam aan. Bovendien is hij klein genoeg om vertrouwelijk bij je te dragen - zelfs in je zak!

Hoe lang kan ik het ActiCuf-zakje dragen? Eén ActiCuf-compressiezakje kan de hele dag worden gebruikt, maar moet om de drie tot vier uur worden verplaatst. Hoewel zeldzaam, kunnen gevallen van huidirritatie optreden bij langdurige blootstelling aan urine. Het ActiCuf-zakje mag niet tijdens het slapen worden gedragen.

Kan ik een openbaar urinoir gebruiken met het ActiCuf-zakje? Absoluut! Omdat het ActiCuf-zakje zo discreet is, kunt u het snel en moeiteloos uit- en weer aantrekken zonder dat iemand het merkt.

Is een voorschrift nodig? Nee. Elke man met urine-incontinentie die een vernieuwde levensstijl wenst, wordt uitgenodigd om de vrijheid van de ActiCuf-compressiezak te ervaren.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het ActiCuf-zakje? De onderstaande dealer kan uw vragen beantwoorden en u helpen beslissen of ActiCuf geschikt voor u is.

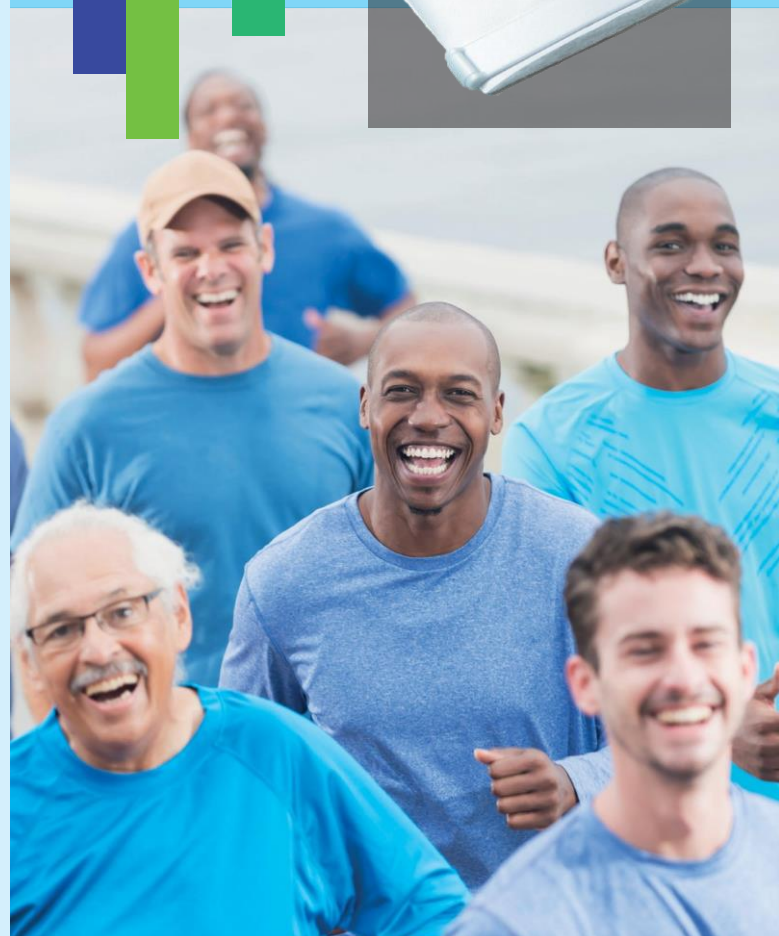

PIONEER



www.pioneermedicaleurope.co.uk

of info@FuturMedi.com (BeNeLux)

ActiCuf™
FREEDOM EVERY DAY

ActiCuf™
FREEDOM EVERY DAY