

Zeta 7 Spray



applications spéciales

Désinfectant en spray prêt à l'emploi pour la désinfection rapide d'empreintes.

Principes actifs: alcools



PLUS PRODUIT

- ▶ Protection élevée: bactéricide, levuricide, tuberculocide et virucide
- ▶ Compatibilité avec les matériaux pour la prise d'empreintes (silicone par addition et condensation, alginates, polyéther, polysulfure et polyvinyléther)
- ▶ Sécurité pour l'utilisateur: sans aldéhydes et phénols
- ▶ Pratique, rapide et prêt à l'emploi, sans rinçage, il désinfecte jusqu'à 250 empreintes

Utilisation

Rincer l'empreinte sous l'eau courante. Pulvériser **Zeta 7 Spray** sur les deux côtés un voile continu de désinfectant sur les surfaces de l'empreinte.

Laisser évaporer pendant au moins 3 minutes.

RESPECTE LES CARACTÉRISTIQUES DE STABILITÉ DIMENSIONNELLE DES EMPREINTES

Spectre d'activité

Bactéricide: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)

Levuricide: EN 13624 (C. albicans)

Tuberculocide: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)

Virucide: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, compris HIV, HBV, HCV)

Tests réalisés en conditions de saleté.