



# PROTETOR IMPERMEÁVEL

para moldes e pensos



## GUIA DE CUIDADOS A TER E DE UTILIZAÇÃO

**PT** O protetor impermeável Bloccs® é especialmente concebido para proteger um molde de gesso, penso ou ligadura, para permitir ao utilizador tomar banho de imersão ou duche como habitualmente. Este protetor totalmente estanque e completamente submersível pode ser utilizado na praia ou na piscina.

**AVISO:** O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica. Se estiver a receber tratamento médico, por favor obtenha a aprovação do seu médico antes de utilizar o protetor. **NÃO UTILIZE SE FOR ALÉRGICO AO LÁTEX.**

### Bloccs®

Precision Dippings  
Manufacturing Ltd,  
Unit J, Lawrence Drive, Stover  
Trading Estate, Yate, Bristol  
BS37 5PG, Reino Unido  
Telefone: +44 (0) 1454 318197  
Email: [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)

[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)



### Fabricado no Reino Unido

Todos os produtos são fabricados de acordo com a atual norma aprovada pelo Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001.

©Bloccs® 2021



**Precision Dippings  
Manufacturing Ltd**  
Unit J, Lawrence Drive,  
Stover Trading Estate,  
Yate, Bristol,  
BS37 5PG,  
UK



Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030 Brussels  
Belgium

A reprodução, cópia, obras derivadas, distribuição e exibição pública deste Manual só são permitidas com o consentimento prévio por escrito da Bloccs®.

# CUIDADOS A TER E UTILIZAÇÃO DO PROTETOR **BLOCCS**<sup>®</sup>

Obrigado por escolher Bloccs<sup>®</sup>. Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o seu protetor Bloccs<sup>®</sup> ou de supervisionar uma criança que utilize um. Assim garantirá que o protetor está a ser utilizado em segurança e que o selo estanque é eficaz.

A decisão de usar o protetor Bloccs<sup>®</sup> ao tomar banho, tomar duche ou usá-lo em qualquer outra atividade envolvendo água, é tomada por sua conta e risco. Deve procurar aconselhamento médico para assegurar que a atividade não afetará o ferimento.

## Como colocar o seu protetor Bloccs<sup>®</sup>

Como o seu protetor Bloccs<sup>®</sup> é feito de látex de borracha natural, deve remover qualquer joia afiada e ter cuidado para não causar furos com as suas unhas. Cobrir as bordas rugosas com fita adesiva ou uma ligadura elástica.

Antes de utilizar, esfregue o selo com as mãos e estique-o suavemente. Para verificar como fica o selo, experimente a cobertura no braço ou perna que não tem gesso. Se sentir que o selo está demasiado apertado ou demasiado solto quando o experimentar, por favor escolha um protetor com um tamanho diferente.

O selo liso, impermeável e à prova de água, deve esticar facilmente sobre um penso.

**Siga os nossos guias fáceis de cinco passos incluídos neste folheto para ajudar a colocar os seus protetores Bloccs<sup>®</sup> de braço/perna e de cotovelo/joelho.**

## Utilizar o seu protetor Bloccs<sup>®</sup>

O protetor Bloccs<sup>®</sup> destina-se a manter um penso seco enquanto exposto ou imerso em água. Os protetores Bloccs<sup>®</sup> utilizam o mesmo tipo de selo que os fatos impermeáveis.

Antes de entrar na água, remova todo o ar do protetor Bloccs<sup>®</sup> massajando a cobertura em direção ao selo para libertar qualquer ar retido. Isto também pode ser feito ao baixar gradualmente o membro para dentro da água, de modo a que a pressão da água force o ar para o topo do protetor.

Puxe suavemente o selo para longe da pele para remover o ar antes de submergir, certificando-se de que nenhuma água entra no protetor.

O protetor deve ser colocado imediatamente antes de entrar na água e removido assim que sai.

A decisão de entrar na água é tomada por sua conta e risco. Não deve saltar ou mergulhar numa piscina. Os protetores não foram concebidos para mergulho, mergulho submarino ou qualquer outro desporto aquático.

Recomendamos que o protetor Bloccs<sup>®</sup> seja verificado regularmente durante a utilização para garantir que o selo permaneceu estanque e ainda é confortável.

O protetor pode ser usado até 30 minutos - desde que ainda seja confortável de usar, não sinta que esteja demasiado apertado e que seja verificado regularmente. O uso do protetor por mais de 30 minutos pode resultar em ar preso causando transpiração e desconforto.

**AS CRIANÇAS DEVEM SER SEMPRE VIGIADAS EM PISCINAS OU NO MAR.**

## Como retirar o protetor

Para remover o protetor Bloccs®, retire-o cuidadosamente de cima do penso ou gesso do seu braço ou perna. Deve ter o cuidado de assegurar que os selos não estão danificados por unhas ou joias.

## Cuidados a ter com protetor Bloccs®

O protetor Bloccs® está sujeito a desgaste, mas deve durar cerca de 4 semanas de utilização normal.

O protetor deve ser verificado antes de cada utilização para garantir que não há sinais de danos ou desgaste.

Se o protetor se deteriorou ou ficou danificado de alguma forma, deve ser adquirido um substituto. Os protetores devem ser armazenados a uma temperatura inferior a 26° C e guardados longe de radiadores. Em frio extremo, o protetor pode tornar-se rígido: isto não é permanente, e com temperaturas mais quentes volta ao estado normal.

Evite armazenar em local húmido. Evite expor o protetor durante um período prolongado à luz, em particular à luz solar direta e à luz artificial com um elevado teor de UV.

O protetor Bloccs® pode ser lavado em água quente e deve depois ser seco cuidadosamente por dentro e por fora. Ao polvilhar pó talco no seu interior, o protetor Bloccs® será mais fácil de colocar. Não seque o protetor numa máquina de secar roupa ou em cima de um radiador.

Evitar o contacto com cobre, ligas que contenham cobre, solventes, óleos e lubrificantes, pois podem danificar o protetor Bloccs®.

Mantenha afastado das chamas, pois isto pode resultar em lesões corporais graves e até morte.

*Se tiver alguma questão relativa ao seu protetor Bloccs®, por favor visite [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) ou envie um email para [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)*

*Uma cópia deste manual, a nossa tabela de tamanhos e a garantia Bloccs® estão disponíveis no nosso website [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) e [www.bloccs.com/warranty](http://www.bloccs.com/warranty)*

*A Bloccs® tem o direito de modificar o manual como considerar apropriado. Como consumidor, é da sua responsabilidade verificar a versão online do manual para quaisquer modificações.*

**AVISO:** O protetor Bloccs® pode tornar-se escorregadio quando molhado. Utilize um tapete antiderrapante no chuveiro ou banheira e tenha outro tapete antiderrapante ou toalha no local para quando sair. Não deve andar à volta de uma piscina quando utiliza um protetor Bloccs® e deve ter um cuidado extra quando utiliza degraus de piscina, pois podem ser escorregadios. Agarre-se firmemente ao corrimão.

**AVISO:** Os protetores Bloccs® não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha o produto e a sua embalagem fora do alcance das crianças e dos bebés.

**AVISO:** O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica. Se estiver a receber tratamento médico, por favor obtenha a aprovação do seu médico antes de utilizar o protetor. **NÃO UTILIZE SE FOR ALÉRGICO AO LÁTEX.**

**AVISO:** Deve ser tomado cuidado extra ao submergir as pernas engessadas na água, devido ao peso e ao restringimento de movimento. Não deve tentar nadar com uma perna engessada.

**AVISO:** Deve ter cuidado ao utilizar este produto caso tenha um cateter central de inserção periférica ou intravenoso.

*Não é possível avisar sobre todos os perigos possíveis relacionados com a utilização deste produto. Os consumidores são portanto aconselhados a usar o bom senso e discernimento quando utilizam um protetor Bloccs®.*

**Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país em que foi adquirido.**

# BLOCCS®

## COMO COLOCAR UM PROTETOR BLOCCS® BRAÇO OU PERNA SEM ASSISTÊNCIA

O protetor deve ser utilizado de acordo com todos as instruções de cuidados e utilização.

Por favor visite [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) para ver o nosso vídeo de demonstração e para ver as nossas FAQs.



Retire o seu protetor da embalagem e desdobre-o. Retire quaisquer anéis afiados, etc.



Antes de utilizar, esfregue o selo com as mãos e estique-o suavemente.



A partir da extremidade aberta, dobrar para trás até metade do protetor.



Para verificar como fica o selo, experimente a cobertura no braço ou perna que não tenha gesso ou penso.

Coloque a perna ou braço necessário na extremidade aberta de modo a que o pé ou a mão fique na extremidade do protetor.



Enrole o protetor para cima do braço ou da perna até que o selo fique plano na pele. Se sentir que o selo está demasiado apertado ou demasiado solto quando o experimentar, escolha um protetor com um tamanho diferente.


Deixe sair um pouco de ar para evitar que o protetor flutue.

# BLOCCS®

## COMO COLOCAR UM PROTECTOR BLOCCS® DE COTOVELO OU JOELHO SEM ASSISTÊNCIA

O protetor deve ser utilizado de acordo com todas as instruções de cuidados e utilização. Por favor visite [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) para ver o nosso vídeo de demonstração e para ver as nossas FAQs.

1

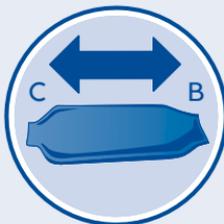

Retire o seu protetor da embalagem e desdobre-o. Retire quaisquer anéis afiados, etc. O protetor tem duas extremidades; uma extremidade mais larga para selar à volta do bíceps ou da coxa (B) e uma extremidade mais pequena para selar à volta do pulso ou na parte inferior do gêmeo (C).

2




Antes de utilizar, esfregue o selo com as mãos e estique-o suavemente.

3



Para colocar o protetor facilmente, pegue do lado da extremidade B e vire metade do protetor de dentro para fora, de modo a que fique imediatamente acima da extremidade C.


4

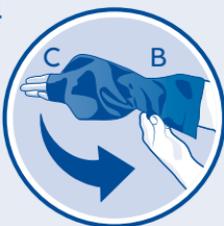

Para verificar como fica o selo, experimente a cobertura no braço ou perna que não tenha gesso ou penso. Empurre lentamente a mão ou o pé através da extremidade B e depois C.

Depois enrole cuidadosamente a extremidade B até selar suavemente no braço ou na coxa.

5

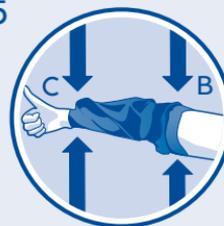

A área completa do punho deve ser coberta, e deve formar-se um selo impermeável liso à prova de água à volta do braço ou da perna em ambas as extremidades do protetor. Se sentir que o selo está demasiado apertado ou demasiado solto quando o experimentar, escolha um protetor com um tamanho diferente.

Deixe sair um pouco de ar para evitar que o protetor flutue.

# GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

	Fabricante
	Marcação de Conformidade Europeia (CE)
	Dispositivo Médico
	Identificador Único do Dispositivo
	Quantidade
	Código do Lote
	Data de Fabrico
	Distribuidor
	Representante autorizado na União Europeia

	AVISO
	Contém látex de borracha natural
	Superfície escorregadia
	Risco de asfixia
	Manter afastado da luz solar
	Conservar entre 5 e 26° C (41-78°F)
	Doente único - múltiplas utilizações
	Não esterilizado
	Consultar as instruções de utilização
	Embalagem reciclável
	Proibido foguear