




Primo-Lacto Kolostrumauffänger

**Geschlossenes System zum Auffangen von Kolostrum mit Medela® Pumpsets
Kompatibel mit nutrisafe2® Ernährungsspritzen ohne Gewinde (bis 2,5 ml)**

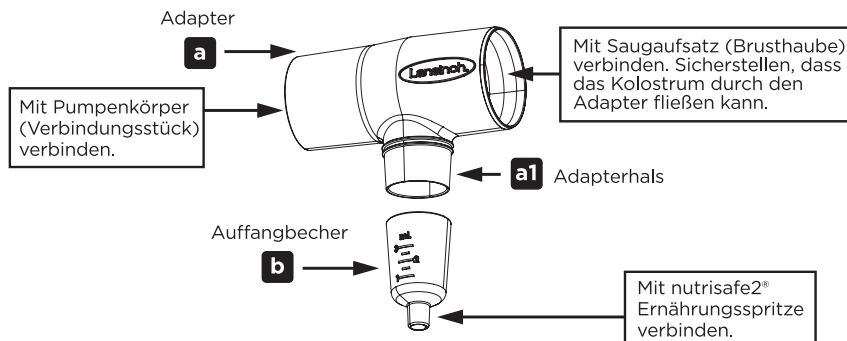

Anwendung beim Abpumpen:

1. Vor jeder Anwendung die Hände mit Wasser und Seife reinigen. Danach die Hände gemäß der internen Hygienerichtlinie desinfizieren.
2. Den Adapter (**a**) mit dem Pumpenkörper (Verbindungsstück) verbinden. Teile aufeinanderdrücken, um einen festen Sitz sicherzustellen.
3. Den Adapter (**a**) mit dem Saugaufsatz (Brusthaube) verbinden. Teile aufeinanderdrücken, um einen festen Sitz sicherzustellen.
4. Auffangbecher (**b**) auf den Adapterhals (**a1**) schrauben.
5. Flasche gemäß Herstelleranleitung an das Pumpset anschließen.
6. nutrisafe2®-kompatible enterale Ernährungsspritze mit dem Auffangbecher (**b**) verbinden. Festen Sitz sicherstellen. Darauf achten, dass der Spritzenkolben komplett eingeschoben ist.
7. Mit dem Abpumpen beginnen. Das Kolostrum fließt direkt in den Auffangbecher (**b**).

Primo-Lacto

Kolostrumauffänger

- Nach dem Abpumpen die Milchpumpe ausschalten und den Saugaufsatz von der Brust nehmen. Den Auffangbecher **(b)** fest halten und langsam den Spritzenkolben aufziehen, um das abgepumpte Kolostrum aus dem Auffangbecher in die Spritze zu ziehen. **WICHTIG:** Den Auffangbecher **(b)** und den Adapter **(a)** fest zusammenhalten während der Spritzenkolben aufgezogen wird, um zu vermeiden, dass Kolostrum verschüttet wird. Die Spritze durch vorsichtiges Drehen vom Auffangbecher entfernen.
- Spritze verschließen und beschriften. Zum Aufbewahren und Füttern bitte den internen Richtlinien folgen.


! WARNUNGEN! Reinigung: Nach jeder Anwendung mit heißem Wasser und mildem Spülmittel reinigen, danach mit klarem, fließendem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

	Primo-Lacto
Vor der ersten Anwendung	✓ Steril - zur sofortigen Verwendung
Nach jeder Anwendung	✓ Reinigen - Heißes Wasser und mildes Spülmittel verwenden
Täglich	✓ Desinfizieren - 5 Minuten auskochen
Desinfektion	✓ Geeignet für die Dampfdesinfektion mit Beuteln in der Mikrowelle

! WARNUNGEN! Zur Verwendung bei nur einem Patienten bestimmt. Das Produkt kann mehrfach verwendet werden. Vor jeder Anwendung das Produkt auf Beschädigungen überprüfen. Nur unbeschädigt verwenden. Bei Schmerzen während der Verwendung den Rat von medizinischem Fachpersonal einholen.

Primo-Lacto ist ein Medizinprodukt. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories Inc.
 nutrisafe2® is a registered trademark of Vygon SA.
 Medela® is a registered trademark of Medela Holding AG Corporations
 © 2020 Lansinoh Laboratories Inc. All Rights Reserved. Made in China.
 Vertrieb: Lansinoh Laboratories Inc., Niederlassung Deutschland, Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin www.lansinoh.de

 Lansinoh Laboratories
 Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Sti.
 Zafer SB Mah, Gunduz Sk. No:13 E.S.B
 Gaziemir/ Izmir/ Turkiye

REF 59102

Artikelnummer

LOT

Chargennummer



Herstellungsdatum



Verwendbar
bis



Nicht
resterilisieren

STERILE EO

Mit Ethylenoxid sterilisiert



Vor
Lichteinstrahlung
schützen



Vor Nässe
schützen



Gebrauchsanweisung
beachten



Nicht
verwenden,
wenn die
Verpackung
beschädigt ist

CE 0197

CE-Kennzeichnung



Hersteller