



koala
babycare


koala perfect head breastfeeding

instrucciones de uso

1.



2-3.

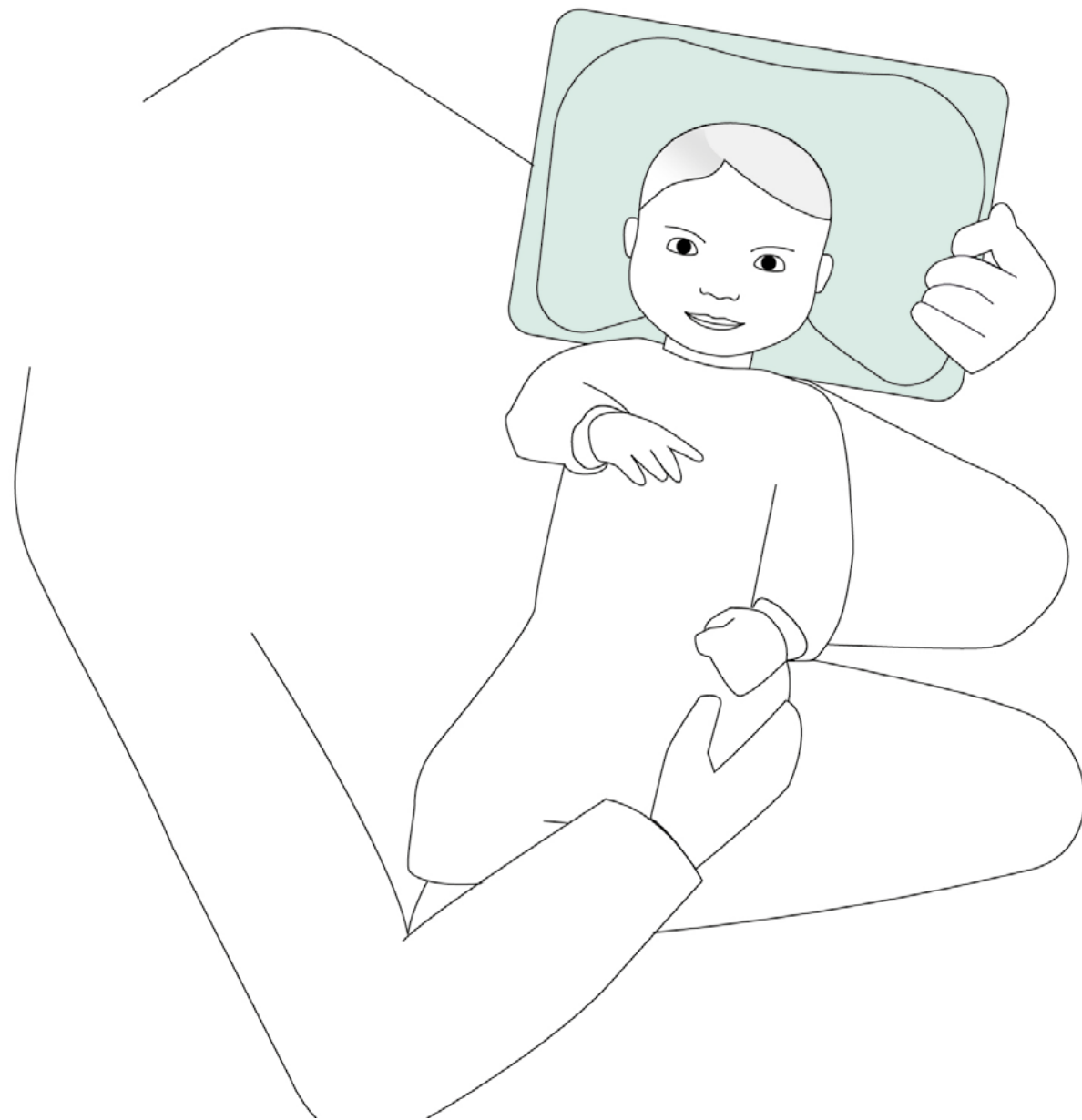

4.



5.



6.



7.



¿Cómo se utiliza Koala Perfect Head Breastfeeding ?

Conoce Koala Perfect Head Breastfeeding Koala Perfect Head Breastfeeding es un producto sanitario de clase 1 diseñado para proteger la cabeza del bebé mientras lo amamantas o lo sostienes.

- 1. Introduce el brazo en la abertura de la almohada** y deslízalo hasta el codo o hasta la altura en la que normalmente apoyas la cabeza del bebé.
- 2. Coloca la cabeza del bebé en el centro de la hendidura:** la presión se distribuirá uniformemente por todo el cráneo.
- 3. Los hombros deben permanecer fuera de la almohada para mantener la postura correcta.**
- 4. Utiliza siempre la almohada durante la lactancia y cuando acune o sostenga a su bebé**
- 5. Alterne el brazo con el que apoya la cabeza de su bebé**
- 6. Además de utilizar Koala Perfect Head Breastfeeding, varíe su posición a la hora de las tomas. Ayúdate, si lo deseas con nuestro cojín de lactancia Koala Hug Baby, te permitirá adoptar cómodamente las posiciones más adecuadas durante las tomas.**

Otros consejos para prevenir la plagiocefalia durante la lactancia

- 7. Elige posiciones en las que la cabeza no se apoye.**

¿En qué le puede ayudar Koala Perfect Head Breastfeeding ?

- Para proteger la cabeza del bebé durante la lactancia, artificial o natural.
- Después de la lactancia, es natural acunar al bebé o ponerlo a dormir en brazos. En estos casos solemos utilizar siempre el mismo brazo (el preferido por la fuerza y la postura) manteniendo al bebé en la misma posición durante un largo periodo de tiempo. Utilizando Koala Perfect Head Breastfeeding podrás seguir acunando al bebé sin temor a que la cabeza se vea afectada.

- Koala Perfect Head Breastfeeding está especialmente recomendado para las madres que han desarrollado mastitis durante la lactancia y que, por tanto, prefieren tener a su bebé en posición supina durante la toma.

¿Cómo lavar Koala Perfect Head Breastfeeding ?

La funda es extraíble y se puede lavar a máquina a 30°.
Instrucciones de lavado de la funda:

- Si la funda está muy sucia, se puede lavar a 40°.
El lavado a esta temperatura no garantiza la misma resistencia del algodón.
- Se recomienda no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no utilizar quitamanchas con disolventes.
Es imprescindible no lavar la espuma viscoelástica.
Si se sumerge en agua, la espuma viscoelástica la absorberá, perdiendo su forma y quedando inservible.

¿Cómo se fabrica Koala Perfect Head Breastfeeding ?

Funda: 75% de Algodón, 25% Poliéster

Cojín: 100% espuma viscoelástica



koalababycare.com
help@koalababycare.com