



koala  
babycare


# koala perfect head breastfeeding

mode d'emploi

1.



2-3.

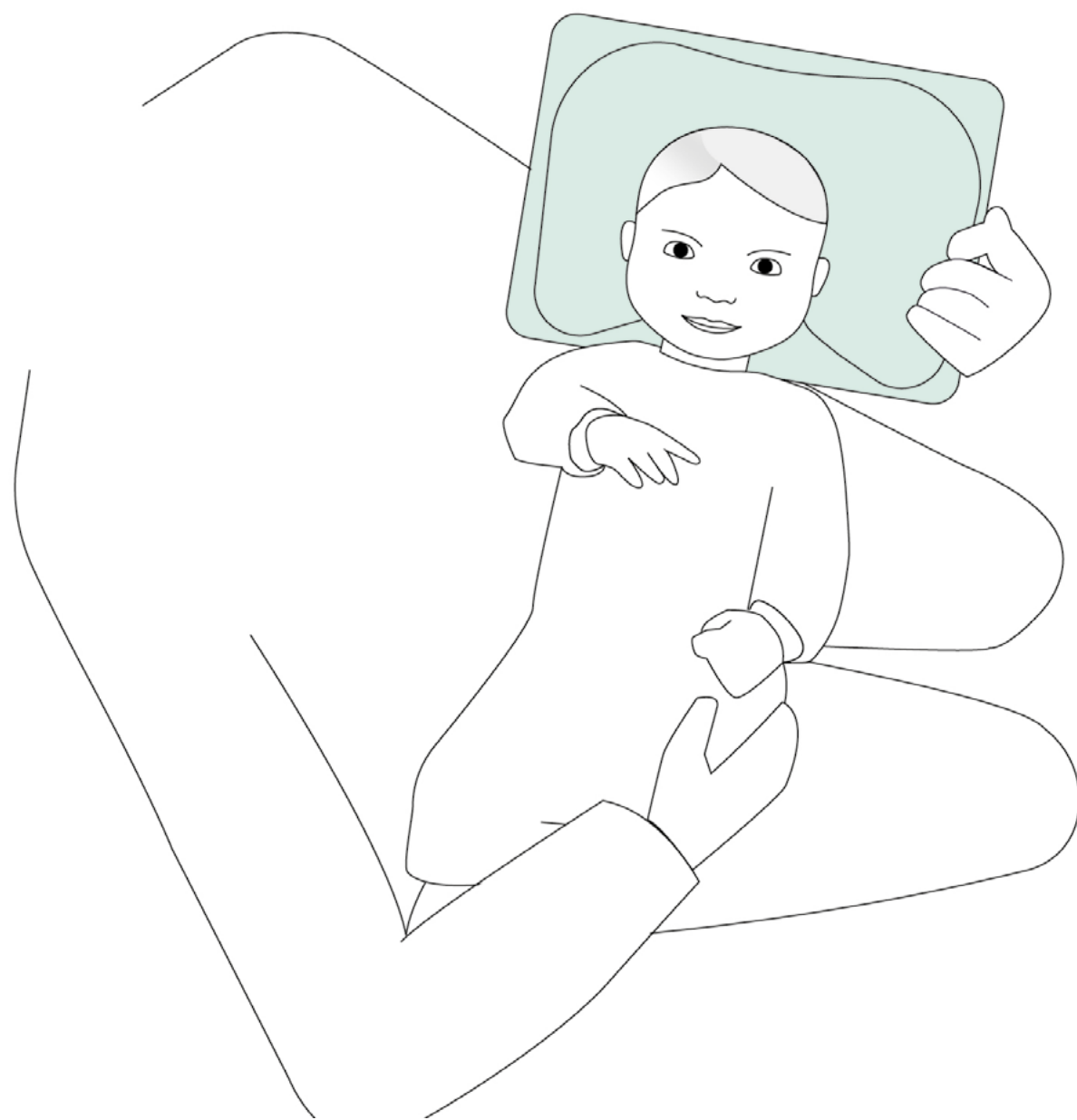

4.



5.



6.



7.



## Comment utiliser Koala Perfect Head Breastfeeding ?

Koala Perfect Head Breastfeeding est un dispositif médical de classe 1 conçu pour protéger la tête de votre bébé pendant l'allaitement et chaque fois que vous le tenez dans vos bras.

- 1. Insérez votre bras dans la poche de l'oreiller** et faites-le glisser jusqu'au coude ou dans la position où vous reposez normalement la tête de votre bébé.
- 2. Placer la tête du bébé au centre du trou:** la pression sera répartie uniformément sur tout le crâne.
- 3. Les épaules doivent rester hors de l'oreiller pour maintenir une posture correcte.**
4. Utilisez toujours l'oreiller pendant l'allaitement et lorsque vous bercez ou tenez votre bébé
5. Alternez le bras avec lequel la tête du bébé est soutenue
6. En même temps que Koala Perfect Head Breastfeeding, utilisez différentes positions pendant l'allaitement. Aidez-vous avec le coussin d'allaitement Koala Hug Baby qui vous permet d'adopter confortablement toutes les positions les plus adaptées pendant l'allaitement.

### **Autres conseils pour prévenir la plagiocéphalie pendant l'allaitement**

7. Utilisez des positions qui ne nécessitent pas le soutien de la tête.

## En quoi Koala Perfect Head Breastfeeding peut-il vous aider ?

- Pour protéger la petite tête de votre bébé pendant l'allaitement, artificiel ou naturel.
- Après l'allaitement, il est naturel de bercer le bébé ou de l'endormir dans les bras. Dans ce cas, nous avons tendance à toujours utiliser le même bras (le préféré pour la force et la posture) en gardant le bébé dans la même position pendant une longue période. En utilisant Koala Perfect Head Breastfeeding, vous pouvez continuer à bercer votre bébé sans craindre que sa tête ne souffre.
- Koala Perfect Head Breastfeeding est particulièrement recommandé aux mamans qui ont développé une mammite pendant l'allaitement et qui doivent.

donc privilégier la position couchée du bébé pendant l'allaitement.

## **Comment laver Koala Perfect Head Breastfeeding ?**

La taie d'oreiller extérieure est amovible et lavable en machine à 30°.

Instructions pour laver la taie d'oreiller :

- Si la taie d'oreiller est particulièrement sale, elle peut également être lavée à 40°. Cependant, avec un lavage à cette température, la même résistance que le coton n'est pas garanti.
- Nous vous recommandons de ne pas blanchir, de ne pas repasser, de ne pas nettoyer à sec et de ne pas utiliser de détachants avec des solvants.

Il est essentiel de ne pas laver l'oreiller interne en memory foam. Si elle est immergée dans l'eau, la mousse à mémoire de forme l'absorbera, perdra sa forme et deviendra inutilisable.

## **Comment est fabriqué Koala Perfect Head Breastfeeding ?**

Taie d'oreiller : 75 % coton, 25 % polyester

Oreiller : 100 % Memory Foam



[koalababycare.com](https://koalababycare.com)  
[help@koalababycare.com](mailto:help@koalababycare.com)