

PERFECT HEAD MAXI



Dispositivo medico
Classe 1



Chi siamo

Koala Babycare nasce agli inizi del 2017 da due giovani ingegneri appassionati di Impresa e Innovazione che hanno ideato la linea **Koala Perfect Head: Koala Perfect Head, Koala Perfect Head Maxi e Koala Perfect Head Breastfeeding**. Si tratta di cuscini ergonomici per neonati che aiutano a prevenire Plagiocefalia posizionale o a trattarla se già presente.

I cuscini sono stati progettati in base a un'attenta analisi delle esigenze dei neogenitori e delle soluzioni già presenti sul mercato, con lo scopo di realizzare **degli ausili ottimali per aiutare a prevenire la comparsa della Plagiocefalia posizionale o a trattarla se già presente**.

La struttura delle tre versioni del **Koala Perfect Head** è stata studiata per accogliere la testa del neonato in modo delicato ma efficace.

Il design dei cuscini, unico nel suo genere, è stato brevettato e ha ottenuto il **marchio CE** come **Dispositivo Medico di Classe I** e il riconoscimento come **Prodotto Ergonomico** dall'Istituto di Salute e Ergonomia tedesco (IGR), a testimonianza del valore delle sue caratteristiche.

Anche i materiali di realizzazione sono stati scelti con estrema cura: entrambi i cuscini sono realizzati in memory foam BASF di altissima qualità, mentre la federa in cotone risulta traspirante e morbida ed è certificata **OEKO TEX**.

Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un utilizzo pratico, corretto e sicuro del cuscino e dei preziosi consigli per il posizionamento del tuo piccolo.

Se hai qualsiasi dubbio non esitare a contattarci tramite la mail a:

info@koalababycare.com

Sapremo aiutarti e consigliarti con la massima gentilezza e disponibilità!

La Plagiocefalia posizionale

La Plagiocefalia posizionale è una sindrome ancora poco conosciuta, nonostante la sua incidenza sia fortemente aumentata da quando, nel 1992, le linee guida dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per il sonno sicuro, hanno suggerito di far dormire i neonati in posizione supina e privi di cuscino.

Le ossa del cranio sono connesse tra di loro in modo molto debole nei primi mesi di vita, per questo motivo, se una pressione viene applicata in modo prolungato sullo stesso punto del cranio, le ossa possono spostarsi. Questo fenomeno è chiamato **Plagiocefalia posizionale (altrimenti detta Testa Piatta)**.

Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se il vostro bimbo dorme nella stessa posizione tutte le notti, durante i pisolini e durante gli altri momenti della giornata.

La posizione supina, che è la più sicura per la prevenzione della SIDS nel primo anno di vita, se mantenuta per un tempo prolungato può quindi portare ad un appiattimento del cranio.

I medici e i pediatri sono il primo punto di riferimento dei neogenitori, per questo è fondamentale rivolgersi a loro tempestivamente.

Per saperne di più sulle deformazioni craniche del neonato ti invitiamo a leggere questo articolo della Dott.ssa Maria Antonietta Bonanno: **Clicca qui**

Quando può presentarsi la Plagiocefalia Posizionale?

- Le cause possono essere **legate al parto**, come per esempio un parto gemellare (quando lo spazio per i feti è ridotto) oppure un bimbo molto grande che si muove poco all'interno del pancione.
- Può presentarsi anche **dopo la nascita** in seguito al verificarsi di diversi comportamenti, come per esempio un eccessivo mantenimento del neonato per troppe ore nella stessa posizione, oppure quando il bambino preferisce tenere la testolina girata sempre in una direzione sviluppando in questo modo un torcicollo posizionale.

Se dovessi notare una deformazione anche lieve nella testolina del tuo Bimbo parlane immediatamente con il tuo pediatra.

Per conoscere meglio i fattori che determinano la Plagiocefalia posizionale guarda il video articolo della Dott.ssa Maria Antonietta Bonanno: **Clicca qui**

Koala Perfect Head Maxi


Koala Perfect Head Maxi ha dimensioni (50cm) che lo rendono ideale per l'utilizzo nel lettino e nelle culle da co-sleeping come la next to me.

Raccomandiamo di utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto fino ai 6 mesi di vita del bambino (o finché non è in grado di rotolarsi su se stesso autonomamente).

Crescendo i bimbi inizieranno a muoversi di più durante il sonno (soprattutto durante la notte quando il sonno è prolungato) e **Koala Perfect Head Maxi**, grazie alla sua dimensione, aiuta a mantenere la testa del bimbo sul cuscino nonostante i movimenti.

Come utilizzo Koala Perfect Head Maxi?

- 1) Utilizzare **Koala Perfect Head Maxi** negli appositi dispositivi: lettino o culla da co-sleeping (es. Next to me).
- 2) Posizionare il bambino sempre in **posizione supina** (con il viso rivolto verso l'alto) fino al compimento del primo anno di età.

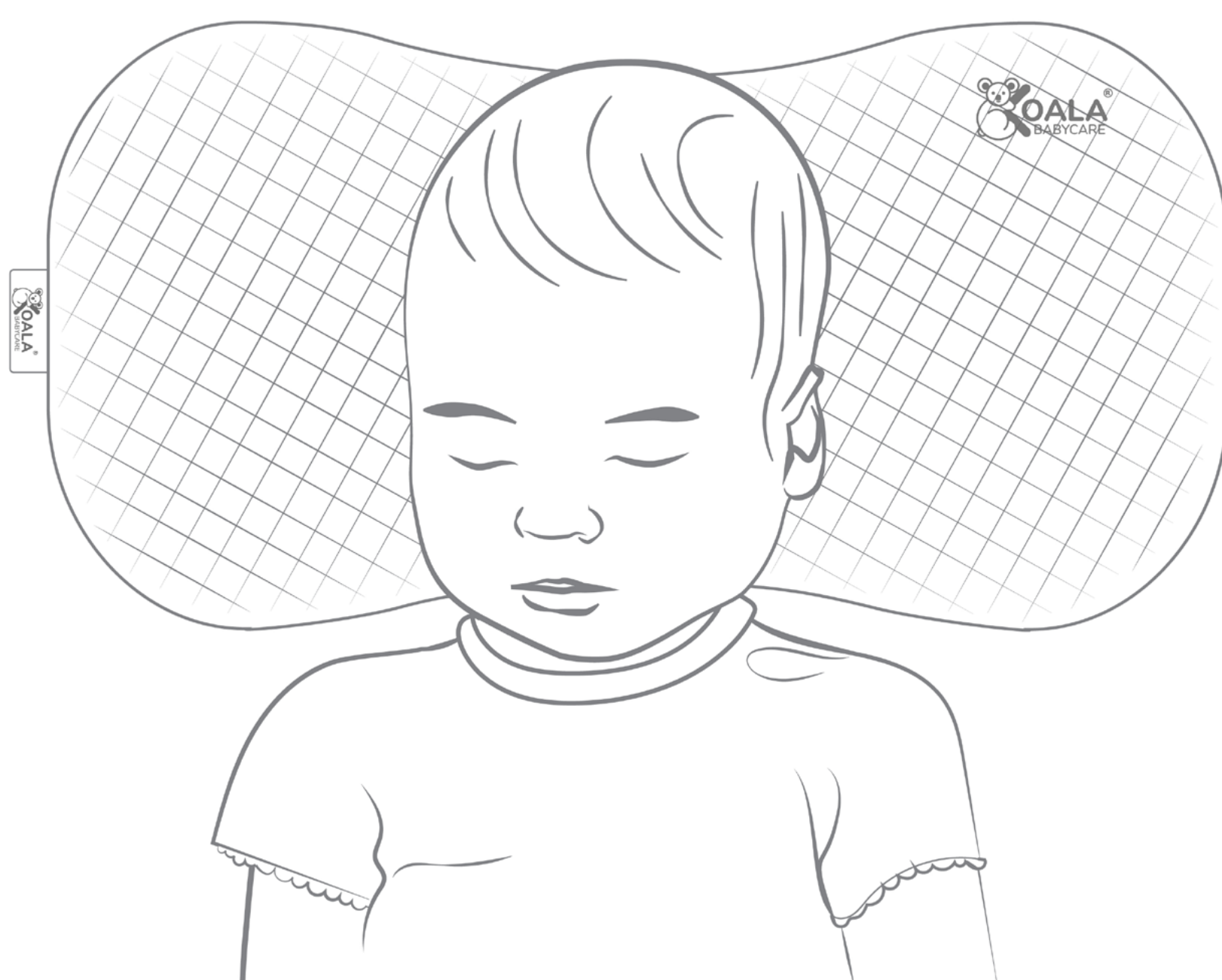



3) Posizionare la nuca del bambino al centro del cuscino, in prossimità della conca centrale: questa particolare struttura assicura il massimo comfort al bambino che crescendo potrà muoversi liberamente. Allo stesso tempo garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni del cranio anche al di fuori della conca.

4) Accertarsi che le spalle rimangano fuori dal cuscino: questo consente di mantenere la corretta postura della schiena e della cervicale e fa sì che la nuca sia centrata nell'apposito foro.

5) Se il bambino presenta già una **Plagiocefalia laterale**, durante le ore di veglia andrebbe posizionato sul lato opposto a quello colpito da Plagiocefalia.

6) Il memory foam ripartirà la pressione della testa su una superficie molto ampia, riducendo quindi le pressioni localizzate che causano la Plagiocefalia.

7) Per la massima sicurezza consigliamo ai genitori di **non praticare bed sharing** (la condivisione del letto) perché è una pratica ritenuta pericolosa per i bambini nei primi anni di vita.

Cos'altro posso fare per combattere la Plagiocefalia posizionale?

Per massimizzare l'efficacia del prodotto, suggeriamo di utilizzare **Koala Perfect Head Maxi** in abbinamento a **Koala Perfect Head** e **Koala Perfect Head Breastfeeding**.

Koala Perfect Head ha un design ultracompatto e leggero ed è pensato per essere trasportato facilmente. Il suo utilizzo ideale è dentro carrozzine, sdraiette o passeggini.

Koala Perfect Head Breastfeeding invece è pensato specificamente per proteggere la testolina del piccolo durante l'allattamento naturale e artificiale e può essere utilizzato durante tutto il primo anno di vita.

Utilizzando i cuscini della linea **Koala Perfect Head** e **seguendo delle semplici abitudini quotidiane** come quelle che trovi qui sotto, potrai contribuire a prevenire la **Plagiocefalia posizionale**.

Ecco alcune semplici abitudini che ti consigliamo di seguire:

- Quando cambi il tuo piccolo, attira la sua attenzione con un gioco in modo che muova la sua testa a destra e sinistra: questo lo abituerà a non mantenere sempre la stessa posizione.
- Tieni il bimbo in braccio quando possibile.
- Prediligi l'utilizzo di una fascia portà bebe o di un marsupio durante i riposini e le attività quotidiane.
- Nella culla e nel box cambia la posizione delle giostrine durante il giorno in modo da farlo girare con la testa in posizioni diverse.
- Utilizza un cuscino allattamento: in questo modo il bimbo non effettuerà una pressione diretta sul vostro braccio.
- Il bambino si girerà sempre nella vostra direzione, quindi se il bambino dorme nella vostra stanza alternate la posizione della culla in modo che non si giri sempre dallo stesso lato.
- Se possibile, da sveglio, tenetelo il meno possibile in culle, passeggini e sdraiette!
- Dal 2° mese e solo se sveglio e sorvegliato eseguite il Tummy Time: posizionatelo in posizione prona (a pancia sotto), stimolandolo a tenere la testa dritta, questa attività lo aiuterà a rinforzare la muscolatura di collo e schiena.

Come lavare Koala Perfect Head Maxi

Mi raccomando NON LAVARE IL MEMORY FOAM (il cuscino interno)!

Se immerso in acqua il memory foam la assorbirà perdendo la sua forma e diventando di conseguenza totalmente inutilizzabile.


Qualora volessi lavare il cuscino interno potrai bagnare un panno di cotone o microfibra in acqua tiepida (eventualmente con l'aggiunta di un goccio di sapone delicato) e pulire le macchie con gesti lievi senza esercitare troppa pressione. Lascialo poi asciugare in una zona molto areata mantenendo sempre la posizione orizzontale, mai appeso.

Ecco alcune indicazioni per il lavaggio delle federe:

- Temperatura massima: 30°C. Se le federe sono particolarmente sporche potrai lavarle anche a 40°. Tuttavia non garantiamo che il cotone resista all'infinito con lavaggi a questa temperatura.
- Non candeggiare.
- Non stirare
- Non pulire a secco, non utilizzare smacchiatori con solventi.

Di cosa è fatto Koala Perfect Head Maxi

- Dimensioni: 50 × 25,5 × 3
- Federa: 75% Cotone, 25% Polyester
- Cuscino: 100% Memory Foam

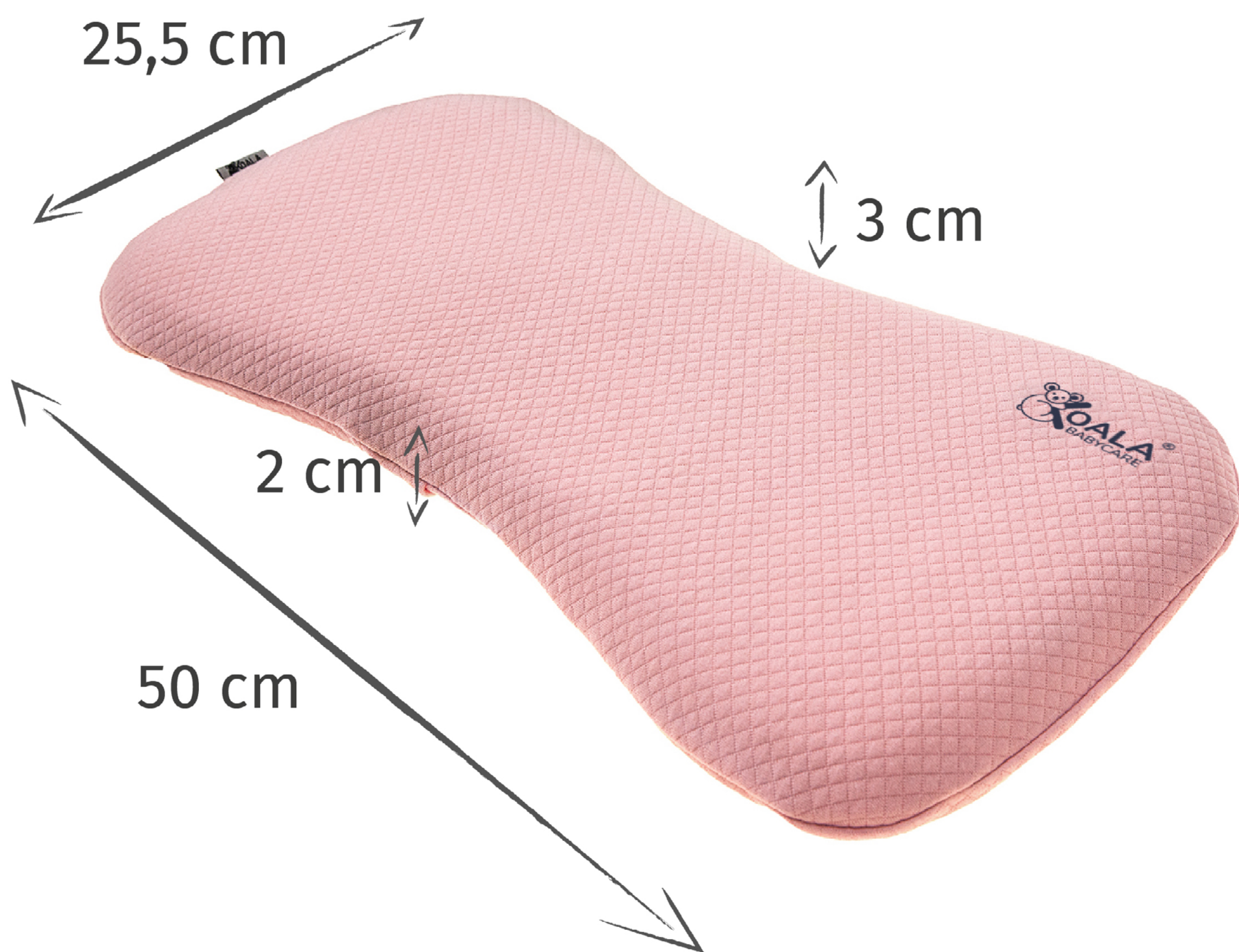

Unisciti alla Community
di Koala Babycare



Registrati alla nostra community, otterrai fino al **20% di sconto** da utilizzare per l'acquisto dei prodotti **Koala Babycare**! Che aspetti?

<https://koalababycare.com/koala-family>