




koala
babycare


koala perfect head maxi

instrucciones de uso


1.


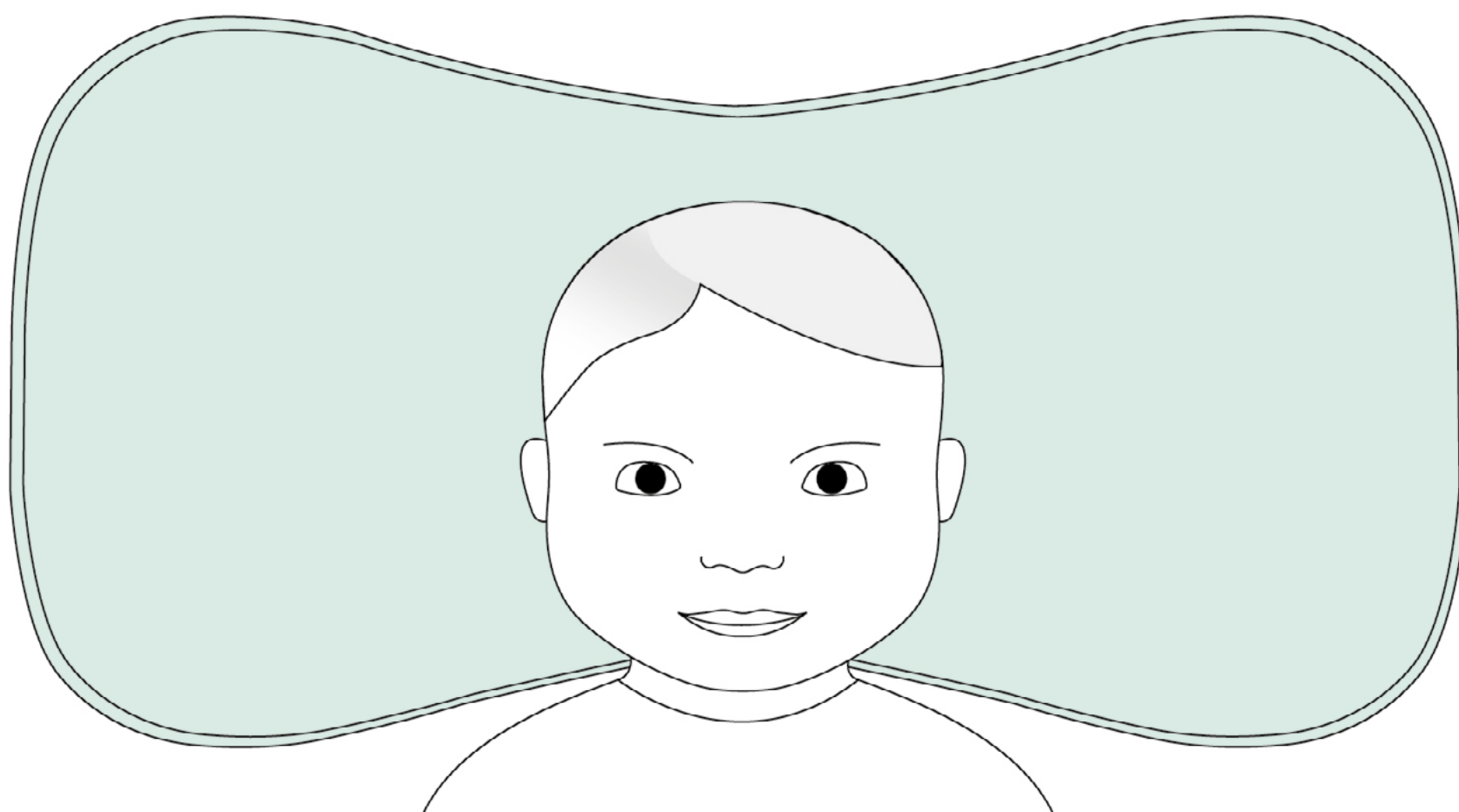


2.

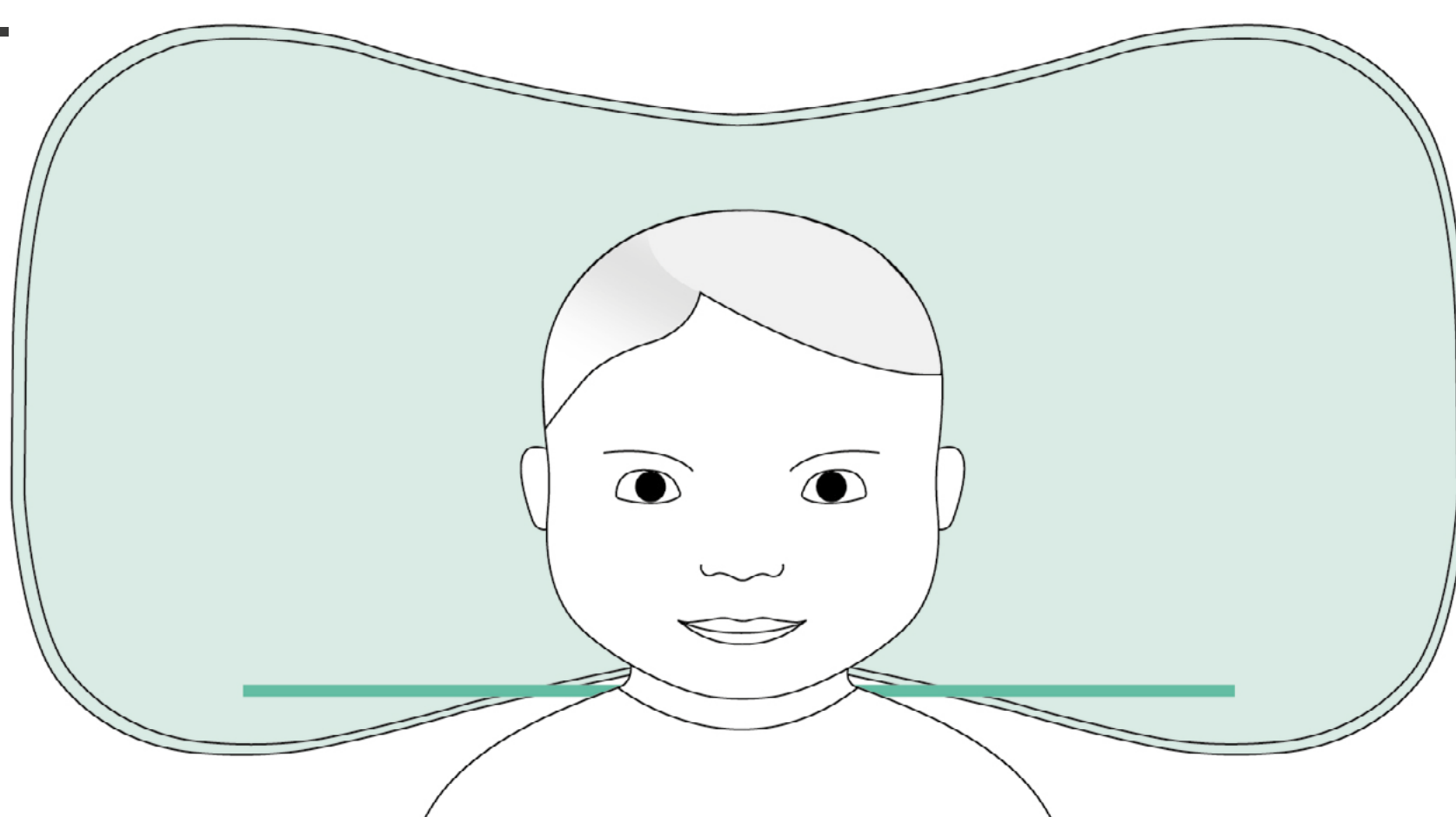

3.

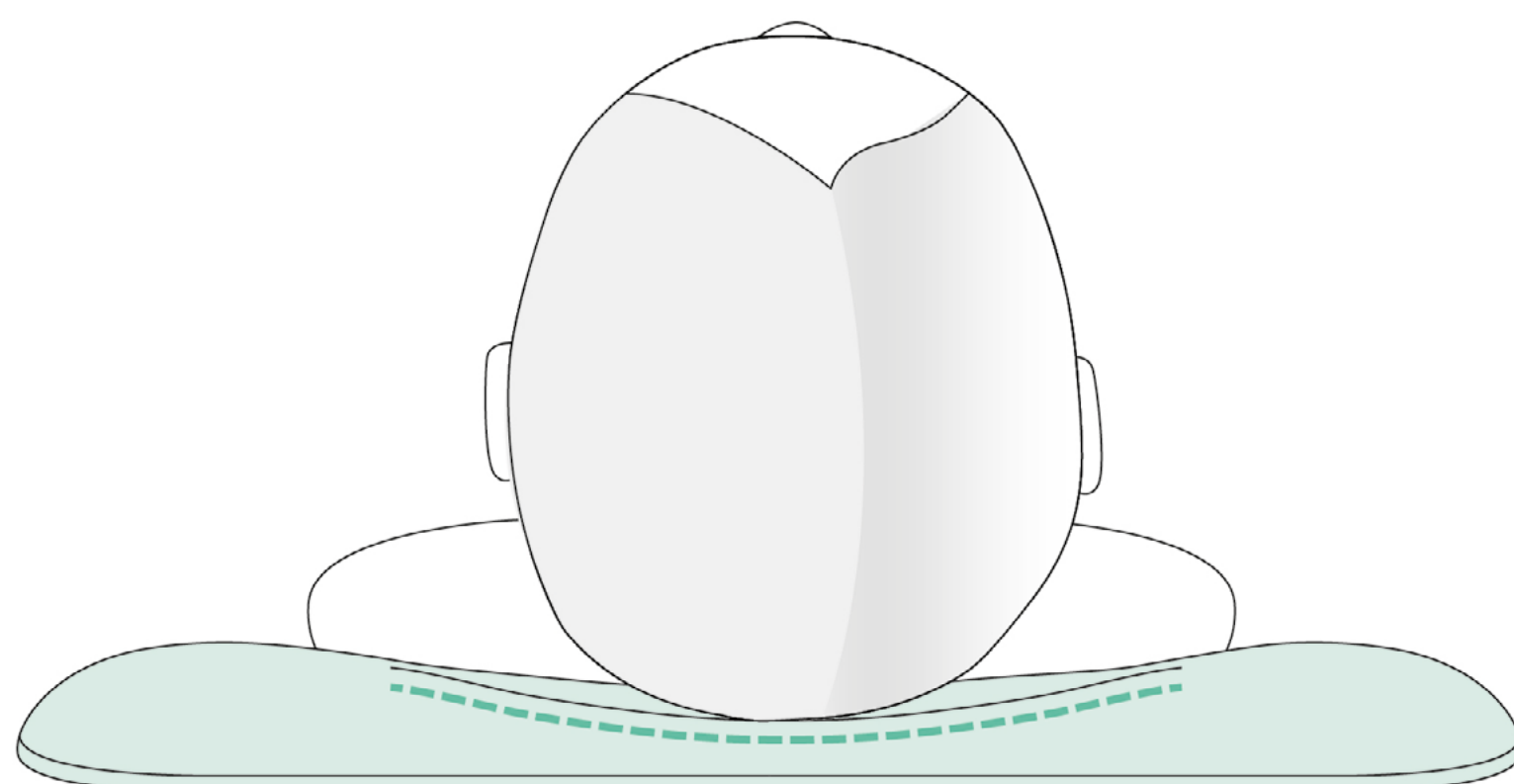

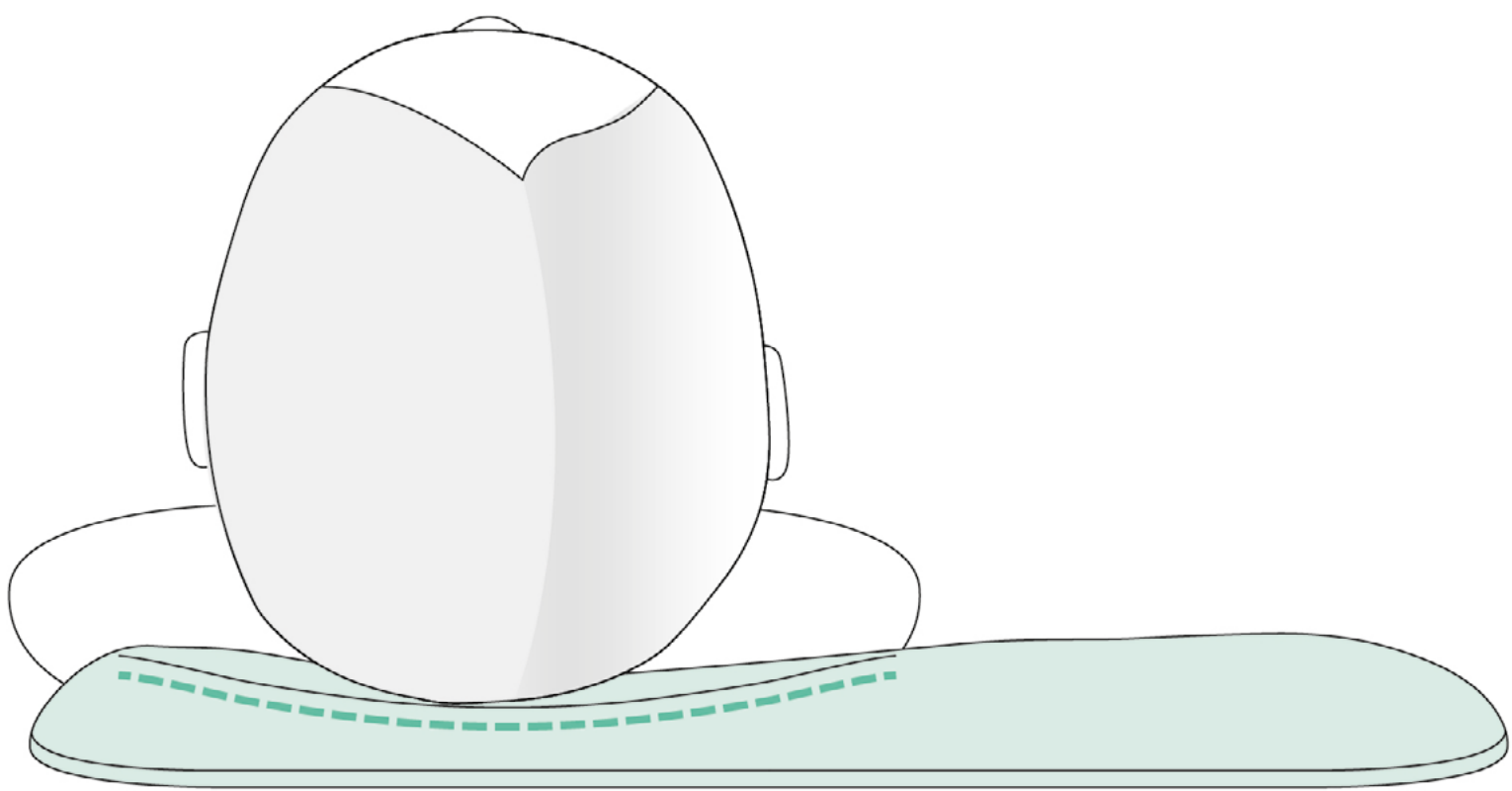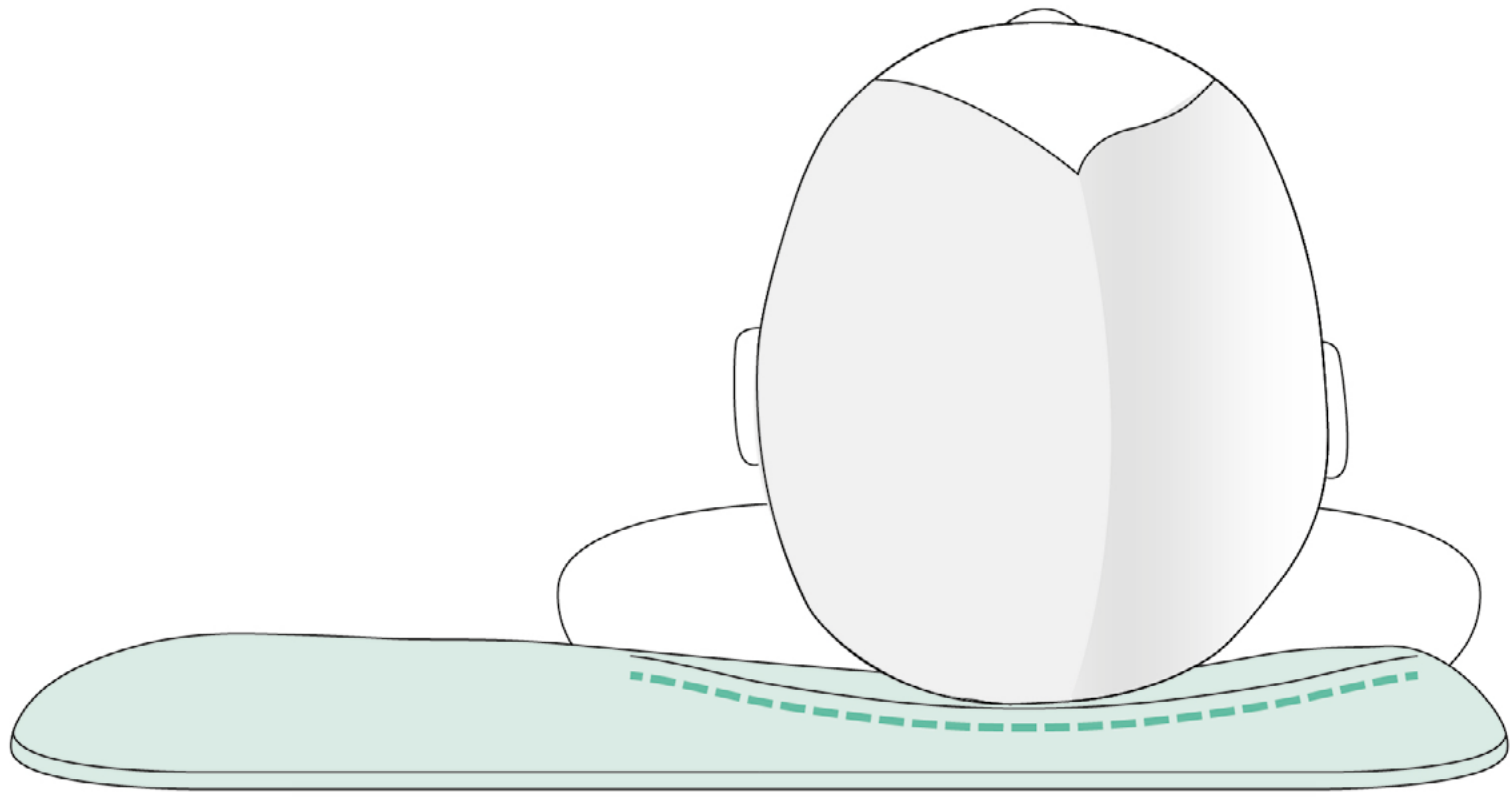

¿Cómo se utiliza Koala Perfect Head Maxi ?

Koala Perfect Head Maxi no es una simple almohada para bebés, sino un **producto sanitario de clase 1 para la prevención y el tratamiento de la plagiocefalia (comúnmente conocida como síndrome de la cabeza plana) y la braquicefalia.**

El Koala Perfect Head Maxi está especialmente diseñado para su uso en cunas de colecho, cunas y camas. También puede utilizarse para jugar en la alfombra o en el gimnasio.

Puede utilizarse hasta los 36 meses de edad. Es ideal tanto para los recién nacidos como cuando los bebés crecen y empiezan a moverse más. De hecho, su tamaño (50 cm) permite a los bebés moverse libremente hacia los lados sin que su cabeza se salga de la almohada, combinando la prevención de la plagiocefalia y la braquicefalia con el desarrollo psicomotor fisiológico.

- 1. Coloque siempre al niño en posición supina** (boca arriba) hasta que cumpla un año.
- 2. Coloca la nuca del niño en el centro de la almohada, en correspondencia con la depresión central:** la almohada está diseñada para garantizar el máximo confort del niño, que podrá moverse libremente a medida que crezca. Al mismo tiempo, garantiza una distribución óptima de las presiones craneales fuera de la depresión.
- 3. Asegúrese de que los hombros quedan fuera de la almohada:** esto permite mantener la postura correcta de la espalda y el cuello y asegúrate que la nuca esté centrada en la depresión central.

Siguiendo correctamente estos tres sencillos pasos, la espuma viscoelástica distribuirá la presión de la cabeza del bebé sobre toda la superficie, reduciendo las presiones localizadas que causan la plagiocefalia. **El diseño delgado** de la almohada está pensado para asegurar una buena postura de la cabeza y la espalda y evitar que el cuello del bebé se incline hacia el pecho, manteniendo las vías respiratorias libres en todo momento.

Recomendamos que Koala Perfect Head Maxi se utilice bajo la supervisión de un adulto hasta que el bebé sea capaz de darse la vuelta por sí mismo, de acuerdo con las directrices de la OMS.

¿Cómo lavar Koala Perfect Head Maxi ?

La funda es extraíble y se puede lavar a máquina a 30°. Instrucciones de lavado de la funda:

- Si la funda está muy sucia, se puede lavar a 40°. El lavado a esta temperatura no garantiza la misma resistencia del algodón.
- Se recomienda no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no utilizar quitamanchas con disolventes. Es imprescindible no lavar la espuma viscoelástica. Si se sumerge en agua, la espuma viscoelástica la absorberá, perdiendo su forma y quedando inservible.

¿Cómo se fabrica Koala Perfect Head Maxi ?

Funda: 75% de Algodón, 25% Poliéster

Cojín: 100% espuma viscoelástica



koalababycare.com
help@koalababycare.com