




koala
babycare


koala perfect head

gebrauchsanleitung


1.

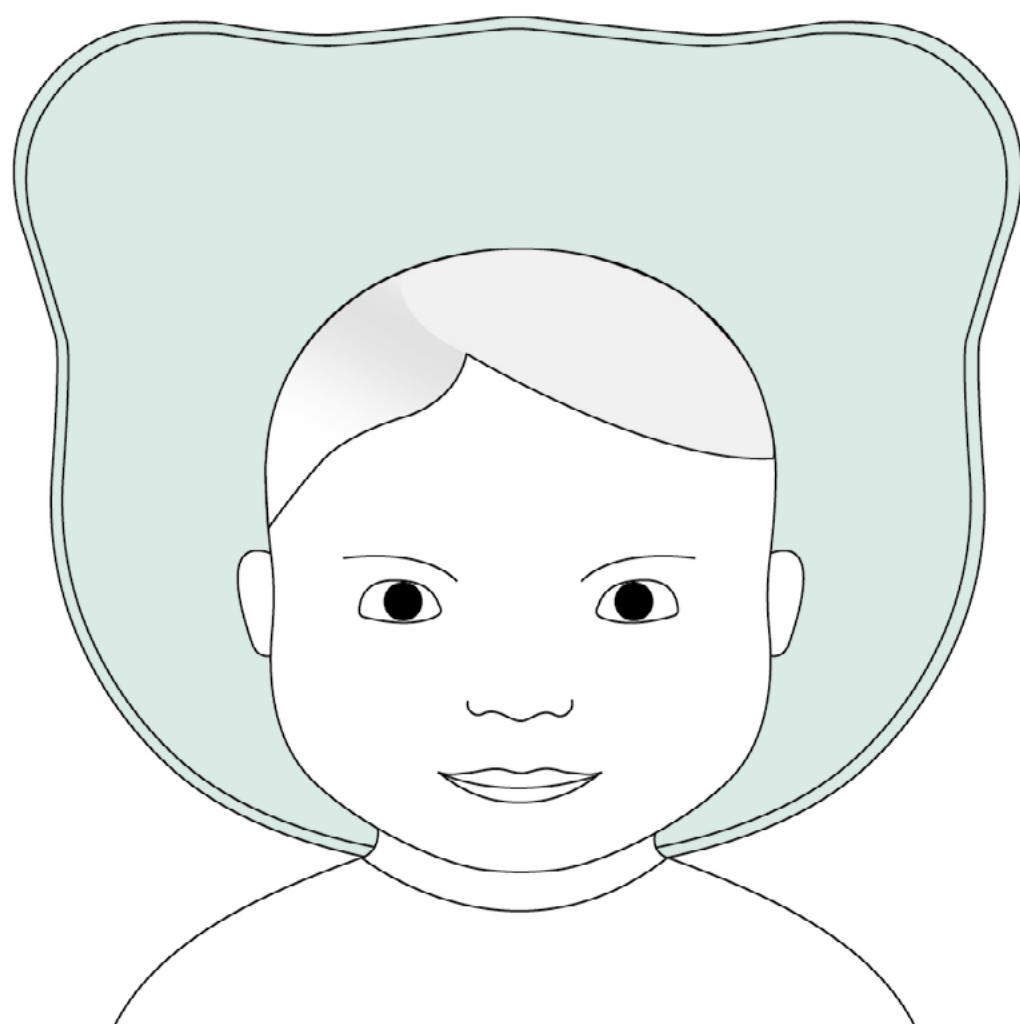

2.

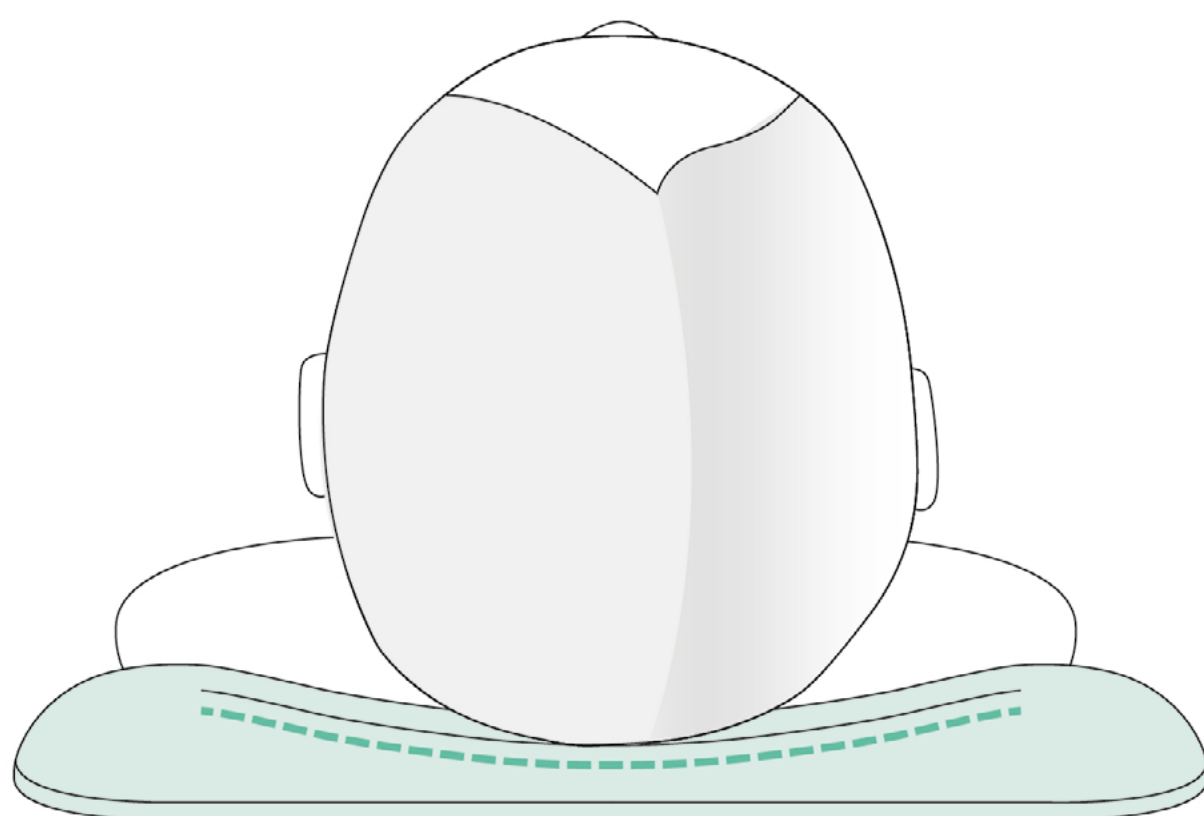

3.

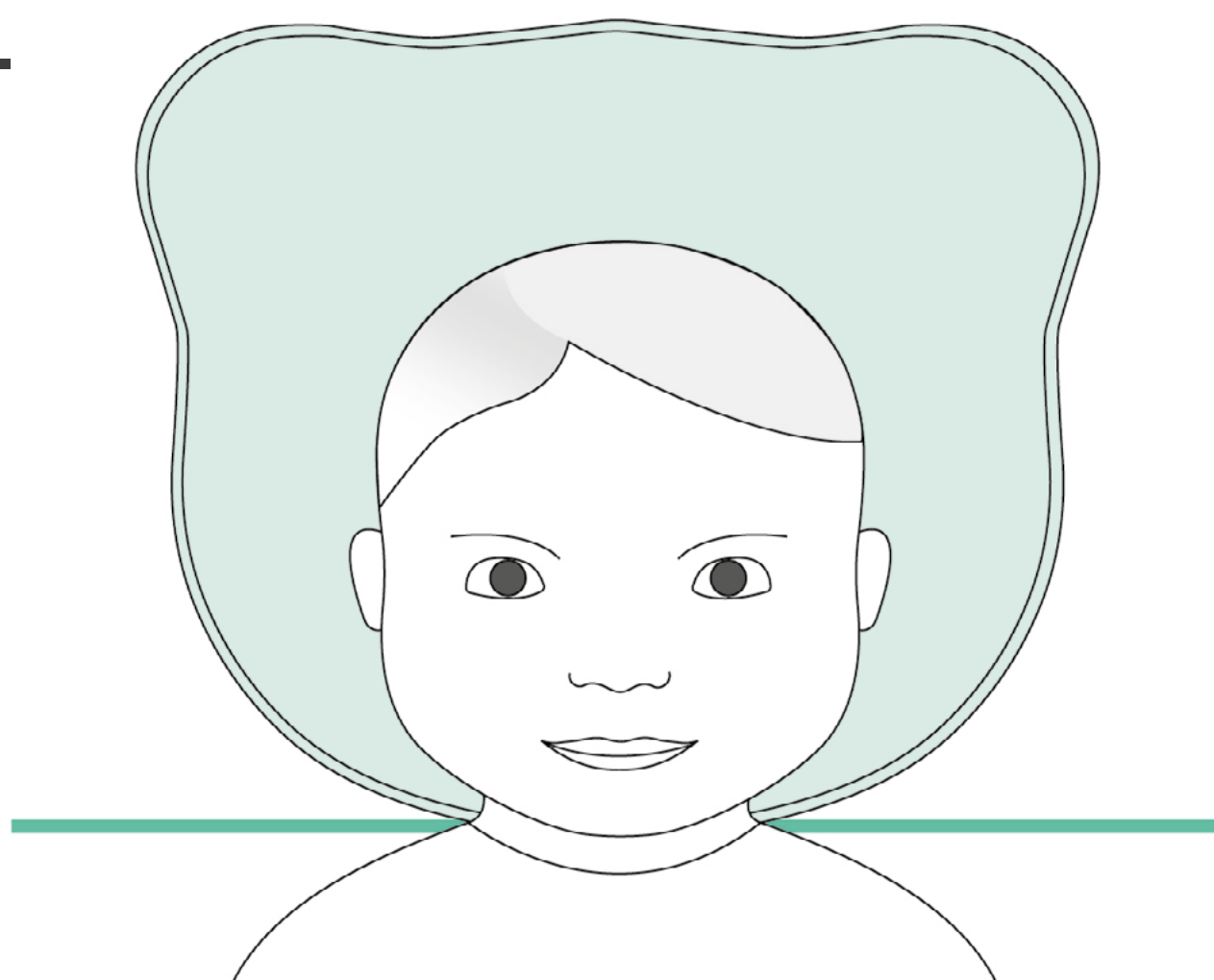

Wie verwende ich Koala Perfect Head ?

- 1) **Das Kind immer immer in die Rückenlage legen** (Gesicht nach oben).
- 2) **Den Nacken des Kindes in der Mitte des Lochs positionieren:** Auf diese Weise wird der Druck gleichmäßig über den gesamten Schädel verteilt und verhindert, dass sich der Kopf abflacht.
- 3) **Darauf achten, dass die Schultern unterhalb des Kissens liegen:** Dies hilft, die korrekte Haltung von Rücken und Nacken beizubehalten und stellt sicher, dass der Kopf in der vorgesehenen Öffnung zentriert ist.

Wenn diese drei einfachen Schritte richtig befolgt werden, verteilt der Memory-Foam den Druck auf den Kopf des Babys über eine große Fläche und reduziert so den lokalen Druck, der Plagiozephalie verursacht. Bewegt das Baby im Laufe des Tages seinen Kopf vom Kopfkissen weg? Machen Sie sich keine Sorgen, es ist normal, dass Babys ab dem zweiten Monat aktiver werden, sich mehr bewegen und die Position wechseln. Wir schlagen vor, dass Sie regelmäßig nach ihm sehen, um sein Köpfchen auf dem Kissen neu zu positionieren, wenn es nötig ist, um die Wirksamkeit zu maximieren.

Wir empfehlen, Koala Perfect Head unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden, bis das Kind in der Lage ist, sich selbständig umzudrehen.

Wie Koala Perfect Head waschen ?

Der äußere Kissenbezug ist abnehmbar und bei 30° in der Maschine waschbar.

Waschanleitung für den Kissenbezug

- Wenn der Kissenbezug besonders schmutzig ist, kann er auch bei 40° gewaschen werden. Allerdings garantiert das Waschen bei dieser Temperatur nicht die gleiche Widerstandsfähigkeit der Baumwolle.
- Wir empfehlen Ihnen, nicht zu bleichen, nicht zu bügeln, nicht chemisch zu reinigen und keine Fleckenentferner mit Lösungsmitteln zu verwenden.

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Memory-Foam nicht waschen. Wenn der Memory Foam in Wasser getaucht wird, nimmt er dieses auf, verliert seine Form und wird unbrauchbar.

Aus was besteht Koala Perfect Head?

Außerer Bezug: 75% Baumwolle 25% Polyester
Kopfkissen: 100% Memory Foam



koalababycare.com

help@koalababycare.com