




koala
babycare


koala perfect head

instrucciones de uso


1.

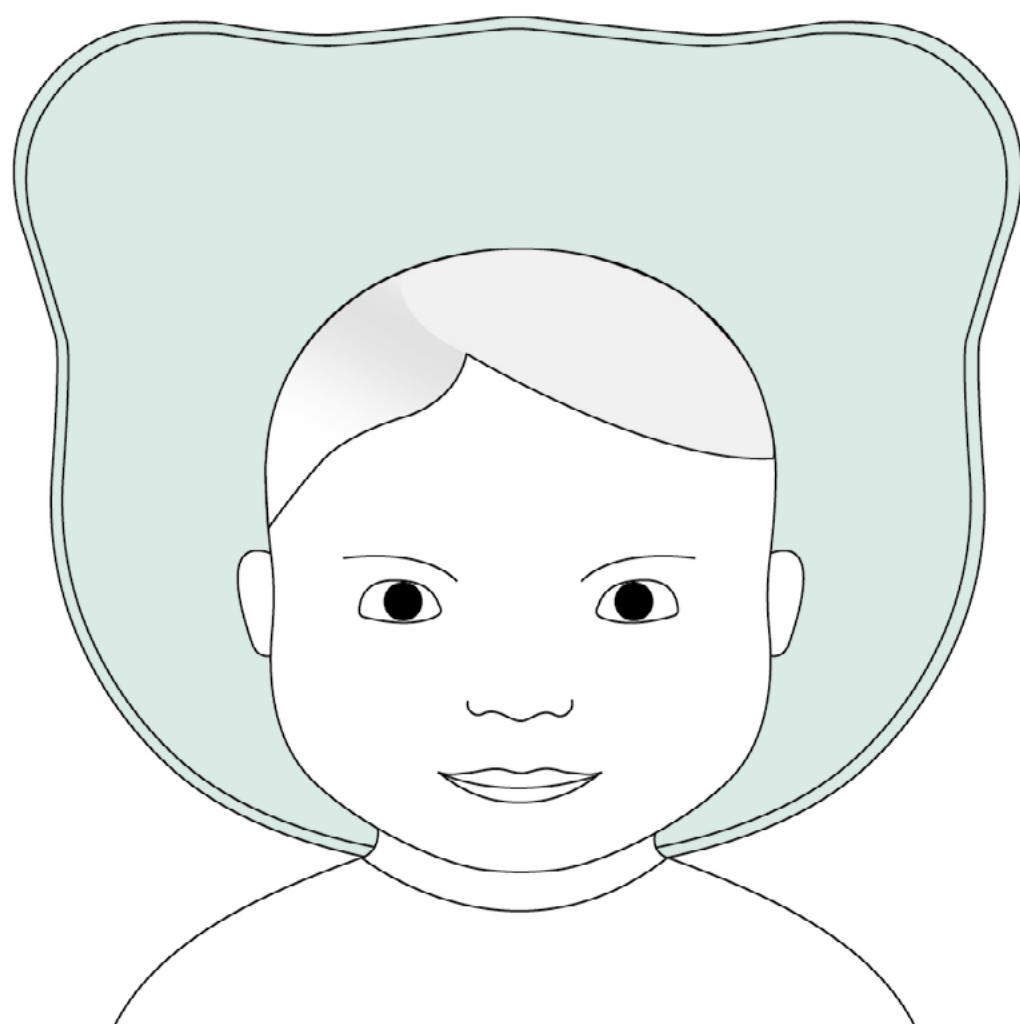

2.

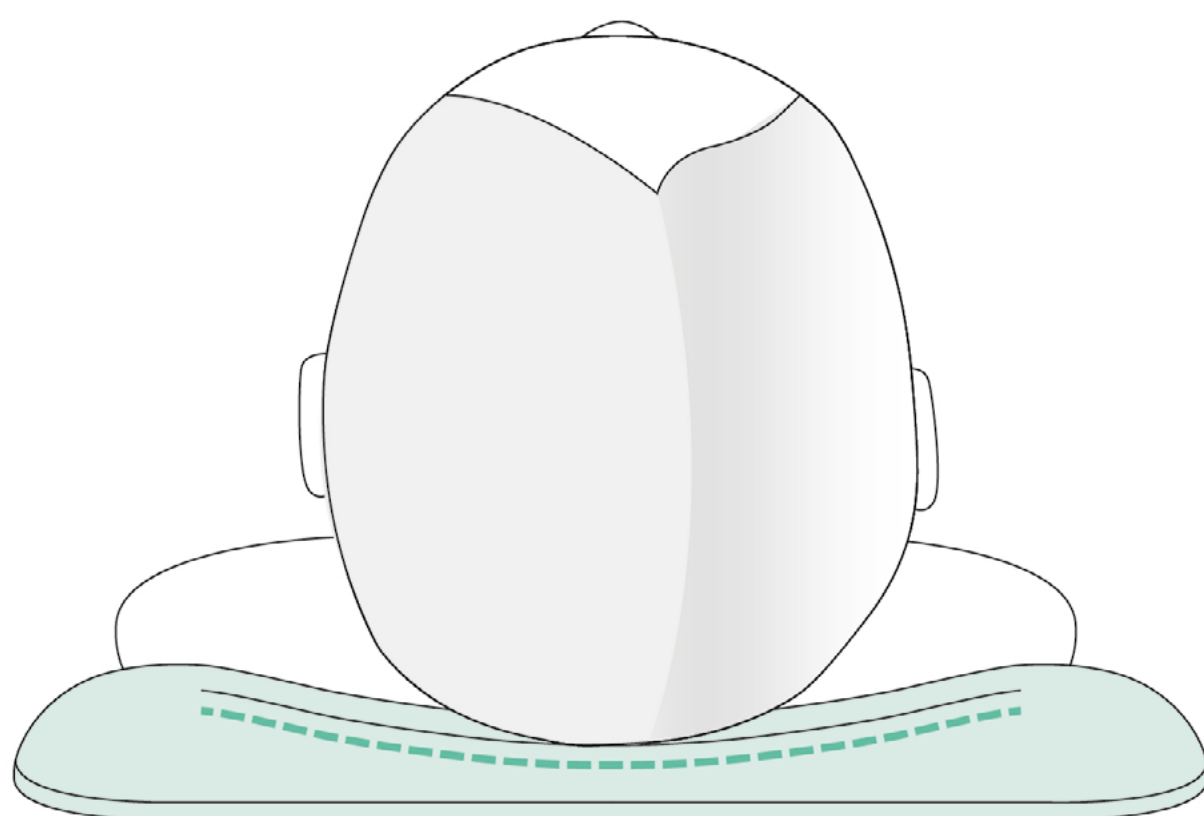

3.

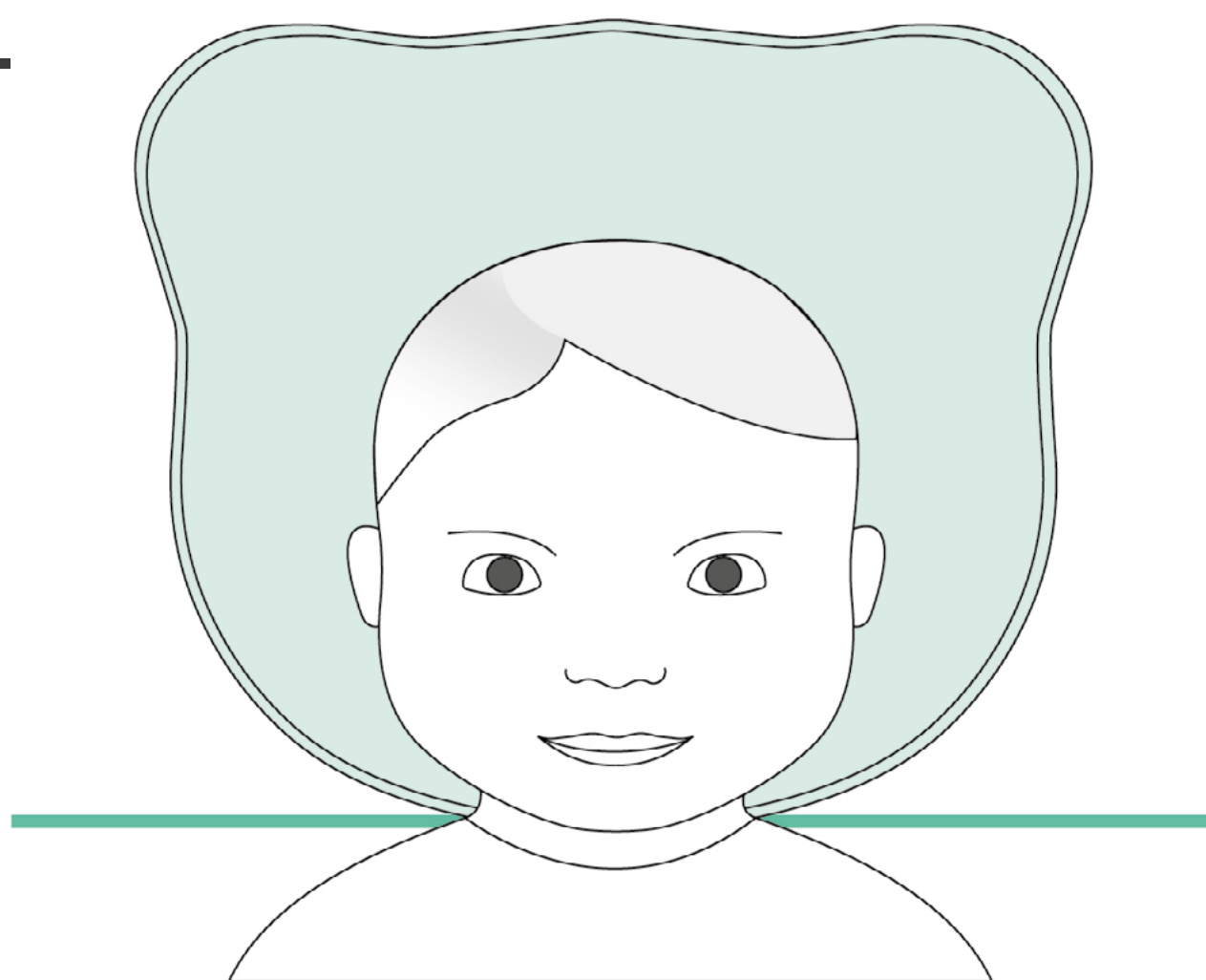

¿Cómo se utiliza Koala Perfect Head?

- 1) **Coloque siempre al bebé en posición supina** (boca arriba).
- 2) **Coloca la parte posterior de la cabeza del bebé en la hendidura central:** de este modo, la presión se distribuirá uniformemente por toda la zona del cráneo, evitando que se forme una zona plana.
- 3) **Asegúrate de que los hombros de tu bebé no estén sobre la almohada:** esto asegura que el bebé mantenga una postura correcta de la espalda y el cuello y ayuda a mantener su cabeza en posición central en la hendidura.

Siguiendo correctamente estos tres sencillos pasos, la almohada de espuma viscoelástica distribuirá la presión de la cabeza del bebé sobre una amplia zona, reduciendo la presión localizada que es la causa de la plagiocefalia (síndrome de cabeza plana).

¿Tu bebé tiene tendencia a mover la cabeza por la almohada a lo largo del día? No tienes que preocuparte, es normal; a partir de los dos meses, los bebés se vuelven más activos y cambian de posición. Le recomendamos que compruebe con frecuencia y cambie la posición de su cabeza en la almohada cuando sea necesario, para obtener los máximos resultados.

Recomendamos que Koala Perfect Head se utilice bajo la supervisión de un adulto hasta que el bebé sea capaz de darse la vuelta por sí mismo.

¿Cómo lavar Koala Perfect Head?

La funda es extraíble y se puede lavar a máquina a 30°. Instrucciones de lavado de la funda:

- Si la funda está muy sucia, se puede lavar a 40°. El lavado a esta temperatura no garantiza la misma resistencia del algodón.
- Se recomienda no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no utilizar quitamanchas con disolventes. Es imprescindible no lavar la espuma viscoelástica. Si se sumerge en agua, la espuma viscoelástica la absorberá, perdiendo su forma y quedando inservible.

¿Cómo se fabrica Koala Perfect Head?

Funda: 75% de Algodón, 25% Poliéster

Cojín: 100% espuma viscoelástica



koalababycare.com

help@koalababycare.com