



koala
babycare

koala silver cups

instrucciones de uso

Koala Silver Cups

La lactancia materna es una de las experiencias más hermosas para una madre, pero también se pueden presentar problemas y dolores que arruinen este momento tan bonito.

Uno de los obstáculos más comunes son las grietas, pequeñas heridas causadas por la fricción entre el paladar y la lengua del bebé. Gracias a las pezoneras Koala Silver Cups, las copas de plata, podemos prevenir y tratar este inconveniente, protegiendo el seno de agentes externos y bacterias y aliviando el dolor desde las primeras 24/48 horas.

Advertencias e instrucciones de uso

Advertencias:

- Si tienes alguna alergia específica a la plata o en caso de reacciones alérgicas, interrumpe su uso inmediatamente.
- Utilizar única y exclusivamente en la zona del pezón.
- Respetar las siguientes instrucciones de uso, lavado y conservación. Un uso o almacenamiento inadecuado puede afectar las propiedades del producto.
- El producto no contiene Níquel.

Instrucciones de uso

- Después del primer uso, lava las pezoneras con agua fría y jabón neutro e inodoro, aclara y seca con un paño limpio. Repite las operaciones de lavado después de cada uso.
- Introduce las pezoneras entre tu pecho y el sujetador, colocándolas contra el pezón.
- En el momento de las tomas, retira las copas con cuidado.
- Cuando acabes de dar pecho, aplica una gota de tu leche o agua dentro de la copa para que se adhiera perfectamente al pecho.

Koala Babycare recomienda

- Empieza a usar las pezoneras de plata Koala Silver Cups entre 7 y 10 días antes del parto como medida preventiva.
- Recuerda lavar siempre las copas y secarlas con un paño seco para evitar la oxidación de la plata (ennegrecimiento).
- Si pierdes bastante leche, puedes meter discos absorbentes entre las copas Koala Silver Cups y el sujetador.
- Si la plata se ennegrece, puedes lavar las copas sumergiéndolas en agua fría y bicarbonato de sodio (50 g por litro) hasta que la mancha haya desaparecido. Si la mancha persiste, escríbenos un correo electrónico a help@koalababycare.com y encontraremos juntos una solución.

Ventajas de utilizar Koala Silver Cups

¿Por qué utilizar las Koala Silver Cups?

- Desde hace más de un siglo, la plata se utiliza en la medicina para tratar varios tipos de enfermedades cutáneas, aunque se ha descubierto que, en presencia de humedad, libera sustancias que ejercen una acción antibacteriana y cicatrizante.
- Su forma se adapta perfectamente al seno, protegiéndolo de un posible roce con la ropa y de agentes externos.
- Lo que nos ahorramos es evidente, tanto en términos económicos como ambientales. Una vez adquiridas las pezoneras, si se conservan de forma adecuada, pueden ser reutilizadas por la misma madre en futuros embarazos, evitando tener que comprar otros productos como cremas o pezoneras de usar y tirar.

Conservación

- Después de lavar las pezoneras con cuidado, guárdalas en su embalaje original, dentro de su saquito. Conserva el producto en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de fuentes de calor o de la luz solar.
- Recomendamos conservar todo el embalaje original. En caso de que se pierda o se tire, puedes guardar las pezoneras dentro de un paño limpio para evitar el contacto con el aire y la exposición a la luz, que ocasionan la oxidación de la plata.

Caducidad

Si has seguido todas las pautas de conservación y almacenamiento, el producto no tiene fecha de caducidad.



koalababycare.com

help@koalababycare.com