



koala
babycare

koala silver cups

mode d'emploi

Koala Silver Cups

L'allaitement est l'une des plus belles expériences pour une maman. Mais malheureusement, des obstacles et des douleurs peuvent survenir et risquent de ruiner ce beau moment. L'un des obstacles les plus courants sont les crevasses, de petites plaies créées par le frottement entre le palais et la langue du bébé. Grâce aux Koala Silver Cups, les protège-mamelons en argent, vous pouvez prévenir et traiter cet inconfort, en protégeant les seins des agents externes et des bactéries et en soulageant la douleur dès les premières 24 à 48 heures.

Avertissements et mode d'emploi

Avertissements:

- Si vous êtes au courant d'allergies spécifiques à l'argent ou si vous voyez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- Utiliser uniquement et exclusivement sur la zone autour du mamelon.
- Respecter les consignes d'utilisation, de lavage et de conservation suivantes. Une utilisation ou une conservation inappropriée pourrait compromettre les propriétés du produit.
- Le produit ne contient pas de NICKEL.

Mode d'emploi

- Lors de la première utilisation, lavez les protège-mamelons à l'eau froide et au savon neutre et inodore. Ensuite, rincez-les et séchez-les avec un chiffon propre. Répétez ces étapes après chaque utilisation.
- Insérez les protège-mamelons entre le sein et le soutien-gorge en les faisant reposer sur les mamelons.
- Pendant l'allaitement, retirez-les délicatement.
- Après l'allaitement, appliquez une goutte de lait ou d'eau à l'intérieur pour qu'ils adhèrent parfaitement au sein.

Koala Babycare conseille

- Commencer à utiliser les Koala Silver Cups 7 à 10 jours avant l'accouchement à titre préventif.
- Pensez à toujours laver les protège-mamelons et les sécher avec un chiffon sec pour éviter l'oxydation de l'argent et qu'il noircisse.
- Si une grande quantité de lait coule, utilisez des coussinets d'allaitement entre les protège-mamelons Koala Silver et le soutien-gorge.
- Si l'argent noircit, vous pourrez laver les protège-mamelons en les plongeant dans de l'eau froide et en ajoutant du bicarbonate de soude (50 g par litre) jusqu'à ce que la tache disparaisse.
- Si la tache ne part pas, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à : help@koalababycare.com et nous trouverons une solution ensemble

Avantages de l'utilisation de Koala Silver Cups

Pourquoi utiliser les protège-mamelons Koala Silver Cup ?

- Depuis plus d'un siècle, l'argent est utilisé en médecine pour traiter différents types de maladies de la peau. En effet, il a été constaté qu'en présence d'humidité, l'argent libère des substances qui exercent une action antibactérienne et cicatrisante.
- Leur forme adhère parfaitement au sein et le protège de tout frottement avec les vêtements ou agents extérieurs.
- Les avantages évidents tant en termes économiques qu'environnementaux. Une fois que vous les avez achetés, s'ils sont conservés correctement, ils peuvent également être utilisés pour de futures grossesses, évitant ainsi l'achat d'autres produits tels que des crèmes ou des protège-mamelon jetables.

Conservation

- Après les avoir bien lavés, remettez-les dans l'emballage d'origine, à l'intérieur de la boîte. Conservez l'emballage dans un endroit frais, sec et propre, à l'écart des sources de chaleur ou du soleil.
- Nous vous conseillons de conserver l'emballage complet pendant l'utilisation. En cas de perte, vous pouvez conserver vos protège-mamelons à l'intérieur d'un chiffon propre pour éviter le contact avec l'air et l'exposition à la lumière qui peuvent provoquer l'oxydation.

Date d'expiration

Si toutes les instructions pour la conservation sont suivies, le produit n'aura pas de date d'expiration.



koalababycare.com

help@koalababycare.com