



koala
babycare

koala silver cups

manuale d'uso

Koala Silver Cups

L'allattamento al seno è una delle esperienze più belle per una mamma, purtroppo però possono presentarsi ostacoli e dolori che rischiano di minare questo bel momento. Uno degli ostacoli più comuni sono le ragadi, delle piccole ferite che si creano a causa dello sfregamento tra il palato e la lingua del bambino.

Grazie a Koala Silver Cups, le coppette in argento, potrai prevenire e curare questo disturbo, proteggendo il seno da agenti esterni e batteri ed alleviando il dolore già nelle prime 24/48 ore.

Avvertenze e Istruzioni d'uso

Avvertenze:

- Se siete a conoscenza di eventuali allergie specifiche all'argento o dovessero presentarsi manifestazioni allergiche, sospenderne immediatamente l'utilizzo.
- Utilizzare solo ed esclusivamente sull'area intorno al capezzolo.
- Rispettare le seguenti indicazioni di utilizzo, di lavaggio e di conservazione. Un utilizzo o una conservazione non idonea potrebbe compromettere le proprietà del prodotto.
- Il prodotto non contiene NICHEL.

Istruzioni d'uso

- Al primo utilizzo lavare le coppette con acqua fredda e sapone neutro e inodore, risciacquare e asciugare con un panno pulito. Ripetere le operazioni di lavaggio a ogni utilizzo.
- Inserire le coppette tra il seno e il reggiseno appoggiandole ai capezzoli.
- Al momento dell'allattamento rimuovere le coppette delicatamente.
- Al termine dell'allattamento applicare una goccia di latte o acqua all'interno della coppetta in modo che possa aderire perfettamente al seno.

Koala Babycare consiglia

- Inizia a usare le coppette Koala Silver Cups da 7-10 giorni prima del parto come prevenzione.
- Ricordati di lavare sempre le coppette e asciugarle con un panno asciutto per evitare l'ossidazione dell'argento (annerimento).
- Se dovesse fuoriuscire una quantità abbondante di latte, usa delle coppette assorbilatte tra Koala Silver Cups e il reggiseno.
- Se dovesse presentarsi un annerimento dell'argento, potrai lavare le coppette immergendole in acqua fredda e bicarbonato di sodio (50 gr ogni Litro) finché la macchia non sarà sparita. Se la macchia dovesse persistere scrivici una mail a help@koalababycare.com e troveremo insieme una soluzione.

Benefici dell'utilizzo di Koala Silver Cups

Perché utilizzare le coppette in argento Koala Silver Cups?

- Da ormai più di un secolo l'argento è utilizzato in medicina per curare varie tipologie di malattie cutanee, infatti è riscontrato che in presenza di umidità rilascia sostanze che svolgono un'azione antibatterica e cicatrizzante.
- La loro forma aderisce perfettamente al seno proteggendolo da eventuali sfregamenti con indumenti o agenti esterni.
- L'evidente risparmio sia in termini economici che ambientali. Una volta acquistate le coppette, se conservate in modo idoneo, potranno essere utilizzate dalla stessa mamma anche per future gravidanze, evitando l'acquisto di altri prodotti come creme o paracapezzoli monouso.

Conservazione

- Dopo averlo appositamente lavato, riporlo nella sua confezione originale, all'interno della sua scatola. Tenere la confezione in un luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da fonti di calore o da raggi solari.
- Consigliamo di conservare tutta la confezione durante l'utilizzo, in caso si fosse persa o buttata potete conservare le vostre coppette all'interno di un panno pulito per evitare il contatto con l'aria e l'esposizione alla luce che ne provocano l'ossidazione.

Scadenza

Se per la conservazione del dispositivo si sono seguite tutte le linee guida il prodotto non ha data di scadenza.



koalababycare.com

help@koalababycare.com