

Leukotape® K

Vendaje Neuromuscular Elasticado

Descripción

Vendaje Neuromuscular Elasticado utilizado como tratamiento kinésico en lesiones deportivas, prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones del sistema músculo esquelético, manejo de tensión y dolor muscular, neuralgias, jaquecas, inestabilidad articular/artrosis, lumbago, cervicobraquialgia, tratamiento de linfedema, entre otros.

Características

- Mantiene completa movilidad de la zona de aplicación.
- Mejora la microcirculación sanguínea y linfática.
- Mejora el drenaje linfático y la propiocepción.
- Ayuda a reducir el dolor.
- Extensibilidad longitudinal aprox. $110 \pm 20\%$.
- Hidrofóbico.
- Fácil de cortar, bordes no se deshilachan luego de cortar el vendaje, no deja residuos adhesivos en tijeras.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Hipoalergénica.
- Buena adhesión inicial y permanente.
- No deja residuos adhesivos después de la extracción.
- Libre de látex.
- Vigencia 3 años.
- Almacenar protegido de la luz, en lugar fresco y seco, bajo 25°C.




Recomendaciones de uso

Según el tipo de aplicación, se adhiere el vendaje sin estirar o con diferentes grados de estiramiento. Antes de colocar el vendaje y retirar la lámina de soporte, se deben cortar las tiras del vendaje de la longitud deseada. Para ello se fabrican cortes en forma de "I", otros en forma de "Y" y en forma de "X", así como en la terapia linfática en forma de abanico y en tiras individuales angostas.

Salvo pocas excepciones, la colocación del vendaje se inicia con el pegado de una base sin tensar, que por lo general suele tener dos dedos de ancho. Partiendo de esta base, se pegan las tiras del vendaje correspondientes con los estiramientos previos necesarios, hasta la base extrema (también con dos dedos de ancho), que se pega sin estirar.

Los extremos de las tiras de vendaje deben recortarse de forma redondeada, evitando así, un desprendimiento prematuro y un enrollamiento indeseado de los extremos del vendaje. Gracias a esto, la aplicación de Leukotape® K puede permanecer por más tiempo. Así mismo, se debe considerar que después de la ducha no se deben frotar las tiras del vendaje con la toalla, sino que sólo se las debe presionar.

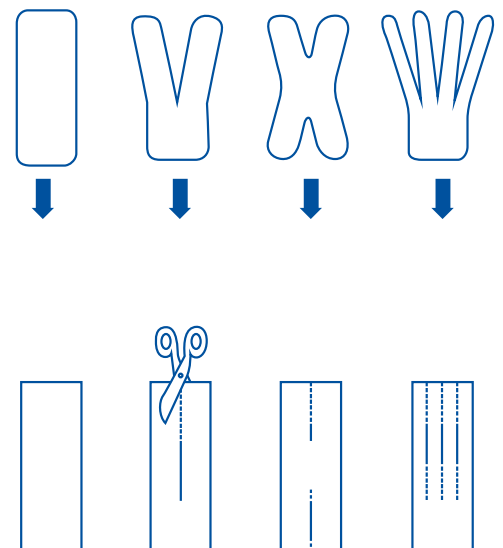

Composición

Sustrato: Tejido elasticado hecho de algodón.

Peso: 80 – 100 g/m²

Masa adhesiva: Adhesivo acrílico.

Peso: 125 ± 15 g/m²

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72978-00020	LEUKOTAPE K 2.5Cm x 5M Azul	1 Rollo
72978-00010	LEUKOTAPE K 2.5Cm x 5M Piel	1 Rollo
73443-00015	LEUKOTAPE K 2.5Cm x 5M Rojo	1 Rollo
72978-00021	LEUKOTAPE K 5Cm x 5M Azul	1 Rollo
72978-00024	LEUKOTAPE K 5Cm x 5M Celeste	1 Rollo
72978-00023	LEUKOTAPE K 5Cm x 5M Negro	1 Rollo
72978-00011	LEUKOTAPE K 5Cm x 5M Piel	1 Rollo
72978-00016	LEUKOTAPE K 5Cm x 5M Rojo	1 Rollo
72978-00025	LEUKOTAPE K 5Cm x 5M Rosado	1 Rollo
72978-00012	LEUKOTAPE K 7.5Cm x 5M Piel	1 Rollo
72978-00017	LEUKOTAPE K 7.5Cm x 5M Rojo	1 Rollo
72978-00022	LEUKOTAPE K 7.5Cm x 5M Azul	1 Rollo

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 9001 - ISO 13485