

## FICHA TECNICA

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** **Tubo Corrugado**

**MARCA:** Global Healthcare

**DESCRIPCION:** Tubo o manguera corrugado usado para terapia de aerosol, 22 mm. de diámetro interno, 30 m de longitud y segmentado cada 15 cm. flexible traslucido, liviano, resistente a quiebres.

**COMPOSICION:** PVC grado medico, sin látex

**PRESENTACIONES COMERCIALES:** por unidad en bolsa plástica 85 x 85 cm. 1tubo/caja corrugada de alto 20 cm. Ancho 49 cm. Largo 49 cm.

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas	Kg.	Código UCC-12
63-505	Tubo Corrugado	1tubo/caja	19x48x48	2.4	872237005567

**TIPO DE CONSERVACION:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Aerosolterapia una forma de inhaloterapia en la que un fármaco se administra directamente a su lugar de acción, lo que permite el empleo de dosis menores y proporciona una respuesta terapéutica más rápida y en general con menos efectos sistemáticos, el tubo también se adapta a una amplia variedad de conectores de equipos para terapia respiratoria y otros procedimientos.

**Instrucciones de uso:** Conecte el Tubo o manguera corrugada a la mascarilla 2.- Seleccione en el dispositivo de la mascarilla la  $FiO_2$  desea administrar 3.- Sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 4.- Pase la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada en la cara. 5.- Adapte la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 6.- Seleccione en el caudalímetro el flujo de oxígeno prescrito.

**INDICACIONES.** El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación. Al seleccionar un flujo de Oxígeno es importante considerar las reservas disponibles en relación con el tiempo de traslado. Por ejemplo: Si disponemos de un tubo de Oxígeno de 0,5 m<sup>3</sup> que contiene 500 litros de oxígeno y graduamos el flujo a 15 l/minuto, consumiremos la carga en 33 minutos.

**OBSERVACIONES:** Descartar luego de usar, **No usar** si el paquete esta abierto o dañado (producto desechable)



TUBO CORRUGADO