

ACTICOAT[®]FLEX 3, apósito antimicrobiano flexible de plata nanocristalina.



Descripción

El apósito ACTICOAT FLEX 3 está formado por una capa de poliéster flexible poco adherente recubierta de plata nanocristalina. El apósito se adapta fácilmente al contorno del cuerpo para mantener un buen contacto con la superficie de la herida. El apósito es poco adherente, lo que ayuda a disminuir al mínimo el traumatismo causado en la herida por los cambios de apósito. La plata nanocristalina proporciona una eficaz barrera antimicrobiana contra la contaminación patógenos, protege la herida de la invasión de microorganismos, lo cual favorece una cicatrización más rápida. La plata nanocristalina también es eficaz contra los microorganismos presentes en la herida. Las propiedades de barrera bactericida de ACTICOAT FLEX 3 se conservan durante un mínimo de 3 días.

Modo de Acción

Acticoat Flex 3 está formado por una capa de poliéster flexible poco adherente recubierta de plata nanocristalina que libera plata de manera rápida a los 30 minutos de haber sido aplicado, y esta liberación es sostenida durante 3 días a una concentración de 70 a 100 ppm. Eficacia comprobada en más de 360 patógenos incluidos.

Indicaciones

ACTICOAT FLEX 3 está indicado como un apósito barrera antimicrobiana para las heridas de espesor parcial a total, como quemaduras, zonas receptoras de injertos, heridas quirúrgicas, úlceras por presión, úlceras venosas y úlceras diabéticas. ACTICOAT FLEX 3 puede utilizarse en heridas infectadas. Cuando se utilice en este tipo de heridas, la infección debe inspeccionarse y tratarse conforme al protocolo clínico local. ACTICOAT FLEX 3 puede utilizarse como capa de contacto con la herida conjuntamente con un sistema de tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) durante un periodo máximo de 3 días.

Contraindicaciones

- No se use en pacientes con sensibilidad a la plata.
- Es incompatible con productos de bases oleosas.
- Se debe evitar el contacto con electrodos o geles conductores en mediciones electrónicas como electroencefalogramas y electrocardiogramas.
- No debe utilizarse en pacientes durante exploraciones de RM (Resonancia Magnética).
- No use el producto si el color del apósito no es uniforme
- Antes de administrar radioterapia, retire el apósito ACTICOAT FLEX 3. Después de cada tratamiento puede aplicarse un apósito nuevo
- No se recomienda el uso de preparados medicinales tópicos en combinación con Acticoat Flex.

Características

- Barrera eficaz a la contaminación microbiana, protege la herida contra los organismos patógenos lo que facilita la curación de la herida.
- Liberación sostenida de plata en el lecho de la lesión durante un plazo mínimo de 3 días.
- En presencia de exudado y un apósito secundario de cura ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida, favoreciendo una rápida cicatrización de cura en ambiente húmedo.
- El apósito puede ser retirado sin causar trauma en el lecho de la herida.
- Contribuye a una efectiva preparación del lecho de la herida.
- Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- Baja adherencia.
- Mínimos cambios de apósito, permanece activo en la lesión hasta 3 días.
- Fácil de usar y retirar.

Instrucciones de uso

1. Utilice sus protocolos clínicos para limpiar/desbridar la herida antes de la aplicación del apósito.
2. Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia seca y libre de grasas, jabones o detergentes.
3. Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
4. Acticoat Flex se debe cortar al tamaño y forma de la herida.

Aplicación del apósito

1. Humedezca Acticoat Flex con agua inyectable, (preferiblemente agua no solución salina) y aplique el apósito de manera central sobre el lecho de la herida.
2. Si se utiliza con Terapia de Presión Negativa, el material de relleno de la herida debe humedecerse y cambiarse conforme a las instrucciones del fabricante.
3. Sin estirar el apósito, aplique Acticoat Flex a la superficie de la herida, por cualquiera de sus caras, asegurando que no se formen pliegues. El apósito debe aplicarse con la dirección del estiramiento a lo largo del miembro para permitir el movimiento.
4. Aplique un apósito secundario apropiado para la fijación y control del exudado, como el apósito hidrocelular Allevyn.

Frecuencia del cambio del apósito

1. La frecuencia de cambio depende del tipo y condición de la herida de acuerdo al nivel de exudado. Es posible el recambio diario de Acticoat[™] Flex para heridas altamente exudativas.
2. Cuando los niveles de exudado son bajos o medios, Acticoat Flex puede cambiarse hasta dentro de tres días.
3. Las heridas deben examinarse y tratarse en la forma apropiada, según las indicaciones del médico responsable.

Retirada del apósito

1. Retire el apósito secundario según los protocolos clínicos existentes.
2. Levante con suavidad el apósito Acticoat[™] Flex, utilizando pinzas o con las manos enguantadas.
3. Si se ha dejado secar demasiado, se puede limpiar la lesión con solución estéril para facilitar el desprendimiento.
4. Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida y retirar el exudado remanente antes de valorar la herida o aplicar otros apósitos.
5. Nota: ACTICOAT Flex 3 puede causar una coloración parduzca pasajera de la piel circundante. El color del apósito puede variar. Esto no afecta a su rendimiento.

ACTICOAT[◇] FLEX 3, apósito antimicrobiano flexible de plata nanocristalina.

Consideraciones y precauciones:

- Facilita la curación de la herida, no del problema subyacente.
- Puede utilizarse durante un periodo máximo de 4 semanas, si transcurrido este periodo no se observa ninguna mejoría, debe valorarse el diagnóstico inicial.
- Es un apósito estéril de un sólo uso y no debe utilizarse si el empaque está dañado.
- Se recomienda no utilizar el producto durante el embarazo o la lactancia al desconocerse sus efectos, por lo que su aplicación recae en el criterio del médico tratante.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta
66800396	ACTICOAT FLEX 3, 5 cm x 5 cm	5	5
66800398	ACTICOAT FLEX 3, 10 cm x 10 cm	5	5
66800399	ACTICOAT FLEX 3, 10 cm x 10 cm	12	12
66800409	ACTICOAT FLEX 3, 10 cm x 20 cm	12	12
66800419	ACTICOAT FLEX 3, 20 cm x 40 cm	6	6
66800432	ACTICOAT FLEX 3, 40 cm x 40 cm	6	6

Re. San.: INVIMA 2018DM-00018081

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON No. 0086 CE No. CE 00356 Clase CE III, estéril 		 Radiación Gamma	 34 meses   25°C 	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		

Smith&Nephew Colombia SAS
 Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
 Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
 www.smith-nephew.com

◇ Marca registrada
 Smith&Nephew