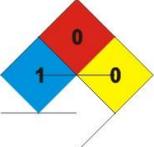


# T5 GREEN

## FICHA TECNICA

**DETERGENTE / DESENGRASANTE**  
**Limpiador Biodegradable**

Es un desengrasante a base de solventes derivados de la cáscara de la naranja. Remueve grasas, aceites y residuos que se adhieren a instrumentos y equipos en clínicas, hospitales y centros de estética. Es un excelente coadyuvante en el prelavado de endoscopios y equipos de liposucción, elimina naturalmente películas de grasas corporales, las cuales por su naturaleza son muy difíciles de remover en este tipo de instrumentos médico quirúrgicos. Estos requieren posterior limpieza con detergentes enzimáticos y/o desinfectantes. LIMPIEZA POR EMULSIFICACION EXPONTANEA: Sus agentes surfactantes reducen la resistencia de aceites y grasas con el agua, de esta forma, una estable emulsión previene la re deposición del sucio. No contiene solventes derivados del petróleo. No tóxico.

<b>APLICACIONES</b>	Limpieza de equipo e instrumentos en clínicas, hospitales, centros de salud, centros de estética y en todo sitio donde sea importante la limpieza y desengrasar. Para procesos de lavado general, reemplaza los abrasivos detergentes en polvo. Procesos de lavado y desengrase en cocinas industriales e institucionales.	
<b>MODO DE USO</b>	<p>PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTAL: Diluya 60 ml de T5 GREEN en 1 galón de agua.</p> <p>PARA LIMPIEZA GENERAL: Diluya 120 ml de T5 GREEN en 1 galón de agua.</p> <p>T5 GREEN puede usarse manualmente y/o con equipos mezcladores manuales o automáticos. Igualmente puede ser utilizado con equipos espumadores para procesos de limpieza especializados. Para adquirir estos equipos, comuníquese con el Departamento Técnico de Estericlean: asistencia@estericlean.com.co</p>	
<b>INGREDIENTES ACTIVOS</b>	Solventes Cítricos Naturales, Tensoactivo Anionico, excipientes.	
<b>VIDA UTIL</b>	2 años.	
<b>PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y los rayos del sol. En caso de contacto directo con piel, ojos y mucosas, enjuague con abundante agua durante 10 minutos. Debe ser colocado en un área donde no se contamine con otro tipo de productos y comidas.</p> <p>MANTENGASE BIEN TAPADO.</p> <p>NO APLICAR EN CONEXIONES ELECTRICAS.</p> <p>MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p>	
<b>PRESENTACION</b>	<p>Envase x 1000 ml / Galón 3.800 ml / Cuñete x 5 galones</p> <p>Fabricado por NATURAL ENVIRO S.A.S</p> <p>Bajo licencia de THEOCHEM LABORATORIES INC. (U.S.A.)</p> <p>Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRAL.</p> <p><a href="mailto:info@estericlean.com.co">info@estericlean.com.co</a></p> <p>PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL</p>	
<b>PROPIEDADES</b>	<b>FORMA</b>	Líquido Viscoso
	<b>OLOR</b>	Cítrico
	<b>COLOR</b>	Verde Esmeralda
	<b>EFFECTIVIDAD EN AGUA</b>	100%
	<b>ESPUMA</b>	Alta
	<b>BIODEGRADABILIDAD</b>	100% 30 días
	<b>ESTABLE EN ALMACEN</b>	24 meses
	<b>INFLAMABILIDAD</b>	Ninguna
	<b>PRESIÓN DE VAPOR</b>	Ninguno
<b>PARAMETRO DEL pH</b>	10.5 - 11	

Certificado INVIMA No. 2012041573



[info@estericlean.com.co](mailto:info@estericlean.com.co)  
[www.estericlean.com.co](http://www.estericlean.com.co)  
 Cra. 80 E N° 40 – 131 Of 201  
 (574) 448 54 43  
 MEDELLÍN-COLOMBIA

