

Biozyme

Detergente Multienzimático

FICHA TECNICA



BIOZYME es una formulación múltiple que contiene mezcla de cuatro enzimas Hidrolíticas, convirtiéndolo en un gran detergente enzimático multipropósito con el cual se elimina en un solo paso todos los residuos de sangre, grasa, carbohidratos, proteína, tejidos, secreciones respiratorias, mucosa, saliva, heces y todo tipo de materia orgánica en instrumentos quirúrgicos, bacteriológicos, odontológicos, endoscópicos y ortopédicos. Sus detergentes no iónicos y su pH neutro, permite su uso en todo tipo de instrumentos delicados y de alta complejidad.

APLICACIONES	BIOZYME, es recomendado en clínicas, hospitales, centros odontológicos y médicos, EPS, IPS y otros, clínicas de estética y en todo sitio donde sea importante la limpieza de instrumental.	
MODO DE USO	BIOZYME, Se debe utilizar 1 onza en 4 litros de agua, dejar actuar de 5 a 10 minutos por inmersión todo el material a limpiar. En consultorios odontológicos utilice 10 ml en 1 litro de agua (NO NECESITA AGUA CALIENTE) posteriormente enjuague con agua preferiblemente destilada. Para instrumental endoscópico recomendamos sumergir mínimo 1 minuto y utilizar esponjas o escobillas de limpieza interna y externa. Para lavadoras ultrasónicas o termolavadoras, diluir 4 ml por litro de agua. No es corrosivo, no contamina el medio ambiente. 100% Biodegradable. No reutilizar.	
INGREDIENTES ACTIVOS	BIOZYME, está compuesto de Lipasa, Proteasa, Amilasa y Carbohidrasa.	
VIDA UTIL	Sin Preparar: 2 años. - Diluido sin contaminar: 12 horas. En contacto con materia orgánica: según biocarga.	
PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Manténgase fuera del alcance de los niños. En contacto con ojos y mucosas enjuagar con abundante agua durante 10 minutos. Almacenar en un sitio fresco y alejado de los rayos del sol directos. Producto de baja toxicidad.	
PRESENTACION	BIOZYME, Frasco 500 ml / Galón 3.800 ml Fabricado por: NATURAL ENVIRO S.A.S. Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. info@estericlean.com.co PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL	
PROPIEDADES	FORMA	Líquido claro
	OLOR	Cítrico suave
	COLOR	Morado
	EFFECTIVIDAD EN AGUA	Excelente
	ESPUMA	Media
	FOSFATOS	Ninguno
	BIODEGRADABILIDAD	Completa
	ESTABLE EN ALMACEN	12 meses
	ESTABILIDAD EN FRIO	0 °c
	SOLUBLE EN AGUA	100%
PARAMETRO DEL pH	7.0 +/- 0.5	

Certificado INVIMA No. 2012041570



info@estericlean.com.co
www.estericlean.com.co
Cra. 80 E N°40 – 131 Of 201
(574) 448 54 43
MEDELLÍN-COLOMBIA

Effective Eco-Disinfection