



FICHA TECNICA

**DETERGENTE ENZIMÁTICO DE BAJA ESPUMA
PARA LAVADO AUTOMATICO**

Dissolves blood and tissue on contaminated instruments
Disuelve sangre y tejido de instrumental contaminado

ECOZYME provee una rápida remoción de materia orgánica convirtiéndolo en un efectivo detergente enzimático con el cual eliminamos en un solo paso todos los residuos de sangre, grasa, carbohidratos y proteína de los instrumentos a esterilizar posteriormente. Su pH ligeramente alcalino trabaja en conjunto con los ciclos hídricos a chorro de termo lavadoras sin generar exceso de espuma que producen el apagado del equipo, tolera agua caliente hasta 70 grados centígrados sin desnaturalizarse su enzima, contiene inhibidores de corrosión y lubricante mineral sintético para preservar equipos e instrumentos en un solo paso.

| | | |
|--|--|---|
| APLICACIONES | ECOZYME contiene enzimas proteolíticas que eliminan todo tipo de materia orgánica en instrumentos quirúrgicos, endoscópicos, y ortopédicos. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR LAVADOS AUTOMÁTICOS EN EQUIPOS ESPECIALIZADOS COMO TERMOLAVADORAS DESINFECTORAS Y MÁQUINAS ULTRASONIDO gracias a sus detergentes no iónicos de baja espuma. Así mismo puede ser utilizado en instrumentos delicados en oftalmología y microcirugías. es recomendado en clínicas, hospitales, centros odontológicos y médicos, EPS, IPS, clínicas de estética y en todo sitio donde se realice lavado automático de instrumental | |
| MODO DE USO | Utilizar 2 mililitros de ECOZYME x litro de agua, (1/ 4 de onza x galón) deje actuar por espacio de cinco minutos, enjuague con agua preferiblemente destilada. Este detergente puede ser utilizado con agua caliente. No es corrosivo, no contamina el medio ambiente. 100% Biodegradable. No reutilizar. | |
| INGREDIENTES ACTIVOS | ECOZYME, está compuesto por combinación de enzimas proteolíticas. | |
| VIDA UTIL | 2 años. | |
| PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Manténgase fuera del alcance de los niños. En contacto con ojos y mucosas enjuagar con abundante agua durante 10 minutos. Almacenar en un sitio fresco y alejado de los rayos del sol directos. Producto de baja toxicidad. |  |
| PRESENTACION | ECOZYME, Galón 3.800 ml Fabricado por: NATURAL ENVIRO S.A.S. bajo licencia de ECO-CONCEPTS U.S.A. Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. info@estericlean.com.co PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL | |
| PROPIEDADES | FORMA | Líquido Transparente |
| | OLOR | Melaza Suave |
| | COLOR | Naranja Claro |
| | EFFECTIVIDAD EN AGUA | Excelente |
| | ESPUMA | Baja |
| | FOSFATOS | Ninguno |
| | BIODEGRADABILIDAD | Completa |
| | ESTABLE EN ALMACEN | 12 meses |
| | ESTABILIDAD EN FRIO | 0 °c |
| | SOLUBLE EN AGUA | 100% |
| PARAMETRO DEL pH | 7.5 +/- 0.5 | |
| Certificado INVIMA No. 2013-007856 | | |
|     | | |
| <p>info@estericlean.com.co www.estericlean.com.co Cra. 80 D N° 40 – 57 (57+4) 448 54 43 MEDELLÍN-COLOMBIA</p> | | |
|  <p>Effective Eco-Solutions</p> | | |