

Steel Glo

FICHA TECNICA

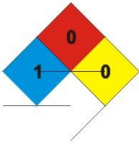
Autoclave Cleaner

Limpiador de Autoclaves

Surgical Instruments Remover

Desmanchador de Instrumental Quirúrgico

STEEL GLO ofrece la mejor alternativa de limpieza y desmanchado de instrumental médico quirúrgico. Es un producto con componentes ecológicamente desarrollados, contiene solventes cítricos derivados de la naranja, tenso activos de última generación y abrasivo natural a base de piedra pómez. Producto no ácido ni corrosivo para los materiales. Devuelve el brillo original de sus instrumentos de acero inoxidable. Remueve el óxido en instrumentos ya deteriorados. Previene el destructivo pitting generado por residuos de aguas duras y su posterior exposición al calor.

APLICACIONES	STEEL GLO puede utilizarse para desmanchar instrumentos de Acero Inoxidable, Tungsteno, Titanio, Carburo de Tungsteno, Aluminio. OTRAS APLICACIONES: Limpieza de cámaras interiores en autoclaves, bandejas metálicas de máquina de ultrasonido, superficies de aluminio, cobre, bronce y plata, mesones y superficies en acero inoxidable.	
MODO DE USO	STEEL GLO, Debe ser usado con un paño o esponja de nylon. Se debe frotar suavemente el material dejándolo actuar por espacio de 2 a 3 minutos y posteriormente enjuagar con agua de la llave.	
INGREDIENTES ACTIVOS	STEEL GLO, Pumice (1317-65-3), Ácido Bencenosulfónico (27176-97-0) Solvente Cítrico Natural	
VIDA UTIL	2 años.	
PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	No se debe utilizar en instrumentos de acero al carbón cromado ya que este se caracteriza por ser un enchape cromado que se despega muy fácilmente, tampoco en superficies pintadas o plásticas. Se puede utilizar sin necesidad de guantes ya que no ataca el PH de la piel.	
PRESENTACION	Envase x 300 gr. / Caja 12 unidades Fabricado por: NATURAL ENVIRO S.A.S. Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. info@estericlean.com PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL	
PROPIEDADES	FORMA	Cremosa
	OLOR	Cítrico
	COLOR	Amarillo claro
	EFFECTIVIDAD EN AGUA	Enjuagable
	ESPUMA	Ninguno
	FOSFATOS	Ninguno
	BIODEGRADABILIDAD	Completa
	ESTABLE EN ALMACEN	24 meses
	ESTABILIDAD EN FRIO	0 °c
	DETERGENTES	Tipo abrasivo suave
PARAMETRO DEL pH	7.0 +/- 0.5	

Certificado INVIMA No. 2012041565



info@estericlean.com
www.estericlean.com
Cra. 80 D N° 40 – 57
(574) 448 54 43
MEDELLÍN-COLOMBIA


Effective Eco-Disinfection