



## División Médicos

# Indicador Químico Integrador Para Vapor Comply 1243



Fecha Digitación 28/03/2000

Fecha Actualización 09/08/2004

## Descripción

El indicador químico integrador para vapor

## Construcción (Composición)

Polipropileno  
lamina de aluminio  
indicador químico

## Especificaciones (Características Técnicas)

- Cumple con los requisitos de la norma EN 867-1. VAPOR Clase D: Indicador multi-variable según clasificación de EN-867-1
- Indicador seguro de las condiciones de esterilización, el indicador químico funde y se desplaza desde la zona de rechazo ( Reject) hasta la zona de aceptación ( Accept), cuando las condiciones de calidad de vapor, tiempo y temperatura son las correctas.

## Usos (Aplicaciones)

Utilice el indicador químico integrador para vapor Comply 1243 para monitorizar los paquetes de todos los ciclos de esterilización por vapor de 121 y 132°C.

## CONTRAINDICACIONES

No emplee el indicador químico integrador para vapor Comply 1243E para la monitorización de calor seco, oxido de etileno u otros procesos de esterilización a baja temperatura.

## Instrucciones de Uso

1. Para conservar mejor los indicadores se debe doblar el extremo del paquete y volver a cerrar. Emplee unas tijeras en el área indicada en la parte superior del paquete metálico para la apertura inicial. Extraiga únicamente el numero necesario de indicadores químicos integradores para vapor Comply 1243. Vuelva a cerrar el paquete efectuando como mínimo dos dobleces en el extremo abierto.

2. Coloque un indicador químico integrador para vapor Comply 1243 en el centro de cada paquete, bolsa o bandeja que desee esterilizar mediante vapor. Sitúe un indicador químico integrador en cada esquina o, al menos, en dos esquinas opuestas o en diagonal de los recipientes rígidos o en el área determinada como mas inaccesible mediante la comprobación del producto.
3. Procese la carga de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Una vez finalizado el proceso, el color oscuro debiera haber entrado en la ventana ACCEPT (Aceptar) del indicador químico integrador para vapor Comply 1243. Si el color oscuro no ha entrado en la ventana ACCEPT, producirá un resultado REJECT (Rechazar) y se entenderá que los elementos del paquete, bolsa, bandeja o el recipiente rígido no se han expuesto lo suficiente a las condiciones de esterilización de vapor. Dichos elementos deberán devolverse para si reprocesamiento.
5. Si varios paquetes, bolsas o bandejas de una carga contienen indicadores integradores con resultados REJECT (Rechazar), revise los resultados del indicador biológico. Compruebe todos los parámetros del proceso para averiguar la causa del fallo.

### Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

### Vida Util del Producto

Los indicadores químicos integradores para vapor Comply 1243 contenidos en un paquete sin abrir tienen una vigencia de 5 años a partir de la fecha de fabricación cuando se almacenan en las condiciones recomendadas.

### Notas Especiales

Almacene los paquetes no abiertos y vueltos a cerrar que contengan indicadores químicos integradores para vapor Comply 1243 en un entorno seco ( humedad relativa menor de 50%) a temperatura ambiente 15-30°C.

Disposición final : incineración

### Condiciones de Transporte

N/A

### Concepto Técnico (Div. Medica):

### Presentaciones comerciales :

STOCKNUMBER	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
70-2007-0269-7		Integradores Químicos 1243A para vapor.	caja x 1000 unidades

#### NOTAS:

##### Datos Técnicos :

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.

##### Uso del Producto :

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

##### Indemnizaciones :

Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

##### Limite de Responsabilidad :

3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal  
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

<b>3M BOGOTÁ</b> Avenida El Dorado No. 78A-93 Tel: 4161666 - 4161655 Fax: 4161677	<b>3M BARRANQUILLA</b> Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B Tel: 095 - 3560722 Fax: 095- 3457432
<b>3M MEDELLÍN</b> Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa Tel: 094 - 3118282 Fax: 094 - 3116292	<b>3M CALI</b> Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 Tel: 092 - 3161414 Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.mmm.com>

Si desea Enviar información a Nuestro E\_Mail: [servicioalcliente@mmm.com](mailto:servicioalcliente@mmm.com)

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636** o **018000113M3M**