

MICROSAFE WIPES

Paños húmedos para baño al paciente

Fecha de actualización: 21/Marzo/2017

Versión: 01

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los paños húmedos Microsafe Wipes están diseñados para garantizar una experiencia simple y diferente cuando se requiere una profunda y completa limpieza del cuerpo. Su fórmula libre de enjuague permite remover todo tipo de impurezas de la piel mientras deja una sensación de frescura y humectación.

ESPECIFICACIONES

Apariencia:	Paño blanco
Calidad del paño:	Tela no tejida (60g/m ²)
Empaque:	5 paños por paquete
Dimensiones:	20 x 22 cm

MODO DE USO

Los paños húmedos pueden usarse a temperatura ambiente o pueden calentarse en horno microondas para generar mayor comodidad.

- PARA CALENTAR EL PRODUCTO
 - Retire la etiqueta que sella el empaque antes de calentar el producto
 - Caliente el empaque completo en horno microondas por un tiempo máximo de 20 segundos
 - Revise la temperatura antes de aplicar el producto para evitar quemaduras de la piel
 - Regule el tiempo en el microondas de acuerdo a la potencia del mismo
 - Se debe tener especial cuidado en la temperatura de los paños que serán usados en niños, adultos mayores, personas con piel sensible o en estado de inconsciencia

- INSTRUCCIONES PARA EL BAÑO

Tome un solo paño al tiempo para limpiar cada una de las áreas y mantenga el siguiente orden:

- Paño 1: Cara – cuello
- Paño 2: Tórax – Brazos – Axilas
- Paño 3: Abdomen – genitales
- Paño 4: Espalda – región anal
- Paño 5: miembros inferiores – pies

Permita que la piel se seque al aire. No reutilizar

RECOMENDACIONES

- Solo para uso externo
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- No usar en los ojos.
- No usar por más de una semana sin prescripción medica
- No usar sobre piel expuesta o zonas con ampollas
- No usar en heridas profundas por punzón, mordeduras de animales y quemaduras serias.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos mantenerlos abiertos y enjuagarlos con suficiente agua corriente durante 15 o 20 minutos. En caso de usar lentes de contacto, deben retirarse 5 minutos luego de comenzar el lavado del ojo y se debe continuar enjuagando por el tiempo sugerido. En caso de ingestión no inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula no se debe continuar usando el producto.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Conservar en un espacio fresco y seco. No exponer a temperaturas mayores a 40°C. No exponer a la luz del sol. Los paños deben permanecer dentro del empaque original.

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

REGISTRO SANITARIO NSOC72916-16C0

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com