

## SANIKLEEN WIPES

Paños húmedos para desinfección de superficies

Fecha de actualización: 21/Marzo/2017

Versión: 01

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Sanikleen Wipes está diseñado para trabajar como un sistema que absorbe y libera la cantidad necesaria de una solución compuesta de tensoactivos y amonio cuaternario que permiten limpiar y desinfectar superficies en un solo paso, facilitando y reduciendo las actividades del personal de limpieza.

La composición del producto previene la dispersión de microorganismos causantes de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) ya que actúa en corto tiempo contra *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538), *Salmonella typhimurium* (ATCC 6539), *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 15442), *Bacillus subtilis* (ATCC 6633), *Aspergillus niger* (ATCC 16404), *Candida albicans* (ATCC 10231).

### ESPECIFICACIONES

Apariencia:	Paño blanco
Calidad del paño:	Tela no tejida (60g/m <sup>2</sup> )
Empaque:	72 paños por paquete
Dimensiones:	25 x 23 cm

### COMPONENTES

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	0.2%
Alkyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride	0.2%

### MODO DE USO

Levante la tapa, retire el sello de seguridad, tome el paño a usar e inmediatamente cierre de nuevo para garantizar que las toallas no pierdan la humectación.

Para lograr una desinfección óptima de un amplio espectro de microorganismos se debe frotar el paño sobre la superficie garantizando que permanezca húmeda por espacio de 1 minuto y permitir secar al aire. No requiere enjuague. El paño debe ser descartado en la caneca correspondiente y no en el sanitario. No se debe reutilizar. Evite desechar a través del sanitario

Nota: Este producto no reemplaza el protocolo rutinario de limpieza y desinfección

## PODER BACTERICIDA A UN MINUTO DE CONTACTO

Microorganismos	% de remoción UFC
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	99.9%
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 6539)	99.9%
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)	99.9%
<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 6633)	99.9%
<i>Aspergillus niger</i> (ATCC 16404)	99.9%
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)	99.9%

### PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No debe usarse como paño húmedo para bebés, cambio de pañal o para uso personal.
- Para superficies plásticas y pintadas se debe hacer una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- No debe usarse en superficies de madera sin pintar, mármol natural o latón.
- Se recomienda usar elementos de protección personal para manipular el producto.

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos mantenerlos abiertos y enjuagarlos con suficiente agua corriente durante 15 o 20 minutos. En caso de usar lentes de contacto, deben retirarse 5 minutos luego de comenzar el lavado del ojo y se debe continuar enjuagando por el tiempo sugerido. En caso de ingestión no inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula no se debe continuar usando el producto.

### ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Conservar en un espacio fresco y seco. No exponer a temperaturas mayores a 40°C. No exponer a la luz del sol. Los paños deben permanecer dentro del empaque original.

### REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

REGISTRO SANITARIO NSOH05274-16CO

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52  
 Autopista Sur Km. 12, La Estrella  
 PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327  
 San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010  
 Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693  
[www.westquimica.com](http://www.westquimica.com)