


# IODOSORB<sup>◇</sup> DRESSING, apósito de cadexómero yodado.

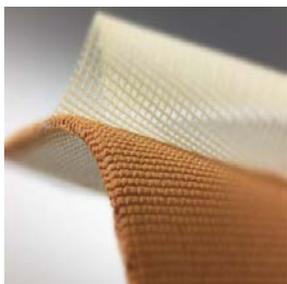

## Descripción

IODOSORB DRESSING es un apósito que consiste en una lámina de pasta marrón oscuro de 2mm que se presenta entre dos capas de gasa de poliéster para facilitar el manejo del apósito y que se retirarán para su aplicación. La pasta está compuesta de cadexómero (microesferas de almodón modificado), polietilenglicol y yodo. Las esferas de cadexómero son biodegradables.

IODOSORB DRESSING absorbe el exceso de exudado y de esfacelos del lecho de la lesión y reduce los microorganismos la sobre superficie de la lesión, transformándose en un gel blando y húmedo.

## Indicaciones

IODOSORB DRESSING está indicado para el tratamiento tópico de lesiones que exudan crónicamente. IODOSORB DRESSING puede utilizarse debajo de una terapia de compresión. IODOSORB DRESSING puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en este tipo de lesiones, la infección debe ser inspeccionada y tratada según el protocolo clínico local.

## Precauciones

El contenido del sobre debe utilizarse solo en un paciente.

No utilizar IODOSORB Dressing cerca de los ojos, oídos, nariz. El producto es para uso externo solamente, el apósito IODOSORB Dressing puede ocasionar un ligero dolor pasajero la primera hora después del tratamiento. Esto significa que el apósito está comenzando a limpiar la lesión. Ocasionalmente, IODOSORB Dressing puede hacer que la piel perilesional se inflame o enrojezca. Esta es una condición pasajera. Si los síntomas persisten o si el paciente experimenta otros síntomas, deberá contactar con el facultativo.

El contacto con la piel perilesional debe reducirse al mínimo.

Es posible que se forme una corteza adherente si se deja que el apósito IODOSORB se seque.

Una sola aplicación del apósito IODOSORB Dressing no debe superar los 50 g (equivale a 5 sobres de 10g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 15 sobres de 10g).

## Características

- Desbrida el lecho de la lesión.
- Absorbe esfacelos, debris y exudado.
- Efectivo ante un amplio espectro de microorganismos.
- Liberación prolongada de yodo de forma continua, mantiene los niveles de yodo en la lesión.
- Fácil de aplicar.
- Se retira fácilmente, sin dañar el epitelio neoformado.
- Ayuda a eliminar el olor.
- El cambio de color del apósito indica el momento en que el producto puede retirarse.

- La duración del tratamiento no debe ser superior a los 3 meses.

## Instrucciones de uso

1. Lavarse las manos biena antes y después de uso. Utilizando guantes, limpiar la lesión y el área de alrededor con un chorro suave de agua o solución salina. NO SECAR la superficie de la lesión.
2. Retirar la gasa protectora de ambos lados de la pasta.
3. Cortar o moldear según la forma de la lesión. Cubrir la lesión completamente con un apósito secundario apropiado.

El apósito IODOSORB DRESSING sobrante, de haberlo, debe tirarse.

Apósito	50g/aplicación	150g/semana
IODOSORB 4 x 6 cm (5 g)	10 apósitos	30 apósitos
IODOSORB 6 x 8 cm (10 g)	5 apósitos	15 apósitos

Tabla: Equivalencia de nº de apósitos

## Contraindicaciones

IODOSORB DRESSING no debe usarse sobre tejido necrótico seco o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a cualquiera de sus componentes

No utilizar IODOSORB DRESSING niños, mujeres embarazadas o lactantes ni en pacientes con trastornos de la glándula tiroides o disfunción renal. (ej, Tiroiditis de Hashimoto o nódulos no tóxicos de bocio).

# IODOSORB<sup>◇</sup> DRESSING, apósito de cadexómero yodado.

## Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66001290	IODOSORB DRESSING 4 x 6 cm (5 g)	5	10	05000223457754
66001291	IODOSORB DRESSING 6 x 8 cm (10 g)	3	3	05000223457785
66001292	IODOSORB DRESSING 6 x 8 cm (10 g)	5	5	05000223457815

Re. San.: INVIMA 2011DM-0008125

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356  Clase CE IIb, estéril  Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008  			 30 meses   	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN En  Distribuidor Smith & Nephew, SAU

### Leyenda símbolos

 LATEX FREE

No contiene látex



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante

 STERILE R

Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Temperatura de almacenamiento



No utilizar si el envase está abierto o dañado

Smith&Nephew Colombia SAS  
 Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso  
 3, Bogotá  
 Tel: 57 (1) 605 7373  
 www.smith-nephew.com

◇ Marca registrada  
 Smith&Nephew