



FICHA TÉCNICA
BOLSAS DRENABLES (TRANSPARENTES U OPACAS) NATURA™ + QUE
INCLUYEN FILTRO, DRENAJE ALARGADO Y SISTEMA DE CIERRE
INVISICLOSE™

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Bolsa Drenable
Nombre Comercial	Natura™ + Bolsas Drenables (Transparentes u Opacas) con Filtro de Carbón Activado, Drenaje Alargado y Sistema de Cierre InvisiClose™
Descripción	Bolsa recolectora para uso en ostomías, con filtro que incluye una capa anti-obstrucciones, materiales amables con la piel, sistema de cierre InvisiClose™ y bolsillo de seguridad Lock-it Pocket™ que esconde de manera segura el drenaje de la bolsa, proporcionando el confort de una bolsa cerrada.
Marca	Natura™ +
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	Lámina de la bolsa: etilenvinil acetato / cloruro de polivinilideno (PVDC por sus siglas en inglés) y colorante (en bolsas opacas); panel de confort: fibra de polietileno / polietilentereftalato; sistema de cierre de la bolsa: tira de adhesivo de poliestireno, cinta de cierre de cremallera: cinta en polipropileno, adhesivo de caucho; pestaña: etilenvinil acetato; filtro con membrana médica, protección del filtro en lámina de polietileno.
Características y Acciones del Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de la piel: Las bolsas drenables para ostomías Natura están recubiertas con un panel de confort que impide el contacto del plástico con la piel del paciente, reduciendo la probabilidad de irritaciones. También están disponibles en presentaciones transparente y opaca, de acuerdo a la necesidad y preferencia del paciente. • Tecnología para el control de olores - filtros de carbón: Las bolsas drenables emplean un filtro diseñado específicamente para las necesidades de la persona que permite reducir los gases al interior de la bolsa, los olores y ayudan a mantener la bolsa con una apariencia más plana • Sistema de cierre: el sistema de cierre sin pinza InvisiClose ofrece doble seguridad, facilidad de drenaje, comodidad y limpieza. El diseño de tiras del drenaje fáciles de abrir y el drenaje alargado permite el control de flujo y reduce las salpicaduras. El sistema de cierre está mejorado con una solapa adicional de seguridad para darle mayor tranquilidad al paciente.
Usos	Ostomías
Recomendaciones de Uso	<p>Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas. • Coloque y retire la barrera cutánea siguiendo las instrucciones de uso correspondientes • Sostenga la pestaña de seguridad sobre la parte delantera de la bolsa • Doble el drenaje alargado 4 veces y asegúrese de que las pestañas de cierre se sobrepongan • Presione las pestañas de cierre unas sobre otras hasta que estén aseguradas cuando escuche el "clic" a lo largo del drenaje alargado de la bolsa.



	<ul style="list-style-type: none">• Gire el bolsillo de seguridad sobre la parte posterior de la bolsa (cara hacia la piel) y presione el sistema de sellado hasta escuchar el "clic" que asegura que está completamente cerrado.
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025
Presentaciones:	Caja x 10 bolsas transparentes u opacas. Están disponibles en los siguientes tamaños: 38mm 45mm 57mm 70mm



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
BOLSAS DRENABLES (TRANSPARENTES U OPACAS) NATURA™ + QUE
INCLUYEN FILTRO, DRENAJE ALARGADO Y SISTEMA DE CIERRE
INVISICLOSE™**

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Sistema de acople a la barrera Natura	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Capacidad y tamaño de la bolsa	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Suavidad del panel de confort	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Capacidad del filtro contra los gases	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Control del olor	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Facilidad de remoción	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Duración	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Comodidad para el paciente	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Facilidad de uso del sistema de cierre Invisiclose™	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Seguridad del sistema de cierre Invisiclose™	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Empaques	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Claridad de las instrucciones de uso	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Presentación	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Servicio postventa: Asesoría educativa y servicio al cliente	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					