



FICHA TECNICA

High-level disinfectant solution
Solucion desinfectante de alto nivel

Cidesteril es un desinfectante de Alto Nivel para material odontológico y quirúrgico que interactúa con proteínas ADN y ARN; esto lo hace un producto esporicida, es virtud a su habilidad de penetrar en el interior de las esporas.

APLICACIONES	CIDESTERIL es recomendado en Clínicas, Hospitales, Centro Odontológicos y Médicos, IPS, EPS, y toda institución donde se quiera aplicar DAN o desinfectar el instrumental.	
MODO DE USO	<p>Agregar el polvo activador al envase que contiene la solución germicida de CIDESTERIL y agitar hasta que la disolución esté completa. La solución se torna de color azul lo que indica que esta activada y lista para su uso. Lavar muy bien el material para realizar desinfección de alto nivel. Con un detergente apropiado para eliminar cualquier residuo de suciedad. Colocar el material dentro de la cubeta con CIDESTERIL, asegurándose que quede totalmente sumergido en la solución.</p> <p>PARA DESINFECTAR: Dejar mínimo 10 minutos dentro de la solución activada. Enjuagar luego con agua potable.</p> <p>PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL: Dejar mínimo 8 horas. Enjuagar con agua estéril ó con agua destilada preferiblemente..</p>	
INGREDIENTES ACTIVOS	Glutaraldehído al 2%	
VIDA UTIL	2 años.	
PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>La mezcla de CIDESTERIL se mantiene activada durante 30 días. Mantener la mezcla activada de CIDESTERIL cubierta para evitar su contaminación.</p> <p>No dejar por un tiempo mayor del requerido el instrumental dentro de la solución de CIDESTERIL, especialmente objetos de acero al carbono.</p> <p>Evitar el contacto con la piel, mucosas y ojos, en caso tal enjuagar con abundante agua.</p> <p>MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p> <p>SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES, TAPABOCAS, GORRO Y GAFAS DE SEGURIDAD.</p>	
PRESENTACION	<p>Envase x 500ml, envase x 1000 ml y galón x 3.800 ml</p> <p>Fabricado por: PROQUIDENT S.A.</p> <p>Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA.</p> <p>info@estericlean.com</p> <p>PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL</p>	
PROPIEDADES	FORMA	Líquido claro
	OLOR	Limón
	COLOR SIN ACTIVAR	Transparente
	COLOR ACTIVADO	Azul
	ESPUMA	Ninguno
	FOSFATOS	Ninguno
	ESTABLE EN ALMACEN	24 meses
	PARAMETRO DEL Ph SIN ACTIVAR	3.7 - 4.5
PARAMETRO DEL Ph ACTIVADO	7.5 - 8.5	
Registro INVIMA No. 2010DM-0005372	<p>info@estericlean.com</p> <p>www.estericlean.com</p> <p>Cra. 80 D N° 40 – 57</p> <p>(574) 448 54 43</p> <p>MEDELLÍN-COLOMBIA</p>	