



FICHA TÉCNICA

MARCA REGISTRADA
 Wescohex Wipes

NOMBRE DEL PRODUCTO
 Paños húmedos para baño al paciente.

PROTOCOLO
 Baño del paciente

DESCRIPCIÓN GENERAL

Wescohex Wipes son paños húmedos impregnados con una solución diseñada para entregar una agradable sensación de limpieza y antisepsia. Su concentración de clorhexidina permite eliminar bacterias que se encuentran en la piel.

El producto está indicado para ser parte de los cuidados diarios de los pacientes que no pueden someterse a un baño rutinario o para la preparación prequirúrgica de la piel.

REGISTRO Y VIGENCIA
 Colombia: 2017DM-0016166

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	Paño blanco
Calidad del paño	Tela no tejida (60g/m ²)
Empaque	5 paños por paquete
Dimensiones	20 x 22 cm
pH	5.5 - 6.5

COMPOSICIÓN

Gluconato de clorhexidina.....2.0%

VIDA UTIL
 2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO


- pH balanceado
- Disminuye los riesgos de contaminación asociados al agua
- Disminución de los consumos de agua
- Disminución de los riesgos en salud ocupacional del personal asistencial
- Proporciona al paciente un baño reconfortante
- Reducción en el tiempo del baño diario.
- No requiere enjuague

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

Microorganismo	Tiempo contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	30 seg	99.9%
<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 6633)		
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		
<i>Pseudomona aeruginosa</i> (ATCC 9027)		
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)	2 min	
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)		

MODO DE USO

Para baño de paciente en cama:

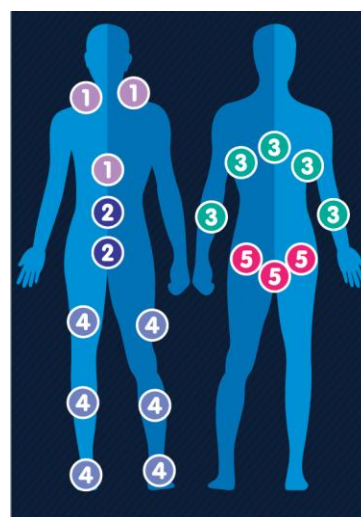

Tome un solo paño al tiempo para limpiar cada una de las áreas y mantenga el siguiente orden:

- Paño 1: Cuello - Tórax



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

- Paño 2: Abdomen – genitales
- Paño 3: Espalda – Brazos – Axilas
- Paño 4: Miembros inferiores – Pies
- Paño 5: Glúteos – Región anal
- Para la cara utilice una compresa húmeda en agua

Permitir que seque al aire. Tener especial cuidado con el contacto con los ojos, oídos y boca.

Para preparación de la piel

Wescorex Wipes pueden ser utilizados como parte del protocolo de preparación pre-quirúrgica de la piel. Para garantizar el efecto antiséptico de la solución se debe garantizar que la piel quede completamente impregnada y permitir que se seque al aire. El número de paños húmedos necesarios puede variar según el tamaño del área corporal a intervenir o según las recomendaciones dadas por el especialista.

Tenga en cuenta las siguientes observaciones luego de limpiar la piel:

- Es normal que su piel se sienta pegajosa durante algunos minutos
- No enjuague ni retire la solución.
- No aplique desodorante, perfume, lociones, cremas hidratantes, geles, polvos o maquillaje
- Lávese las manos con agua y jabón.
- Póngase ropa limpia o ropa de dormir.
- Ponga sábanas limpias en su cama.
- Una vez use los paños no debe tocarse los ojos, los oídos o la boca.

RECOMENDACIONES

- Solo para uso externo
- Manténgase fuera del alcance de los niños

- No usar en los ojos, oídos o boca.
- No usar por más de una semana sin prescripción médica
- No usar sobre piel expuesta o zonas con ampollas
- No usar en heridas profundas por punzón, mordeduras de animales y quemaduras serias.
- Deben ser descartados en caneca roja

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, retirar los lentes de contacto y continuar lavando por al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.

- Piel

Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de ardor se debe suspender el uso del producto y enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste se debe consultar al especialista

DISPOSICIÓN

El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

PRESENTACIONES

Empaque por 5 paños

PARTIDA ARANCELARIA

34.01.19.90.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

