

CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



## FICHA TÉCNICA

### MARCA REGISTRADA

West Zymme Ultra

- La solución de West Zymme Ultra debe desecharse a diario o cuando se encuentre visiblemente sucia.

### NOMBRE DEL PRODUCTO

Detergente Enzimático

### RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilice los elementos de protección personal durante el proceso de lavado.
- Evite la ingesta o contacto con los ojos.
- No mezcle con otros productos.
- Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros Representantes Técnico Comerciales.

### COMPOSICIÓN

Mezcla de enzimas, tensoactivos, estabilizantes y colorantes.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

West Zymme Ultra es un detergente líquido enzimático que remueve los residuos orgánicos adheridos al instrumental médico quirúrgico y odontológico luego de su uso.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:  
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.

### MODO DE USO

- Diluya 7.5 ml de West Zymme Ultra en un litro de agua.
- Introduzca los instrumentos en la solución preparada luego de su uso.
- Deje el material en inmersión durante 3 minutos (mínimo) para eliminar el material orgánico.
- De ser necesario use un cepillo suave.
- Enjuague con abundante agua potable, destilada o estéril, según el protocolo establecido.
- Seque el instrumental y continúe con el proceso de desinfección o esterilización.

- Ingestión:  
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, consultar al médico inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

### ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El recipiente debe permanecer cerrado, en un espacio fresco y seco. No exponga a la luz del sol ni



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



## FICHA TÉCNICA

a temperaturas superiores a 30°C. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

- No descargue el producto en efluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

### REGISTRO Y VIGENCIA

Certificación No. 2018006539



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia

