

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER, apósito hidrocélular con adhesivo de silicona.



Características

- **Elevada capacidad de absorción gracias a su capa central.**
- **No se adhiere al lecho de la lesión.**
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Suave**, minimiza el trauma durante los cambios de apósito.
- **Puede retirarse y colocarse sin perder las propiedades adherentes.**
- **Conformable**, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Película exterior impermeable**, actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- **Adhesivo de elevada tolerancia cutánea.**
- **Puede permanecer en la lesión hasta 7 días**, mínimos cambios de apósito.
- **Fácil de usar y retirar.**

Descripción

El apósito ALLEVYN[®] GENTLE BORDER es un apósito hidrocélular trilaminar, compuesto por una capa central hidrocélular absorbente entre una capa perforada de contacto con la lesión cubierta con un adhesivo suave de silicona y una capa exterior impermeable altamente transpirable.

Modo de acción

El apósito avanzado de tres capas ALLEVYN GENTLE BORDER facilita el control del fluido proporcionando el entorno húmedo más óptimo para la lesión lo que da como resultado la curación más rápida y reduce al mínimo el riesgo de maceración.

La capa de contacto con la lesión de ALLEVYN GENTLE BORDER está recubierta de un adhesivo de silicona suave, permite la aplicación de apósitos primarios si fuera necesario, y asegura la retirada sin trauma durante los cambios de apósito. ALLEVYN GENTLE BORDER puede quitarse y volverse a colocar sin perder sus propiedades adherentes. Puesto que ALLEVYN GENTLE BORDER es fácil de aplicar y retirar.

Indicaciones

El apósito está indicado para el tratamiento por segunda intención de heridas en fase de granulación poco profundas. Heridas exudativas crónicas y profundas, heridas de espesor total y parcial como úlceras por presión, úlceras de pierna, úlceras de pie diabético, heridas infectadas, heridas malignas, heridas quirúrgicas, quemaduras de segundo grado, zonas donantes, grietas de la piel, úlceras micóticas. ALLEVYN GENTLE BORDER puede utilizarse en combinación con INTRASITE[®] GEL para el tratamiento de lesiones con tejido desvitalizado. ALLEVYN GENTLE BORDER está indicado para su uso en pieles frágiles.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según la práctica habitual
2. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado
3. Preparar y limpiar la piel alrededor de la lesión, quitando el exceso de humedad. Debe recortarse el exceso de vello de alrededor de la lesión a fin de asegurar el contacto más próximo con la lesión.
4. Empezar retirando el papel posterior de protección de ALLEVYN GENTLE BORDER y fijar la capa adhesiva del apósito sobre la piel.
5. Alisar el apósito sobre la lesión, retirando el resto del papel posterior de protección y comprobar que el apósito se ha adherido completamente alrededor de la lesión.
6. ALLEVYN GENTLE BORDER puede cortarse especialmente para tratar lesiones en el talón, codos y otras zonas difíciles. Cuando corte el apósito utilice siempre una técnica aséptica.
7. Puede utilizarse como apósito secundario en combinación con otros apósitos para la cicatrización de heridas.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocélular de poliuretano.

Capa de contacto autoadherente: Capa de poliuretano microperforada.

Masa adhesiva: Silicona.

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER, apósito hidrocélular con adhesivo de silicona.

Especificaciones técnicas

Peso del apósito: mín. 400 g/m² (almohadillado).

180 – 260 g/m² (masa adhesiva).

Capacidad de absorción: mín. 35 g/100 cm².










Extensibilidad: 2,2 N/cm.

Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/ m² 24 hrs a 37°C.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta
66800269	ALLEVYN GENTLE BORDER 7,5 cm x 7,5 cm	10	10
66800270	ALLEVYN GENTLE BORDER 10 cm x 10 cm	10	10
66800272	ALLEVYN GENTLE BORDER 12,5 cm x 12,5 cm	10	10
66800273	ALLEVYN GENTLE BORDER 17,5 cm x 17,5 cm	10	10

Re. San.: INVIMA 2012DM-0001719-R2

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<p>ON n° 0086</p> <p>CE n° CE 00356</p> <p>Clase CE</p> <p>IIb, estéril</p> <p>Smith & Nephew, S.A.U</p> <p>ISO 9001:2008</p> 			<p> 24 meses</p> <p></p> <p></p>	<p> Smith & Nephew Wound Management- UK</p> <p> 25°C</p> <p> Distribuidor Smith & Nephew, SAU</p>

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado con óxido de etileno
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

®Marca registrada Smith&Nephew