

Ficha Técnica

ALLEYVN[®] Ag GENTLE BORDER, apósito hidrocélular trilaminar con plata y adhesivo de silicona.



Características

- **Propiedades anti-microbianas**, efectivo contra un amplio espectro de microorganismos patógenos presentes en la lesión. **Liberación sostenida de plata en el lecho de la lesión.**
- **No se adhiere al lecho de la lesión.**
- **Puede retirarse y colocarse:** sin perder las propiedades adherentes.
- **Elevada capacidad de absorción:** gracias a su capa central hidrocélular.
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Conformable**, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Suave y acolchado**, gran confort para el paciente.
- **Adhesivo de silicona de alta tolerancia cutánea.**
- **Mínimos cambios de apósito**, puede permanecer en la lesión hasta 7 días según criterio clínico.
- **Fácil de aplicar y retirar.**

Descripción

ALLEYVN[®] Ag GENTLE BORDER es un apósito hidrocélular, trilaminar, antimicrobiano y absorbente, que consiste en una capa central hidrocélular con capacidad de absorción, que contiene sulfadiazina argéntica, situada entre una capa de poliuretano microperforada de contacto con la lesión con adhesivo de silicona y una película de poliuretano externa impermeable. El apósito proporciona una barrera eficaz contra la contaminación microbiana, protegiendo la lesión contra microorganismos patógenos invasivos, ayudando de esta manera a una curación más rápida. La sulfadiazina argéntica es efectiva contra los microorganismos presentes en el apósito y en la lesión. En presencia de exudado el apósito ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Indicaciones

ALLEYVN[®] Ag GENTLE BORDER es un apósito antimicrobiano absorbente para la cicatrización por segunda intención de lesiones exudativas crónicas y agudas, de espesor total o parcial, superficiales, con tejido de granulación, tales como: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, quemaduras, zonas donantes, úlceras fungosas/malignas y lesiones quirúrgicas dehiscentes.

ALLEYVN[®] Ag GENTLE BORDER puede utilizarse en lesiones infectadas. Cuando el producto se utilice en lesiones infectadas, éstas deben tratarse según el protocolo clínico local.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los protocolos locales.
2. Seleccionar el apósito un poco más grande que la lesión.
3. Preparar y limpiar la piel perilesional secando cualquier exceso de humedad. Para asegurarse el contacto con la lesión, deberá retirarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Sacar el apósito de su envase original mediante una técnica aséptica
5. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER
6. Colocar el apósito alisándolo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
7. ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER puede cortarse, especialmente para la curación de heridas en rodillas, codos y otras zonas de difícil acceso

Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina argéntica o a las sulfonamidas.

Debido a que las sulfonamidas causan kernicterus, no utilizar ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER en mujeres en avanzado estado de gestación o en periodo de lactancia, en bebés prematuros o en recién nacidos durante los primeros meses de vida.

ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER, apósito hidrocélular trilaminar con plata y adhesivo de silicona.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocélular de poliuretano con sulfadiazina argéntica.

Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada.

Masa adhesiva: Silicona

Especificaciones técnicas

Dimensiones: nominal $\pm 0,5$ cm.

Peso: 500 – 700 g/m².

Capacidad de absorción: mín. 30 g/100 cm².








Permeabilidad al vapor de agua: 700 – 4000 g/m² 24 horas.

Adhesividad al acero: mín. 1 N/cm.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800460	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 7,5 cm x 7,5 cm	10	10	05000223465964
66800462	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 12,5 cm x 12,5 cm	10	10	05000223466022
66800463	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 17,5 cm x 17,5 cm	10	10	05000223466053

Re. San.: INVIMA 2013DM-0010162

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 24 meses  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

[®]Marca registrada Smith&Nephew