

Ficha Técnica

ALLEVYN[®] ADHESIVE, apósito hidrocélular trilaminar adhesivo.



Características

- **No se adhiere al lecho de la lesión.**
- **Elevada capacidad de absorción:** gracias a su capa central hidrocélular.
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Conformable,** fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Suave y anatómico,** gran confort para el paciente.
- **Adhesivo de alta tolerancia cutánea.**
- **Bordes sellados y forma redondeada:** protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad.
- **Película exterior impermeable:** actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- **Mínimos cambios de apósito,** puede permanecer en la lesión hasta 7 días según criterio clínico.
- **Fácil de aplicar y retirar.**

Descripción

Apósito con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocélular suave y altamente absorbente y una externa permeable al vapor de agua que actúa de barrera bacteriana e impermeable, ofrece una barrera física contra líquidos, partículas y contaminantes microbianos.

Modo de acción

ALLEVYN[®] ADHESIVE absorbe el exceso de exudado al mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo adecuado para facilitar el proceso de cicatrización.

La elevada capacidad de absorción se debe a la capa central formada por hidrocélulas de poliuretano, y gracias a las partículas de polietilenglicol que contiene, se consigue una rápida absorción inicial.

El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocélulas. La película exterior es un film impermeable que actúa como barrera bacteriana y a fluidos por lo que previene la lesión de posibles contaminaciones.

ALLEVYN ADHESIVE está especialmente diseñado para su utilización en lesiones que por su ubicación requieran un apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana pero no al lecho de la lesión y ha demostrado ser de bajo riesgo ante la irritación cutánea.

Indicaciones

Cicatrización de heridas por segunda intención crónicas o agudas con niveles de exudado de moderado a alto: úlceras por presión, úlceras de pierna, heridas infectadas con tratamiento antimicrobiano según protocolo local, úlceras de pie diabético, heridas malignas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, úlceras fúngicas.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los procedimientos habituales.
2. Seleccionar el tamaño del apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel perilesional secando cualquier exceso de humedad. Para asegurar el contacto con la úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN ADHESIVE.
5. Colocar el apósito sobre el centro de la herida, situando la cara de color blanco en contacto con la herida y la rosa en el exterior. Alisarlo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
6. ALLEVYN Adhesive puede cortarse, especialmente para la curación de lesiones en rodillas, codos y otras zonas.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocélular de poliuretano y polietilenglicol (PEG).

Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada.

Masa adhesiva: Acrílica.

Especificaciones técnicas

Capacidad total de absorción: mín. 35 g/cm².

Extensibilidad: máx. 1,9 N/cm.

Capacidad de absorción: mín. 30 g/cm². Permeabilidad: mín. 80 g/cm².

Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/m² 24 horas.

ALLEVYN[®] ADHESIVE, apósito hidrocélular trilaminar adhesivo.

Tamaño apósito	Superficie activa absorbente capa hidrocélular
7,5 x 7,5 cm (56,3)	5 x 5 cm (25,0 cm ²)
12,5 x 12,5 cm (156,3)	10 x 10 cm (100,0 cm ²)
17,5 x 17,5 cm (306,3)	15 x 15 cm (225,0 cm ²)
22,5 x 22,5 cm (506,3)	20 x 20 cm (400,0 cm ²)

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta
66000043	ALLEVYN ADHESIVE 7.5 cm x 7.5 cm	10	10
66000044	ALLEVYN ADHESIVE 12.5 cm x 12.5 cm	10	10
66000045	ALLEVYN ADHESIVE 17,5 cm x 17,5 cm	10	10
66000046	ALLEVYN ADHESIVE 22.5 cm x 22.5 cm	10	10

Re. San.: INVIMA 2012DM-001719-R2

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 24 meses     	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Temperatura de almacenamiento



No utilizar si el envase está abierto o dañado

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

®Marca registrada Smith&Nephew