

## ALLEVYN<sup>®</sup> SACRUM, apósito hidrocélular adhesivo.



### Características

- Se ajusta perfectamente a la zona sacra.
- Adhesivo de alta tolerancia cutánea.
- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Conformable, fácilmente adaptable a los contornos del cuerpo.
- Elevada capacidad de absorción gracias a su capa central.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- Bordes sellados y con forma redondeada, protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad.
- Película exterior impermeable, actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.
- Suave y acolchado, gran confort para el paciente.
- Puede permanecer en la lesión según criterio clínico, mínimos cambios de apósito
- Fácil de usar y retirar.

### Descripción

Apósito con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocélular suave y altamente absorbente y una externa impermeable que actúa de barrera bacteriana y permeable al vapor de agua.

### Modo de acción

El sacro es la zona más usual para la formación de úlceras por presión. ALLEVYN<sup>®</sup> SACRUM ha sido especialmente diseñado para adaptarse anatómicamente y facilitar el tratamiento de úlceras por presión, combinando con la probada eficacia de Allevyn Adhesive, sobre la zona sacra. ALLEVYN SACRUM absorbe el exceso de exudado al mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo adecuado para facilitar el proceso de cicatrización.

La elevada capacidad de absorción se debe a la capa central formada por hidrocélulas de poliuretano, y gracias a las partículas de polietilenglicol que contiene, se consigue una rápida absorción inicial.

El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocélulas. La película exterior es un film impermeable que actúa como barrera bacteriana y a fluidos por lo que previene la lesión de posibles contaminaciones.

ALLEVYN SACRUM está especialmente diseñado para su utilización en lesiones que por su ubicación requieran un apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana pero no al lecho de la lesión y ha demostrado ser de bajo riesgo ante la irritación cutánea.

### Indicaciones

Úlceras por presión en fase de granulación en zona sacra.  
 Profilaxis de úlceras por presión en zona sacra.

### Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los procedimientos habituales.
2. Seleccionar el tamaño del apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel periulceral secando cualquier exceso de humedad. Para asegurar el contacto con la úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN<sup>TM</sup> ADHESIVE.
5. Colocar el apósito situando la porción más estrecha a 2 cm, como mínimo, del esfínter anal.
6. Alisar el apósito encima de la lesión y quitar el papel protector restante.

### Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocélular de poliuretano y polietilenglicol (PEG).

Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada.

Masa adhesiva: Acrílica.

# ALLEVYN<sup>®</sup> SACRUM, apósito hidrocélular adhesivo.

## Especificaciones técnicas

Capacidad de absorción: mín. 35 g/100 cm<sup>2</sup>.

Extensibilidad: máx. 35 g/cm<sup>2</sup>.


Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/m<sup>2</sup> 24 horas.

Superficie total del apósito	Superficie activa absorbente capa hidrocélular
17 x 17 cm (223,1 cm <sup>2</sup> )	123,5 cm <sup>2</sup>
22,5 x 22,1 cm (381,9 cm <sup>2</sup> )	232,1 cm <sup>2</sup>

## Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta
66000451	ALLEVYN SACRUM 22,5 cm x 22,1 cm	10	10
66000700	ALLEVYN SACRUM 17 cm x 17 cm	10	10

Re. San.: INVIMA 2013DM-0010162

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE IIb, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 3 años  	 Smith & Nephew Medical(Suzhou) Ltd- China  Distribuidor Smith & Nephew, SAU

### Leyenda símbolos

 No contiene látex

 Producto esterilizado por irradiación

 Caducidad

 No reutilizar

 Manténgase en lugar seco

 Temperatura de almacenamiento

 No exponer el producto a la radiación solar

 No utilizar si el envase está abierto o dañado

 Fabricante

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

°Marca registrada Smith&Nephew