

## OPSITE<sup>®</sup> POST OP VISIBLE, apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente.



### Descripción

OPSITE POST-OP VISIBLE es un apósito translúcido, impermeable y barrera bacteriana que consiste en una almohadilla de espuma absorbente situada en el centro de una capa de poliuretano microperforada, permeable al vapor de agua, recubierta con un adhesivo acrílico de contacto con la lesión. La superficie adhesiva está protegida con dos tiras de papel de fácil liberación superpuestas en un extremo del apósito. El lado no adhesivo de la película está cubierto por un film de plástico que facilita el manejo del apósito.

### Modo de acción

El apósito OPSITE Post-Op Visible está compuesto por tres capas que combinan una capa de contacto con la herida de baja adherencia, una almohadilla de espuma hidrocélular y una película impermeable altamente transpirable. La película es impermeable a líquidos y bacterias y mientras el apósito permanece intacto protege la herida de la contaminación exterior. El diseño de celosía de la almohadilla de espuma hidrocélular permite observar de forma continuada la herida y la piel circundante sin necesidad de cambiar el apósito. Además, puede aplicarse fácilmente utilizando una técnica limpia y debido a la forma en la que el adhesivo se ha impregnado, el dolor al quitar el apósito se reduce.

### Indicaciones

OPSITE POST-OP VISIBLE está indicado para heridas agudas como heridas quirúrgicas, laceraciones, cortes, abrasiones y quemaduras leves como niveles de exudado de bajo a moderado.

## Características

- Estructura de espuma en red y capa posterior transparente, permite llevar a cabo evaluaciones periódicas de la herida, sin necesidad de levantar o retirar el vendaje.
- Barrera bacteriana, proporciona una barrera contra bacterias, incluidas SARM, que reduce el riesgo de infección.
- Capa impermeable, permite el aseo del paciente.
- Estructura de espuma en red, permite supervisar el progreso de la herida con la frecuencia que desee sin innecesarios cambios de apósito. Esto permite reducir posibles daños en el lecho de la herida, minimizar el riesgo de infección y ayuda a proporcionar una solución rentable.
- Alta tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR), el film tiene una estructura molecular única que proporciona una alta tasa de transmisión de vapor de humedad. Esto favorece la transpiración y ayuda a reducir el riesgo de infección.
- Almohadilla con estructura en red altamente absorbente, permite la difusión lateral a través del entramado maximizando la absorción sin impedir la visibilidad reduciendo el riesgo de maceración de la piel para un cuidado coste efectivo.
- Confortable y conformable, el diseño único del apósito y su adhesivo de alta tolerancia dérmica garantiza su comodidad y facilidad para aplicar y retirar.

### Instrucciones de uso

1. Retirar el papel protector superior.
2. Manteniendo los extremos no adhesivos del apósito, colocar cuidadosamente el apósito sobre el área afectada.
3. Aplicar el apósito en la zona, aplicando una ligera presión (especialmente en los bordes del apósito).
4. Retirar el soporte de plástico.

### Composición

Película de poliuretano de baja reflectancia recubierta con adhesivo acrílico, como almohadilla de espuma hidrofílica que incorpora una estructura en red que permite la visibilidad. La superficie adhesiva está protegida con 2 tiras de papel de fácil liberación y la parte no adhesiva por una capa de plástico transparente (polietileno de polipropileno), no extensible, que facilita la manipulación del apósito.

### Especificaciones técnicas:









Adhesividad al acero:	130 g/cm
Impermeabilidad:	conforme
Capacidad de absorción:	mín. 16 g/100 cm <sup>2</sup>
Permeabilidad al vapor del agua:	mín. 1000 g/m <sup>2</sup> 24h a 37°C
Transmisión de humedad:	mín. 3000 g/m <sup>2</sup> 24h a 37°C
Extensibilidad:	máx. 0,4 N/cm.

# OPSITE<sup>◇</sup> POST OP VISIBLE, apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente.










Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades Envase	Unidades mínima venta	Código EAN
66800137	OPSITE POST OP VISIBLE 15 cm x 10 cm	20	20	05000223463083
66800138	OPSITE POST OP VISIBLE 20 cm x 10 cm	20	20	05000223463113
66800139	OPSITE POST OP VISIBLE 25 cm x 10 cm	20	20	05000223463144
66800141	OPSITE POST OP VISIBLE 35 cm x 10 cm	20	20	05000223468699

Re. San.: INVIMA 2015DM-0003467-R1

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<p><b>ON</b> n° 0086</p> <p><b>CE</b> n° CE56481</p> <p><b>Clase CE</b>  I, estéril</p> 			 5 años  seco  No exponer el producto a la radiación solar	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN  Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por
 Caducidad	 irradiación No reutilizar
 Manténgase en lugar	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 solar Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS  
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,  
Bogotá  
Tel: 57 (1) 605 7373  
www.smith-nephew.com

◇ Marca registrada  
Smith&Nephew