

**DESCRIPCIÓN**

ESENTA™ Spray (50 mL) para proteger la piel sin irritaciones

**COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO**

94,75% Hexamethyldisiloxane, HMDSO  
5% Trimethylated Silica, TMS (Trimethylsiloxysilicate)  
0,25% Zanthalene

**FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO**

ConvaTec Limited – Reino Unido  
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido  
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Limpie y seque la piel.
2. Sostenga el producto a unos 10 cm del área que se va a tratar.
3. Aplique un recubrimiento uniforme en un movimiento de barrido.
4. Asegúrese de que el área esté completamente seca antes de aplicar productos adhesivos, como equipos o apósitos.
5. El producto debe sustituirse en cada cambio de apósito o material para mantener una protección completa.

**USOS**

Protección de la piel frente a los daños asociados a los desechos corporales, enzimas y adhesivos.

**CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO**

- Sistema Bag-on-Valve (BoV): Rocía en cualquier ángulo. La nueva tapa puede girar en cualquier dirección para mejorar su uso.
- Protege la piel hasta por 72 horas.
- Fórmula basada en silicona.
- Crea una barrera transpirable que protege la piel de los daños causados por adhesivos, residuos corporales y enzimas.
- Fácil de aplicar y retirar.
- No acumulan residuos, ni se adhieren a los pliegues de la piel.
- Se seca rápidamente (en 30 segundos) para formar una película duradera de silicona.
- Se recomienda aplicar cada 12-72 horas, dependiendo de las condiciones de la superficie de la piel.
- Seguro y eficaz incluso con uso frecuente.
- Normalmente, no es necesario quitarlo. No obstante, el protector cutáneo ESENTA™ se puede quitar fácilmente con el removedor de adhesivos médicos ESENTA™.
- Alivia la piel enrojecida y dolorida.
- Reduce el picor.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5.
- Amigable con el medio ambiente.

**PRECAUCIONES**

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.
- Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

**ADVERTENCIAS**

- Usar solo según las indicaciones.
- Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**MUY INFLAMABLE**

VIDA ÚTIL	ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
4 años	Producto no estéril	INVIMA 2021DM-0024229 VIGENCIA: 13 de septiembre de 2031	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No fumar.</li> <li>• No perforar ni quemar, incluso después de su uso.</li> <li>• Proteger de la luz solar.</li> <li>• No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.</li> </ul>

**PRESENTACIONES**

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
423288	ESENTA™ Sting Free Skin Barrier	Spray 50ml